

Sensorstripen

DignaCare sensorstripe er en elastisk stripe sammensatt av ett hode og fire sensorer. Sensorene måler individuelt og fanger opp endringer i fuktighet og temperatur. Målingene blir sendt til gatewayer hvor de blir analysert og videresendt til DignaCare mobilapp. Dersom sensorstripen fanger opp nok fuktighet vil dette utløse en varslings i mobilappen.

Sensorstripen er ment å plasseres på utsiden av et inkontinensprodukt og skal gi en varslings når inkontinensproduktet bør skiftes. Sensorstripen skal ikke plasseres rett på hud. Det er viktig at tilstrekkelig med gatewayer blir satt opp steder der brukeren av sensorstripen ferdes, slik at signalene til enhver tid har dekning og varslinger utløses til korrekt tid.

Slik bruker du sensorstripen

Langs sensorenheten kan du se fire hvite prikker. Det er disse som måler fuktighet i inkontinensproduktet. På toppen av sensorstripen ligger sendingsmekanisme og batteri. Batteriet har en levetid på 12 måneder og sensorstripen byttes ut i sin helhet etter dette.

For å bruke DignaCare sensorstripe trenger du:

- Inkontinensprodukt
- Sensorstripe
- Gateway
- Teip levert av SensCom



Slik plasserer du sensorstripen riktig

1. Plasser sensorstripen på utsiden av inkontinensproduktet med de hvite prikkene inn mot inkontinensproduktet.
2. Dekk sensorstripen med teip og riv forsiktig av
3. Stryk god på plass og inkontinensproduktet er klart til bruk
4. For å ta av sensorstripen etter bruk åpne teipen ved toppen av stripen og dra sensorstripen forsiktig ut.

Pass på at toppen av sensorstripen vender opp mot magen.



Slik bruker du appen

DignaCare mobilapp er en mobilapplikasjon som kan installeres på mobile enheter, og støttes både for Android og iOS. Appen viser til enhver tid om sensorstriper er på nett, og om inkontinensproduktet de er festet på trenger å skiftes. Et varsel vil også gi beskjed for skift dersom appen ikke er åpen.

Appen er ment for pleiere som tar hånd om pasienter, der pasientene benytter inkontinensprodukter og DignaCare sensorstriper. Det er avdelingsleders oppgave å vedlikeholde sensorstriper i bruk, og passe på at disse blir tilgjengelige i appen. Dette gjøres via en separat brukerportal. Appen krever pålogging for å fungere, og denne tildeles også fra avdelingsleder. Det er viktig at enheten som kjører appen har dekning til internett for å kunne laste inn data og motta varslinger.

