



BRUKSANVISNING

ALERTA RUBY AUTO DYNAMISK MADRASS

Alerta Medical er en verdensledende designer og produsent av innovative, banebrytende vekselstrykk madrasser for helsevesenet, og leverer løsninger for omsorgsgivere for å proaktivt maksimere pasientsikkerhet og komfort.

SensaCare Truflo Teknologi™ - konstant automatisk trykkjustering gjennom en luftsensor og mikrodataregulator for et ultra-lavt overflatetrykk og en jevn atmosfære for naturlig søvn og stabil blodsirkulasjon med Ultra-Silent™ pumpedrift.

Driftsprinsipper

- Vekslende trykk i tilstrekkelig rytme unngår langvarig vaskulær kompresjon som sannsynligvis vil forårsake vevshypoksi.
- Vekslende trykk tilpasser madrassen til pasientens og deres stilling.

Retningslinjer for bruk

- Den tradisjonelt aksepterte metoden for trykksårskontroll er å snu bruker med jevne mellomrom og observere områder med risiko regelmessig.
- Vekslende trykkmadrass er beregnet for å komplimentere denne behandlingen, observasjon av klienten og snuregimer når det er nødvendig bør fortsatt betraktes som en del av behandling.
- Konsulter alltid lege eller helsepersonell før du bruker denne enheten.

Kontrollpanelfunksjoner



- Digitalt display som viser setup ut ifra brukervekt. Kan brukes i Auto eller Manuell modus.
- Maks. brukervekt er 200 kg.
- 10, 15, 20 eller 25 minutters syklustid.
- Statisk modus, Vekslende modus, Max firm modus, Setemodus og Displaylås.
- Alarm for lavt trykk, strømbrudd eller feil ved alternering.

Installasjon / Bruk

1. Rull madrassen og legg den på sengen med fot logoen i fotenden. Pearl er en overmadrass som er beregnet for bruk oppå en vanlig madrass.
2. Fest den til sengen med feststroppene på en måte som sikrer at du ikke begrenser bevegelige sengedeler.
3. Heng pumpen på sengen ved hjelp av krokene.
4. Koble slangene til pumpen.
5. Forsikre deg om at CPR (HLR) pluggen er ordentlig satt inn og at CPR klaffen er på plass.
6. Før den elektriske strømforsyningskabelen fra pumpen langs sengen til stikkkontakten og plugg den inn.
7. Trykk på bryteren og trykk på Av/På knappen på displayet for å slå på pumpen.
8. For pleiepersonells bekvemmelighet, trykk Max Firm. Statisk er ikke det samme som Max Firm. Statisk gir en mykere madrass som fordeler trykket over hele liggeflaten.

Auto-Vekt Guide

1. **Pumpestart.** Etter at Av/På knappen er skrudd på vil pumpen automatisk begynne Auto Vekt Modus. 8 indikatorer vil blinke og systemet vil tilpasse trykket ut ifra brukers vekt. Madrassen vil først fylles til 25mmHg og deretter måle brukers vekt. Deretter fylles passende luftnivå. Denne prosessen kan ta opp til 30 minutter, men går som regel fort.
2. Mens Auto-justeringen foregår, kan bruker/pleiepersonell gjøre andre instillinger, men disse vil starte etter at Auto-Vekt moduset er komplett.
3. Systemet vil automatisk rekalkulere trykket hver fjerde time.
4. **Manuell vektinnstilling:** Trykk og hold Vekt knappen i 2 sekunder, så vil systemet avslutte Auto-justeringen og bytte til manuell input. Bruk vekt-knappen og justere ut ifra lyset som indikerer vektinnstilling.

Hjerte-Lunge-Rednings situasjon (CPR)

I tilfelle en nødsituasjon, trekk ut CPR klaffen og slå av pumpen. Luften vil tømmes ut fra madrassen ved hjelp av pasientens egen vekt. For å gjenoppta normal drift, følg trinn 5, 7 og 8 ovenfor.

Låsefunksjon

1. Auto: Kontrollpanelet vil automatisk låses etter 5 minutter uten bruk
2. Manuell: Trykk låseknappen i 2 sekunder for å låse. Trykk på nytt i 2 sekunder for å låse opp

Memory funksjon etter strømbrudd

Dersom det skulle skje et strømbrudd mens bryteren er skrudd på, vil pumpen automatisk gå tilbake til sist brukte innstilling når strømtilførselen er gjenopprettet. Dersom madrassen derimot sto i Statisk eller Max Firm modus vil den gjenoprettes i Alternierende modus.

Sikkerhetstiltak

- **VÆR FORSIKTIG** når du bruker dette elektriske utstyret.
- **IKKE** la være tilkoblet elektrisk forsyning når den ikke er i bruk.
- **IKKE** utsett utstyret for overdreven fuktighet.
- **IKKE** bruk etsende rengjøring produkter som industrielle avfettingsmidler eller syrebaserte løsningsmidler.
- **IKKE** prøv å flytte dette utstyret mens det er koblet til elektrisk forsyning.
- **IKKE** posisjoner utstyret så det er vanskelig å få tilgang til display eller stikkontakt
- **ADVARSEL** – Utstyret skal brukes på strømforsyning som er jordnet

Rengjøring / desinfeksjon

Madrassen må rengjøres grundig mellom pasienter for å unngå krysskontaminering.

- Koble fra strømforsyningen før vask.
- Bruk en fuktet klut med et mildt vaskemiddel.
- Følg produsentens anbefalte konsentrasjoner av vaskemidler.
- Ikke overskrid produsentens anbefalinger før du tørker av rengjøringsløsningen.
- Rengjør med en fuktig klut eller fuktig engangsklut og en blanding med mild vaskemiddel / desinfeksjonsmiddel med CE-merke og vann. Skyll grundig med rent vann. Hvis trekket er veldig tilsmusset kan det benyttes en 0,1% (1000 ppm) kloropløsning og kaldt vann. Der det kreves, kan trekk vaskes i vaskemaskin som følger; hovedvask 65°C i ikke mindre enn 10 minutter eller 95°C for ikke mindre enn 3 minutter.
- Tørking av trekk kan gjøres i tørketrommel på lav varme. Tørketemperatur må ikke overstige 60°C

Service og garanti

Denne enheten skal vedlikeholdes av en kyndig tekniker. Unnlattelse av å bruke ekte Alerta-deler annullerer garantien av dette produktet.

Madrassegenskaper

Maks. Brukervekt: 200 kg.

Madrassmål: 200x90x20cm

Materialer: Nylon TPU-celle, nylon PU Multistretch trekk og CPR klaff

Pumpe

Syklustid: 10/15/20/25 minutter

Luftutgang: 8L / min

Elektrisk strømforsyning: 220-240 volt, 50-60 Hz



Sofies

Produsent

Alerta Medical
4 Symington Place
Riverside Business Park
Irvine
KA11 5DE
United Kingdom
www.alertamedical.com

Distributør

Sofies AS
Grensesvingen 7
0661 Oslo
(+47) 67 11 10 80
post@sofies.no
www.sofies.no