

KUDU RULLATOR



Kudu lettvektscrollator har en sølvfarget aluminiumsramme. Rullatoren foldes sammen sidelengs, og sammenlagt tar den minimalt med plass og er dermed enkel å transportere i bil eller lignende. Rullatoren er utstyrt med et ryggbelte som gir sikkerhet og støtte når setet brukes. Setet er laget av slitesterkt nylon. Et handlenett i slitesterkt nylon er montert foran. Handlenettet er utstyrt med 2 håndtak slik at det enkelt kan tas av og bæres separat.

De store 200 mm hjulene gjør rullatoren god til både innendørs og utendørs bruk. Kjørehåndtakene kan justeres i høyden. Rullatoren er utstyrt med 2 låsbare bremses som bremses bakhjulene. Ved bakhjulene er det montert en fotpedal for å tråkke på for å lett komme over små hindringer. En ringeklokke, stokkeholder og et brett som kan tas av og festes til setet er inkludert.

Rullatoren er tilgjengelig i 3 forskjellige størrelser: Small, medium og standard.

1. Introduksjon

Denne brukerhåndboken inneholder en detaljert produktbeskrivelse og viktige instruksjoner for riktig bruk av produktet. Les derfor disse instruksjonene nøye før du bruker produktet. Vær oppmerksom på alle forholdsregler, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, og følg dem alltid for å oppnå en sikker og langvarig bruk av produktet.

Formålsbeskrivelse

Produktet er et medisinsk produkt som brukes av eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne som trenger støtte når de går eller som trenger å sitte regelmessig. Produktet lar brukeren utføre de fleste daglige aktiviteter uten hjelp fra en helper. Annen bruk enn den som er beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tillatt.

Indikasjon

Rullatoren er et medisinsk utstyr beregnet på å hjelpe personer med funksjonsnedsettelse. Indikasjonene for bruk er sykdommer som forårsaker bevegelsesbegrensninger og funksjonshemninger som hindrer selvstendig sitting, stående og gåing. Det er derfor behov for ekstra stabil støtte når ovennevnte aktiviteter gjennomføres. Indikasjonene kan ikke relateres til et bestemt sykdomsbilde og avhenger av en individuell vurdering av den potensielle brukerens helsetilstand av profesjonell lege eller fysioterapeut, men hovedmålgruppene er eldre, personer med lammelser, revmatiske sykdommer og andre personer med begrenset lumbal mobilitet, knær eller hofter. Det er forbudt å bruke produktet til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor.

Kontraindikasjon

Rullatorer er ikke beregnet på personer som ikke kan opprettholde riktig kroppsbalanse i sittende og stående stilling. Hjelpemidlet skal ikke brukes dersom bruker har problemer med nedsatt persepsjon. Kontraindikasjoner kan ikke relateres til et spesifikt klinisk bilde og avhenger av en individuell vurdering av den potensielle brukerens helsetilstand. Valg av ortopedisk hjelpemiddel som passer til et gitt sykdomsbilde skal alltid gjøres ved hjelp av spesiallege eller fysioterapeut. I tillegg må du følge sikkerhetsinformasjonen i kapittel 2. Har du spørsmål om produktet, ta kontakt med oss.

2. Sikkerhetsinstruksjoner

- Bruk kun produktet i perfekt stand
- Dersom det oppdages feil eller mangler på produktet, må forhandler kontaktes umiddelbart
- Vær oppmerksom på informasjonen på typeskiltet
- Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet
- Ingen strukturelle endringer kan gjøres på produktet uten skriftlig tillatelse fra produsenten
- Pass på å ikke klemme fingrene eller få andre skader i alle ledd på rullatoren og ev. med justeringer, bretting mm.
- Kontroller at begge bremsene virker før start
- Bruk bare rullatoren når den er helt utfoldet og med låsemekanismen helt innkoblet
- Produktet skal kun brukes på en flat og stabil overflate innendørs og utendørs
- Alle hjul skal alltid være i kontakt med bakken. Dette sikrer at rullatoren er i balanse og dermed eventuelle ulykker unngås
- Når rullatoren brukes til å sitte på, må parkeringsbremsene alltid være aktivert
- Begge bremsespakene må være aktivert og blokkert samtidig
- La aldri en rullator være ulåst i bremsefunksjonen
- Produktet må aldri utsettes for større belastning enn totalt 150 kg
- Posen kan maks. bære 5 kg
- Rullatoren må ikke brukes til å stå på

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Kudu-rullatoren er en 4-hjuls rullator som kan foldes på kryss og tvers mot midten. Rullatoren er meget manøvrerbar og kan justeres i høyden for å passe brukeren. Er utstyrt med behagelig mykt sete og ryggstøtte slik at brukeren kan hvile. Vesken gjør det mulig å handle på farten.

Rullatorrammen er pulverlakkert aluminium. Rullatoren leveres med ringeklokke, stokkholder og brett som kan monteres på setet om ønskelig.

Montering

- Plasser rullatoren med hjulene på gulvet.
- Trykk setet ned til låsen går i inngrep. Trykk inn sidene av setet der det er en rørramme. Trykk ned til et "klikk" høres. Sjekk at rullatoren er foldet ut riktig ved å trekke setet på midten. Se rullatoren i åpen posisjon i bildet over.
- Sett de 2 skyvehåndtakene inn i rørene som vist på bildet, og fest i ønsket høyde med de medfølgende skruhåndtak. Normal anbefalt høyde er at kjørehåndtaket skal være inntil brukerens håndledd når du står med armene nede ved siden.
- Kontroller at boltene som fester hjulene er riktig festet og at rullatoren er stabil slik at ingen deler kan flyttes.
- Kontroller funksjonen til bremsen før du bruker rullatoren.
- For å slå sammen rullatoren må foldeutløseren aktiveres med én hånd, samtidig som at stroppen i midten av setet trekkes oppover.
- Rullatoren kan låses i sammenfoldet tilstand ved å feste låsen fra venstre side av bakkanten av setet til høyre side. Må fjernes igjen for å folde ut rullatoren igjen.

Funksjonell beskrivelse

- Juster høyden på kjørehåndtakene slik at håndtakene er i håndleddshøyde når brukeren står med armene ved siden. Dette vil bety at armene er i 20°-30° vinkel når rullatoren brukes. Juster lengden på kjørehåndtakene ved å løsne og fjerne skruhåndtakene, plasser kjørehåndtakene i ønsket høyde og sett tilbake skruhåndtakene og stram til. Kontroller at kjørehåndtakene er riktig festet og stabile.
- For å bremse rullatoren, dra bremsehåndtaket oppover. Håndtaket slippes for å frigjøre bremsen igjen.
- For å låse bremsene, skyv bremsespaken ned til et "klikk" høres. For å frigjøre bremsen, trekk håndtaket oppover og du kan skyve rullatoren igjen.
- Når rullatoren brukes til å sitte på i parkert modus, MÅ bremsene blokkeres. Dette gjøres av trykk ned på bremsespaken. Bremsene skal alltid være låst når rullatoren er parkert, spesielt hvis terrenget er ujevnt

Transportanbefaling

Rullatoren kan enkelt slås sammen som beskrevet for transport. Rullatoren skal plasseres i bagasjerommet eller festes under transport i bil.

Tilbehør

Rullatoren kommer med veske, ringeklokke, stokkholder og plastbrett for å montere på toppen av setet.

4. Tekniske data

Kudu Rullator	Standard	Medium	Small
Total høyde / Høyde på skyvehåndtak	80-98,5 cm	79-88 cm	69-80 cm
Setemål Høyde-Bredde-Dybde	62 x 42 x 20,5 cm	57 x 42 x 20,5 cm	50 x 42 x 20,5 cm
Mål på foldet rullator Høyde-Bredde-Dybde	82 x 29 x 67	79 x 27 x 68	67 x 27 x 72
Total bredde	61 cm	61 cm	61 cm
Innvendig bredde mellom skyvehåndtak	45,5 cm	4,5 cm	45,5 cm
Lengde (Dybde) Utfoldet	67	68	70
Vekt	8 kg	7,9 kg	7,7 kg
Maks belastning 150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Bremser	2 låsbare, med parkeringsfunksjon		
Hjul	Forhjul og bakhjul: 200 x 35 mm		

5. Vedlikehold

Smuss kan vanligvis tørkes av med en klut med mildt såpevann. Sterkt alkaliske rengjøringsmidler eller alkoholholdige produkter må ikke brukes og stive børster og skarpe gjenstander bør ikke brukes til rengjøring.

Produktet er normalt vedlikeholdsfritt, men bør jevnlig gjennomgå en sjekk som kan utføres av en ekspert. Ved en slik inspeksjon anbefaler vi at følgende kontrolleres og utføres:

- ✓ Rengjøring og desinfisering av produktet
- ✓ Ramme/produkt kontrolleres for skjevheter og tegn på brudd
- ✓ Slitedeler kontrolleres og skiftes ut om nødvendig
- ✓ Generell tilstramming av produktet

Anbefalt levetid: Vanligvis 10 år avhengig av bruk.

Rengjøring av hjul

Det anbefales å rengjøre hjulene med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Smør også lagrene ved å spraye et smøremiddel en gang iblant eller når hjulene begynner å knirke.

Advarsel

Hvis produktet utsettes for svært kalkholdig vann, kan det oppstå binding og ansamling av kalk på hjullager og andre bevegelige deler. I dette tilfellet kan produktet rengjøres med et kalkopløsende middel og deretter smøres med smøreolje.

Advarsel

Ved bruk i svært klorholdige miljøer kan det oppstå ekstra sterk korrosjon og garantien bortfaller.

Advarsel

Vær oppmerksom på at hvis rammen er bøyd eller ødelagt, må produktet ikke gjenbrukes, men må skiftes ut

Oppbevaring

Vi anbefaler oppbevaring på et tørt sted.

Resirkulering

Produktet er egnet for resirkulering. Før gjenvinning, hvor ny bruker skal overta produktet, skal produktet kontrolleres iht pkt 5.

6. Generell problemløsning

Problembeskrivelse	Mulige årsaker	Løsning
Rullatoren skyves eller styres med vanskeligheter	Det er skitt mellom hjulene og gaflene	Rengjør mellom hjul og gaffel. Evt fjern hjulet. Smør de bevegelige delene med smøreolje
Bremsene fungerer ikke som de skal eller en av bremsene fungerer bedre enn den andre	Bremseskoene er slitte eller bremsene er ikke riktig justert	Prøv å justere bremsekabelen eller bytt bremseskoene. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt forhandleren
Setet låses ikke i riktig posisjon	Sjekk om låsemekanismen går i inngrep eller om den er defekt. Se om det er noen noe er i veien eller hvis noe ikke er festet	Kontroller eller bytt ut låsemekanismen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt forhandleren

7. Avhending av produktet

Når dette produktet ikke lenger kan brukes, skal det leveres inn på en kommunal gjenvinningsplass.

8. Garanti

Sansehjørnet AS gir 2 års garanti mot material- og produksjonsfeil. Vi påtar oss ikke ansvar for skader som følge av dårlig vedlikehold av produktet, skader som følge av feil utførte reparasjoner eller skader som følge av normal slitasje. Hvis det gjøres strukturelle endringer på produktet uten vår skriftlige aksept, faller CE-merkingen og vårt produktansvar bort. Dersom det oppdages material- eller produksjonsfeil, må du umiddelbart kontakte forhandleren av produktet eller Sansehjørnet AS direkte. Garantien dekker ikke transportkostnader og inkluderer ikke erstatning for personskade eller manglende bruk av produktet under reparasjon. Det gis ingen kompensasjon for skader forårsaket av ikke å følge denne bruksanvisningen.