

## PANTHER RULLATOR



**Panther** lettvektsrullator har en blå aluminiumsramme. Rullatoren kan enkelt slås sammen og tar svært liten plass når den er sammenslått, noe som gjør den enkel å transportere. Setet er laget av et slitesterkt, langtidsholdbart materiale som gir brukeren komfort og stabilitet. På fronten er det en avtakbar veske med to håndtak, som også kan brukes til shopping. De store, myke hjulene gjør rullatoren egnet for både innendørs og utendørs bruk; den er stabil og absorberer effektivt støt. Kjørehåndtakene kan enkelt og helt uten verktøy justeres i høyden.

**Panther** rullatoren er utstyrt med 2 låsbare bremses som bremses bakhjulene. En vippepedal er integrert i den bakre rammen for å gjøre det lettere å kjøre over mindre hindringer. Rullatoren er testet og godkjent for en brukervekt på opptil 150 kg.

- Tilgjengelig i to størrelser: Standard (62 cm) og Liten (55 cm). Vennligst spesifiser ønsket størrelse ved bestilling.

## 1. Introduksjon

Denne brukerhåndboken inneholder en detaljert produktbeskrivelse og viktige instruksjoner for riktig bruk av produktet. Les derfor disse instruksjonene nøye før du bruker produktet. Vær oppmerksom på alle forholdsregler, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, og følg dem alltid for å oppnå en sikker og langvarig bruk av produktet.

### Formålsbeskrivelse

Rullatoren er beregnet på personer som på grunn av bevegelsesproblemer trenger stabil støtte når de går, men som er i stand til å bruke rullatoren selv uten fare for å skade seg selv eller påføre andre. Rullatoren avlaster redusert gangfunksjon og balanseevne. Takket være setet og parkeringsbremsene kan brukeren sette seg ned når som helst for en pause. Rullatoren må kun brukes til å komme seg rundt og til å sitte på.

### Indikasjon

Rullatoren er et medisinsk utstyr beregnet på å hjelpe personer med funksjonsnedsettelse. Indikasjonene for bruk er sykdommer som forårsaker bevegelsesbegrensninger og funksjonshemninger som hindrer selvstendig sitting, stående og gåing. Det er derfor behov for ekstra stabil støtte når ovennevnte aktiviteter gjennomføres. Indikasjonene kan ikke relateres til et bestemt sykdomsbilde og avhenger av en individuell vurdering av den potensielle brukerens helsetilstand av profesjonell lege eller fysioterapeut, men hovedmålgruppene er eldre, personer med lammelser, revmatiske sykdommer og andre personer med begrenset lumbal mobilitet, knær eller hofter. Det er forbudt å bruke produktet til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor.

### Kontraindikasjon

Rullatorer er ikke beregnet på personer som ikke kan opprettholde riktig kroppsbalanse i sittende og stående stilling. Hjelpemidlet skal ikke brukes dersom bruker har problemer med nedsatt persepsjon. Kontraindikasjoner kan ikke relateres til et spesifikt klinisk bilde og avhenger av en individuell vurdering av den potensielle brukerens helsetilstand. Valg av ortopedisk hjelpemiddel som passer til et gitt sykdomsbilde skal alltid gjøres ved hjelp av spesiallege eller fysioterapeut. I tillegg må du følge sikkerhetsinformasjonen i kapittel 2. Har du spørsmål om produktet, ta kontakt med oss.

## 2. Sikkerhetsinstruksjoner

- Bruk kun produktet i feilfri tilstand.
- Dersom det oppdages mangler eller feil på produktet, må forhandler kontaktes umiddelbart.
- Vær oppmerksom på informasjonen på typeskiltet.
- Bruk kun produktet til det angitte formålet.
- Ingen strukturelle endringer kan gjøres på produktet uten produsentens skriftlige tillatelse.
- Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene eller får andre skader i alle ledd på rullatoren og ifm. med justeringer, folding o.l.
- Kontroller at begge bremsene fungerer før igangkjøring.
- Bruk bare rullatoren når den er helt utfoldet og med låsemekanismen helt innkoblet.
- Produktet skal kun brukes på en flat og stabil overflate innendørs og utendørs.
- Alle hjul må være i kontakt med bakken. Dette sikrer at rullatoren er i balanse og unngår dermed mulig ulykke.
- Når rullatoren brukes til å sitte på, må parkeringsbremsene være aktivert.
- Begge bremsespakene må være aktivert og blokkert samtidig.
- La aldri en rullator være ulåst i bremsefunksjonen.
- Produktet må aldri utsettes for større belastning enn totalt 150 kg.
- Handleposen er testet til 5 kg.

### 3. Beskrivelse

#### Produktbeskrivelse

Panther-rullatoren har en lett ramme laget av pulverlakkert aluminium og er utstyrt med 4 hjul. Aluminiumsrammen gjør det enkelt å brette sammen rullatoren og oppbevare og transportere den. Den er lett å manøvrere og er veldig stabil. Kjørehåndtakene kan justeres i høyden enkelt og uten bruk av verktøy. Rullatoren er fra fabrikk utstyrt med montert sete, stokkholder, ryggbelte og handlepose.

#### Klargjøring

- Ta rullatoren ut av esken og plasser den med hjulene på gulvet. For å kunne folde ut rullatoren må den sorte låseanordningen sikres ved å vippe den av et av rørene. Ta så tak i rørene ved setet og trykk dem ned til det høres et lett klikk i låsemekanismen. Rullatoren er nå utfoldet og sikret mot sammenlegging.
- Kontroller før bruk at boltene som fester hjulene er riktig festet og at rullatoren er stabil slik at ingen deler kan bevege seg.
- Kontroller også funksjonen til bremsen før du bruker rullatoren.

#### Folding av rollatoren

- For å folde sammen rullatoren, dra oppover i stroppen i midten av setet.
- Låsemekanismen frigjøres deretter og rollatoren kan enkelt foldes sammen. Den låses da med låser sikringen.

#### Høydejustering av skyvehåndtaket

- For å stille inn høyden på kjørehåndtakene, trykk på trykknappen.
- Sett deretter håndtakene til ønsket høyde, sjekk at trykknappen har sprutt ut igjen.

*Juster høyden på kjørehåndtakene slik at håndtakene er i håndleddshøyde når brukeren står ved siden av rullatoren med armene strukket vertikalt nedover. Dette betyr at armene har en vinkel på 20°- 30° når rullatoren brukes.*

#### Bruk av håndbrems

- For å bremse må begge bremsespakene trekkes oppover.
- Jo hardere bremsespakene aktiveres, desto sterkere blir bremseeffekten.
- For å forbli STOPPET, må bremsespakene trekkes inn for å holde dem nede.
- For å flytte rullatoren igjen, må bremsespakene slippes. De frigjøres automatisk.

*Aktiver alltid parkeringsbremsene når du ikke bruker rullatoren!*

*Slipp aldri parkeringsbremsene når du sitter på rullatoren!*

*Parkerer du rollatoren på ujevnt underlag, skal parkeringsbremsene alltid være aktivert!*

#### Låse/frigjøre brems

- For å stoppe rullatoren, dra bremsespakene oppover for å få den til å stoppe.
- For å parkere, trykk ned bremsespakene til du hører et "klikk".
- Rullatoren må kun brukes til å sitte på når bremsene er låst.
- Før du kjører av gårde igjen, må du stå i kjøreretningen og koble ut

*Ved parkering skal bremsene alltid være låst. Bruk aldri setet uten at bremsene er låst! Len deg aldri tilbake når du sitter. Det anbefales å kun bruke forsetet og ikke sitte på sekken eller lene seg bakover.*

### Funksjonell beskrivelse

På grunn av den sammenleggbare bakhjulsrammen kan rollatoren foldes sammen for å spare plass. Skyvebøylene (styret) kan justeres til din kroppsstørrelse takket være den trinnløse høydejusteringen. Setet lar deg ta hvilepauser.

### Tilbehør

Det er et brett som tilbehør til rollatoren. Kontakt oss for mer informasjon.

### Håndtering under transport

Det anbefales å transportere rollatoren i sammenslått stilling. Dens konstruksjon og lave vekt gjør at den kan foldes ut og brettes på en enkel måte. Du bør sørge for at rollatoren er i en stabil posisjon under transporten slik at den ikke blir skadet.

### Applikasjon

Stå i midten bak bakhjulene, ta tak i håndtakene og slipp bremsene. Bremsene er spesielt utviklet slik at de enkelt kan aktiveres uten å slippe håndtaket.

## 4. Tekniske data

<b>Panther Rullator</b>	<b>Standard</b>	<b>Small</b>
Total høyde / Høyde på skyvehåndtak	78-101 cm	71-93 cm
Anbefalte brukerhøyde	150-195 cm	140-187 cm
Setehøyde	62 cm	55 cm
Total bredde åpen/foldet	62 / 22 cm	62 / 22 cm
Innvendig bredde mellom skyvehåndtak	43 cm	43 cm
Lengde (dybde)	75,5 cm	75,5 cm
Vekt	6,73 kg	6,25 kg
Maks belastning 150 kg	150 kg	150 kg
Bremser	2 låsbare, med parkeringsfunksjon	
Hjul	Forhjul og bakhjul: 200 x 35 mm	

## 5. Vedlikehold

Vanlig smuss på metall- og plastdeler kan fjernes med vanlige rengjøringsmidler. Bruk kun milde såper. Ikke bruk sterkt alkaliske rengjøringsmidler, løsemidler eller skuremidler, heller ikke stive børster og skarpe gjenstander til rengjøring.

Til tross for stabil konstruksjon og bruk av motstandsdyktige og korrosjonsbestandige materialer, vil rollatoren bli utsatt for noe slitasje. Det anbefales derfor å få en fagperson til å sjekke det regelmessig (minst en gang i året). Ved en slik kontroll bør følgende kontrolleres: Visuell kontroll av alle rammedeler med hensyn til skjevheter, skader, slitasje og korrosjon og spesielt kontroll av:

- ✓ Gåstolrammen
- ✓ Skyv håndtak og grep

- ✓ Bremsespaker og bremsekabler
- ✓ Styregafler og forhjul
- ✓ Bakhjul med bremses
- ✓ Sete og låseanordning
- ✓ Handlepose
- ✓ Sjekk om noen monteringsdeler mangler (f.eks. muttere, skruer, nagler) og om de fungerer og er i god stand

### Rengjøring av hjul

Det anbefales å rengjøre hjulene med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Smør også lagrene ved å spraye et smøremiddel en gang iblant eller når hjulene begynner å knirke.

**Anbefalt levetid:** Vanligvis 10 år avhengig av bruk.

### Oppbevaring

Vi anbefaler oppbevaring på et tørt sted.

### Resirkulering

Produktet er egnet for resirkulering. Før gjenvinning, hvor ny bruker skal overta produktet, skal produktet kontrolleres iht pkt 5.

*Vær oppmerksom på at hvis rammen er bøyd eller ødelagt, må ikke rollatoren gjenbrukes før hele rammen/rullatoren er skiftet.*

## 6. Generell problemløsning

Problembeskrivelse	Mulige årsaker	Løsning
Rullatoren skyves eller styres med vanskeligheter	Det er skitt mellom hjulene og gaflene	Rengjør mellom hjul og gaffel. Evt fjern hjulet. Smør de bevegelige delene med smøreolje
Bremsene fungerer ikke som de skal eller en av bremsene fungerer bedre enn den andre	Bremseskoene er slitte, eller bremsene er ikke riktig justert	Prøv å justere bremsekabelen eller bytt bremseskoene. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt forhandleren
Setet låses ikke i riktig posisjon	Sjekk om låsemekanismen går i inngrep eller om den er defekt. Se om det er noen noe er i veien eller hvis noe ikke er festet	Kontroller eller bytt ut låsemekanismen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt forhandleren

## 7. Avhending av produktet

Når dette produktet ikke lenger kan brukes, skal det leveres inn på en kommunal gjenvinningsplass.

## **8. Garanti**

Sansehjørnet AS gir 2 års garanti mot material- og produksjonsfeil. Vi påtar oss ikke ansvar for skader som følge av dårlig vedlikehold av produktet, skader som følge av feil utførte reparasjoner eller skader som følge av normal slitasje. Hvis det gjøres strukturelle endringer på produktet uten vår skriftlige aksept, faller CE-merkingen og vårt produktansvar bort. Dersom det oppdages material- eller produksjonsfeil, må du umiddelbart kontakte forhandleren av produktet eller Sansehjørnet AS direkte. Garantien dekker ikke transportkostnader og inkluderer ikke erstatning for personskaade eller manglende bruk av produktet under reparasjon. Det gis ingen kompensasjon for skader forårsaket av ikke å følge denne bruksanvisningen.