

## BUFFALO HD RULLATOR



**Buffalo-rollatoren** har en forsterket ramme av pulverlakkert aluminium og er utstyrt med 4 hjul. Den lette aluminiumsrammen gjør det enkelt å brette sammen rollatoren og oppbevare og transportere den. Den er lett å manøvrere og er tilstrekkelig stabil. Kjørehåndtakene kan justeres i høyden. Rollatoren er fra fabrikk utstyrt med montert sete og handlepose og leveres også som standard med ryggbelte og stokkholder.

### Leveransen inkluderer

- ✓ 1 rollator sammenlagt, inkl. sete, stangholder, ryggbelte og bag
- ✓ 1 brukerveiledning

## 1. Introduksjon

Denne brukerhåndboken inneholder en detaljert produktbeskrivelse og viktige instruksjoner for riktig bruk av produktet. Les derfor disse instruksjonene nøye før du bruker produktet. Vær oppmerksom på alle forholdsregler, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, og følg dem alltid for å oppnå en sikker og langvarig bruk av produktet.

### Formålsbeskrivelse

Rullatoren er beregnet på personer som på grunn av bevegelsesproblemer trenger stabil støtte når de går, men som er i stand til å bruke rullatoren selv uten fare for å skade seg selv eller påføre andre. Rullatoren avlaster redusert gangfunksjon og balanseevne. Takket være setet og parkeringsbremsene kan brukeren sette seg ned når som helst for en pause. Rullatoren må kun brukes til å komme seg rundt og til å sitte på.

### Indikasjon

Rullatoren er et medisinsk utstyr beregnet på å hjelpe personer med funksjonsnedsettelse. Indikasjonene for bruk er sykdommer som forårsaker bevegelsesbegrensninger og funksjonshemninger som hindrer selvstendig sitting, stående og gåing. Det er derfor behov for ekstra stabil støtte når ovennevnte aktiviteter gjennomføres. Indikasjonene kan ikke relateres til et bestemt sykdomsbilde og avhenger av en individuell vurdering av den potensielle brukerens helsetilstand av profesjonell lege eller fysioterapeut, men hovedmålgruppene er eldre, personer med lammelser, revmatiske sykdommer og andre personer med begrenset lumbal mobilitet, knær eller hofter. Det er forbudt å bruke produktet til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor.

### Kontraindikasjon

Rullatorer er ikke beregnet på personer som ikke kan opprettholde riktig kroppsbalanse i sittende og stående stilling. Hjelpemidlet skal ikke brukes dersom bruker har problemer med nedsatt persepsjon. Kontraindikasjoner kan ikke relateres til et spesifikt klinisk bilde og avhenger av en individuell vurdering av den potensielle brukerens helsetilstand. Valg av ortopedisk hjelpemiddel som passer til et gitt sykdomsbilde skal alltid gjøres ved hjelp av spesiallege eller fysioterapeut. I tillegg må du følge sikkerhetsinformasjonen i kapittel 2. Har du spørsmål om produktet, ta kontakt med oss.

## 2. Sikkerhetsinstruksjoner

- Bruk kun produktet i feilfri tilstand.
- Dersom det oppdages mangler eller feil på produktet, må forhandler kontaktes umiddelbart.
- Vær oppmerksom på informasjonen på typeskiltet.
- Bruk kun produktet til det angitte formålet.
- Ingen strukturelle endringer kan gjøres på produktet uten produsentens skriftlige tillatelse.
- Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene eller får andre skader i alle ledd på rullatoren og ifm. med justeringer, folding o.l.
- Kontroller at begge bremsene fungerer før igangkjøring.
- Bruk bare rullatoren når den er helt utfoldet og med låsemekanismen helt innkoblet.
- Produktet skal kun brukes på en flat og stabil overflate innendørs og utendørs.
- Alle hjul må være i kontakt med bakken. Dette sikrer at rullatoren er i balanse og unngår dermed mulig ulykke.
- Når rullatoren brukes til å sitte på, må parkeringsbremsene være aktivert.
- Begge bremsespakene må være aktivert og blokkert samtidig.
- La aldri en rullator være ulåst i bremsefunksjonen.
- Produktet må aldri utsettes for større belastning enn totalt 150 kg.
- Handleposen er testet til 5 kg.

### 3. Beskrivelse

#### Produktbeskrivelse

Buffalo-rullatoren har en forsterket ramme av pulverlakkert aluminium og er utstyrt med 4 hjul. Den lette aluminiumsrammen gjør det enkelt å brette sammen rollatoren og oppbevare og transportere den. Den er lett å manøvrere og er tilstrekkelig stabil. Kjørehåndtakene kan justeres i høyden. Rollatoren er fra fabrikk utstyrt med montert sete og handlepose og leveres også som standard med ryggbelte og stokkholder.

#### Klargjøring

- Plasser rullatoren med hjulene på gulvet. Trykk på den røde knappen og ta tak i rørene ved setet. Skyv disse ned til du hører et klikk i låsemekanismen. Nå er rollatoren foldet ut og sikret mot sammenbrudd.
- Kontroller før bruk at boltene som fester hjulene er riktig festet og at rullatoren er stabil slik at ingen deler kan bevege seg.
- Kontroller også funksjonen til bremsen før du bruker rollatoren.

#### Folding av rullatoren

- For å folde sammen rullatoren, dra oppover i stroppen i midten av setet.
- Låsemekanismen frigjøres deretter og rollatoren kan enkelt foldes sammen. Den låses da med låser sikringen.

#### Høydejustering av skyvehåndtaket

- For å justere høyden på kjørehåndtakene, løsne tommelskruen.
- Håndtakene justeres deretter til ønsket høyde, hvoretter skruen trekkes til igjen.

Vær oppmerksom på at begge håndtakene må stilles i samme høyde. Riktig justerte håndtak skal ca. være i albuehøyde for brukeren når han står med armene hengende løst.

#### Bruk av håndbrems

- For å bremse, trekk begge bremsespakene oppover for å bremse.
- Jo hardere bremsespakene aktiveres, desto sterkere blir bremseeffekten.
- Hold bremsespakene aktivert for å STOPPE.
- Hvis du vil flytte rullatoren, slipp bremsene igjen. De frigjøres automatisk.

*Aktiver alltid parkeringsbremsene når du ikke bruker rullatoren!*

*Slipp aldri parkeringsbremsene når du sitter på rullatoren!*

*Parkerer du rullatoren på ujevne eller skrånende veier, skal parkeringsbremsene alltid være aktivert!*

#### Låse/frigjøre brems

- For å stoppe rullatoren, dra bremsespakene oppover for å få den til å stoppe.
- For å parkere, trykk ned bremsespakene til du hører et "klikk".
- Rullatoren skal kun brukes til å sitte når bremsene er låst.
- Før du kjører igjen, stå i kjøreretningen og slipp bremsespakene ved å trekke dem oppover.

*Ved parkering skal bremsene alltid være låst.*

*Bruk aldri setet uten at bremsene er låst!*

*Len deg aldri tilbake når du sitter. Det anbefales å kun bruke forsetet og ikke sitte på sekken eller lene seg tilbake.*

### Funksjonell beskrivelse

På grunn av den sammenleggbare bakhjulsrammen kan rollatoren foldes sammen for å spare plass. Skyvehåndtakene (styret) kan justeres til din kroppsstørrelse takket være den trinnløse høydejusteringen. Setet lar deg ta hvilepauser.

### Tilbehør

Det finnes diverse tilbehør til rollatoren. Kontakt oss for mer informasjon.

### Håndtering under transport

Det anbefales å transportere rollatoren i sammenslått stilling. Konstruksjonen gjør at den kan foldes ut og brettes på en enkel måte. Du bør sørge for at rollatoren står stabilt under transport slik at den ikke vipper.

### Applikasjon

Stå i midten bak bakhjulene, ta tak i håndtakene og slipp bremsene. Bremsene er spesialutviklet slik at det kun kreves en liten innsats.

## 4. Tekniske data

Rollator Buffalo HD	Standard	Small	Standard med SOFT hjul	Small med SOFT hjul
Høyde på skyvehåndtak (justerbare)	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Anbefalte brukerhøyde	150 - 200 cm	125 - 170 cm	150 - 200 cm	125 - 170 cm
Setehøyde	62 cm	55 cm	62 cm	55 cm
Total bredde åpen / sammenfoldet	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Innvendig bredde mellom skyvehåndtak	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Lenge (dybde)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Vekt (+ taske 380 g)	7,8 kg	7,5 kg	7,9 kg	7,6 kg
Max. belastning (rollator / taske)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunksjon			

## 5. Vedlikehold

Smuss kan vanligvis tørkes av med en klut med mildt såpevann. Sterkt alkaliske rengjøringsmidler eller alkoholholdige produkter må ikke brukes og stive børster og skarpe gjenstander bør ikke brukes til rengjøring.

Produktet er normalt vedlikeholdsfritt, men bør jevnlig gjennomgå en sjekk som kan utføres av en ekspert. Ved en slik inspeksjon anbefaler vi at følgende kontrolleres og utføres:

- ✓ Rengjøring og desinfisering av produktet
- ✓ Ramme/produkt kontrolleres for skjevheter og tegn på brudd
- ✓ Slitedeler kontrolleres og skiftes ut om nødvendig
- ✓ Generell tilstramming av produktet

## Rengjøring av hjul

Det anbefales å rengjøre hjulene med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Smør også lagrene ved å spraye et smøremiddel en gang iblant eller når hjulene begynner å knirke.

## Advarsel

Hvis produktet utsettes for svært kalkholdig vann, kan det oppstå binding og ansamling av kalk på hjullager og andre bevegelige deler. I dette tilfellet kan produktet rengjøres med et kalkoppløsende middel og deretter smøres med smøreolje.

## Advarsel

Ved bruk i svært klorholdige miljøer kan det oppstå ekstra sterk korrosjon og garantien bortfaller.

## Advarsel

Vær oppmerksom på at hvis rammen er bøyd eller ødelagt, må produktet ikke gjenbrukes, men må skiftes ut.

**Anbefalt levetid:** Vanligvis 10 år avhengig av bruk.

## Oppbevaring

Vi anbefaler oppbevaring på et tørt sted.

## Resirkulering

Produktet er egnet for resirkulering. Før gjenvinning, hvor ny bruker skal overta produktet, skal produktet kontrolleres iht pkt 5.

## 6. Generell problemløsning

Problembeskrivelse	Mulige årsaker	Løsning
Rullatoren skyves eller styres med vanskeligheter	Det er skitt mellom hjulene og gaflene	Rengjør mellom hjul og gaffel.
Bremsene fungerer ikke som de skal eller en av bremsene fungerer bedre enn den andre	Bremseskoene er slitte, eller bremsene er ikke riktig justert	Sjekk hvordan bremsene er innstilt, bytt om nødvendig bremseklosser (→ serviceverksted)
Setet går ikke ordentlig i inngrep når det brettes ut	Låseanordningen er feil innstilt eller defekt	Kontroller at låseanordningen er riktig innstilt eller skift den ut (→ serviceverksted)

## 7. Avhending av produktet

Når dette produktet ikke lenger kan brukes, skal det leveres inn på en kommunal gjenvinningsplass.

## 8. Garanti

Sansehjørnet AS gir 2 års garanti mot material- og produksjonsfeil. Vi påtar oss ikke ansvar for skader som følge av dårlig vedlikehold av produktet, skader som følge av feil utførte reparasjoner eller skader som følge av normal slitasje. Hvis det gjøres strukturelle endringer på produktet uten vår skriftlige aksept, faller CE-merkingen og vårt produktansvar bort. Dersom det oppdages material- eller produksjonsfeil, må du umiddelbart kontakte forhandleren av produktet eller Sansehjørnet AS direkte. Garantien dekker ikke transportkostnader og inkluderer ikke erstatning for personskade eller manglende bruk av produktet under reparasjon. Det gis ingen kompensasjon for skader forårsaket av ikke å følge denne bruksanvisningen.