


BodyPoint® Dynamisk Armstøtte

ARTIKKELNR.: AS201L, AS201R, AS202L, AS202R, AS200L, AS200R

MONTERING OG BRUKERINSTRUKSJONER

Disse instruksjonene inneholder viktig informasjon om trygg bruk og vedlikehold av Bodypoint® armstøtter. Gi disse instruksjonene til brukeren eller deres forsørger, og gå gjennom dem for å sikre at de er forstått.

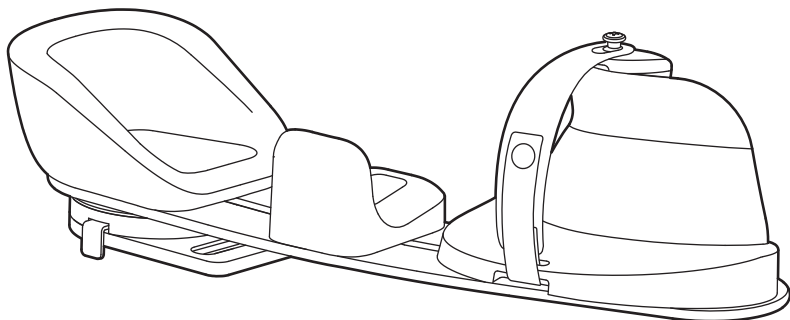

TILTENKT BRUK:

BodyPoint® Dynamisk Armstøtte er en dynamisk mobil støtte for albue, underarm og hånd som festes til en manuell eller elektrisk rullestol. Den gir støtte til øvre kroppsdeler, funksjonell dynamisk bevegelsesfrihet i skulderen og en innovativ og fleksibel håndstøtte som fremmer håndfunksjonene og bidrar til å minimere fleksortone og sammentrekninger.

Dette produktet inneholder modulbaserte komponenter som kan justeres for en tilpasset ortopedisk passform. En omdreiningmekanisme gjør at brukeren kan bruke skulderen med funksjonell og dynamisk bevegelsesfrihet. Den fleksible håndstøtten bidrar til å posisjonere håndleddet, hånden og fingrene nøytralt og minimere fleksortone og sammentrekninger.

Dette produktet er utviklet for montering på en rekke ulike rullestolmodeller med høydejusterbare armstøtter, og kan enkelt fjernes for flytting ved hjelp av hurtigfrigjøringsfunksjonen. For å sikre det beste kliniske utfallet bør brukere rådføre seg med kvalifisert helsepersonell før produktet brukes.



558 1st Avenue South, #300, Seattle, WA 98104, USA
206.405.4555 | 800.547.5715 | www.bodypoint.com



Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PG Terwolde
Nederland



MD Medisinsk
utstyr

© 2022 Bodypoint, Inc. Alle rettigheter er forbeholdt.

BPI116-no2022.4

⚠ADVARSEL! Dette produktet må monteres og tilpasses av en kvalifisert rehabiliteringstekniker.

⚠ADVARSEL! Dette produktet må bare brukes for posisjonering av en persons armer i en rullestol. Feil bruk av produktet er ikke tillatt og ikke trygt.

⚠ADVARSEL! Brukerens arm må posisjoneres riktig i armstøtten. En feiljustert armstøtte kan føre til at brukerens arm faller ut, noe som kan føre til at skulderen går ut av ledd eller at håndens fleksortone forverres. Be en terapeut eller tekniker demonstrere riktig justering og bruk.

⚠ADVARSEL! Hvis brukerens fysiske eller kognitive evner forhindrer dem fra sikker bruk av produktet, må det alltid være en forsørger til stede under bruk. Sørg for at alle forsørgere vet hvordan produktet brukes på riktig måte.

⚠ADVARSEL! Dette produktet kan endre måten en person sitter på. Fortsett jevnlige aktiviteter for trykkreduksjon og kontroller av hudens integritet. Hvis det oppstår økt rødhet i huden eller irritasjon, må bruken avsluttes og kvalifisert helsepersonell må rådføres.

⚠ADVARSEL! Brukeren må alltid overvåkes når dreieplaten låses opp for rotasjon. Dreieplaten må alltid være låst når rullestolen kjøres eller transporteres i et kjøretøy for å forhindre skade fra treff med dører eller andre hindringer nær siden av stolen.

⚠ADVARSEL! Ved montering må det kontrolleres at armstøtten er trygt låst inn i adapterplaten for hurtigutløsning. Installatøren skal høre en tydelig klikkelyd.

⚠ADVARSEL! Hvis det oppstår en alvorlig hendelse knyttet til bruken av dette produktet, må det rapporteres til fabrikanten (Bodypoint, Inc.) og lokal kompetent myndighet.

JEVNLIGE SIKKERHETS- OG YTELSESKONTROLLER:

For å sikre brukerens sikkerhet må produktet jevnlig kontrolleres for riktig funksjon og tegn på slitasje. Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte eller om betydelig slitasje oppdages på delene må bruken stanses, og leverandøren må kontaktes for kvalifisert reparasjon eller utskiftning fra Bodypoint®. Dette produktet må ikke under noen omstendighet endres eller repareres av ukvalifisert personell.

RENGJØRING:

Dette produktet kan rengjøres ved å tørke av med desinfeksjonsmiddel eller en klut dyppet i varmt vann og såpe. Tørk av med et håndkle eller lufttørk. Mildt desinfeksjonsmiddel kan brukes på overflaten. Håndtroppen kan rengjøres i maskin på 60 °C (140 °F). Blekemiddel må ikke brukes. Tørk i tørketrommel på lav temperatur eller heng til tork. Må ikke strykes.

AVHENDING:

Dette produktet er laget av materialer som trygt kan avhendes uten spesielle forholdsregler når brukstiden utløper.

GARANTI:

Dette produktet har en begrenset livstidsgaranti mot produksjonsdefekter og materialdefekter som oppstår under vanlig bruk av den opprinnelige forbrukeren. Kontakt leverandøren eller Bodypoint® for garantikrav. For mer informasjon om produkter fra Bodypoint® og informasjon om distributører utenfor USA kan du gå til www.bodypoint.com.

NØDVENDIGE VERKTØY

4 mm sekskantnøkkel




3 mm sekskantnøkkel

For valgfri finjustering av hurtigutløsningskroken




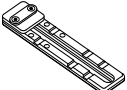
INNHOLD I PAKKEN

A	B	C	D	E	F
Albuepute	Underarms- pute	Håndblokk og -stropp	Baseplate	Adapterplate for hurtigut- løsning	Dreieplate

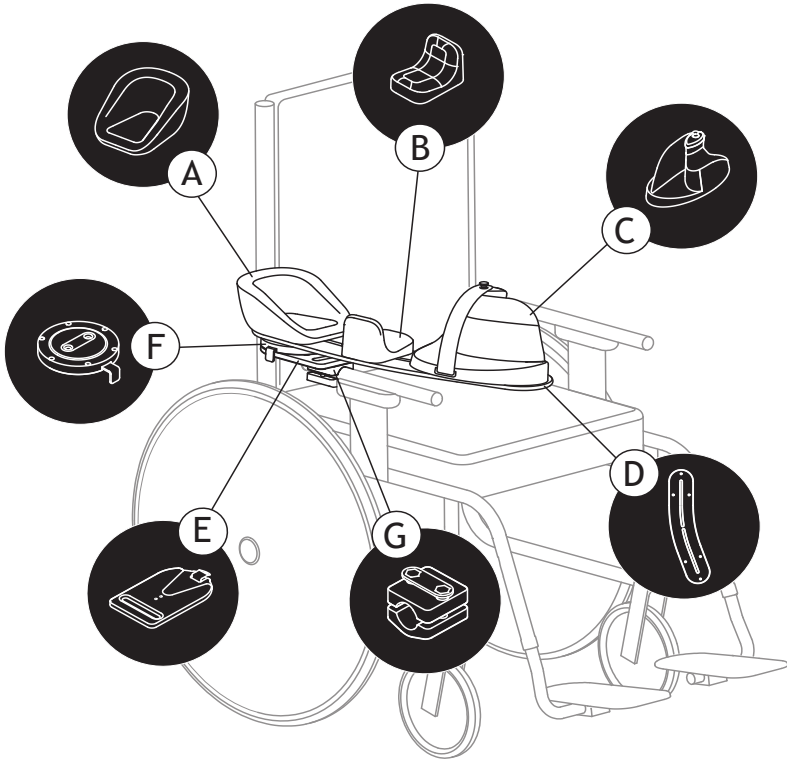


MONTERINGSDELER

VALGFRI KLEMME ELLER PLATE SELGES SEPARAT
MONTERINGSKLEMME FOR ARMSTØTTEN VISES OVENFOR

G	H
<p>Monteringsklemmer for armstøtte</p> <p>Kompatibel med Ø19 mm [3/4"] eller Ø22/25 mm [7/8"/1"] rundrør for armstøtten</p>	<p>Monteringsplate for armstøtte</p> <p>Kompatibel med flate armstøtter</p>
	

POSISJONERING AV ARMSTØTTE FOR BRUKEREN

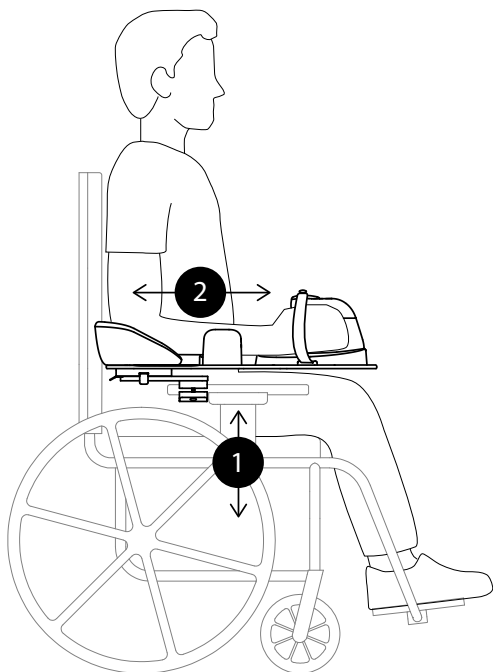

1. Høyde

Det anbefales bruk av en høydejusterbar armstøtte for optimal posisjonering.

Juster høyden på armstøtten for å støtte albuen for jevn trykkdistribusjon mot armen uten å løfte skulderen.

2. Dybde

Løse skruene som er plassert på monteringsdelene for armstøtten for å justere armstøtten fremover eller bakover.

Skyv armstøtten fremover eller bakover for å sette armstøtten i riktig posisjon.

For mer informasjon, se: «YTERLIGERE FINJUSTERING AV DREIEPLATEN, YTERLIGERE DYBDEJUSTERINGER».

3. Sideveis

Løse skruene som fester adapterplaten for hurtigutløsning til monteringsdelene på armstøtten for å justere armstøtten nærmere eller lenger vekk fra brukeren.


Skyv armstøtten innover eller utover og stram begge skruer igjen.

4. Vinkling

Dreieplaten tillater et forhold mellom intern og ekstern rotasjon på inntil 60°. Trekk fliken på dreieplaten ut og posisjonér armstøtten for å velge vinkel på armstøtten.

Trykk fliken på dreieplaten inn for å låse den i ønsket vinkel i trinn på 5°.


For mer informasjon, se: «YTERLIGERE FINJUSTERING AV DREIEPLATEN, YTERLIGERE INTERNE OG EKSTERNE ROTASJONGRENSER».

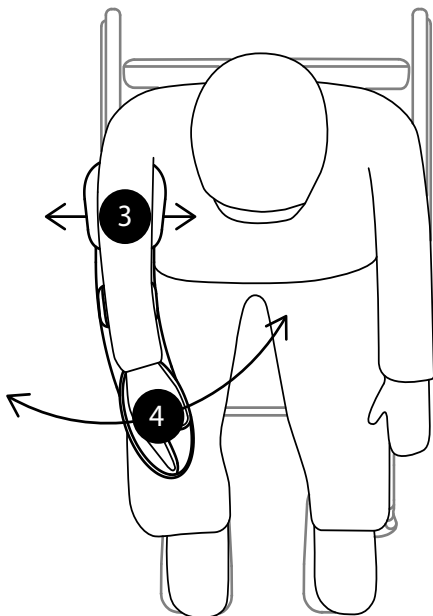

MONTERE ARMSTØTTEN

Fjern hurtigtutløsningsmottakeren fra armstøtten før montering. For mer informasjon, se: «BRUKE ADAPTERPLATEN FOR HURTIGUTLØSNING».

1. Monter hurtigtutløsningsmottakeren på rullestolens armstøtte ved hjelp av monteringsdeler for armstøtten, som er tilleggsutstyr. Stram monteringskruene delvis for å kunne justere. Se instruksjonene som medfølger monteringsdelene som er tilleggsutstyr for mer informasjon.

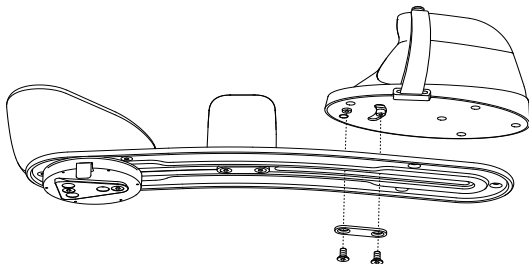


2. Monter håndblokken til baseplaten ved hjelp av skiven og de medfølgende M6-skruene (2).

Merk: Ikke stram skruene helt før de endelige justeringene og tilpasningene til brukeren er gjort.

3. Skyv armstøtten inn i adapterplaten for hurtigtutløsningen - hurtigtutløsningskroken vil låses med et hørbart «klikk!»


Merk: Hurtigtutløsningskroken kan justeres for å fjerne slark ved å løse M5-skruene (2) nederst ved hjelp av en 3 mm sekskantnøkkel. Trykk hurtigtutløsningskroken tett mot den bakre kanten av hurtigtutløsningskilen mens skruene strammes for å feste den på plass.

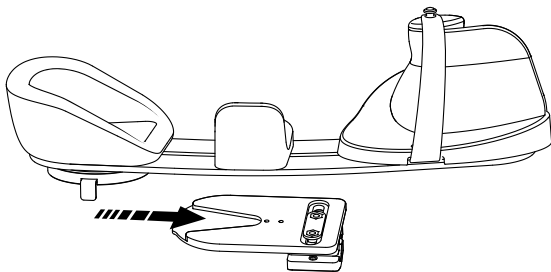


JUSTERE UNDERARMSPUTEN OG HÅNDBLOKKEN

Start med å posisjonere brukerens albue i albueputen.

Løsne M6-skruene (2) og skyv håndblokken langs baseplaten for å justere håndblokken og forhindre at brukerens underarm beveg. Stram den bakre skruen til den er stram, og juster deretter vinkelen på håndblokken fra 0-30° for å posisjonere hånden og håndleddet riktig. Stram begge skruer godt for å sikre håndblokken på plass.

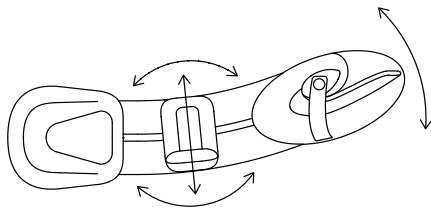


Løsne M6-skruene (2) og skyv underarmsputen langs baseplaten for å justere underarmsputen og feste brukerens arm bak håndleddet. Den kan justeres inn eller ut, roteres eller monteres på nytt i motsatt retning for å støtte eller begrense armbevegelser. Stram skruene på nytt.

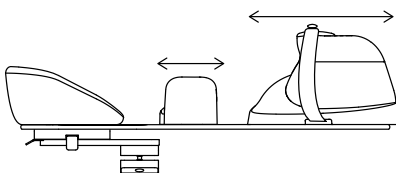

BRUK AV ADAPTERPLATEN FOR HURTIGUTLØSNING

Trykk ned på hurtigutløsningskroken for å låse den opp før fjerning.

For å montere den på nytt, skyv armstøtten inn i hurtigutløsningsmottakeren inntil den festes med et hørbart «klikk!»

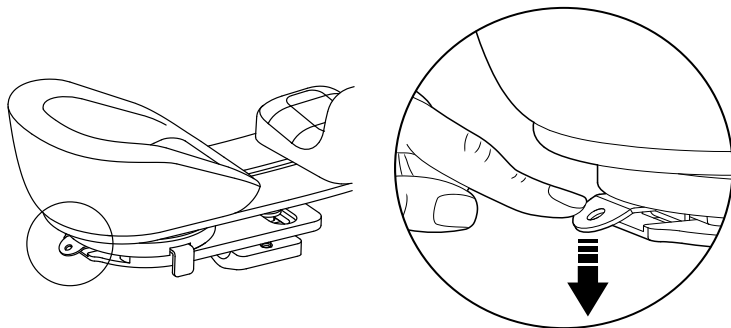


LÅSE /LÅSE OPP DREIEPLATEN

Armstøtten kan låses opp for å tillate dynamiske bevegelser, eller låses for å bevare en fast armposisjon.

Trekk fliken på dreieplaten ut for å låse den opp. Armstøtten kan nå rotere fritt gjennom et internt til eksternt intervall på 60 °.

Trykk fliken på dreieplaten inn for å låse den. Armstøtten kan låses i intervaller på 5 °.

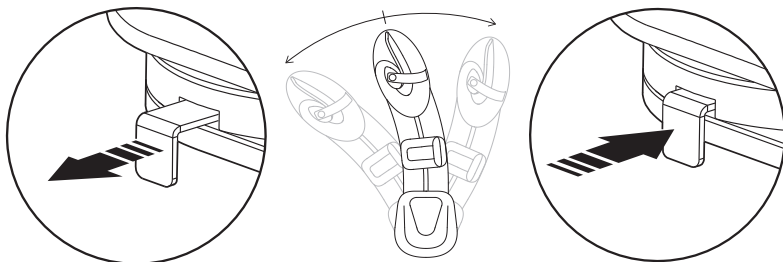

LÅS OPP


DREI

LÅS

ADVARSEL! Brukeren må alltid overvåkes når dreieplaten er låst opp og kan roteres. Dreieplaten må alltid være låst når rullestolen kjøres eller transporteres i et kjøretøy for å forhindre skade fra treff med dører eller andre hindringer nær siden av stolen.

YTTERLIGERE FINJUSTERING AV DREIEPLATEN

YTTERLIGERE DYBDEJUSTERINGER

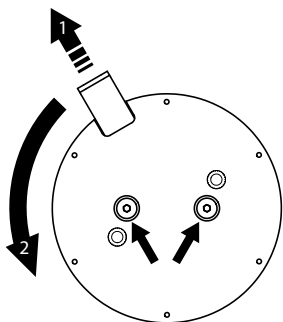

Ytterligere justeringer kan gjøres ved å repositionere dreieplaten inntil 25 mm fremover på baseplaten.


Fjern hurtigtutløsningskilen for å få tilgang til monteringskruene, trekk ut fliken på dreieplaten for å låse den opp, og roter til M6-monteringskruene er synlige gjennom de to tilgangshullene.

Løsne begge skruene for å skyve dreieplaten fremover, og stram begge skruer før du fester hurtigtutløsningskilen på nytt.

YTTERLIGERE INTERNE OG EKSTERNE ROTASJONGRENSER

Standardinnstillingen for dreieplaten tillater 30° intern / 30° ekstern rotasjon fra nøytral posisjon (i forhold til stolens armstøtte). Dette gir samme funksjon enten den er montert på høyre eller venstre side.

Noen brukere er i stand til større intern armrotasjon, som er mulig ved å repositionere hurtigtutløsningskilen nederst på dreieplaten for å gjøre det mulig med 45° intern / 15° ekstern rotasjon.

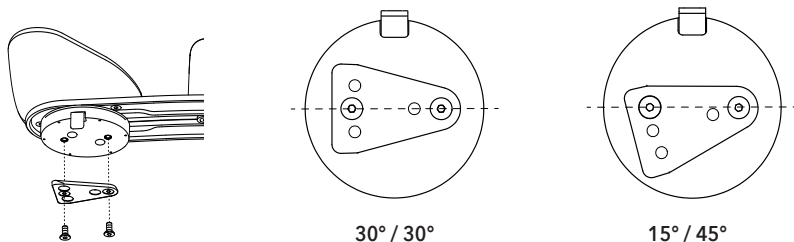

SIKKERHETS- OG YTTELSESKONTROLLER

Brukeren må sitte i rullestolen før sikkerhetskontrollen gjennomføres.

1. VANLIG BRUK

Se etter klempunkter eller løse deler.

2. KOMFORT

Se etter irritasjonsområder.

3. POSISJON

Bekreft riktig plassering av brukerens overkropp og skuldre.

4. YTTERLIGERE

Beveg stolen gjennom alle bevegelser, inkludert vipping, bretting og rulling, og se etter interferens. Juster armstøtten om nødvendig.

