



Utgave 04.2023

Brukerveiledning

Hypnos madrass

Ta vare på denne brukerveiledningen til fremtidig bruk. Du bør lese den nøye.
Kontakt oss umiddelbart ved eventuelle spørsmål.

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK OG KONTRAINDIKASJONER



Les alltid brukerveiledningen nøye før du bruker produktet



Madrassen må kun brukes til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne bruksanvisningen. Madrassen må ikke kombineres, monteres eller repareres med andre deler, tilbehør eller reservedeler enn de som er beskrevet i denne bruksanvisningen eller i annen dokumentasjon fra ZiboCare Denmark ApS.



DENNE MADRASSEN KAN IKKE BRUKES FOR SEG SELV. For å forhindre trykksår bør brukeren bytte liggestilling regelmessig.



DENNE MADRASSEN MÅ IKKE BRUKES i nærheten av eller sammen med varme overflater og åpen flamme, som bål, påtente sigaretter og varmelamper. Selv om dette produktet har gjennomgått branntesting, kan det imidlertid bli skadet hvis det kommer i kontakt med åpen flamme.



Plasser og bruk madrassen på en slik måte at den ikke blir klemt eller skadet. **OBS!** Vær spesielt oppmerksom på at det er fare for at madrassen kommer i klem ved bruk med sengeramme.



Sørg alltid for at madrassen har riktig størrelse.



Bruk av sengefunksjoner: Vær oppmerksom på at ved heving av sengegavlen vil basen bli utsatt for ekstra press. Dette kan reduseres ved å heve fotdelen av sengen.



Hold skarpe gjenstander unna madrassen for å unngå å skade den.



Madrassen er utstyrt med to håndtak. Disse håndtakene skal kun brukes til å flytte madrassen. Annen bruk av håndtakene dekkes ikke av produktets garanti og er på brukerens eget ansvar.



Denne madrassen kan kun brukes med den riktige siden vendt opp. Siden av madrassen som skal vende opp er tydelig merket.



Hvis du bruker en sengegavl, sørg for at dens øvre kant er minst 21 cm over madrassen.

INNHold

Introduksjon	2
Produktbeskrivelse	3
Pakke ut madrassen	5
Rengjøring - Klargjøring	5
Generell informasjon	6
Symbolforklaring	7

INTRODUKSJON



Les alltid brukerveiledningen nøye før du bruker produktet.

Tiltenkt formål og bruk

Denne madrassen er en forebyggende madrass som kan brukes for å forebygge trykksår, og for å hjelpe til med behandling av trykksår i kategori 0–2.

Det anbefales at brukeren bytter liggestilling regelmessig.

Intervall mellom bytte av stilling bør bestemmes basert på brukerens status, diagnose og allmenntilstand.

Kliniske fordeler

Denne madrassen kan brukes til å hjelpe til med:

- forebygge og behandle trykksår
- redusere smerte
- fremme beroligende, uforstyrret søvn og raskere rehabilitering
- lette bevegelse på og av sengen

Tiltenkt brukergruppe

Brukere som står i fare for, eller blir behandlet for, trykksår.

Brukervekt:

Hypnos 1: 0–121 kg.

Hypnos 2: 120–160 kg

PRODUKTBSKRIVELSE

Hypnos I:

Hypnos 1 har høyelastisk kaldskum og stofftrekk, og madrassen er kuttet skum på den ene siden med forskjellige skjæredybder. Madrassen er delt inn i 5 soner slik at den tilsvarer kroppens trykkpunkter. Den er også utstyrt med en bred skumkant for å sikre bedre stabilitet når du beveger deg inn og ut av sengen. Trekket er laget av 72% polyester og 28% bomull, for å sikre optimal ventilasjon av borgeren på madrassen.

Madrassen har et skum med en tetthet på 40kg/m³, som gir en behagelig liggeflate og lang holdbarhet.

Madrassen er tilgjengelig i følgende størrelser:

Navn	REF nr.	Størrelse
Hypnos I, 80 x 180 cm	STA-M2201	80 x 180 cm
Hypnos I, 85 x 180 cm	STA-M2202	85 x 180 cm
Hypnos I, 90 x 180 cm	STA-M2203	90 x 180 cm
Hypnos I, 75 x 200 cm	STA-M2204	75 x 200 cm
Hypnos I, 85 x 200 cm	STA-M2205	85 x 200 cm
Hypnos I, 90 x 200 cm	STA-M2206	90 x 200 cm
Hypnos I, 120 x 200 cm	STA-M2207	120 x 200 cm
Hypnos I, 90 x 220 cm	STA-M2208	90 x 220 cm
Hypnos I, 120 x 220 cm	STA-M2209	120 x 220 cm

Hypnos II:

Hypnos II har høye elastisk kaldskum og stofftrekk, og madrassen er kuttet skum på den ene siden med forskjellige skjæredybder. Madrassen er delt inn i 5 soner slik at den tilsvarer kroppens trykkpunkter. Den er også utstyrt med en bred skumkant for å sikre bedre stabilitet når du beveger deg inn og ut av sengen. Trekket er laget av 72% polyester og 28% bomull, for å sikre optimal ventilasjon av borgeren på madrassen.

Madrassen har et skum med en tetthet på 50 kg/m³ som gir et litt hardere liggeunderlag.

Madrassen er tilgjengelig i følgende størrelser:

Navn	REF nr.	Størrelse
Hypnos II, 90 x 200 cm	STA-M2215	90 x 200 cm
Hypnos II, 120 x 200cm	STA-M2216	120 x 200 cm
Hypnos II, 90 x 220 cm	STA-M2217	90 x 220 cm
Hypnos II, 120 x 220 cm	STA-M2218	120 x 220 cm

PAKKE UT MADRASSEN

Alle madrasser sendes i en gjenbrukbar plastpose. Begynn med å sjekke at emballasjen er uskadet. Fjern plastposen og eventuelt beskyttende materiale. Unngå å bruke en kniv for å åpne pakken, da dette kan skade trekket.

1. Sørg alltid for at madrassen er riktig orientert under trekket.
2. Hvis det er folder i trekket, rett dem ut og sørg for at glidelåsen er lukket.

RENGJØRING OG KLARGJØRING

Det er viktig å følge instruksjonene nedenfor før en ny bruker begynner å bruke produktet. Hvis du har spørsmål, kontakt leverandøren for hjelp og ytterligere informasjon.

VIKTIG! Sjekk trekket etter hver vask. Hvis trekket er skadet må det repareres eller skiftes ut. Følg nøye lokale retningslinjer og bruksanvisningen for rengjøringsmidler.

Trekk

Trekket kan vaskes på 60° og lufttørkes. Trekket skal ikke strykes eller tørketromles. Avføring og blodflekker bør fjernes umiddelbart med kaldt vann. Følg nøye lokale retningslinjer og bruksanvisningen for rengjøringsmidler. Lagene i flerlags trekk må skilles før vask. Vask med lignende farger.

Skumkjerne

Trekket beskytter skumkjernen fullt ut og krever dermed sjelden rengjøring. Hvis det likevel skulle bli nødvendig å rengjøre kjernen, bruk en mild såpe og vann (påføres f.eks. med dusjflaske). Trykk vannet forsiktig ut. La skumkjernen tørke i et varmt, godt ventilert område hvor den ikke utsettes for direkte sollys. Sørg for at skumkjernen er helt tørr før du bruker den igjen. Bruk en mild såpe om nødvendig.

Vaskeanvisning



GENERELL INFORMASJON

Denne madrassen kvalifiserer som klasse I medisinsk utstyr og er CE-merket i henhold til EU-forordningen om medisinsk utstyr, Medical Device Regulation, 2017/745.

Lagring

Oppbevar madrassen på et flatt underlag eller forsiktig rullet/foldet med glidelåsen lukket. Oppbevar alltid madrassen på et tørt sted. Sørg for at madrassen oppbevares på et sted hvor den ikke vil bli utsatt for støt, slag eller andre krefter som kan skade den. Unngå å utsette madrassen for direkte sollys. Hvis madrassen skal oppbevares i mer enn tre måneder, anbefales oppbevaring på en flat overflate (ikke foldet eller sammenrullet).

Merking

Denne madrassen er merket med produktnavn, produksjonsdato, ref.nr., størrelse, pleie- og vaskeanvisning, og partinr.

Garanti

Garanti: 2 år.

Produktet er dekket av en garanti for produksjonsfeil. Garantien dekker ikke normal bruksslitasje, produktforringelse eller skade som følge av uforsiktig håndtering eller stell av produktet.

Levetid

Produktets forventede levetid er fire år med hensyn til dets trykkavlastende egenskaper. Det forventes en total levetid på opptil 10 år for bruk med pasienter som ikke har risiko for trykksår. Under forventede daglige bruksforhold vil trekket vare i to år.

Service og vedlikehold

Madrassen krever ingen service eller vedlikehold unntatt rengjøring, som beskrevet i disse instruksjonene.

1.1 Reparasjoner

For mer informasjon om reparasjoner, kontakt leverandøren.

1.2 Resirkulering

Alle sengeprodukter er fullt resirkulerbare og bør resirkuleres som «brennbart avfall». Madrassen krever ikke separering eller demontering før resirkulering.

1.3 Returer og krav

Returer og krav skal rettes til leverandøren. Returer må håndteres i henhold til leverandørens vilkår og vil kun bli behandlet for gyldige krav. Skader som oppstår under transport skal meldes til transportøren.

Ulykker og hendelser

I henhold til myndighetenes forskrifter om medisinsk utstyr er produsenten og helsepersonell forpliktet til å rapportere ulykker og hendelser med disse produktene. Vi ber derfor om at all informasjon om enhver ulykke eller hendelse som involverer et av våre produkter sendes til leverandøren Varodd Velferdsteknologi og produsenten ZiboCare.

SYMBOLFORKLARING



Advarsel



Produsent



Fabrikant



Lotnr.



Medisinsk utstyr



Se instruksjoner



CE-merket i henhold til EU-forordningen om medisinsk utstyr, Medical Device Regulation 2017/745



Referansenummer



Maskinvask på 60° C



Må ikke blekes



Må ikke strykes



Må ikke tørketrommel



Må ikke renses



Lufttørkes på flat overflate



Holdes unna direkte sollys



Holdes unna fuktighet