



## **Bruksanvisning for RICK V1 kamerastativ**

### **Produktinformasjon:**

Rick fotostativ kan monteres på skinne på elektriske rullestoler som

for eksempel en Permobil, men også andre rullestoler med skinne montert.

Rick er utviklet for å kunne ta bilder og video for folk med ulike funksjonshemninger.

Kan monteres på høyre og venstre side.

Produktet kan tilpasses kunde etter behov.

### **Produktet inneholder:**

- Holder som monteres på rullestolskinne
- M8 skrue(1), skive(1) og mutter(1) monteres på holder for feste/klemme av rustfri stang
- 6 skruer og muttere for montering av holder på rullestolskinne (M6)
- Rustfri stang 25mm tykk og 650 mm lang med spor. Skrue i toppen til feste av fotokamera
- Lite bord (3 deler: feste på stang, bord og mutter ferdig montert) til feste av fjernkontroll, mobilholder, ipad
- M10 skrue(1) og mutter(1) for feste av bord
- 1 kule med feste og 1 mobilholder som skrues fast i bord

**Holder og bord vil bli levert delvis montert for lettere montering.**

## Montering

Bilde av komplett sett:



1. Holder med M6 skrue og mutter og M8 skrue og mutter montert på



2. M6 muttere settes inn i spor på rullestolskinne



3. Holder med M6 skrue monteres på skinne





4. Rustfri stang settes i spor på holder og skrues fast med M8 skrue



5. Bord skrues fast i spor på stangen med M10 skrue og mutter



6. Kule og mobilfeste monteres sammen og skrues ned i bord. Kan festes på to plasser på bordet.



Når alt er ferdig montert, gå over for å se om alt er godt festet.

Ferdig montert:



For videre support vennligst kontakt oss på: [post@robotek.no](mailto:post@robotek.no)