



## Robust rullestol – sammenleggbar og med regulerbar benstøtte

Bruerveiledning

Art. 874002



### Symboler på etiketter eller i brukerveiledning

	Adresse til fabrikant		Invitasjon til å lese brukermanual
	Fabrikasjonsdato		Følg sikkerhetsinstruksjoner
	Lot nummer		CE samsvar
	Produkt referanse		Tåler ikke fukt
	Max bruker vekt		Det medisinske direktiv

### VIKTIG

Les instruksjonene nøye før du bruker dette produktet og oppbevar dem hvis nødvendig.

Bruker: Hvis du ikke er i stand til å lese eller forstå noen advarsler, forholdsregler eller instruksjoner, vennligst kontakt ditt helsepersonell eller distributør før du bruker dette produktet, ellers kan det oppstå risiko for skade.


Rådfør deg med legen din eller helsepersonell før du bruker en rullestol. Han eller hun vil gi råd og informere deg om den mest hensiktsmessige bruken i ditt tilfelle.

Distributør: Dette pakningsvedlegget må gis til brukere av dette produktet.

## BRUKSOMRÅDE

Rullestolen er bevegelseshjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne eller mobilitet. Disse produktene er beregnet for bruk innendørs og utendørs og kan slås sammen for enkel oppbevaring eller transport.

## Produkt beskrivelse

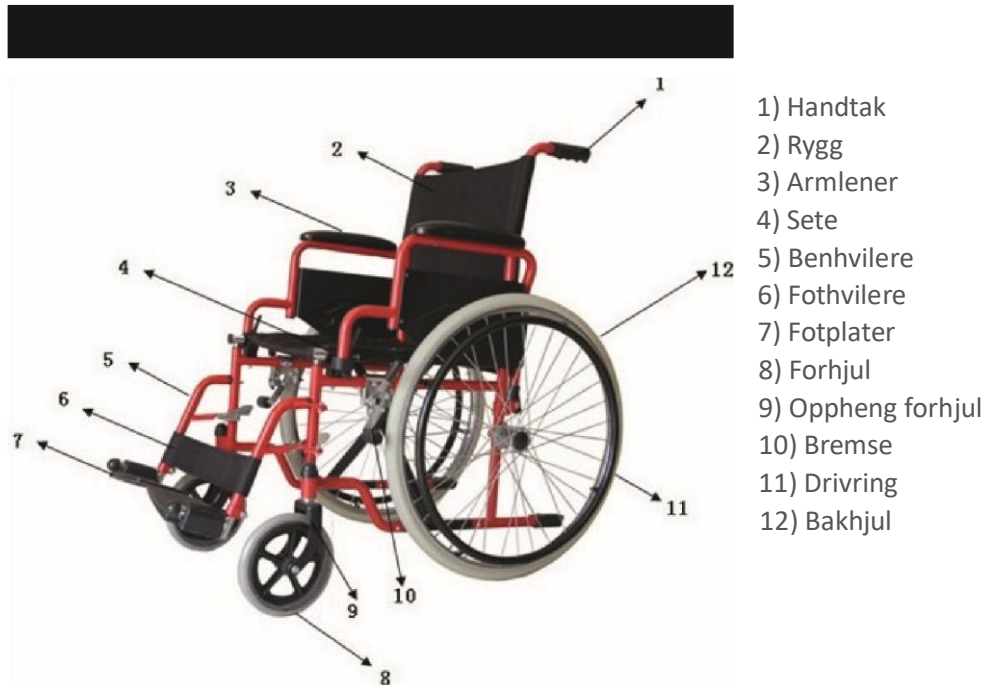

## Sikkerhetsinstruksjoner

Unnlatelse av å følge sikkerhetsreglene kan føre til risiko for alvorlig skade.

- Ikke overskrid den maksimale vektgrensen på 120 kg.
- Sørg for at alle deler er sikre og i god stand.
- Ikke bruk produktet i trapper eller rulletrapper.
- Bruk kun tilbehør og deler levert av produsenten.
- Ikke foreta noen justeringer på produktet mens det er i bruk.
- Kontroller at bremsene fungerer som de skal før bruk.
- Under bruk, lås bremsene for alle handlinger.
- Alle hjul skal alltid være i kontakt med bakken.
- Når produktet er i stasjonær stilling, må bremsene være låst. Ikke forsøk å flytte produktet hvis bremsene er låst.
- Pass på at fotstøttene er ordentlig festet.
- Pass på at demonteringspinnen er godt festet bak hjul og ramme på stolen.
- Vær forsiktig når du klatrer opp på fortau eller i skrånende, ujevnt eller glatte overflater. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i en betydelig risiko for fall eller skade.
- Ikke bruk rullestolen på en våt, isete eller snødekte skråning.
- Når du bruker produktet, må du ikke overskride en hastighet på 3-5 km/t (3-5 mph).
- Ikke stå på produktets fotstøtter da det er fare for produktet velter.
- Hvis noen deler er skadet, ødelagt, slitt eller mangler, ta kontakt med forhandler.

## Montering

### 1. Folde ut rullestolen

Hold håndtakene med begge hendene for å folde ut rammen forsiktig. Trykk begge sidene av setetrekket lett for hånd, slik at rullestolen blir foldet ut. (Figur 1).

**Merk:** Ikke dra i rammen for hardt av frykt for å skade delene. Ikke hold i seterørene med fingrene for å unngå å skade fingrene når du skyver ned setetrekket.

### 2. Legge sammen rullestolen

Snu først begge fotplatene, løft opp begge sider av setetrekket lett med hender, og så kan rullestolen legges sammen. (Figur 2)

### 3. Justere fotplaten

Løsne først låsemutteren med skiftenøkkelen, trekk ned røret og juster fotplaten til en riktig posisjon, og deretter lås og fest boltene med skiftenøkkel i retning med klokken. (Figur 3).

### 4. Metode for å bruke rullestolen alene

Brukeren sitter stabilt i rullestolen, og holder deretter i drivringene til bakhjulene med begge hender. Samtidig beveg rullestolen med en balansert kraft med begge hender for å få den til å bevege seg fremover, slipp deretter. Når rullestolen bremses ned må den betjenes én gang til etter å ha beveget seg et stykke, gjenta disse trinnene som nevnt ovenfor. (Figur 6)



## Bruk av rullestolen

### 1. Bruk av bremsene

Brukeren holder bremsehåndtakene med begge hender når rullestolen stopper, og flytter deretter bremsehåndtak frem til selvlåsende tilstand, for å få bakhjulene til å stoppe helt for å forbli låst. Prosessen for bremsing er fullført. (Figur 5)

### 2. Driftsmetode for å krysse hindringene

I tilfelle av å komme over hindringer, bør ledsageren dra i håndtakene med begge hender, trå så på enden av røret til rullestolen, len rullestolen tilbake for å løfte det fremre hjulet, kryss deretter hindringene. (Figur 6)



### 3. Metoden for å vippe armlenet

Når du tar av armlenet, trykk først på armlensfestet med én hånd for å skille det fra den fremre braketten på seterøret, så kan du vippe det tilbake. Ved montering av armlenet, få armlenefestet til å sikte mot posisjonen til den fremre braketten til seterøret og trykk lett til selvlåsende feste. (Figur 7)



### 4. Metoden for avtakbar benstøtte

Når du monterer benstøtten, bør du først rette opp posisjoneringshullene mot de faste stiftene opp og ned, henge benstøtten og deretter klippe benstøtten til fjæren fra utsiden til innsiden for at den skal låses; når du skal ta av benstøtten, bør du først, deretter snu benstøtten utvendig til en viss vinkel, løfte den for å komme ut av de faste pinnene, og ta av benstøtten til slutt. (Figur 8)



## Vedlikehold

Unnlatelse av å ta vare på og overvåke produktet ditt kan føre til risiko for alvorlig skade.

- Rengjør produktet regelmessig med varmt vann og en myk klut. Ikke bruk skuremidler, vaskemidler eller løsemidler.
- Tørk med en ren, tørr myk klut for å unngå rust.
- Sørg for at det ikke samler seg smuss eller rusk rundt akselen, bremsene eller hjulene.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder fenol eller klor, da dette kan skade aluminium- og polyamidmaterialer.
- Smør hjulene med litt olje hvis de knirker.
- Kontroller med jevne mellomrom slitasjen og etter trekk alle skruer og bolter. Skift ut alle ødelagte, skadde eller slitte deler umiddelbart.
- Kontroller at bremsene fungerer før hver bruk. Sjekk bremsene ved å skyve håndtakene inn i låst posisjon, og deretter prøve å skyve produktet.
- Undersøk rullestolen for å se om alle deler og bolter er løsnet etter en tids bruk. Hvis de er løse, bør de involverte etter trekke dem i tide for at ikke uhell skal skje.
- Sete- og ryggtrekk skal holdes rent og helt for å beskytte brukernes hud.
- Hvis det er feil eller mangler, må du ikke reparere produktet selv. Rådfør deg med en autorisert forhandler.

## Ny eier

Produktet kan gjenbrukes. Det må først rengjøres og desinfiseres i i henhold til hygieneanvisninger. Når du overfører produktet, husk å overlevere alle nødvendige tekniske dokumenter til ny bruker. På forhånd må produktet inspiseres av en autorisert spesialist.

## Resirkulering

Når produktet er blitt ubrukelig og du må kaste det: kontakt din fagforhandler. Hvis du ønsker å gjennomføre resirkulering for deg selv, spør ditt lokale avfallshåndteringselskap for avhendings retningslinjer.

## Oppbevaring

Unnlatelse av å følge oppbevaringsvilkårene kan føre til forringelse av produktet og dermed risiko for alvorlig skade.

- Ikke oppbevar produktet i en lengre periode i nærheten av en varmekilde eller i solen (f.eks. bak et vindu eller i nærheten av en radiator) eller i nærheten av en kald kilde.
- Hold rullestolen unna alle flammer og gnistkilder.
- Følg betingelsene for oppbevaring og oppbevaring av produktet:
  - På et tørt og temperert sted
  - Beskytt produktet ved å pakke det inn mot støv, korrosjon (f.eks. slipende elementer, sand, sjøvann, salt luft).
  - Oppbevar alle fjernede deler sammen på samme sted (eller merk dem om nødvendig) for å unngå å forveksle dem med andre produkter når de monteres igjen.
  - Alle komponenter må lagres uten belastning (ikke plasser gjenstander som er for tunge på produktelementene, ikke blokker noe...).

## Teknisk spesifikasjon

Ytre mål	Bredde 63 x dybde. 103 x høyde 91 cm
Sete dimensjoner	Bredde 45 x dybde. 40 x høyde 50 cm
Sete bredde	46 cm
Sete dybde	40 cm
Gulv til sete høyde	50 cm
Rygg høyde	41 cm
Bredde når sammenstått	26.5 cm
Forhjul diameter	20 cm
Bakhjul diameter	61 cm
Ramme	Stål grå farge
Vekt	18.5 kg
Maximal brukervekt	120 kg

## Levetid

Forventet levetid for dette produktet er 5 år under normal bruk, sikkerhet og vedlikeholds forhold. Utover denne perioden kan produktet brukes så lenge det fortsatt er i god stand.

## Garanti

Dette produktet er garantert i to år fra kjøpsdatoen av brukeren. IDENTITIES vil levere reservedeler for alle deler som har gått i stykker på grunn av en produksjons-, design- eller materialfeil. Kontakt distributøren du kjøpte produktet fra i tilfelle du trenger å fremsette et krav. Feil som følge av utilsiktet skade, feilbruk, endring eller slitasje dekkes ikke av denne garantien.

Kontakt forhandleren du kjøpte produktet fra for å bruke garantien.



Identités - ZA Pôle 49  
Bd de la Chanterie  
49124 Saint Barthélémy d'Anjou



Max brukervekt: 120 kg

