



Reise rullestol - sammenleggbar

Brukerveiledning

Medisinsk utstyr

Art. 874005



Symboler på etiketter eller i brukerveiledning

| | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------------------|
|  | Adresse til fabrikant |  | Invitasjon til å lese brukermanual |
|  | Fabrikasjonsdato |  | Følg sikkerhetsinstruksjoner |
|  | Lot nummer |  | CE samsvar |
|  | Produkt referanse |  | Tåler ikke fukt |
|  | Max bruker vekt |  | Det medisinske direktiv |

VIKTIG

Les instruksjonene nøye før du bruker dette produktet og oppbevar dem hvis nødvendig.

Bruker: Hvis du ikke er i stand til å lese eller forstå noen advarsler, forholdsregler eller instruksjoner, vennligst kontakt ditt helsepersonell eller distributør før du bruker dette produktet, ellers kan det oppstå risiko for skade.

Rådfør deg med legen din eller helsepersonell før du bruker en rullestol. Han eller hun vil gi råd og informere deg om den mest hensiktsmessige bruken i ditt tilfelle.

Distributør: Denne brukerveiledningen må gis til brukere av dette produktet.

BRUKSOMRÅDE

Rullestolen er et medisinsk utstyr. Det er et mobilitetshjelpemiddel for bevegelseshemmede. Denne forflytningsstolen er designet for daglig bruk både innendørs og utendørs. Den kan brukes på ulike typer overflater som betong, asfalt, innendørs overflater eller tepper. Vær oppmerksom på at rullestolen ikke kan brukes på ujevnt eller mykt underlag som sand, da dette kan skade hjulene, rammen eller andre deler av produktet.

Produkt beskrivelse



Sikkerhet



Unnlatelse av å følge forholdsreglene for bruk kan føre til alvorlig skade.

- Ikke overskrid den maksimale støttede vekten på 100 kg.
- Kontroller at alle komponenter er sikret før bruk.
- Sørg for at produktet er i god stand.
- Kontroller produktet visuelt.
- Kontroller stabiliteten til forflytningsstolen før bruk.
- Ikke bruk produktet i trapper eller rulletrapper.
- Kontroller at bremsene fungerer som de skal før bruk.
- Vær forsiktig når du klatrer fortauskanter eller ved bruk av skrå, ujevne eller glatte overflater. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i en betydelig risiko for fall eller skade.
- Ikke bruk produktet på våte, isete eller snødekte bakker.
- Ikke stå på produktets fotstøtter da det er fare for at produktet velter.
- Sørg for å løsne bremsene før du flytter rullestolen igjen.
- Ved forflytning eller når rullestolen står stille, sett på bremsene.
- Aldri bøy deg mens du er i stolen.
- Vær obs på klemfaren ved sammenlegging.
- Ved skadede, ødelagte, slitte eller manglende deler, kontakt forhandleren.

Montering og bruk

Rullestolen krever ingen installasjon, den leveres ferdig montert.

Slå opp rullestolen



1. Rullestol sammenlagt i esken
2. Hev ryggstøtten til vertikal posisjon
3. Senk fotstøtten til horisontal posisjon
4. Brett ut setet helt og trykk ned med håndflaten.
5. Senk armlenene til horisontal posisjon

Slå sammen rullestolen

For å folde sammen rullestolen etter bruk, følg trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.

1. Hev armlenene til vertikal stilling
2. Fold inn setet
3. Fell ned fotstøtten
4. Senk ryggstøtte

BREMSING:



For å bremse, klem på venstre og høyre (svarte) bremsehåndtak samtidig.

For å låse bremsene (parkeringsbrems), klem på de svarte håndtakene og dra deretter opp de røde hendlene for å låse dem.

Vedlikehold



Unnlatelse av å ta vare på og overvåke produktet ditt kan føre til risiko for alvorlig skade.

- Rengjør produktet for hånd (alle hjul, seter og fester) med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel og desinfeksjonsmiddel. Ikke bruk slipemidler, vaskemidler eller løsemiddelbaserte produkter.
- Tørk med en ren, tørr myk klut.
- Rullestolen skal gjennomgås fullstendig hvert år, med obligatorisk smøring.
- Det anbefales at enheten får service årlig.
- Hvis enheten utsettes for mye bruk og/eller bruk i et flerbrukermiljø, anbefaler vi at enheten får service oftere.
- I tilfelle feil, ikke reparer produktet selv. Rådfør deg med en autorisert forhandler.

Sjekkliste

For å holde produktet i god stand, kontroller før hver bruk, og kontroller regelmessig som følger:

| Kontroller produktet | Alltid | Hver uke | Hver måned |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| Skruer og bolter | | X | |
| Stabilitet til ramme og rygg | | | X |
| Tilstand til sete og hjul | | | X |
| Sammenlegging samt bremses | X | | |

Endring av eieforhold

Produktet kan gjenbrukes. Det må først rengjøres og desinfiseres i henhold til hygieneanvisninger. Ved overføring av rullestolen, husk å overlevere alle nødvendige tekniske dokumenter til den nye brukeren. På forhånd må produktet inspiseres av en autorisert spesialist.

Resirkulering

Når produktet er blitt ubrukelig og du må kaste det: kontakt din fagforhandler. Hvis du ønsker å utføre resirkulering for deg selv, spør ditt lokale avfallshåndteringsselskap om retningslinjer for avhending.

Oppbevaring



Unnlatelse av å følge oppbevaringsvilkårene kan føre til forringelse av produktet og dermed risiko for alvorlig skade.

- Ikke oppbevar produktet ditt i en lengre periode i nærheten av en varmekilde eller i solen (f.eks. bak et vindu eller i nærheten av en radiator) eller i nærheten av en kald kilde.
- Hold deg unna alle flammer og gnistkilder.
- Følg forholdene for oppbevaring og oppbevaring av produktet.
- På et tørt og temperert sted
- Beskytt produktet ved å pakke det mot støv, korrosjon (f.eks. slipende elementer, sand, sjøvann, salt luft).
- Oppbevar alle fjernede deler sammen på samme sted (eller merk dem om nødvendig) for å unngå å blande dem med andre produkter når de monteres igjen.
- Alle komponenter må lagres uten belastning (ikke plasser gjenstander som er for tunge på produktelementene, ikke kilt seg fast noe).

Teknisk spesifikasjon

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ytre mål | Bredde 46 x høyde 77 x dybde 90 cm |
| Sete dimensjon | Bredde 36 x høyde 39 x dybde 45,5 cm |
| Bredde når slått sammen | 21 cm |
| Vekt | 7,14 kg |
| Maksimal brukervekt | 100 kg |

Levetid

Forventet levetid for dette produktet er 5 år under normal bruk, sikkerhet og vedlikeholdsforhold. Utover denne perioden kan produktet brukes så lenge det fortsatt er i god stand.

Garanti

Dette produktet er garantert i to år fra kjøpsdatoen av brukeren. IDENTITIES vil levere reservedeler for alle deler som har gått i stykker på grunn av en produksjons-, design- eller materialfeil. Ta kontakt med distributøren du kjøpte produktet fra i tilfelle du trenger å fremsette et krav. Feil som følge av utilsiktet skade, feilbruk, endring eller slitasje dekkes ikke av denne garantien. Kontakt forhandleren du kjøpte produktet fra for å bruke garantien.



Identités –ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU
FRANCE



Maksimal vekt tillatt: 100 kg