

## Brukerveiledning Jupiter regncape

Lett og pustende regncape til elektriske rullestoler hvor ryggstøtten er høy og ev. har nakkestøtte. Tilgjengelig til barn og voksne. Laget i et mykt, vind- og vanntett kvalitetsmateriale med teipede sømmer og mange funksjonelle detaljer.



Vanntett



Vindtett



Pustende



Teipede sømmer



Vaskbar



*Kjære kunde,*

*Takk for at du valgte et produkt fra Varodd Velferdsteknologi og DARO. Vi håper du blir fornøyd og får mange gode opplevelser ute i det fri.*

*Les denne brukerveiledningen før du bruker regncapen.*



### Sikkerhetsregler

-  Bruk kun regncape som passer brukerens størrelse.
-  Bruk kun regncape med elektrisk rullestol hvor ryggstøtten er høy og ev. har nakkestøtte.
-  Bruk **aldri** regncapen hvis deler er løse, ødelagte eller mangler. Det er fare for at den kan sette seg fast i hjulene.
-  Immobile eller pleietrengende brukere må **ikke** etterlates alene eller være uten tilsyn når vedkommende har på seg produktet.
-  Vær oppmerksom på brukerens temperatur og tilpass klærne deretter. Dette gjøres for å unngå overoppheting.
-  Hvis brukeren benytter sele, skal denne **alltid** være fastspent ved bruk av regncape slik at brukeren ikke glir ned.

### Garantibetingelser

Det er 2-års garanti på produktet. Dette inkluderer material- og produksjonsfeil. Gjelder **IKKE** ved:

- Uaktsom bruk.
- Feil vask.
- Dårlig vedlikehold.
- Uautoriserte endringer.
- Normal slitasje.

### Regncapens funksjoner

- Vanntett opptil 10 000 mm.
- Pusteevne på 5.000g/m<sup>2</sup>.
- Tapede sømme.
- Regulerbar hette.
- Skyggekant på hetten som beskytter ansiktet mot regn, sludd og snø.
- Vannavstøtende glidelås ved halsåpning med vanntett understykke.
- Henger i glidelåsen slik at brukeren lettere kan ta tak i den.
- Romslig fasong som dekker hele brukerens kropp og går nedover stolryggens bakside.
- Ermer med strikk ved håndleddene og forsterkning på innersiden.
- Innsydd strikk rundt hele kanten, slik at regncapen lukker seg rundt rullestolen..
- Sikkerhetsreflekser foran, bak og på ermer samt refleksløgo på brystet for bedre synlighet i mørket.
- Lommen foran kan også fungere som en praktisk pakkepose til regncapen.

## Slik brukes regncapen

**Merk:** Denne regncapen er kun beregnet til elektriske rullestoler hvor ryggstøtten er høy og ev. har nakkestøtte.

1. Åpne glidelås i halsåpningen og trekk regncapen over hodet. Den skal dekke hele brukerens kropp.
2. Trekk regncapen over ryggen på rullestolen og ned over brukerens føtter. Regncapen skal plasseres **mellom** brukerens føtter og rullestolens fotplate.
3. Kontroller at regncapen sitter godt og **ikke** går inn i hjulene.

**OBS!** Regncapen må være helt tørr før den pakkes ned.



Regncapen skal plasseres **mellom** brukerens føtter og rullestolens fotplate.

## Vask

**!** Denne vaskeanvisningen **MÅ** følges. Hvis produktet vaskes feil, er det fare for skader og forkortet levetid.

**!** **IKKE** bruk skyllemiddel, tøymykner, vaskemiddel med blekestoffer eller pulvervaskemiddel.

**TIP!** Den mest skånsomme måten å vaske en regncape på er å skylle av synlig smuss under rennende vann. Da beholder regncapen egenskapene lengst mulig. Ikke bruk en børste eller klut ved synlig sand på regncapen. Dette vil skade det vanntette belegget. La regncapen lufttørke.

## Vask i maskin

1. Skyll løst smuss og skitt av regncapen under rennende vann. Trekk opp glidelåsen og vring regncapen før du putter den i vaskemaskinen.
2. Bruk kun en liten mengde flytende vaskemiddel **uten** blekestoffer.
3. Vask regncapen på **maks 40°C** og unngå sentrifugering.
4. Regncapen må ikke tørkes i tørketrommel, men bør drypp-/lufttørkes på henger.



Ingen blekemidler



Skånsom vask maks 40°C



Ingen tørketrommel



Drypptørring anbefales



Rens er mulig

**OBS!** For hver maskinvask brytes en liten del av det vanntette belegget ned, noe som vil forkorte regncapens levetid.

## Vedlikehold

- Sjekk regncapen regelmessig for skader.
- Bruk **aldri** regncapen hvis deler er løse, ødelagte eller mangler.
- Sørg for at regncapen er helt tørr før den pakkes ned.

## Materiale

- OEKO-TEX® 100-sertifisert.



- 100% polyester med PU-belegg.

## Teknisk info

- Vannsøyletrykk: 10.000 mm.
- Pusteevne: 5.000g/m<sup>2</sup>.
- Kvadratmetervekt: 135g/m<sup>2</sup>.

## DARO - dansk produsent av klær til alle typer funksjonshemninger

Hos DARO brenner vi for å lage klær til alle typer funksjonshemninger - klær som kan gi deg økt livskvalitet, komfort og en lettere hverdag. DARO har mer enn 40 års erfaring med å designe og sy moderne og funksjonelle klær til både barn og voksne. Vi kan spesialtilpasse klærne for deg og hjelper gjerne med nye løsninger hvis du har spesifikke behov. Se hele DAROs produktutvalg på [www.daro.dk](http://www.daro.dk).

DARO er klær til DEG og KLÆR med omtanke. 😊

## Forhandler



Varodd Velferdsteknologi AS

Rigedalen 41  
4626 Kristiansand  
Norge

Tlf. (+47) 38 14 48 00  
[hjelpemidler@varodd.no](mailto:hjelpemidler@varodd.no)  
[www.hjelpemidler.varodd.no](http://www.hjelpemidler.varodd.no)

## Produsent

# DARO

by **able**

able nordic a/s  
DARO  
Skavholmvej 8C, 1.  
DK-8520 Lystrup  
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22  
[daro@ablenordic.dk](mailto:daro@ablenordic.dk)  
[www.daro.dk](http://www.daro.dk)