

Brukerveiledning

Kjørepose med avtakbar front - vinter

Myk og fasongsydd kjørepose uten sete til barn. Laget i et pustende, vind- og vannavstøtende kvalitetsmateriale med varm Thinsulate-isolering og myk fleeeeforing.



Vannavstøtende



Vindtett



Pustende



Vaskbar








Kjære kunde,

Takk for at du valgte et produkt fra Varodd Velferdsteknologi og DARO. Vi håper du blir fornøyd og får mange gode opplevelser ute i det fri.

Les denne brukerveiledningen før du bruker kjøreposen.



Sikkerhetsregler

-  Bruk kun kjørepose som passer brukerens størrelse.
-  Bruk **aldri** regncapen hvis deler er løse, ødelagte eller mangler. Det er fare for at den kan sette seg fast i hjulene.
-  Immobiler eller pleietrengende brukere må **ikke** etterlates alene eller være uten tilsyn når vedkommende har på seg produktet.
-  Vær oppmerksom på brukerens temperatur og tilpass klærne deretter. Dette gjøres for å unngå overoppheting.
-  Hvis brukeren benytter sele, skal denne **alltid** være fastspent ved bruk av kjørepose slik at brukeren ikke glir ned.

Garantibetingelser

Det er 2-års garanti på produktet. Dette inkluderer material- og produksjonsfeil. Gjelder **IKKE** ved:

- Uaktsom bruk.
- Feil vask.
- Dårlig vedlikehold.
- Uautoriserte endringer.
- Normal slitasje.

Kjøreposens funksjoner

- Vindtett, pustende og vannavstøtende.
- Varm Thinsulate-isolering og myk fleeceforing.
- Fasongsydd og uten sete.
- 2-veis glidelås med stolpe rundt slik at forstykket kan tas helt av.
- Henger i glidelås for bedre grep.
- Bakstykke med bred og myk ribbekant som slutter under knærne.
- Bunnplate inn- og utvendig i sort og meget slitesterkt stoff med Thinsulate-isolering.
- Sikkerhetsreflekser og reflekslogo på forstykket for bedre synlighet i mørket.



Slik brukes kjøreposen

1. Trekk ned glidelåsen slik at du får et for- og et bakstykke.
2. Plasser bakstykket i rullestolen og sett brukeren i stolen med føttene på bunnplaten.
3. Legg forstykket over benene.
4. Trekk opp glidelåsen fra den ene siden og hele veien rundt.



Kjøreposens bunnplate skal plasseres **mellem** brukerens føtter og rullestolens fotplate.

Vask

- ⚠ Denne vaskeanvisningen **MÅ** følges. Hvis produktet vaskes feil, er det fare for skader og forkortet levetid.
- ⚠ **IKKE** bruk skyllemiddel, tøymykner, vaskemiddel med blekestoffer.

Vask i maskin

1. Trekk opp glidelåsene og vring kjøreposen før den puttes i vaskemaskinen.
2. Bruk kun en liten mengde flytende vaskemiddel **uten** blekestoffer.
3. Vask kjøreposen på **maks 60°C** og ved lav sentrifugering.
4. Heng kjøreposen til tork. Den kan også tørkes i tørketrommel på lav varme.



Ingen blekemidler



Skånsom vask maks 60°C



Tørketrommel på lav varme



Stryking på lav varme



Rens er mulig

Vedlikehold

- Sjekk kjøreposen regelmessig for skader.
- Bruk **aldri** kjøreposen hvis deler er løse, ødelagte eller mangler.

Materiale

Ytterstoff

- OEKO-TEX® 100-sertifisert.



- 100% polyester med PU-belegg.

Isolering

- OEKO-TEX® 100-sertifisert.
- Thinsulate P100.



Foring

- OEKO-TEX® 100-sertifisert.
- 100% fleece i polyester.

Teknisk info

Ytterstoff

- Vannsøyletrykk: 10.000 mm.
- Pusteevne: 5.000g/m².
- Kvadratmetervekt: 135g/m².

Bunn

- Vannsøyletrykk: 10.000 mm.
- Slitestyrke: 100.000 cykluser.
- Kvadratmetervekt: 210g/m².

Isolering

- Evne: Bevarer isoleringen i fuktige omgivelser og tørker raskt.
- Kvadratmetervekt: 95g/m².
- Isolering: 0,30 Rct.
- Tykkelse: 1,1 cm.

Foring

- Anti-peeling.
- Kvadratmetervekt: 300g/m².

DARO - dansk produsent av klær til alle typer funksjonshemninger

Hos DARO brenner vi for å lage klær til alle typer funksjonshemninger - klær som kan gi deg økt livskvalitet, komfort og en lettere hverdag. DARO har mer enn 40 års erfaring med å designe og sy moderne og funksjonelle klær til både barn og voksne. Vi kan spesialtilpasse klærne for deg og hjelper gjerne med nye løsninger hvis du har spesifikke behov. Se hele DAROs produktutvalg på www.daro.dk.

DARO er klær til DEG og KLÆR med omtanke. 😊

Forhandler



Varodd Velferdsteknologi AS

Rigedalen 41
4626 Kristiansand
Norge

Tlf. (+47) 38 14 48 00
hjelpemidler@varodd.no
www.hjelpemidler.varodd.no

Produsent

DARO

by able 🇳🇴

able nordic a/s
DARO
Skavholmvej 8C, 1.
DK-8520 Lystrup
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22
daro@ablenordic.dk
www.daro.dk