

Brukerveiledning

Kjørepose Aktiv - vinter

Myk og fasongsydd kjørepose uten sete til aktive brukere. Tilgjengelig til barn og voksne. Laget i et pustende, vind- og vanntett kvalitetsmateriale med varm Thinsulate-isolasjon og myk fleeceforing.








Kjære kunde,

Takk for at du valgte et produkt fra Varodd Velferdsteknologi og DARO. Vi håper du blir fornøyd og får mange gode opplevelser ute i det fri.

Les denne brukerveiledningen før du bruker kjøreposen.



Sikkerhetsregler

-  Bruk kun kjørepose som passer brukerens størrelse.
-  Bruk **aldri** kjøreposen hvis deler er løse, ødelagte eller mangler. Det er fare for at den kan sette seg fast i hjulene.
-  Immobiler eller pleietrengende brukere må **ikke** etterlates alene eller være uten tilsyn når vedkommende har på seg produktet.
-  Vær oppmerksom på brukerens temperatur og tilpass klærne deretter. Dette gjøres for å unngå overoppheting.
-  Hvis brukeren benytter sele, skal denne **alltid** være fastspennet ved bruk av kjørepose slik at brukeren ikke glir ned.

Garantibetingelser

Det er 2-års garanti på produktet. Dette inkluderer material- og produksjonsfeil. Gjelder **IKKE** ved:

- Uaktsom bruk.
- Feil vask.
- Dårlig vedlikehold.
- Uautoriserte endringer.
- Normal slitasje.

Kjøreposens funksjoner

- Pustende, vind- og vanntett.
- Varm Thinsulate-isolering og myk fleeceforing.
- Tapede sømmer.
- Fasongsydd og uten sete.
- Lomme foran med vanntett glidelås.
- Glidelås på hver side.
- Bakstykke med myk og bred ribbet del.
- Regulerbart bånd med klikkspenne i midjen og strikk.
- Regulering med snøring nederst på bakstykket.
- Hjelpelbånd på innsiden nederst for optimal plassering av bunnplaten.
- Bunnplate inn- og utvendig i sort og meget slitesterkt stoff med Thinsulate-isolering.
- Sikkerhetsreflekser og reflekslogo på forstykket for bedre synlighet i mørket.



Snøring til regulering av bakstykket

Slik brukes kjøreposen

1. Sett deg i rullestolen.
2. Trekk ned glidelåsene på hver side.
3. Plasser føttene på bunnplaten i kjøreposen og bruk det innsyddede røde hjelpebåndet til fininnstilling.
4. Reguler bredden rundt benene ved hjelp av snøringen på baksiden av kjøreposen.
5. Legg forstykket på benene og før båndet bak ryggen, lukk klikk-spennen og stram til.
6. Trekk opp glidelåsene på hver side.
7. Reguler midjestrikken ved behov.





Hjelpebånd til plassering av bunnplaten



Lomme foran med vannett glidelås

Vask

 Denne vaskeanvisningen **MÅ** følges. Hvis produktet vaskes feil, er det fare for skader og forkortet levetid.

 **IKKE** bruk skyllemiddel, tøymykner, vaskemiddel med blekestoffer.

Vask i maskin

1. Trekk opp glidelåsene og vring kjøreposen før den puttes i vaskemaskinen.
2. Bruk kun en liten mengde flytende vaskemiddel **uten** blekestoffer.
3. Vask kjøreposen på **maks 40°C** og ved lav sentrifugering.
4. Heng kjøreposen til tork. Den kan også tørkes i tørketrommel på lav varme.



Ingen blekemidler



Skånsom vask maks 40°C



Tørketrommel på lav varme



Stryking på lav varme



Rens er mulig

Vedlikehold

- Sjekk kjøreposen regelmessig for skader.
- Bruk **aldri** kjøreposen hvis deler er løse, ødelagte eller mangler.

Materiale

Ytterstoff

- OEKO-TEX® 100-sertifisert.



- 100% polyester med PU-belegg.

Isolering

- OEKO-TEX® 100-sertifisert.

- Thinsulate P100.



Foring

- OEKO-TEX® 100-sertifisert.
- 100% fleece i polyester.

Teknisk info

Ytterstoff

- Vannsøyletrykk: 10.000 mm.
- Pusteevne: 5.000g/m².
- Kvadratmetervekt: 135g/m².

Bunn

- Vannsøyletrykk: 10.000 mm.
- Slitestyrke: 100.000 sykluser.
- Kvadratmetervekt: 210g/m².

Isolering

- Evne: Bevarer isoleringen i fuktige omgivelser og tørker raskt.
- Kvadratmetervekt: 95g/m².
- Isolering: 0,30 Rct.
- Tykkelse: 1,1 cm.

Foring

- Anti-peeling.
- Kvadratmetervekt: 300g/m².

Forhandler



Varodd Velferdsteknologi AS

Rigedalen 41
4626 Kristiansand
Norge

Tlf. (+47) 38 14 48 00
hjelpemidler@varodd.no
www.hjelpemidler.varodd.no

Produsent

DARO

by **able**

able nordic a/s
DARO
Skavholmvej 8C, 1.
DK-8520 Lystrup
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22
daro@ablenordic.dk
www.daro.dk

DARO - dansk produsent av klær til alle typer funksjonshemninger

Hos DARO brenner vi for å lage klær til alle typer funksjonshemninger - klær som kan gi deg økt livskvalitet, komfort og en lettere hverdag. DARO har mer enn 40 års erfaring med å designe og sy moderne og funksjonelle klær til både barn og voksne. Vi kan spesialtilpasse klærne for deg og hjelper gjerne med nye løsninger hvis du har spesifikke behov. Se hele DAROs produktutvalg på www.daro.dk.

DARO er klær til DEG og KLÆR med omtanke