

Handi One G3

Brukerveiledning

Art. nr: 706540

Programversjon 5.5 eller nyere

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
1.1 Om Handi One.....	3
1.2 Tiltent formål.....	3
1.3 Dokumentbeskrivelse	3
1.4 myAbilia	4
1.5 Bildearkiv	4
1.6 Support.....	4
2. Brukerkonto og lisens	5
2.1 Brukerkonto i myAbilia.....	5
2.2 Kontoadministrasjon i myAbilia.....	5
2.3 Lisens	6
3. Oversikt Handi-appene	7
3.1 Album	7
3.2 Hurtiginstillinger	7
3.3 Kalender	7
3.4 Kalkulator.....	7
3.5 Kamera.....	7
3.6 Kontakter	8
3.7 Krisplan.....	8
3.8 Notater.....	8
3.9 Prisregneren	8
3.10 Sjekkliste	8
3.11 Talemelding.....	8
4. Produktoversikt	9
5. Start opp Handi One	10
5.1 Kontroller innholdet i esken	10
5.2 Starte Handi One.....	10
5.3 Lade batteriet.....	10
5.4 Koble til internett.....	10
5.5 Sjekk dato og klokkeslett	10
6. Kom i gang med Handi One	11
6.1 Last ned manualer for Handi One.....	11
6.2 Tilpass Handi One	11
6.3 Velg tastatur	11
6.4 Starte opp myAbilia	11
7. Håndtering av Handi One	12
7.1 Slå enheten av og på.....	12
7.2 Slå av Handi One helt.....	12
7.3 Lading og batterihåndtering	12
7.4 Koble Handi One til en PC.....	13
7.5 Dato og tid	13
7.6 Lyd.....	14
7.7 Skjerminnstillinger	14
7.8 Tastaturet	15

7.9 Internettilkobling	16
7.10 Trådløst headset (Bluetooth)	16
7.11 Naviger og bla	16
8. Startmenyen	17
8.1 Startmenyen med Handi-layout	17
8.2 Startmenyen med Standard-layout	17
9. Hurtiginnstillinger	18
9.1 Wi-Fi	18
9.2 Bluetooth	18
9.3 Volum	18
9.4 Lyd ved valg	19
9.5 Roter skjermen	19
9.6 Skjermens tidsgrense	19
9.7 Bakgrunnsbilde	19
9.8 Batteri	19
10. Kamera	20
11. Innstillinger	21
11.1 Innstillingsmodus	21
11.2 Startmenyen	22
11.3 System	24
11.4 Bildearkiv	27
11.5 Hurtiginnstillinger	29
11.6 Kamera	29
11.7 Kalkulator	30
11.8 Koble til myAbilia	30
12. Vedlikehold	31
12.1 Backup	31
12.2 Tilbakestilling	31
12.3 Logger	32
12.4 Synkroniseringsstatus	33
12.5 Oppdater Handi One	33
12.6 Omstart - Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	33
12.7 Rengjøring	33
13. Oppbevaring og kassering	34
13.1 Oppbevaring	34
13.2 Gjenvinning av elektronisk avfall	34
14. Produktspesifikasjoner	35
14.1 Medfølgende artikler	35
14.2 Tekniske data	35
15. Viktig informasjon	36
15.1 Sikkerhetsdefinisjoner	36
15.2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruk	36
15.3 Alvorlige hendelser	36
15.4 Produktansvar	36
16. Grunninnstilling	37

1. Innledning

1.1 Om Handi One

Handi One er et medisinsteknisk hjelpemiddel designet for å tjene som et kognitivt hjelpemiddel i hverdagen. Produktet er en håndholdt digital kalender med flere utfyllende funksjoner.

Handi One har følgende funksjoner:

- Album
- Kamera
- Prisregnere
- Hurtiginnstillinger
- Kontakter
- Sjekkliste
- Kalender
- Kriseplan
- Talemelding
- Kalkulator
- Notater

Handi One kan i stor grad tilpasses etter brukerens behov og funksjonsnivå. Man kan bruke egne bilder eller de som følger med Handi One. Man kan velge hvilke funksjoner brukeren skal ha tilgang til. For å lese mer om hvordan man tilpasser Handi – se *Tilpasningsguide Handi5*.

Via nettjenesten *myAbilia* kan støttepersoner hjelpe med Handi One også når de ikke er i nærheten. Fra datamaskin/nettbrett kan støttepersonene administrere kalender, sjekklister, billedarkiv, notater og talemeldinger.

Vil du vite mer om Handi, se www.abilia.no.

1.2 Tiltentkt formål

Handi One er en digital kalender utviklet for personer som trenger hjelp med tid og planlegging og har behov for grafisk tydelighet. Handi One kan brukes både innendørs og utendørs.

1.3 Dokumentbeskrivelse

Dette dokumentet beskriver hvordan man kommer i gang med bruken av Handi One. Denne håndboken er beregnet på ergoterapeuter, nære pårørende eller andre støttepersoner. Dette dokumentet inneholder ikke detaljerte instruksjoner for de innebygde funksjoner. Hver funksjon har en egen bruksanvisning som kan lastes ned på www.abilia.no.

1.3.1 Terminologi

I denne håndboken brukes følgende begrep:

Enhet	Maskinvaren som utgjør Handi One.
Bruker	Person som har fått Handi One som hjelpemiddel.
myAbilia	Nettjeneste for Handi One og andre produkter fra Abilia. Det finnes forskjellige typer kontoer: bruker, støtteperson, administrator.
Startoppsett	Bildearkiv, standardaktiviteter og standardtimere som er installert i Handi One.
Brukermodus	Den innstillingen Handi One står i når man bruker den som hjelpemiddel.
Innstillingsmodus	Modusen der du stiller inn hvordan Handi One skal fungere. Henvvisninger til innstillingsfunksjoner er beskrevet i for eksempel: Handi Innstillinger Startmeny .
Hjemmeskjerm/ Startskjerm	Enhetens Startskjerm som åpnes når Handi One starter. Handi One har en Startmeny med to valgbare oppsett. Ved å sveipe opp på skjermen kan du alltid gå tilbake til Startmenyen.
Sveipe	En måte å navigere i ulike lister på ved å holde fingeren mot skjermen og deretter dra opp/ned eller høyre/venstre. Erstatte ofte knappene Neste/Forrige.
Zoome	Der bilder vises i fullskjerm kan man zoome, forstørre bildet ved å plassere to fingre på skjermen og dra dem fra hverandre.

1.4 myAbilia

Abilia leverer nettjenesten *myAbilia* for Handi og andre produkter fra Abilia.

Med *myAbilia* kan man:

- Administrere kalenderen, bildearkiv, sjekklister, notarer og talemeldinger fra PC'en og/eller nettbrett o.l.
- Velge ut støttepersoner som kan legge til og endre påminnelser/varslinger via Internett.

For å kunne bruke myAbilia må man ha en brukerkonto. Les mer om hvordan du oppretter ekonto i myAbilia og de ulike rollene i 2 *Brukerkonto og lisens*.

1.5 Bildearkiv

Ca 300 bilder leveres med Handi One. Bildene er organisert i mappene Handi, Klær, Bad, Skole, Grunnbilder, Smileys, Mennesker (tom) og Bakgrunner. Bilder lagret fra for eksempel SMS og e-post lagres i Innboks-mappen. Mappen vises bare hvis det er lagrede mottatte bilder. Bildearkivet kan tilpasses via myAbilia. På denne måten kan for eksempel egne bilder legges til eller fylles med flere bilder fra myAbilias bildearkiv.

1.6 Support

Abilia kan gi support for Handi-funksjoner og innstillinger for disse i Handi One og myAbilia. Du er velkommen til å ta kontakt med Abilias support

- Send en e-post til support@abilia.no
- Ring 23 28 94 00

2. Brukerkonto og lisens

For å bruke Handi One kreves en myAbilia-brukerkonto og en gyldig lisens.

2.1 Brukerkonto i myAbilia

Med en brukerkonto i myAbilia som er koblet til Handi One, lagres brukerdata (kalender, basisaktiviteter, bildearkiv, sjekklister etc.) i myAbilias skylagring.

2.1.1 Roller i myAbilia

I myAbilia har man forskjellige typer kontoer avhengig av formålet. I sentrum er alltid brukeren, den som bruker hjelpemidlet. Brukeren kan ha behov for hjelp med sin kalender, og så videre av en støtteperson. Avhengig av virksomhet kan det trenes en administrator, en person som administrerer kontoer og lisenser uten å ha tilgang til brukerens personlige opplysninger.

Avhengig av rollen får du ulike rettigheter i myAbilia og derfor tilgang til ulike funksjoner:

Rolle	Beskrivelse	Funksjoner
Brukere	Den personen som bruker hjelpemidlet. Trenger ikke å være aktiv på webtjenesten, men har bare en konto som er koblet til hjelpemidlet.	Kalender, Standardaktiviteter, Standardtimere, Bildearkiv, Sjekkliste, Notater, Talemelding, Profil, Lisenser, Støttepersoner, Administratorer
Støtteperson	Én eller flere personer som hjelper brukeren med hjelpemidlet.	Samme som ovenfor
Administrator	Den person som oppretter og/eller håndterer brukerkontoen og lisenser. Kan også være støtteperson.	Brukerkontoer: Profil, Støttepersoner, Administratorer

2.1.2 Tilpasse myAbilia

Under **Min profil | Moduler** i myAbilia kan man velge hvilke moduler som skal vises i myAbilia. Hvis man bruker den samme myAbilia-kontoen på forskjellige enheter (for eksempel både MEMOplanner og Handi) kan man velge hvilken kalender som skal vises.

2.1.3 Dele myAbilia-kalenderen

Ved å opprette en abonnementskobling (ICS) for myAbilia-kalenderen, kan den vises i andre kalenderprogrammer, for eksempel Outlook og Google. Instruksjoner er tilgjengelige på myAbilia.

2.2 Kontoadministrasjon i myAbilia

2.2.1 Opprett frittstående konto, med e-postadresse

Dette er prosedyren for å opprette en brukerkonto som ikke er tilknyttet en administrator.

1. Gå til www.myabilia.com og klikk på *Opprett konto*.
2. Velg *Bruker*.
3. Oppgi navn og aktiv e-postadresse.
4. Kryss av for avkrysningsboksene slik at du oppgir at du har lest og godtar Abilias Brukervilkår og Personvernerklæring.
5. Klikk på *Opprett konto*.
6. En velkomst-e-post sendes fra myAbilia til e-postadressen som er oppgitt.
7. Velg passord ved å klikke på koblingen i velkomst-e-posten.

2.2.2 Opprett konto knyttet til en administrator

Dette er prosedyren hvis du er administrator og vil opprette en brukerkonto.

1. Logg inn som administrator på *www.myabilia.com*.
2. Gå til *Mine brukere* i menyen og velg *Legg til bruker*.
3. Skriv inn navn og velg *Konto med brukernavn*.
4. Skriv inn brukernavn og passord.
5. Velg om du skal være støtteperson for brukeren og ha tilgang til alle brukerens data.
6. Klikk på *Opprett*.

Den opprettede kontoen kan nå brukes til å logge på MEMOplanner.

2.2.3 Fjerne en brukerkonto (myAbilia)

Kontakt Abilias support for å slette en brukerkonto, se *1.6 Support*.

2.3 Lisens

På Handi One er en lisens forhåndsinstallert. Lisensen angis også på det verdibeviset som leveres med produktet. Programvaren kan oppdateres i løpet av lisensperioden.

I god tid før lisensen utløper gis et varsel om dette i Handi (3 måneder, 3 uker og 3 dager).

Se lisensens sluttdato i **Handi Innstillinger | System | Lisenshåndtering**.

Forlengelse av lisensen kan bestilles fra Abilia. Ved bestilling, skriv inn lisensnøkkelen og e-postadressen som en ny kupong skal sendes til. For å aktivere forlengelse av lisensens kal man deretter gå til **Handi Innstillinger | System | Lisenshåndtering** og trykke på *Søk lisensforlengelse*. Sørg for internettilkobling.

3. Oversikt Handi-appene

I dette kapittelet gis en oversiktlig beskrivelse av alle Handi-appene. For en mer detaljert beskrivelse, se brukermanualen for den respektive Handi-appen som kan lastes ned fra www.abilia.no.

3.1 Album

Med funksjonen *Album* kan man ha bildeserier med bilder, tekst og innspilt lyd. Det kan være sosiale bildeserier av typen «Min familie», eller bildeserier som forteller en historie, for eksempel «Ferie 2023». Funksjonen *Album* kan også brukes til mer praktisk rettede bildeserier som oppskrifter eller arbeidsinstruksjoner.

Albumet opprettes i Handi.

3.2 Hurtiginnstillinger

I *Hurtiginnstillinger* kommer man til de mest grunnleggende innstillingene som volum, lyd ved valg og så videre på en lettforståelig måte. Man kan slå av lyden og stille inn hvilket tidspunkt den skal settes på igjen. Se også 8 *Hurtiginnstillinger*.

3.3 Kalender

▲ ADVARSEL: Ikke bruk produktet som eneste støtte for medisiner, medisinsk behandling eller andre viktige aktiviteter.

Kalenderen er en sentral funksjon i Handi og hjelper brukeren til å få orden i livet.

Med *Kalender* får man oversikt over dag, uke og måned. Man får tydelige varsler når aktiviteter begynner og slutter. Det er enkelt å legge inn aktiviteter. Man kan bruke bilder og få teksten opplest med talesyntese.

Det er også mulig å koble til funksjoner som hører naturlig sammen med aktivitetene, som for eksempel en handleliste eller et telefonnummer. På den måten får man opp informasjonen akkurat når aktiviteten begynner, i stedet for å måtte lete etter den.

Kalenderen håndteres i Handi eller via myAbilia.

3.4 Kalkulator

Kalkulator er en enkel kalkulator som man kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere med.

Alle tallene og regnetegnene som skrives inn vises i inntastings-vinduet, også etter at man har trykket på er-lik tegnet.

Om noen av tallene er feil kan man endre det uten å måtte begynne på nytt igjen. Man trykker da i inntastings-vinduet for å plassere markøren der. Deretter kan man slette og endre som man vil.

Kalkulator kan stilles inn i tre nivåer; enkel, regnskap og avansert.

3.5 Kamera

Med funksjonen *Kamera* kan man ta egne bilder som for eksempel kan brukes for å symbolisere forskjellige aktiviteter.

Kameraet kan stilles inn til selfie-posisjon og man kan velge om man vil bruke blits eller ikke.

3.6 Kontakter

I funksjonen *Kontakter* kan man lagre informasjon om ulike personer. Informasjonen lagres som en «kontakt», og kan inneholde navn, bilde, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e postadresse og ekstra informasjon.

Kontaktlisten kan vises på to måter. Enten i alfabetisk rekkefølge, eller sortert i mapper (for eksempel «Familien» og «Venner») hvilket gjør det enklere å finne frem i kontaktlisten.

Kontaktene håndteres i Handi.

3.7 Krisplan

Kriseplan er en trygghetsfunksjon som er utviklet for de tilfeller hvor brukeren risikerer å bli akutt syk.

Kriseplanen er et vindu med handlingskjeder/oppgaver ved akutt tilstand. Informasjonen er i form av tekst, som kan leses opp ved hjelp av talesyntesen.

Kriseplan kan startes via krisepanikonet  i Hjemmeskjerm.

Kriseplanene håndteres i Handi.

3.8 Notater

Med *Notater* kan man skrive inn informasjon med det innebygd (på skjermen) tastaturet. Det er enkelt å lagre og åpne Notater. Informasjonen kan leses opp av talesyntesen.

Notater håndteres i Handi eller via myAbilia.

3.9 Prisregneren

Noen ganger kan det være vanskelig å ha kontroll på pengene når man er ute og handler. *Prisregneren* viser tydelig hvilke sedler og mynter man kan bruke, hvor mange av hver man trenger og regner ut summen mens man er i butikken. Man får svar på spørsmål som «Har jeg nok penger med meg?» og «Hvor mye skal jeg ha igjen?».

3.10 Sjekkliste

Sjekklistene er for mange en måte å få struktur på og oversikt over det man skal gjøre. De fungerer som et støtte for hukommelsen og øker kanskje også selvtilliten og motivasjonen. Det føles godt å huke av for det man har gjort.

Å bruke sjekklistene i Handi er enkelt og oversiktlig. Man kan bruke bilder fra bildearkivet eller legge inn egne bilder. Man kan få teksten opplest med talesyntese. Sjekklistene kan kobles direkte til aktiviteter i kalenderen.

Sjekklistene håndteres i Handi eller via myAbilia.


3.11 Talemelding

Med *Talemelding* legger man inn informasjon i Handi med tale. Det er enkelt å lagre og åpne talemeldinger.

Talemeldinger stiller ingen krav til skriveferdigheter, men funksjonen kan også brukes som en veldig enkel og rask måte å mate inn informasjon selv om man kan skrive.

Talemeldinger håndteres i Handi eller via myAbilia.

4. Produktoversikt

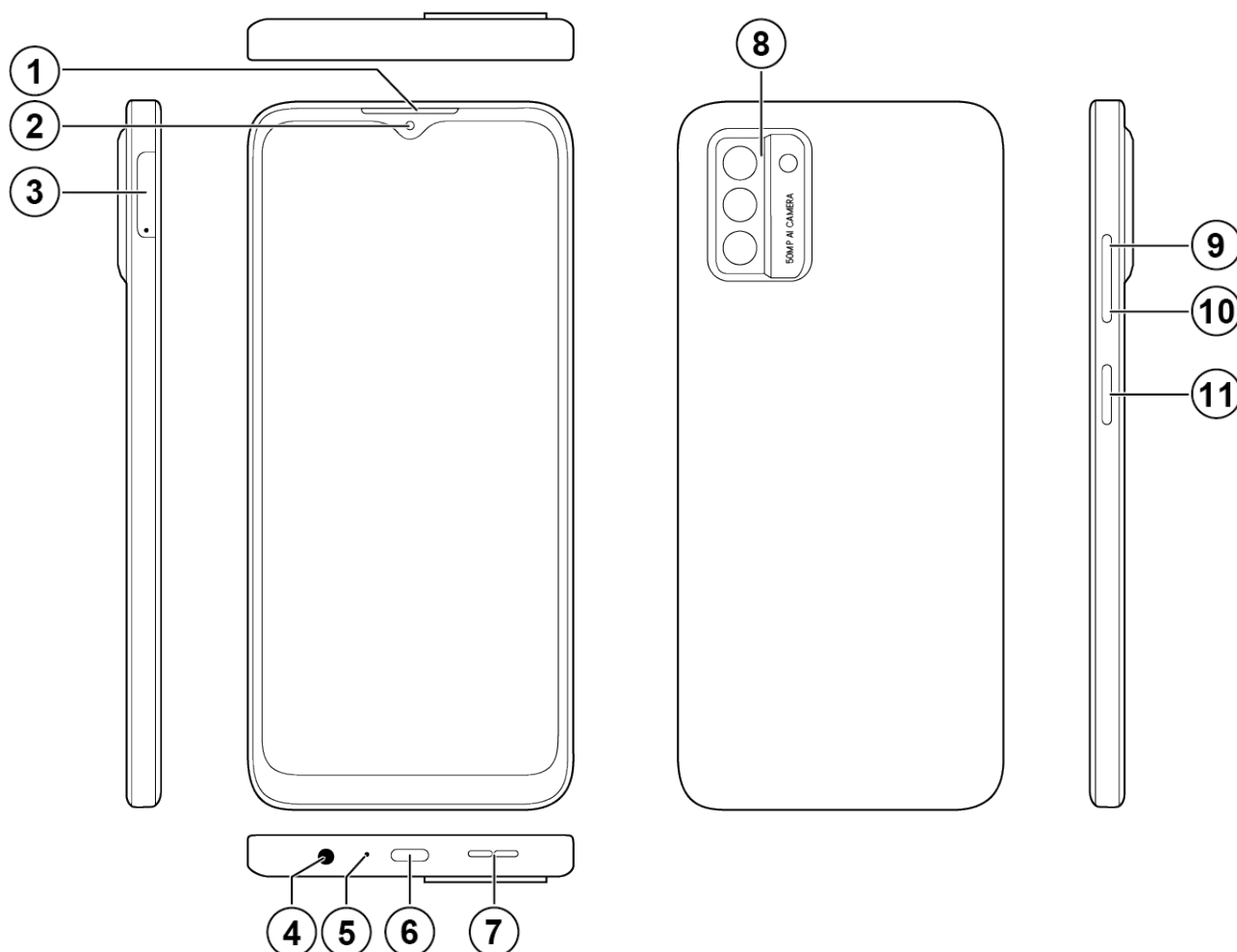

1. Telefonhøytaler
2. Kamera (forside)
3. SIM- og minnekortholder
4. Hodetelefonkontakt
5. Mikrofon
6. USB-C port

7. Høytaler
8. Kamera (bakside)
9. Volum +
10. Volum -
11. På/Av-knapp

Henvisningene i denne brukerveiledningen har formen «(X)» der X refererer til et punkt i listen ovenfor.

5. Start opp Handi One

5.1 Kontroller innholdet i esken

I kartongen skal følgende finnes:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Handi One G3 | Dokumenter, 4 st: |
| 2. Ladekabel, USB-C | • Start opp Handi |
| 3. Strømadapter, USB-C | • Brukerveiledning Handi One G3 (dette dokument) |
| 4. Headset, kabeltilkobling | • Kalender - Funksjonsbeskrivelse |
| 5. Beskyttelsesdeksel | • Tilpasningsguide Handi5 |
| 6. Verdibevis med lisensnøkkel | |

5.2 Starte Handi One

Gör så här för att starta Handi One:

1. Trykk på *På/Av*-knappen (11) til enheten vibrerer og skjermen lyser.
2. Sveip opp på skjermen hvis *Startmenyen* i Handi One ikke åpnes.

5.3 Lade batteriet

⚠ ADVARSEL: *Bruk bare den medfølgende laderen til å lade produktbatteriet.*

1. Sett den ene kontakten på USB-kabelen inn i USB-porten (6) på Handi One.
2. Sett den andre enden av USB-kabelen inn i strømadapteren.
3. Koble strømadapteren til en stikkontakt..



5.4 Koble til internett

Hvis netjtjenesten myAbilia skal brukes, må Handi One være koblet til Internett. Se 7.9 *Internetttilkobling* for instruksjoner om hvordan du kobler til Wi-Fi.

5.5 Sjekk dato og klokkeslett

Handi One leveres med korrekt dato og klokkeslett, men bør sjekkes.

Gjør følgende for å sjekke dato og klokkeslett:

1. Start *Klokke*-appen på Startmenyen.
2. Sjekk at gjeldende dato og klokkeslett er lagt inn. Klikk på klokken for å få lest opp klokken.
3. Sveip opp på skjermen for å gå tilbake til Start-menyen.

Skulle dato og klokkeslett være feil, se 7.5 *Dato og tid*.

6. Kom i gang med Handi One

Nedenfor er det tips for hvordan man enklere kommer i gang med Handi One.

Alle innstillinger gjøres i innstillingsmodus. Dit kommer man ved å velge Handi Innstillinger i Startmenyen eller via «knappekombinasjonen» (se 11.1 *Innstillingsmodus*).

6.1 Last ned manualer for Handi One

På Abilias nettsider kan tilpasningsguider, hurtigveiledninger og funksjonsbeskrivelser for de ulike funksjonsappene lastes ned. Gå til www.abilia.no.

6.2 Tilpass Handi One


Handi kan tilpasses i høy grad etter brukerens behov og evner.

Se *Tilpasningsguide Handi5* for en beskrivelse av de viktigste innstillingene og hvordan de brukes. Her finnes informasjon om startmenyen, talestøtte, bildestøtte, tastatur, kalenderens funksjonalitet og utseende, hvordan man kan beskytte innstillingsmodusen med kode og så videre.

6.3 Velg tastatur


Det er to tastaturer å velge mellom i Handi One:

- Handi tastatur

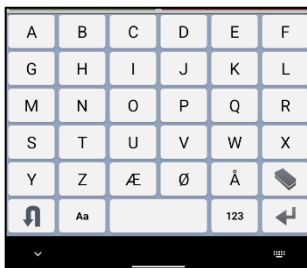

- ABC-oppsett på bokstavene
- Store taster
- Talestøtte

- Standard

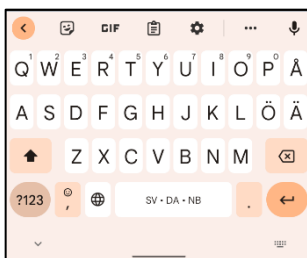

- QWERTY-oppsett på bokstavene
- Mindre taster
- Ordprediksjon, dvs. gir forslag til ord mens du skriver.

Standard er forhåndsvalgt i Handi One.

Les mer i 7.8 *Tastaturet* om hvordan man aktiverer og velger Handi-tastatur.

6.4 Starte opp myAbilia

Dersom Handi One skal kobles til myAbilia, gjøres følgende:

Gå til **Handi Innstillinger | myAbilia** og angi brukernavn og passord for brukerens myAbilia-konto. Les mer i 11.8 *Koble til myAbilia*.

Hvis kontoen mangler, følg instruksjonene i 2 *Brukerkonto og lisens*.


7. Håndtering av Handi One

7.1 Slå enheten av og på

Handi One startes og slås av ved å trykke på *På/Av*-knappen (11). Dette vil slå av skjermen og sette enheten i hvilemodus.

Hvis enheten ikke brukes på 10 minutter, vil skjermen automatisk slå seg av og enheten går i hvilemodus. Tiden kan endres, se [9.6 Skjermens tidsgrense](#).


Når enheten er i hvilemodus, «våkner» den automatisk ved for eksempel en alarm.

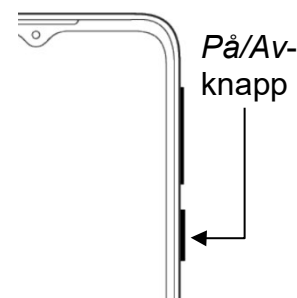

7.2 Slå av Handi One helt

For å slå av enheten helt, trykk og hold inne *På/Av*-knappen til alternativmenyen vises, se bildet og velg deretter *Slå av*.

For å starte Handi One igjen, trykk på *På/Av*-knappen til enheten vibrerer, se [5.2 Starte Handi One](#).

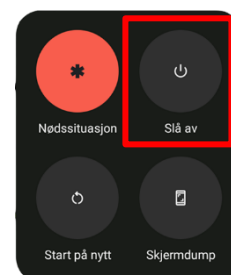

ⓘ MERK: Hvis Handi One er slått helt av, vil den ikke «våkne» når det for eksempel er en alarm.

7.3 Lading og batterihåndtering

⚠ ADVARSEL: Bruk bare den medfølgende strømadapter og ladekabel til å lade produktbatteriet.

Se [5.3 Lade batteriet](#) for instruksjoner om hvordan du lader Handi One.

Du kan se ladestatusen ved å klikke på *Batteri* i *Startmenyen* eller i *Hurtiginnstillinger*, se [7.3.3 Sjekk batterinivået](#).

💡 TIPS: En god rutine er å lade Handi One hver natt for å sikre at batteriet er fulladet til neste dags bruk.

7.3.1 Handi One er fullstendig utladet

Hvis Handi One har blitt ladet fullstendig ut (ingenting skjer når man trykker på *På/Av*-knappen), må man den lades opp den som vist ovenfor. Handi One kan brukes mens den lades.

7.3.2 Varselsmelding «Koble til en lader»

Når batteriet er utladet til mindre enn 15 % av full kapasitet, vises en melding om lading. Når man da trykker OK, kan Handi One fortsatt brukes. Imidlertid kommer meldingen til å vises med jevne mellomrom til Handi One er ladet.

7.3.3 Sjekk batterinivået

Den enkleste måten å sjekke batterinivået på er via *Hurtiginnstillinger*, se [9.8 Batteri](#).

7.4 Koble Handi One til en PC


Det går fint å koble Handi One til en datamaskin for å overføre bilde- og lydfiler fra og til Handi One. For at dette skal fungere, må en innstilling gjøres i Handi One.

Avhengig av tilkoblingene på datamaskinen, trengs en kabel som følger:

- PC med USB-C Bruk den medfølgende ladekabelen
- PC med USB En kabel med USB-C-tilkobling på ene siden og USB på den andre

Fortsett som følger for å aktivere tilkobling av Handi One til en PC:

1. Koble Handi One til en PC med en kabel, se ovenfor.
2. Gå til **Handi Innstillinger | Android Innstillinger | Tilkoblede enheter**.
3. I *Tilkoblede enheter*-visningen trykker du på **USB**.
4. I visningen *USB-innstillinger* velger du *Filoverføring* under *Bruk USB for*.
5. Sveip opp på skjermen for å gå tilbake til Startmenyen.
6. Åpne *Utforsker* på PC-en der *Nokia G22* er synlig som en enhet under *Denne PC*.
7. Klikk på *Delt intern lagring*, hvor mapper for ulike filtyper blir synlige.

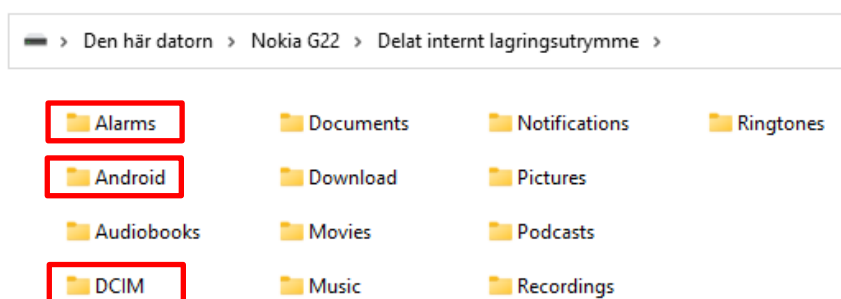

- Egne alarmlyder lagres i *Alarms*
- Bilder som skal velges i kalender, kontakter etc. lagres i *DCIM/Handi*.
- Sikkerhetskopier filer lagres i *Android/data/se.handitek/files/Handi/Backup*

8. Koble kabelen fra PC-en når overføringen er fullført.

ⓘ MERK: Denne innstillingen må gjøres hver gang Handi One kobles til en PC.


7.5 Dato og tid

Innstilling av dato, tid og tidsson stilles via **Handi Innstillinger | Android Innstillinger | System | Dato og klokkeslett**.

Det beste er om man kan ha innstillingen *Bruk nettverkets klokkeslett*, som vil si at informasjon om dato, tid og tidssone automatisk hentes via telefonnettet/det trådløses nettverket. Da viser klokken alltid nøyaktig tid, og man vet at omstilling til sommer-/vintertid fungerer.

Vanligvis er alternativet *Bruk nettverkets klokkeslett* valgt, men hvis det ikke fungerer tilfredsstillende stenger man av det. Da kan dato og tid stilles inn manuelt.

For å endre tidssone stenger man av *Bruk nettverkets tidssone* og velger så ønsket tidssone.

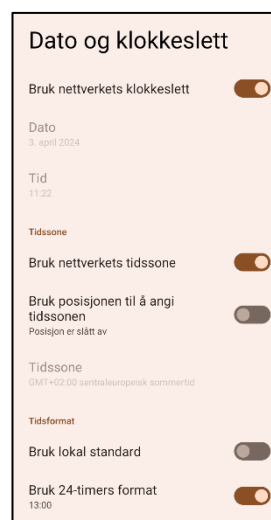

7.6 Lyd

Lydvolumet kan stilles inn på flere måter.

7.6.1 Volumkontroll

Mens man lytter til for eksempel musikk eller lydbok, endrer man enkelt avspillingsvolumet (medievolumet) ved å trykke på Volum-knappene (9), (10).

7.6.2 Voluminnstillinger

Via *Hurtiginnstillinger* kan man enkelt endre de ulike volumene, se 9.3 *Volum*.

7.6.3 Alarmlyd

Innstillinger for alarmer gjøres via **Handi Innstillinger | Kalender | Alarmlyd**.

Hvis Alarmlyder er satt til å vises i Kalender-menyen, angir du i Kalender hvilke alarmlyder som aktiviteter, tidtakere og påminnelser som skal ha der.

Man kan stille inn separat lyd for *Aktiviteter uten kvitterbarhet*, *Aktiviteter med kvitterbarhet*, *Timere* og *Påminnelser*.

Man velger alarmlyd ved å trykke på navnet på alarmlyden. Da vises en liste med de tilgjengelige alarmlydene.

Ved å trykke på *Play*-knappen kan man spille av valgt alarmlyd. 

For påminnelsealarmer finnes også alternativene - *Ingen lyd*- i listen, samt avkrysningsfeltet *Vibrasjon* ved påminnelse. Hvis man velger dette vil alle påminnelser være lydløse, men med vibrasjon.

Alarmtiden, dvs. den tiden som alarm og påminnelser skal varsle/ vibrere kan stilles på *Signal*, *15 sekunder*, *30 sekunder*, *1 minutt*, *2 minutter* og *5 minutter*. («Signal» spiller a lyden en kort stund.)



7.6.3.1 Egne alarmlyder

Man kan legge inn egne alarmlyder. Disse bør være i mp3- eller m4a-format. Koble Handi til PC og legg lydfilene i mappen *Alarms*. For tilkobling til PC se 7.4 *Koble Handi One til en PC*.

7.6.4 Lyd ved valg

Via *Hurtiginnsillinger* stiller man inn om man vil ha en klikkelyd som bekreftelse når man trykker på knapper og mer i appene, se 9.4 *Lyd ved valg*.

7.7 Skjerminnstillinger

7.7.1 Skjermens tidsgrense


Via *Hurtiginnstillinger* kan man stille inn tiden før skjermen slukkes og enheten går i hvilemodus (skjermen slukkes) når den går på batteristrøm. Se 9.6 *Skjermens tidsgrense*.

7.7.2 Roter skjermen

Via *Hurtiginnstillinger* kan man stille inn om skjermen skal roteres når man vrir på enheten. Se 9.5 *Roter skjermen*.

7.7.3 Skjermlås

Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke bruker skjermlås, da det kan gjøre det vanskelig å få tilgang til Handi One og bruke den.

 **MERK:** Hvis du velger å aktivere skjermlåsen og glemmer passordet, kan ikke Abilia Support løse problemet og enheten må tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

7.8 Tastaturet

Man kan velge mellom ulike tastaturer i Handi One:

- Standardtastaturet (Gboard, en del av Android) har små taster og tilbyr ordforslag mens du skriver (ordprediksjon).
- Handi-tastaturet er fordelaktig da det har store taster og talestøtte.


i **MERK:** Handi-tastaturet må være aktivert for å velges når du skriver.

7.8.1 Aktiver Handi-tastaturet


Handi-tastatur aktiveres via **Handi Innstillinger | Android Innstillinger | System | Språk og inndata | Skjermtastatur**.

For å aktivere Handi-tastaturet, gjør følgende:


1. Trykk på **Skjermtastatur**

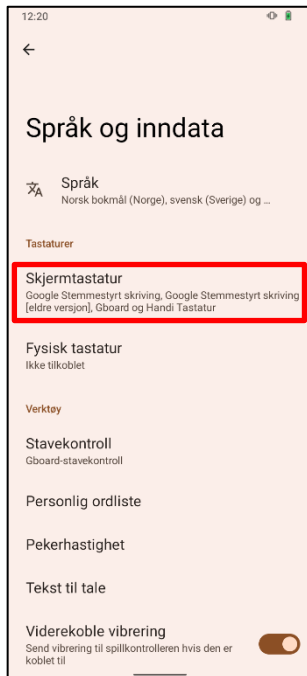


2. Trykk på **Administrer skjermtastatur**

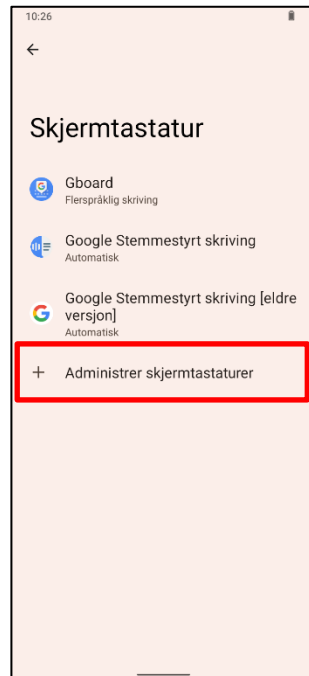

3. Slå på **Handi Tastatur**

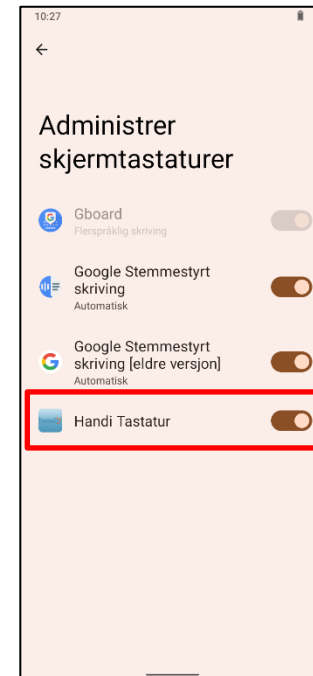

4. **Handi Tastatur** vises i listen

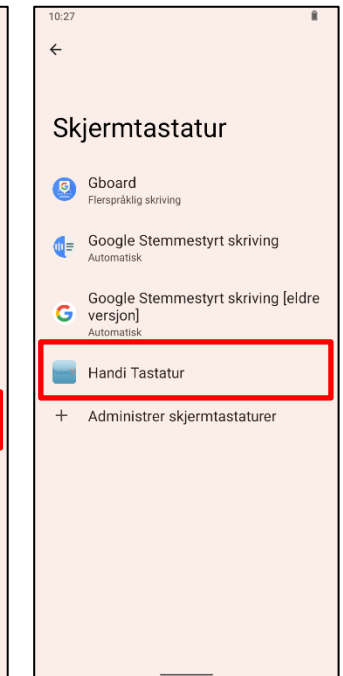

5. Sveip opp på skjermen for å gå tilbake til **Startmenyen**.



7.8.2 Funksjon og bruk av Handi-tastaturet

Handi-tastaturet har automatisk endring mellom store og små bokstaver. Etter punktum eller på en ny linje blir bokstaven automatisk STOR. Handi-tastaturet viser et ABC-tastatur ved stående skjerm og et QWERTY-tastatur ved liggende.

7.8.3 Bytt mellom tastaturer

Bytt mellom tastaturer når du skriver:

1. Klikk på symbolet nederst til høyre på tastaturet, se bilde 1.
2. Velg hvilket tastatur som skal være aktivt.

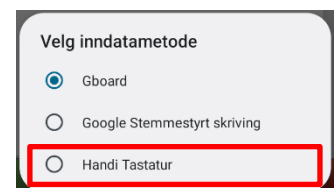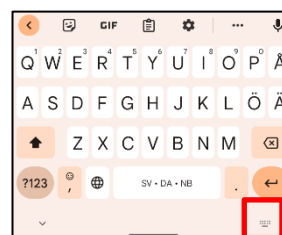

7.9 Internettilkobling

Bruk av nettjenesten myAbilia krever internettilkobling.

7.9.1 Koble til et Wi-Fi

Via Hurtiginnstillinger kan man koble til via Wi-Fi (trådløst nettverk).

For å koble til et trådløst nettverk, gjør følgende:

1. Start *Hurtiginnstillinger*-appen på Startmenyen.
2. Velg Wi-Fi og Internett-siden åpnes, sørg for at Wi-Fi-knappen er aktiv (slått på).
3. Velg ønsket trådløst nettverk i listen og logg på. (Pålogging er kun nødvendig første gang, deretter kobler Handi One seg automatisk til det valgte nettverket.)
4. Sveip opp på skjermen for å gå tilbake til *Startmenyen*.

 **MERK:** Det er ikke mulig å koble til offentlige nettverk som krever bekreftelse via nettleser da det ikke er noen nettleser i Handi One.

7.9.2 Aktiver flymodus

Flymodus innebærer at all radiokommunikasjon slås av, dvs. at verken Wi-Fi eller Bluetooth fungerer, men forøvrig fungerer Handi som vanlig. For å aktivere flymodus, gjør følgende:

1. Start *Hurtiginnstillinger*-appen på Startmenyen.
2. Velg *Flymodus* og siden *Nettverk og Internett* åpnes.
3. Aktiver *Flymodus* ved å slå på knappen til høyre.
4. Sveip opp på skjermen for å gå tilbake til *Startmenyen*.






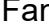










7.10 Trådløst headset (Bluetooth)

 **ADVARSEL:** Bruk kun CE-merket eksternt tilbehør.

Via *Hurtiginnstillinger* kan man koble til trådløst headset (og høyttaler), se 9.2 *Bluetooth*.

7.11 Naviger og bla

For å lette navigering og bla i Handi One er det ulike støttefunksjoner avhengig av hvilken innstilling du har valgt for enheten din.

	Gå tilbake til Startmenyen		Sveip opp fra bunnen av skjermen.
			Bla-knapper for å bla fremover og bakover.
			Faner, vises hvis det er mer enn én side.
			Pilsymboler opp/ned, vises hvis alt ikke får plass på skjermen.
			Pilsymboler høyre/venstre, for å navigere forover og bakover.
			OK, for å bekrefte et valg.
			Avbryt/Angre.
			Talestøtte, for å få lest opp tekst.

Ah

8. Startmenyen

Startmenyen er den enkle og tydelige hovedmenyen som alle apper starter fra; «Handi-skallet».


Startmenyen kan ha ulike layouts; *Standard*, *Handi Rutenett* eller *Handi Rader*.

- *Startmeny med Handi-layout* har mindre informasjon og et renere utseende og med mulighet for talestøtte. Startmenyen kan vises med rader eller som rutenett.
- *Startmeny med standard-layout* minner om en vanlig startskjerm i Android og viser i tillegg til tilgjengelige apper, også statusfeltet.


Det er mulig å legge en snarvei til funksjoner i Handi-appene, for eksempel «Ukevisning» fra Kalender og «Søk kontakt» fra Kontakter. Man kan også ha snarvei direkte til for eksempel en kontakt eller album.

De ulike layoutene er beskrevet nedenfor. I 11.2 *Startmenyen* er det beskrevet hvordan du tilpasser Startmenyen.

8.1 Startmenyen med Handi-layout

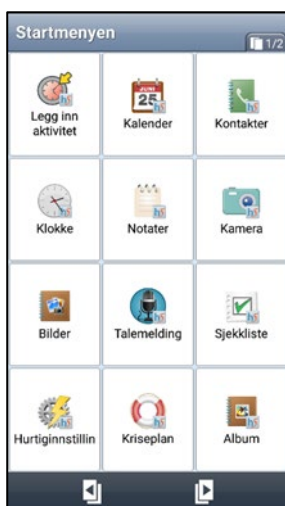


I Startmenyen vises ikoner for apper og snarveier. Når man markerer et ikon starter den valgte appen.

Man kan ha flere sider med apper. I rubrikken vises hvor mange sider som finnes og hvilken side som vises nå  1/2.

Man trykker på *Bla*-knappene   for å bytte side.


Handi-layouten kan vises i rutenett eller rader.

Ved å trykke på *Talestøtte*-knappen  blir det man har markert lest opp (forutsatt at talestøtte i menyer er valgt).

8.2 Startmenyen med Standard-layout



I Startmenyen vises ikoner for apper og snarveier. Den valgte appen starter når man trykker på et ikon.

Man kan ha flere sider med apper. Symbolet med hvite prikker  viser hvor mange sider som finnes og hvilken side som vises nå. For å bytte side plasserer man fingeren på skjermen og drar til siden.

Den første siden har en stor klokke med dato.

Øverst vises Androids statusfelt.

Nederst finnes en favorittliste hvor man kan legge 1-3 apper som man alltid vil ha lett tilgjengelige uansett hvilken side som vises.

Det er mulig å bytte bakgrunnsbilde.

Det finnes ingen talestøtte i denne layout.

9. Hurtiginnstillinger



I Startmenyen finner du Handi-appen *Hurtiginnstillinger* hvor du kan gjøre de vanligste innstillingene for enheten.

Det er mulig å stille inn hvilke innstillinger som skal vises, se 11.5 *Hurtiginnstillinger*.

Når man starter *Hurtiginnstillinger* vises de innstillingene man har valgt å ha tilgjengelige.

De valgene som er aktiverte (*Wi-Fi*, *Volum*, *Roter skjermen* og *Skjermens tidsgrense*) har et kryss i ruten, de som ikke er aktiverte (*Bluetooth* og *Lyd ved valg*) er gråmarkerte.

Noen av innstillingene har en pil lengst til høyre som viser at man må trykke på raden for å gå videre til flere innstillinger.

9.1 Wi-Fi

Når man huker av for *Wi-Fi* kan enheten kobles til et trådløst nettverk. Når man er innenfor rekkevidde for det trådløse nettverket, velger enheten automatisk denne tilkoblingen til Internett. Når man trykker på pilen til høyre kommer man til Androids Wi-Fi-innstillinger, se 7.9.1 *Koble til et Wi-Fi*.

9.2 Bluetooth

For å koble til et Bluetooth-headset eller en høyttaler, må man krysse av i boksen *Bluetooth* og deretter trykke på pilen til høyre. Da kommer man til Androids Bluetooth-innstillinger.

1. Still Bluetooth-enheten i «paringsmodus» (se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten). Oppdagede enheter vises i en liste.
2. Trykk på navnet til den enheten du vil koble til, så kobles enheten til Handi.

Vær oppmerksom på at Bluetooth øker enhetens strømforbruk.

9.3 Volum

Når man trykker på pilen til høyre for Volum vises skjermbildet «Voluminnstillinger». Her kan man stille inn alle volum individuelt:

- Medievolum (for eksempel Talestøtte)
- Alarmvolum

Man velger volumnivå gjennom å trykke på volumskyveknappen.

Ved å trykke på Play-knappen  får man høre det innstilte volumet.


Den nye innstillingen blir lagret når man trykker OK.




9.3.1 Tid for tilbakestilling

Hvis man huker av for Volum i skjermbildet Hurtiginnstillinger er lyden avstengt, noe som også vises i statusfeltet. Knappen Tilbakestill kl. vises.

Når man trykker på knappe *Tilbakestill kl.* kan man angi på hvilket tidspunkt volumet skal settes på igjen.

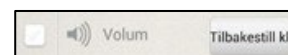

Hvis man angir et klokkeslett som er før gjeldende tid, kommer volumet til å settes på ved dette tidspunktet neste døgn. (For eksempel klokken er nå 20:30 og man setter tiden til 08:00 hvilket blir i morgen). Det angitte klokkeslettet vises på knappen.

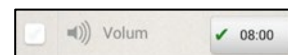

9.4 Lyd ved valg

Hvis man huker av for *Lyd ved valg* vil man få en klikkelyd som bekreftelse på trykk på knapper i og så videre app'ene.

9.5 Roter skjermen

Hvis *Roter skjermen* er valgt og man heller på enheten, vrir bildet seg og vises i den andre retningen. (Dette gjelder ikke alle apper). For eksempel viser Handi-tastaturet da et liggende QWERTY-tastatur.

Det er ofte lettere å lese teksten i «liggende» retning i stedet for «stående». Likevel kan man i enkelte tilfeller ha ønske om å sperre roteringsfunksjonen for eksempel når enheten ligger på et bord kan den rotere i ulike retninger, hvilket kan være forstyrrende.

9.6 Skjermens tidsgrense


Via *Skjermens tidsgrense* kan man stille inn tiden før skjermen slukkes og enheten går i hvilemodus (gjelder bare når enheten går på batteristrøm). Følgende skjerm vises.

Her stiller man inn hvor lenge skjermen skal være tent etter at man har brukt enheten.

Det kan oppleves plagsomt hvis den slukkes for raskt, men på den andre siden drar det mer strøm hvis den er tent for lenge.

Normalt er tiden til hvilemodus 10 minutter, men den kan stilles til 30 sekunder, 1, 2, 10 eller 30 minutter.

Den nye innstillingen blir lagret når man trykker OK.

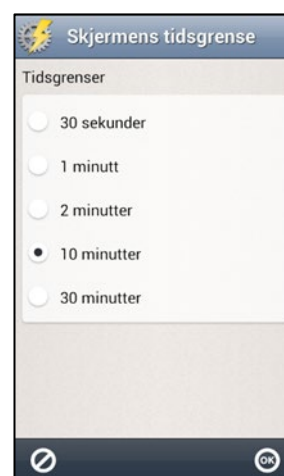

ⓘ MERK: Jo lengre tidsgrense, desto høyere strømforbruk.

9.7 Bakgrunnsbilde

Via *Bakgrunnsbilde* stiller man inn hvilket bakgrunnsbilde som skal brukes for Standardlayout.

Man kan velge mellom de tilgjengelige bildene eller et nytt bilde med kameraet.

Man kan ikke velge bakgrunnsbilde for Handi-layout.

9.8 Batteri

Her vises hvor mye batterikapasitet som gjenstår. Når lader er koblet til, vises dette med et symbol i batteriet.

Grønt betyr at Handi One har god ladning (71–100%), oransje betyr at den snart trenger å bli ladet (21–70%), rødt betyr at den er akutt behov for lading (0–20%).

10. Kamera

Med det innebygde kameraet kan man ta egne bilder.

Bildene lagres på enhetsminnet. Dersom bildene brukes i en aktivitet eller sjekklister, synkroniseres de automatisk med myAbilia.

Når man starter *Kamera* vises søkeskjermen.

Du kan velge mellom automatisk blits/blits alltid/blits aldri ved å trykke på *Blits*-knappen.



Du kan velge front- eller bakkamera ved å trykke på knappen *Bytt mellom kameraer*.



For å ta et kort, trykk på *Kamera*-knappen.



Du kan også ta et kort ved å holde nede *Kamera*-knappen (7) når kameraet er på.



Hvis man er fornøyd med bildet, trykker man på *OK*.

Hvis du ikke er fornøyd, trykk på *Slett*-knappen og tar så et nytt bilde.



Trykk deretter på *Tilbake* knappen.



11. Innstillinger

I dette kapittelet beskrives innstillinger for *Startmenyen*, *System*, *Bildearkiv*, *Hurtiginnstillinger*, *Kalkulator*, *Kamera* og *myAbilia*.



Startmenyen

Tilpass hva som skal være synlig i Startmenyen, for eksempel å lage en ny snarvei.

System

Innstillinger for ulike systeminnstillinger i Handi One, for eksempel talestøtte.

Bildearkiv

Innstillinger for bildearkivet, for eksempel hvordan du oppretter en ny mappe.

Hurtiginnstillinger

Tilpass hva som skal være synlig i Hurtiginnstillinger.

Kamera

Slå av kameraet.

Kalkulator

Tilpasser kalkulatoren.

myAbilia

Kobler til myAbilia, logg inn/logg ut.


Beskrivelse av innstillingsfunksjonsapper som *Kalender*, *Kriseplan* og *Sjekkliste* er beskrevet i den respektive referansehandbok, se 6.1 *Last ned manualer for Handi One*.

11.1 Innstillingsmodus

Man kan komme til Innstillingsmodus på to måter:

- Ikon i startmenyen
- Knappekombinasjonen

10.1.1 Ikon i Startmenyen

I grunninnstillingen finnes det et ikon for Handi Innstillinger i Startmenyen: . Ved å trykke på det kommer man til Innstillingsmodus.

Hvis brukeren ikke skal ha tilgang til Innstillinger er det hensiktsmessig å fjerne ikonet. Dette gjøres ved å fjerne haken på ikonet i **Handi Innstillinger | Startmenyen | Ordne apper**.


ⓘ MERK: Hvis Innstillinger-ikonet fjernes fra Start-menyen, kan innstillingsmodusen bare nås via knappekombinasjonen.

11.1.2 Knappekombinasjonen

Hvis du velger å skjule Innstillinger-ikonet i Startmenyen, får du tilgang til innstillingene ved hjelp av en knappekombinasjon.

For knappekombinasjonen brukes volumtastene + (øk, 9) og - (reduser, 10) volumet.

Trykk som følger: **10 - 9 - 10 - 10 - 9**

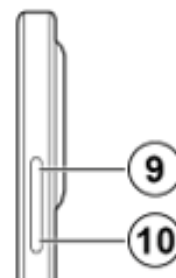

11.2 Startmenyen

For å tilpasse Startmenyen skal man gå til **Handi Innstillinger | Startmenyen**. En meny vises hvor man kan gjøre følgende tilpasninger:

- Ordne appar
- Velg startmeny
- Velg bakgrunnsbilde

11.2.1 Ordne appar

Via **Handi Innstillinger | Startmenyen | Ordne appar** velger man hvilke ikoner som skal vises og i hvilken rekkefølge de skal vises.

På skjermbildet vises ikonene og en øvre knapperad med redigeringsfunksjonene *Ny*, *Favoritt* (bare Standard-layout) og *Flytte*. (Hvis ingen ikoner er markert vises bare knappen *Ny*).

Ordne appar med Handi-layout valgt:



Ordne appar med Standardtema valgt:

Handi Rutenett

Handi Rader

Første siden

Øvrige sider

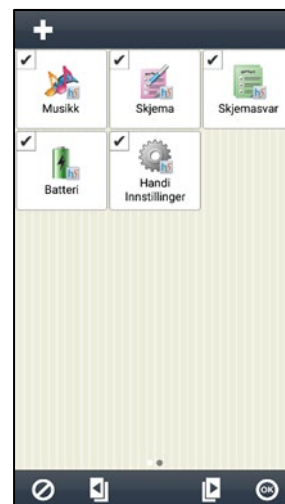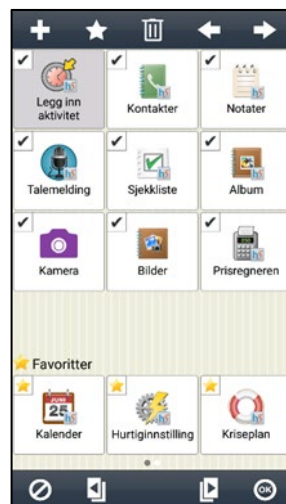

11.2.1.1 Ny snarvei/app

+ Via knappen *Ny* kan man legge inn snarveier til visse funksjoner i Handi-apper i Startmenyen. Man kan laste en snarvei til *Handi Innstillinger* og *Oppdater Handi*.



For å legge inn en ny snarvei til en Handi-app må man velge funksjon i det første vinduet, for eksempel «Kalender».

I «Velg snarvei» vises en liste over funksjonens tilgjengelige snarveier.


Når man trykker på *OK* legges snarveien inn etter de avkryssede ikonene.

Snarveier som allerede finnes i Startmenyen vises ikke i listen.

11.2.1.2 Velge/velge bort app

Alle installerte apper finnes i **Handi Innstillinger | Startmenyen | Ordne apper**, men ikke alle er valgt, dvs. synlige på Startmenyen.

Vis app i Startmenyen: Trykk på den lille avkrysningsboksen i ikonet slik at haken blir svart, dvs. haker for funksjonen.

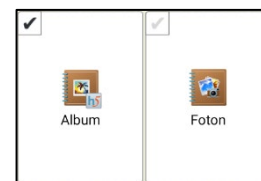

Ikke vis app i Startmenyen: Fjern merket i avmerkingsboksen ved å trykke på den slik at den blir grå.

Innstillingene lagres når du trykker OK.

11.2.1.3 Flytte ikon med Flytte-knapper



1. Velg app-ikonet for å flytte.

2. Trykk på en av pilene *Flytt til venstre/høyre* eller *Flytt opp/ned*.



3. Plasseringen av ikonet endres i Startmenyen basert på den valgte pilknappen.

4. Klikk OK for å lagre innstillingene.

Hvis layouten for startmenyen er Handi Rader vises knappene opp/ned, ellers vises venstre/høyre.

11.2.1.4 Flytte ikon med «drag & drop»

Man kan endre rekkefølgen på ikoner med hjelp av «drag & drop». Man trykker og holder på det ikonet som skal flyttes og drar deretter ikonet til den nye plasseringen og slipper. Man kan flytte ikonet til en annen side ved å dra det til venstre eller høyre.

11.2.1.5 Favoritt (bare Standard-layout)



For å legge til en ny favoritt i favorittlisten nederst, markerer man det ønskede ikonet og trykker på knappen *Favoritt*. Hvis det allerede finnes 3 ikoner i favorittlisten, kommer ikonet lengst til høyre i favorittlisten til å bytte plass med det markerte ikonet.

11.2.1.6 Slett snarvei



For å slette en snarvei fra listen markerer man det og trykker så på *Slett*-knappen. Man må bekrefte at ikonet skal slettes. Ikonet tas så bort fra listen. Innstillingene lagres når man trykker på OK.


11.2.1.7 Oppdatere



Med *Oppdater*-knappen flyttes alle avmerkede ikoner slik at de ligger først og det er dermed mulig å organisere rekkefølgen.

11.2.2 Velg startmeny

Via **Handi Innstillinger | Startmenyen | Velg startmeny** stiller man inn hvilket layout startmenyen i Handi skal ha.

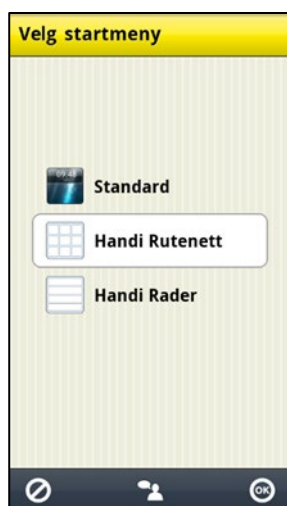

Velg mellom tre forskjellige varianter:

- Standard
- Handi Rutenett
- Handi Rader

De tre variantene beskrives i *8 Startmenyen*.

11.2.3 Velg bakgrunnsbilde

Via **Handi Innstillinger | Startmenyen | Velg bakgrunnsbilde** stiller man inn hvilket bakgrunnsbilde som skal brukes for Standard-layout.

Man kan velge mellom de tilgjengelige bildene eller et nytt bilde med kameraet.


Man kan ikke velge bakgrunnsbilde for Handi-layout.

Bakgrunnsbilde kan også velges via Hurtiginnstillinger, se 9.7 *Bakgrunnsbilde*.




11.3 System

Via **Handi Innstillinger | System** kan man gjøre systeminnstillinger, tilbakestilling, ta backup samt få diverse informasjon om Handi One. Følgende funksjoner vises i menyen:

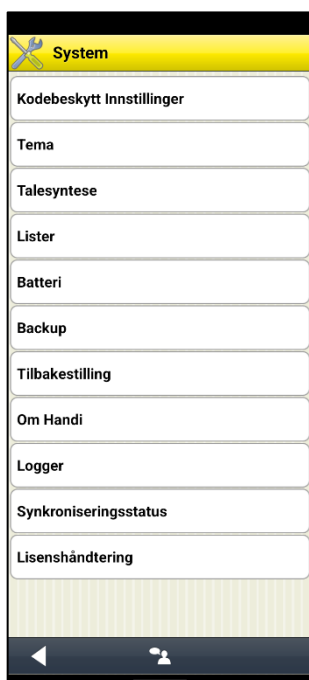

<i>Kodebeskytt Innstillinger</i>	Hvordan kodeskytte tilgang til Innstillinger.
<i>Tema</i>	Hvordan knappraden skal se ut.
<i>Talesyntese</i>	Innstillinger for talestøtte.
<i>Lister</i>	Hvordan bla gjennom Handi One.
<i>Batteri</i>	Indikerer batteristatus i prosent.
<i>Backup</i>	Se 12.1 <i>Backup</i> .
<i>Tilbakestilling</i>	Se 12.2 <i>Tilbakestilling</i> .
<i>Om Handi</i>	Viser informasjon om Handi One.
<i>Logger</i>	Se 12.3 <i>Logger</i> .
<i>Synkroniseringsstatus</i>	Se 12.4 <i>Synkroniseringsstatus</i> .
<i>Lisenshåndtering</i>	Viser aktiv lisens og mulighet for å deaktivere aktiv lisens.

11.3.1 Kodebeskytt Innstillinger

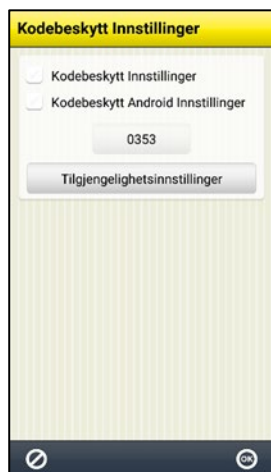


Via **Handi Innstillinger | System | Kodebeskytt Innstillinger** stiller man inn kodebeskyttelse for Innstillinger for Handi og/eller Innstillinger for Android.

Dette innebærer at når man trykker på ikonet *Innstillinger* eller trykker knappekombinasjonen så vises skjermen til høyre og man må angi en oppgitt kode.

Dette for å hindre at brukeren ved en feiltakelse går inn i Innstillinger og gjør endringer.

For å velge kodebeskyttelse huker man av for «Kodebeskytt Innstillinger» og/eller «Kodebeskytt Android Innstillinger».

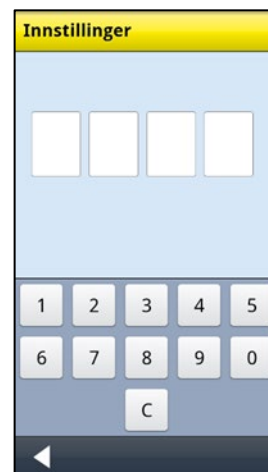

Hvis man vil ha en annen kode enn **0353**, trykker man på knappen med koden og får angi en egen kode.

For å kunne kodebeskytte Androids innstillinger i Handi One må du trykke først på knappen *Tilgjengelighetsinnstillinger* og aktivere tjenesten Handi.

11.3.2 Tema

Via **Handi Innstillinger | System | Tema** bestemmer man hvordan knapperaden skal se ut i alle Handi-apper.



Man kan velge mellom:

- Moderne knapperad
- Klassisk knapperad

Det moderne knapperad er mer diskret.

Klassisk har fargede knapper med tydeligere kontraster og konturer.

Moderne knapperad



Klassisk knapperad



11.3.3 Talesyntese

Gå til **Handi Innstillinger | System | Talesyntese** for å gjøre innstillinger knyttet til talestøtte. En meny vises hvor følgende tilpasninger kan gjøres:

- Talesynteseinnstillinger
- Velg stemme
- Last ned stemme

11.3.3.1 Talesynteseinnstillinger




Via **Handi Innstillinger | System | Talesyntese | Talesynteseinnstillinger** bestemmer man om og hvordan talestøtte skal brukes i tastaturet og i menyer. Når talestøtte er valgt kan man også gjøre følgende innstillinger:

- Talestøtte i menyer
- Talestøtte i overskrifter
- Høytalersymbol (i tekstfeltet)
- Opplesning av ord ved mellomrom
- Talehastighet

MERK: Når «Talesyntese av» er aktivert, gis ingen talestøtte.

Innstillingarna beskrivs nedan.

Talestøtte i menyer

Når *Talestøtte i menyer* er valgt vises knappen  *Talestøtte* i alle menyer og lister, se eksemplene til høyre.

For at *Talestøtte*-knappen skal vises må et ikon/rad være markert. Når man trykker på *Talestøtte*-knappen leses ikonet/raden opp av talesyntesen.

(Talestøtten i Kalendervinduet fungerer annerledes, se *Brukerveiledning Kalender*.)

Talestøtte i overskrifter

Når *Talestøtte i overskrifter* er valgt leses det som står i overskriften opp av talesyntesen, for eksempel navn, dato og tid.

Høytalersymbol (i tekstfeltet)

Når *Høytalersymbol (i tekstfeltet)* er valgt vises *Talestøtte*-knappen ved siden av tekstfeltet. Se bildet til venstre.

Når *Høytalersymbol (i tekstfeltet)* ikke er valgt vises ikke *Talestøtte*-knappen. Se bildet til høyre.

Når man trykker på *Talestøtte*-knappen leses hele teksten opp.

Opplesning av ord ved mellomrom

Når *Opplesning av ord ved mellomrom* er valgt leses ordene opp mens man skriver med tastaturet. Foregående ord leses opp så fort man trykker på mellomrom.

Talehastighet

Man endrer talehastigheten ved å trykke og skyve på talehastighetsjusteringen. Frasen «Test av talehastighet» leses opp slik at man kan høre hastigheten.



11.3.3.2 Velg stemme



Via **Handi Innstillinger | Talesyntese | Velg stemme** velger man hvilken talesyntese-stemme som skal brukes.

Man kan velge mellom stemmene Olav (mannlig) og Kari (kvinnelig). Når man trykker på **OK** installeres stemmen.

11.3.3.3 Last ned stemme

Via **Handi Innstillinger | Talesyntese | Last ned stemme** kan man laste ned eventuelle stemmer som ikke var inkludert i installasjonen.

 **MERK:** Internettforbindelse er nødvendig.


11.3.4 Lister



Via **Handi Innstillinger | Lister** stiller man inn hvordan man skal bla sider i Handi.

Välj mellan:

• Bruk rullelister

Når «Bruk rullelister» er valgt finnes *Vis mer*-symboler  lengst opp/ned for å vise at listen fortsetter i den retningen.

Man plasserer fingeren på skjermen og drar det i den retningen som listen skal rulle.

• Bruk sidesveiping

Når «Bruk sidesveiping» er valgt kan man bla til neste side ved å plassere fingeren på skjermen og dra mot høyre/venstre.

Det går også an å bla med Bla-knappene



11.3.5 Om Handi

I **Handi Innstillinger | System | Om Handi** vises programversjonen og informasjon om enheten.

Via knappen *Søk oppdatering* kan man kontrollere om det finnes en nyere versjon av programvaren.

 **MERK:** Funksjonen krever internettilkobling.

Hvis «Søk oppdatering» gir beskjed om at det finnes nyere versjon tilgjengelig startes automatisk funksjonen «Oppdater Handi», se [12.5 Oppdater Handi One](#).

Hvis det finnes en nyere versjon vises det på ikonet for system i *Innstillinger*.

Hvis man har en snarvei til «Oppdater Handi» på startmenyen vises et symbol. En melding «Det finnes en ny versjon av Handi tilgjengelig» vil vises.



11.4 Bildearkiv

Via **Handi Innstillinger | Bildearkiv** gjør man innstillinger for bildearkivet direkte i Handi.



Et redigeringsvindu for Bildearkivet vises.

For å redigere bildearkivet bruker man redigeringsknappene i den øvre knapperaden: *Ny*, *Endre*, *Slett*, *Flytt mot venstre* og *Flytt mot høyre*. (Hvis ingen ikon er markert vises bare knappen *Ny*.)

Via *Ny*-knappen kan man legge inn nye mapper. Man kan ikke legge inn nye bilder på denne måten, det må gjøres via myAbilia.


Hvis Handi One er knyttet til myAbilia kan man også legge til bilder i bildearkivet som er tatt med mobilkamera.

Hvordan man redigerer bildearkivet beskrives nedenfor.

11.4.1 Legge inn mappe

 For å legge inn en ny mappe trykker man på knappen *Ny*.

1. Velg et bilde for mappen, trykk OK.

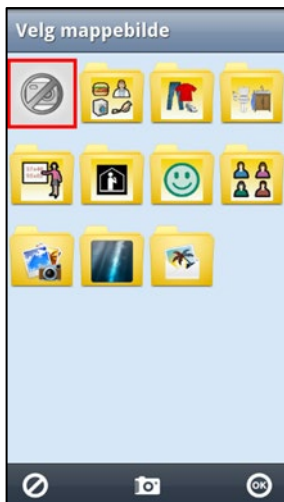

Her kan du også ta ditt eget bilde med kameraet.

2. Gi mappen et navn, trykk OK.




Mappen legges til sist i bildearkivet. (Hvis et ikon velges når du oppretter en ny mappe, settes mappen inn etter det valgte ikonet.) Bildearkivet lagres når du trykker OK.


3. Ny mappe opprettet, trykk OK.




11.4.2 Endre mappe

 For å endre en mappe markerer man den og trykker på knappen *Endre*. Samme guide som i 11.4.1 *Legge inn mappe*.

11.4.3 Bytte navn på bilde

 For å bytte navn på et bilde markerer man den og trykker på knappen *Endre*. Tastaturet vises og man kan endre bildets navn.

11.4.4 Slette mappe/bilde

 For å slette mappe/bilde markerer man den og trykker på knappen *Slett*. Etter at man har bekreftet slettingen, fjernes mappen/bildet.

11.4.5 Flytta mapp/bild



For å flytte mappe/bilde til venstre eller høyre markerer man den og trykker på knappen *Flytt til venstre* eller *Flytt til høyre*. Mappen/bildet flyttes.

Hvis man flytter et bilde/mappe slik at det havner før/etter en kategori får man spørsmålet «Vil du flytte bildet/mappen x til mappen x?»

Hvis man svarer *JA* flyttes bildet til mappen x.

Hvis man svarer *NEI* legges bildet før/etter kategorien i nåværende nivå.



11.5 Hurtiginnstillinger

Via **Handi Innstillinger | Hurtiginnstillinger** velger man hva som skal vises i appen *Hurtiginnstillinger*.

Velg mellom følgende funksjoner:


- Wi-Fi
- Bluetooth
- Volum
- Lyd ved valg
- Roter skjermen
- Skjermens tidsgrense
- Velg bakgrunnsbilde
- Batteri



11.6 Kamera

Via **Handi Innstillinger | Kamera** kan man slå av kameraet i Handi-funksjonene og standardappen Kamera.

Hvordan kameraet fungerer er beskrevet i *10 Kamera*.

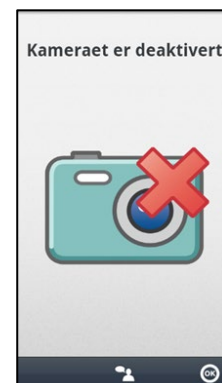

11.7 Kalkulator

Via **Handi Innstillinger | Kalkulator** gjør man innstillinger for Kalkulatoren i Handi.



Man kan gjøre følgende innstillinger:

- Heltall og desimaler (Enkel, Regnskap, Avansert)
- Tastatur

Når «Enkel» er valgt kan man skrive inn maks 5 heltall. Ingen desimaler kan skrives inn eller vises. Summene presenteres ikke med desimaler, de avrundes til nærmeste heltall. Desimal-knappen vises ikke i tastaturet. Når «Regnskap» er valgt kan man skrive inn maks 5 heltall og maks 2 desimaler.

Når «Avansert» er valgt kan man skrive inn maks 10 heltall og maks 5 desimaler.

Man kan velge om tastaturet skal se ut som på en telefon (123) eller som på en vanlig kalkulator (789).

11.8 Koble til myAbilia

Via **Handi Innstillinger | myAbilia** logger man på Handi One til myAbilia.

MERK: Krever internettilkobling.

For å kunne gjøre dette må man først ha en **brukerkonto** i myAbilia. Bruk den medfølgende kontoen, se dokumentet «Start opp Handi», eller opprett en ny direkte på myAbilia.com.

11.8.1 Logg inn

For at Handi skal kunne synkroniseres med *myAbilia* må Handi være pålogget. Det gjøres via **Handi Innstillinger | myAbilia**. Følgende skjerm vises:



Skriv inn brukernavn og passord, og trykk på **Logg inn**.

Når Handi er logget inn vises menyen til høyre. Sjekk at det er huket av for «Synkronisere». Trykk deretter på **OK** for å lukke menyen.

Det kreves internettilkobling for at Handi One skal kunne synkronisere med nettserveren. Synkroniseringen foretas kun ved behov – ved endringer i Handi eller på myAbilia.

Dersom man ikke har internettilkobling, kan man likevel bruke Handi uten problem, synkroniseringen foretas da bare senere.



11.8.1 Utlogging


Handi forblir pålogget til *myAbilia* til man aktivt logger ut. Selv om Handi restarter fortsetter den å være innlogget.

For å logge ut må man gå til **Handi Innstillinger | myAbilia** og trykke på knappen **Logg ut**. Meldingen «Du har logget ut» vises og logg inn menyen vises igjen.

MERK: Dataene dine forblir på enheten når du logger ut av myAbilia og vil bli synkronisert igjen hvis du logger på en annen eller samme myAbilia-konto. Hvis enheten skal bytte bruker, bør en tilbakestilling av fabrikk gjøres, se 12.6 Omstart - Tilbakestill til fabrikkinnstillinger.

12. Vedlikehold

12.1 Backup

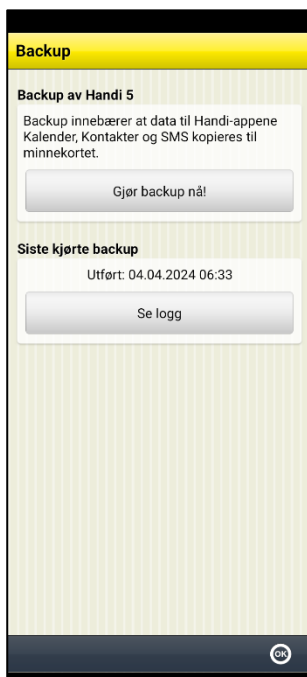

Du kan lage en manuell sikkerhetskopi ved å trykke på knappen **Gjør backup nå!** i **Handi-innstillinger | System | Backup**.

Backup betyr at innstillinger og data for Handi-appene Kalender og Kontakter kopieres til minnet.

Data for andre Handi-apper er allerede lagret i minnet.

Systeminnstillinger som volum og bakgrunn kopieres ikke.

I forbindelse med backup gjøres det en skanning av kalenderdatabasen for å fjerne aktiviteter som er satt til «Slett etterpå».

Via *Se logg*-knappen kan du se informasjon om siste sikkerhetskopiering, og om den var vellykket, se **11.3 Logger**.

Automatisk backup skjer hver natt, klokken 03:15.

ⓘ MERK: Hvis du bruker Handi One sammen med myAbilia, fungerer myAbilia som backup for kalendere, sjekklister og notater.

12.2 Tilbakestilling



Via **Handi Innstillinger | System | Tilbakestilling** kan man gjøre tilbakestilling fra følgende:

- Fra backup
- Til grunninnstilling

De ulike tilbakestillingene beskrives i fremtidige kapitler.

ⓘ MERK: Funksjonen **Slett Handi data** brukes kun i forbindelse med en fullstendig omstart av Handi One, se **12.6 Omstart - Tilbakestill til fabrikkinnstillinger**.



12.2.1 Tilbakestilling fra backup

Total tilbakestilling innebærer at alle databaser og innstillinger fra siste backup legges inn.

Trykk på knappen *Tilbakestill nå!* for å starte tilbakestilling.

Hvis man trykker på knappen *Tilpasset tilbakestilling* kan man velge hva som skal tilbakestilles fra backup, Kalender eller Kontakter, se det høyre bildet.

i **MERK:** Tilbakestilling fra backup skal kun gjøres hvis det har oppstått problemer med noen av databasene.



12.2.2 Tilbakestilling til grunninnstilling

Tilbakestilling til grunninnstilling innebærer at Handi får tilbake de innstillingene som den hadde fra begynnelsen, Inkludert hvilke apper som skal vises.

Ingen databaser, dvs. bilder, kontakter, meldinger og så videre tas bort.

Man kan velge mellom *Nivå 1-2 (Handi-layout)* og *Nivå 3 (Standard-layout)*.

Grunninnstillingene er definerte i *15 Grunninnstilling*.

i **MERK:** Gjenoppretting til grunninnstillingen brukes ideelt for å gå tilbake til en starttilstand når du har prøvd litt og tilbaka.



12.3 Logger



Via **Handi Innstillinger | System | Logger** kan man håndtere loggfiler i Handi.

Loggfiler opprettes i bakgrunnen av Handi og brukes først og fremst ved feilsøking.


Loggfilene lagres automatisk til enhetens interne minne, der ligger de utilgjengelig.

Velger man *Last opp til server* så lastes loggfilene opp til Abilias supportserver via Wi-Fi.

Trykk på knappen *Last opp* for å starte.

i **MERK:** Krever internettilforbindelse.

12.4 Synkroniseringsstatus

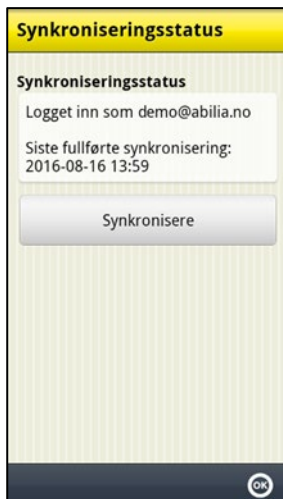

Via **Handi Innstillinger | System | Synkroniseringsstatus** kan man se informasjon om hva som er synkronisert med myAbilia.

Informasjon om synkroniseringsstatus brukes ved feilsøking.

Via knappen *Synkronisere* kan man påtvinge synkronisering mellom Handi og myAbilia.

ⓘ MERK: Krever internettilforbindelse.

12.5 Oppdater Handi One

Programvaren i Handi One oppdateres via **Handi Innstillinger | System | Om Handi** eller via en snarvei i Startmenyen. Hvordan man legger inn snarveier er beskrevet i *11.2 Startmenyen*.

ⓘ MERK: Krever internettilforbindelse.

For å oppdatere, gjør følgende:

1. Gå til **Handi Innstillinger | System | Om Handi**.
2. Trykk på knappen *Søk oppdatering*.
3. Vent på meldingen om at det finnes en nyere versjon av programvaren.
4. Trykk på *Last ned*.
5. Trykk på *Installer* når oppdateringen er nedlastet.
6. Trykk på *OK* når meldingen «Bytt ut app» vises.
7. Trykk på *Installer* på skjermbildet «Ønsker du å installere denne applikasjonen?».
8. Når det står «Ferdig», sveip opp for å gå tilbake til Startmenyen.

12.6 Omstart - Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Fabrikkinnstilling betyr en fullstendig tilbakestilling av Handi One hvor alle brukerdata fjernes og enheten gjenopprettes til slik den var da den kom fra fabrikken. En tilbakestilling av fabrikken blir aktuelt dersom Handi skal overleveres til en ny bruker og enheten først må rengjøres fullstendig. Instruksjoner for total tilbakestilling finnes i et eget dokument *Rekondisjoneringsinstrukser* som kan lastes ned fra www.abilia.no.

ⓘ MERK: For å kunne utføre en total omstart kreves tilgjengelig Wi-Fi for å kunne koble Handi One til internettil og verdibevis med en lisensnøkkel.

12.7 Rengjøring

Før rengjøring, slå av Handi One og koble fra alle kabler.

Rengjør med en myk klut fuktet med vann og et mildt rengjøringsmiddel. Hvis desinfeksjon er nødvendig, bruk en myk klut lett fuktet med et alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

▲ ADVARSEL: Bruk ikke flytende eller aerosolbaserte rengjøringsmidler som kan inneholde antennelige stoffer.

13. Oppbevaring og kassering

13.1 Oppbevaring

Oppbevar produktet innendørs i romtemperatur. Må ikke oppbevares i fuktige omgivelser.

Om du skal lagre Handi One lengre enn 1 måned, bør den lades helt opp og slås av på riktig måte. Da kan du forhindre at enhetens batteri utsettes for dypere utladning.

13.2 Gjenvinning av elektronisk avfall



Produktet inneholder elektronikk som skal gjenvinnes etter at produktet er tatt ut av bruk.

Kast produktet blant elektronisk avfall på en egnet gjenvinningsstasjon.



14. Produktspesifikasjoner

14.1 Medfølgende artikler

Art.nr	Benevning	Beskrivelse	Antall
706540	Handi One	Med Androidbasert maskinvare	1 stk
706493	USB-C ladekabel	For batterilading, USB-C til USB-C	1 stk
	Strømadapter	Vegglader med USB-C inngang	1 stk
706542	Beskyttelsesdeksel	Beskytter enheten	1 stk
706356	Hodetelefoner	Kabel tilkoblet for 3,5 mm hodetelefonkontakt	1 stk
N/A	Verdibevis	Inkludert lisensnøkkel	1 stk
N/A	Brukerveiledninger	Brukerveiledning Handi One G3 (dette dokument) Start opp Handi Kalender - Funksjonsbeskrivelse Tilpasningsguide Handi5	4 stk

For tilbehør, se www.abilia.no.

14.2 Tekniske data




Enhetsnavn/modell	Nokia G22 / TA-1528
Produktnummer	706540 med 3 års lisens inkludert
Operativsystem	Android 12
Mål (H × B × D)	165 x 76 x 8 mm
Vekt	0,196 kg (unntatt skjermbeskytter og beskyttelsesdeksel)
Skjerm	Størrelse: 6,5 tomme Oppløsning: 720x1600 IP-klasse: IP52
Kamera	Bakside: 50 MP Forside: 8 MP
Batteri	5050 mAh, Li-ion polymer 3,85 V
Batteritid	Opptil tre dagers bruk
Nettverk	802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5.0GHz, BT 5, 3G/4G
Porter	USB-C, uttak for høretelefoner 3,5 mm, Nano SIM/Micro SD
Driftstemperatur	0 °C till 40 °C
Anslått levetid	3 år

15. Viktig informasjon


Les og forstå innholdet i denne håndboken før du bruker produktet.

15.1 Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler og merknader brukes til å peke på spesielt viktige deler av manualen.

-  **ADVARSEL:** Brukes hvis det er fare for personskade eller død hvis instruksjonene ikke følges.
-  **FORSIKTIG:** Brukes hvis det er fare for skade på produktet hvis instruksjonene ikke følges.
-  **MERK:** Brukes til å gi mer informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

15.2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruk

-  **ADVARSEL:** Les advarselsinstruksjonene som følger før du bruker produktet.
 - Ikke bruk produktet som eneste støtte for medisiner, medisinsk behandling eller andre viktige aktiviteter.
 - Bruk bare den medfølgende laderen til å lade produktbatteriet.
 - Bruk kun CE-merket eksternt tilbehør.
 - Bruk ikke flytende eller aerosolbaserte rengjøringsmidler som kan inneholde antennerlige stoffer.

15.3 Alvorlige hendelser

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse relatert til produktet, må dette rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i ditt land.

En hendelse anses som alvorlig hvis den direkte eller indirekte ledet, kan ha ledet eller kan føre til noen av disse situasjonene:

- Død til bruker eller annen person.
- I tilfelle midlertidig eller permanent alvorlig forverring av brukerens eller andre personers helse.
- En alvorlig trussel mot folkehelsen.

15.4 Produktansvar

Produktet er utviklet og risikovurdert i samsvar med ISO 14971. Bruksanvisningen og de tekniske spesifikasjonene er utformet i samsvar med sikkerhetsvurderingen i risikoanalysen.

Vær alltid sikker på når du bruker produktet. Abilia AB tar ikke ansvar for konsekvenser etter feil bruk eller installasjon av produktet.

Enhver form for manipulering eller manipuleringsavvik av produktet ugyldiggjør garantien og fraskriver seg produsentens ansvar.

Anslått levetid for produktet gjelder når det brukes i samsvar med den tiltenkte bruks- og vedlikeholdsinstruksjonen.

16. Grunninnstilling

Når Handi startes for første gang og når en omstart gjøres, tilbakestilles Handi i henhold til en grunninnstilling. Hva grunninnstillingen betyr er beskrevet nedenfor. (Nivå 1, 2 og 3 indikerer et behovsnivå basert på antall innstillinger som skal gjøres.)

				Nivå		
				1	2	3
Startmenyen	Legg inn aktivitet			X	X	X
	Kalender			X	X	X
	Kontakter				X	X
	Ur (snarvei)			X	X	X
	Notater			X	X	X
	Kamera				X	X
	Bilder (snarvei)				X	X
	Talemelding			X	X	X
	Sjekkliste			X	X	X
	Hurtiginnstillinger			X	X	X
	Kriseplan				X	X
	Album				X	X
	Prisregneren			X	X	X
	Kalkulator				X	X
	Batteri			X	X	X
	Handi Innstillinger			X	X	X
		Startmeny	Standard			X
			Handi Rutenett	X	X	
			Handi Rader			
		Bakgrunnsbilde				Standard
System	Tema	Knapperad	Moderne		X	X
			Klassisk	X		
	Talesyntese	På/Av		På	På	På
			Talestøtte i menyer	X	X	
			Talestøtte i overskrifter	X	X	
			Høytalersymbol (i tekstfeltet)	X	X	X
			Opplesing av ord ved mellomrom			
			Talehastighet	55%	55%	55%
	Listor	Använd rullistor				X
		Använd sidsvepning				X
Kalenderen	Kalendervindu	Visning	Liste		X	X
			Tidssølje	X		
		Bla bakover samme dag			X	X
		Bla dager fremover	Ikke tillatt			
			Max 6 dager			
			Ubegrenset	X	X	X
		Bla dager bakover		X	X	X
		Vis digital tid for aktiviteten		X	X	X
		Vis tekst for aktiviteten		X	X	X
		Vis klokkevinduet ved trykk på klokken		X		
	Aktivitetsvindu	Vis/Skjul i knapperaden	Slett-knapp		X	X
			Endre-knapp		X	X

Grunninnstilling

			Velg alarm-knapp	X	X	X
		Vis/Skjul kvarterurvisning	Kvarterurvisning	X	X	X
			Siste kvarteret som fem punkter		X	X
			Digital nedtelling		X	X
	Legge inn aktivitet	Tillat passert starttid			X	X
		Forvalgt alarm	Alarm+Vibrasjon	X	X	X
			Alarm			
			Vibrasjon			
			Stille alarm			
			Ingen alarm			
		Forhåndsvalgte påminnelser	Ingen	X	X	X
		Legg inn aktivitet via Endrevinduet	Valgt		X	X
			Velg type aktivitet		X	X
			Standardaktivitet-knapp		X	X
		Legg inn aktivitet via sekvens	Valgt	X		
			Velg dato	X	X	X
			Velg type aktivitet		X	X
			Velg standardaktivitet	X	X	X
			Velg bilde	X	X	X
			Gi aktiviteten navn	X	X	X
			Info-meny	X	X	X
			Slett etterpå		X	X
			Angi kvitterbarhet og alarm	X	X	X
			Velg kategori	X	X	X
			Velg påminnelse	X	X	X
			Angi varighet			
			Angi sluttid			
	Endrevindu		Dato	X	X	X
			Navn	X	X	X
			Starttid	X	X	X
			Sluttid	X	X	X
			Varighet			
			Hele dagen	X	X	X
			Kvittering	X	X	X
			Velg alarm	X	X	X
			Bilde	X	X	X
			Info-menyen	X	X	X
			Påminnelse	X	X	X
			Slett etterpå	X	X	X
			Kategori	X	X	X
	Info-menyen	Notater		X	X	X
		Talemelding		X	X	X
		Sjekkliste		X	X	X
		Kontakter			X	X
		Bilde		X	X	X
		Timer		X	X	X
		Hurtiginnstillinger				
		Album				
		Prisregneren				
	Kalendermenyen		Legg inn aktivitet	X	X	X

			Almanakk	X	X	X
			Ukevisning	X	X	X
			Start timer	X	X	X
			Tidsmåler	X	X	X
			Tidsbok	X	X	
			Klokke	X	X	
			Søk aktivitet		X	X
			Standardaktiviteter			X
			Standardtimere			X
			Alarmlyd			X
	Tidsvisning	Klokke	Analog	X	X	
			Digital			X
		Månedssymbol/Ukenummer	Handisymbol	X	X	
			Piktogram			
			Ukenummer			X
			Ikke			
		Vis ukedagsfarger		X	X	
		Vis helligdager		X	X	X
	Tidsinntasting	Metode for å angi tid	Digital (med tall)			
			Analog (med klokke)			
			Digital m. analog-knapp	X	X	X
			Analog m. digital-knapp			
		Analog døgninndeling	f.m. og e.m.			
			dag og natt	X	X	X
	Klokken	Vis dato		X	X	X
		Vis tid på døgnet		X	X	X
		Visa knapp for opplesning hvert kvarter				
		Klokke	Analog	X	X	X
			Digital			
			Både analog og digital			
	Almanakk	Vis markering for gjentakende akt.				
	Ukevisning	Antall dager i ukevisning	7 dager	X	X	X
			5 dager			
		Visning av aktivitet	Alltid tid			
			Bilde	X	X	X
		Vis gjentakende aktiviteter		X	X	X
		Vis knapp for timevisning		X	X	X
		Vis Ny aktivitet-knapp		X	X	X
	Start timer	Velg standardtimer		X	X	X
		Velg bilde		X	X	X
		Gi timeren navn		X	X	X
		Timertid	1–99 minutter	X	X	X
			1–999 minutter			
			Timer og minutter			
	Tidsmåler	Sekundviser		X	X	X
		Vis Pause-knapp		X	X	X
	Tidsbok	Ny tidsmåling		X	X	X
		Vis i standardaktiviteter				
		Vis i standardtimere				
	Standardaktiviteter	Stå opp		X	X	X
		Gå på toalettet		X	X	X
		Dusje		X	X	X

Grunninnstilling

		Kaffe		X	X	X
		Mat		X	X	X
		Handle		X	X	X
		Lade Handi		X	X	X
	Standardtimere	Pusse tenner	3 minutter	X	X	X
		PC-tid	30 minutter	X	X	X
		Vaskemaskinen ferdig	60 minutter	X	X	X
		5 minutter (blå punkt)	5 minutter			
		10 minutter (rød punkt)	10 minutter			
		15 minutter (gul punkt)	15 minutter			
		20 minutter (grønn punkt)	20 minutter			
	Alarmlyd	Aktiviteter uten kvitterbarhet	Alarm Classic	X	X	X
		Aktiviteter med kvitterbarhet	Osmium	X	X	X
		Timere	Alarm Beep 2	X	X	X
		Påminnelser	Fomalhaut	X	X	X
		Vibrasjon ved påminnelse		X	X	X
		Alarmtid		30sek	30sek	30sek
	Alarmvinduet	Vis snooze-knapp		X	X	X
	Reisemodus	Aktiver reisemodus				
	Kategorier	Blå		X	X	X
		Lilla		X	X	X
		Rød		X	X	X
		Orange		X	X	X
		Grønn		X	X	X
		Turkis		X	X	X
Kontakter	Kontaktliste	Listetype	Handi Rader	X	X	X
			Handi Rutenett 4x3			
			Handi Rutenett 3x2			
		Vis konto	Handi	X	X	X
		Sortering	Mapper og egen sortering			
			Mapper og alfabetisk sortering	X	X	X
			Kun alfabetisk			
	Vis i Kontaktvinduet	Adresse		X	X	X
		Bilde		X	X	X
		Telefonnummer		X	X	X
		Mobilnummer		X	X	X
		E-postadresse		X	X	X
		Info		X	X	X
		Slett		X	X	X
		Endre		X	X	X
	Kontaktmenyen	Ny kontakt		X	X	X
		Søk kontakt		X	X	X
		Sorter kontakter				
		Velg konto				
		Kopier kontakter				
Hurtiginnstillinger	Wi-Fi			X	X	X
	Bluetooth			X	X	X
	Volum			X	X	X
	Lyd ved valg			X	X	X
	Roter skjermen			X	X	X

	Skjermens tidsgrense			X	X	X
	Velg Bakgrunnsbilde			X	X	X
	Batteri			X	X	X
Album	Albumliste	Vise i listen	Bilder	X	X	X
			Videoklipp	X	X	X
			Mottatt	X	X	X
		Vise i menyen	Nytt album	X	X	X
			Ordne album			
	Bildemenyen	Slett		X	X	X
		Oversikt		X	X	X
		Endre navn		X	X	X
		Endre album		X	X	X
		Dele				X
Sjekkliste	Oppgavevinduet	Innlegging	Hurtig			
			Tilpasset	X	X	X
		Endre-knapp		X	X	X
		Slett-knapp		X	X	X
		Talesyntese	Oppgave ferdig/ ikke ferdig	X	X	X
			Kun oppgave			
	Sjekklistemenyen	Ny sjekkliste		X	X	X
		Ordne sjekklister				
	Listeinnstillinger	Listetype	Rader	X	X	X
			Handi Rutenett			
		Sortering	Mapper og egen sortering			
			Egen sortering	X	X	X
			Alfabetisk sortering			
Talemelding		Velg bilde				
		Gi lyden navn				X
		Navneforslag	Talemelding	X	X	X
		Max lydlengde	30 sekunder			
			5 minutter	X	X	
			30 minutter			
			90 minutter			X
		Lytt direkte i listen				X
Kalkulator		Heltall og desimaler	Enkel		X	X
			Regneskap			
			Avansert			
		Tastatur	Telefon (123)		X	X
			Kalkulator (789)			
Prisregneren		Kvitteringsliste ved inntasting		X	X	X
		Antall-knapp		X	X	X
		Foreslå nærmeste valør		X	X	X
Kamera		Deaktiver kameraet i Handi				

CE

