

# KUKINI™

Joggevogn for barn med spesielle behov



[www.akces-med.com](http://www.akces-med.com)

Brukerhåndbok



**⚠ OBS!**

Produsenten påtar seg ansvaret for produktet ved riktig bruk i henhold til brukerveiledning, og kun ved kjøp fra autorisert forhandler.


**Akces-MED Ltd.** forbeholder seg retten til å innføre tekniske og handelsmessige endringer i innholdet i bruksanvisningen uten forvarsel.



Produktet som er merket med CE-merket, er medisinsk utstyr i klasse I, regel 1, i samsvar med kravene i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr.



Akces-MED. Ltd. har innført kvalitetsstyringssystemet ISO 13485 for produksjon, salg og service. Systemet er sertifisert av SGS.

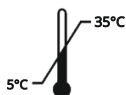

# Innhold

---

Innledning.....	4
1. Formålet med brukerhåndboken.....	5
2. Indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk.....	5
3. Joggevognen generelle egenskaper.....	7
4. Størrelsestabell.....	8
5. Hvordan bruke joggevognen.....	9
5.1 Hvordan brette ut joggevognen.....	9
5.2 Sammenlegging av vognen.....	10
5.3 Fotstøtte.....	11
5.4 Fjerne hjulene.....	12
5.5 5-punkts sikkerhetssele.....	13
5.6 Justerbar ryggstøtte.....	16
5.7 Justering av skyvehåndtaket.....	16
5.8 Sentralbrems / håndbrems.....	17
5.9 Justering av fjærene.....	19
5.10 Toppesikring.....	20
5.11 Sammenleggbare kalesje.....	22
5.12 Regntrekk.....	22
5.13 Oppbevaringskurv under setet.....	23
6. Bruk av joggevognen.....	24
6.1 Klargjøring før bruk.....	24
6.2 Klargjøring av vognen.....	25
7. Sikkerhetsregler.....	26
8. Garantibetingelser.....	28
9. Vedlikehold og rengjøring.....	28
10. Merking.....	32



# Innledning

---

KUKINI™ er utstyrt med et støtdempingssystem bak og 16-tommers oppblåsbare eikehjul, noe som gjør kjøring i ujevnt terreng til en fornøyelse for både barn og omsorgsperson.

Barnets sikkerhet og korrekte sittestilling garanteres av et 5-punkts sikkerhetsbelte med magnetisk feste. Den anatomiske Octagon™-hodestøtten, som kan monteres i ulike høyder, gir komfortabel hodestøtte. Med det justerbare ryggstøtten kan du stille inn den optimale posisjonen for barnet ditt under kjøreturen. Hurtigutløsesystemet for hjulene og den kompakte størrelsen på den sammenfoldede vognen gjør den enkel å oppbevare og transportere. Den slitesterke og komfortable kledningen har en praktisk lomme til telefon, lommebok eller nøkler.

For å beskytte barnet mot ulike værforhold er KUKINI™ utstyrt med en justerbar, sammenleggbar kalesje som gir ekstra beskyttelse mot vind, regn og sol.

Husk å lese denne bruksanvisningen nøye. Her finner du ikke bare nyttig informasjon, men også retningslinjer for sikker og effektiv bruk av produktet.

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål eller kommentarer:

**Medisinsk rådgiver:** mobil +48 516 183 883

**Akces-MED Ltd.:** tel. +48 17 864 04 77

**e-post:** [export@akces-med.com](mailto:export@akces-med.com)

## OBS!

Før produktet tas i bruk må bruker gjøre seg kjent med brukerveiledningen.

Husk at det er viktig å følge alle instruksjoner i brukerveiledningen. Dette sikrer både brukeren og produktet og forlenger levetiden på produktet.

# 1. Formålet med brukerhåndboken

---

## OBS!

Bruksanvisningen inneholder grunnleggende informasjon som er nødvendig for å klargjøre vognen før bruk, bruke vognen, vedlikeholde og rengjøre den.

Denne bruksanvisningen bør oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Bruksanvisningen er beregnet på personer som tar seg av funksjonshemmede brukere, samt leger og fysioterapeuter som håndterer vognen.

Før joggevognen tas i bruk for første gang, må brukeren (eller omsorgspersonen) gjøre seg kjent med bruksanvisningen.

## 2. Indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk

---

Dette medisinske hjelpemiddelet er beregnet på personer med ortopediske, nevrologiske og kardiologiske sykdommer og på personer etter operasjoner, med dysfunksjoner i muskel- og skjelettapparatet, som ikke har oppnådd evnen til å sitte selvstendig eller som har problemer med å innta og opprettholde sittestillingen.

Både for slappe personer med redusert muskeltonus og for personer med spastisitet. Hjelpemiddelet kan også være svært nyttig for personer som trenger langvarig avlastning av en eller begge underekstremiteter. Det er et uerstattelig hjelpemiddel i rehabiliteringsprosessen, både når det gjelder bevegelse og sosial integrering. Hjelpemiddelet er til stor hjelp under hverdagsaktiviteter som rehabilitering, men også når man leker, studerer eller spiser. Valg av riktig størrelse på hjelpemiddelet avhenger av medisinske indikasjoner og anatomiske parametere, uavhengig av brukerens alder.

### **Enheten anbefales for personer i følgende tilfeller:**

- Cerebral parese - ulike typer og former;
- Hjerne- og ryggmargsskader med lammelser og svakhet i underekstremitetene, balanse- og motoriske koordinasjonsforstyrrelser med ulik etiologi;
- Demyeliniserende sykdom (f.eks. multipel sklerose - SM);
- Meningoceles;
- Muskelsykdommer med svakhet og lammelser (dystrofi, myasthenia gravis, myositt);
- Genetiske lidelser;
- Degenerasjon og nevrologiske sykdommer;
- Andre tilstander knyttet til muskelsvakhet, lammelser og muskel- og skjelettlidelser;
- Etter hode- og ryggmargsskader og ryggradstraumer med lammelser og pareser.

## 2. Indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk

---

### **Kontraindikasjoner:**

- Kritisk tilstand hos brukeren;
- Lammelse;
- Dyp sedasjon;
- Ustabile brudd med spesifikke ortopediske anbefalinger, inkludert ryggbrudd;
- Ubehandlet dyp venetrombose;
- Hemodynamisk ustabilitet;
- Identifiserte hjernedysfunksjon når man sitter oppreist;
- Alvorlig leddgikt i nakkesøylen;
- Lungeemboli;
- Nylig hjerteinfarkt i løpet av de siste 24 timene;
- Ferske postoperative sår eller ikke-helende sår i ryggområdet, bekkenområdet, hofteldd og lår;
- Brukere med psykiske lidelser bør ikke etterlates i enheten uten tilsyn av en omsorgsperson.

### 3. Joggevognen generelle egenskaper




#### I TILLEGG:

- SAMMENLEGGBAR ALUMINIUMSRAMME UTSTYRT MED SKIVEBREMS PÅ FORHJULET OG SENTRALBREMS PÅ BAKHJULET
- SPESIELL LÅSING AV VOGNEN MOT UTILSIKTET UTFOLDELSE MED MAGNETISK FESTEANORDNING
- ERGONOMISK SKYVEHÅNDTAK MED SIKKERHETSBELTE
- REGNTREKK
- ANTI-TIPP-FOT



## 4. Størrelsestabell

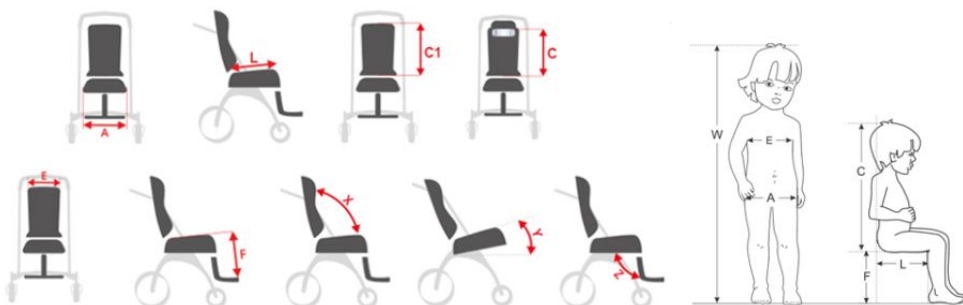

Symbol	Måling	Enhet	Størrelse 1	Størrelse 2
W	veiledende brukerhøyde *	[cm]	100 - 135	130 - 165
A	setebredde	[cm]	37	43
L	setedybde	[cm]	37	41
C	nakkestøtتهøyde	[cm]	47 - 60	60 - 78
C <sub>1</sub>	høyde på ryggstøtten	[cm]	60	78
E	bredde på ryggstøtten	[cm]	36	42
F	lengde på fotstøtte	[cm]	27, 40	35, 45
	høyde på skyvehåndtak	[cm]	90 - 120	87 - 135
X	vippevinkel på ryggstøtten	[°]	95 - 130	95 - 130
Y	setevinkling	[°]	20	20
Z	vippevinkel for fotstøtte	[°]	125	125
	maksimal brukervekt	[kg]	40	65

Vekt og dimensjoner	Enhet	Størrelse 1	Størrelse 2
bredde	[cm]	67	74
bredde etter folding **	[cm]	54	60
lengde (min - maks)	[cm]	124 - 143	141 - 169
lengde etter folding **	[cm]	97	103
høyde	[cm]	105	107
høyde etter folding **	[cm]	38	38
vekt	[kg]	14	16,5

**Merk:** Toleranseområdet for målingen er +/- 1 cm / 1/2 in.

\* Dette målet kan ikke være den viktigste parameteren ved valg av produktstørrelse.

\*\* Sammenfoldede mål gjelder for en barnevogn med avmonterte hjul og avmontert fotstøtte.



## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.1 Hvordan brette ut joggevognen



#### OBS!

Hold brukeren borte fra de bevegelige delene av vognen når den foldes ut. Det er alvorlig fare for personskade.

Det skal ikke være noen polstring mellom de bevegelige delene av vognen. Før du bruker vognen, må du kontrollere at alle delene er ordentlig låst og at polstringen er riktig montert. Det er mulig å løse festespenningene når vognen foldes sammen. Når vognen ikke er sammenfoldet, må alle festeanordninger absolutt være festet.

## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.2 Sammenlegging av vognen



#### OBS!

Vær spesielt oppmerksom på sammenleggbare deler av joggevognens ramme, som utgjør en skaderisiko.

Det skal ikke være polstring mellom de bevegelige delene av vognen.

Det anbefales å fjerne fotstøtten før vognen klappes sammen.




## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.3 Fotstøtte

#### **i** INFORMASJON!

For å endre høyden på fotstøtten trykker du på spakene på begge sider av fotstøtten. Det er mulig å stille inn høyden på fotstøtten i tre nivåer.

Husk å sikre fotstøtetrekket ved å feste beltet bak fotstøttekonstruksjonen.

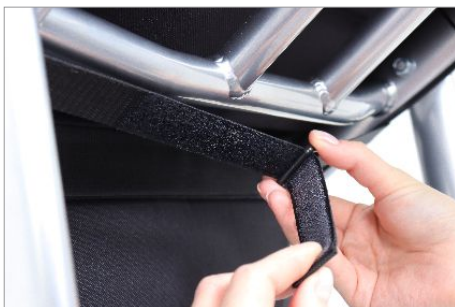

## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.3 Fotstøtte



### 5.4 Fjerne hjulene

#### FRONTHJUL



#### BAKHJUL



## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.5 5-punkts sikkerhetssele

#### **i** INFORMASJON!

Beltene kan monteres i ønsket høyde på vognens ryggstøtte - husk å montere begge de øvre stroppene på de 5-pinneres sikkerhetsbeltene i samme høyde.


Hver gang du bruker vognen, må du feste 5-punkts sikkerhetsbeltene og kontrollere at de er riktig festet.



#### **i** INFORMASJON!


De øvre stroppene festes bak ryggstøtten på vognen.

Når du har åpnet ryggglommen, fester du de øvre stroppene med mutterne.

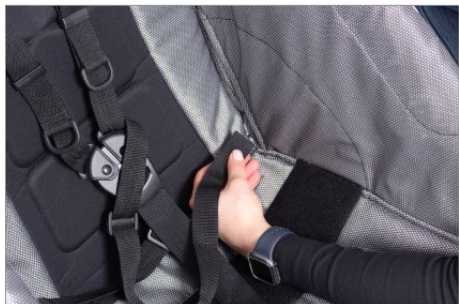



## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.5 5-punkts sikkerhetseler

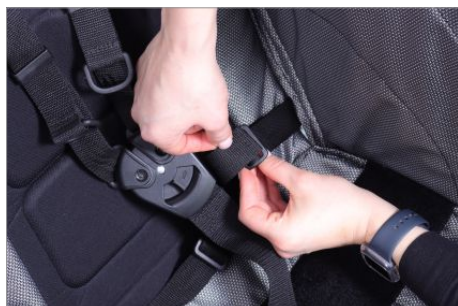

## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.5 5-punkts sikkerhetseler

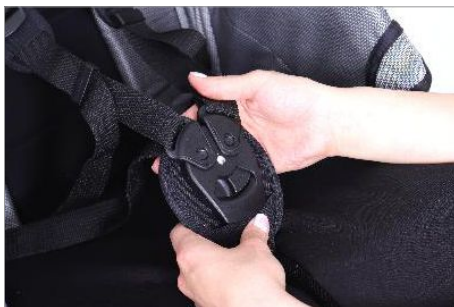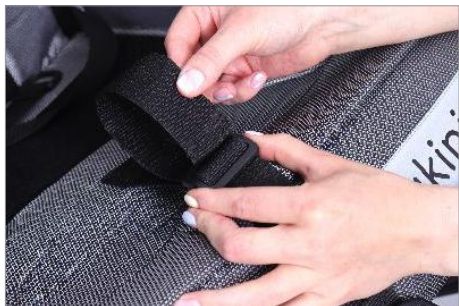


LÅST OPP 5-PUNKTS SIKKERHETSBELTER



## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.6 Justerbar ryggstøtte

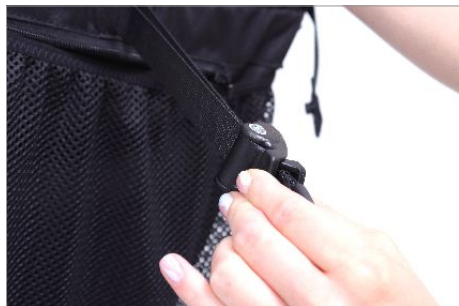

#### OBS!

Før du tar vognen i bruk, må du kontrollere at låseelementet for ryggvinkelen er ordentlig festet. Maksimal belastning på oppbevaringslommen bak ryggenet er 1 kg!


### 5.7 Justering av skyvehåndtaket





## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.8 Sentralbrems / håndbrems

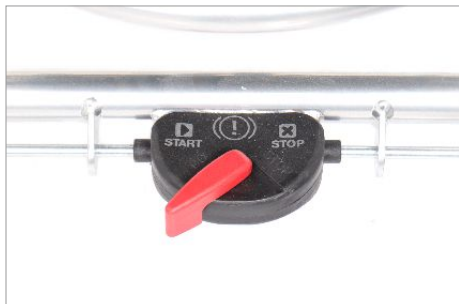

#### **⚠ OBS!**

Merk at det kun er midtbremsen som skal brukes når rullestolen er parkert.

Håndbremsen skal kun brukes til å bremse rullestolen, for eksempel når du kjører nedover et skrånende terreng.



### JUSTERING AV HÅNDBREMSEN

#### **i INFORMASJON!**

Hvis bremsebeleggene er slitte eller ikke er justert, må de skiftes ut og/eller spalten justeres på nytt.

Sørg også for å justere både mellomrommet på innersiden og mellomrommet på yttersiden.


## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.9 Håndbrems - justeringsskjema

#### **!** OBS!


Husk å justere både spalten på innersiden og spalten på yttersiden. Hvis du bare justerer spalten på den ene siden, kan det føre til:

- kontakt mellom bremsebeleggene og bremsekiven,
- får utilstrekkelig bremsekraft,
- kontakt mellom bremsekiven og bremseklammene under bremsing.

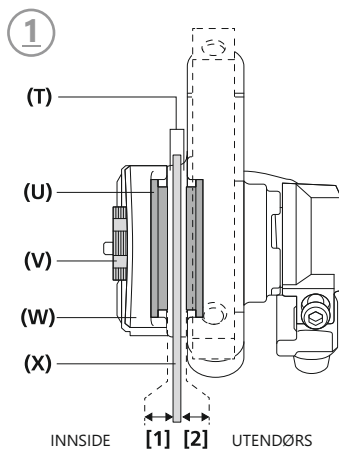

#### **i** INFORMASJON!

- (T) DISC GAP
- (U) BREMSEBELEGG
- (V) JUSTERINGSSKRUE FOR FØR
- (W) KLEMME
- (X) BREMSEKIVE
- (Y) KABELJUSTERINGSKNOTT
- (Z) KABELJUSTERINGSMUTTER

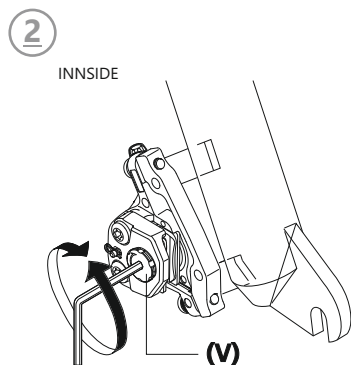

#### **i** INFORMASJON!



Bremsebelegg kan brukes så lenge tykkelsen er minst 0,5 mm.

## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.9 Håndbrems - justerings skjema

3

UTENDØRS

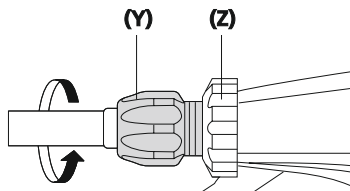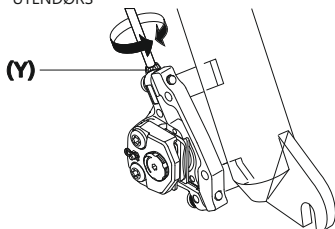

#### **i** INFORMASJON!

1. Juster de to mellomrommene mellom bremsekiven og bremsebeleggene: innersiden [1] = yttersiden [2]. Spalten mellom bremsebeleggene [1] [2]: 0.2 mm - 0.5 mm.
2. Juster med justeringskruen for fôr.
3. Juster ved å vri på kabeljusteringsknappene på klemmene og bremsepakene.

### 5.9 Justering av fjærene

#### **i** INFORMASJON!


Det er mulig å endre stivheten på fjæringen på joggevognen, noe som gjør det mulig å gjøre konstruksjonen stivere eller øke støtdempingen.

Justeringen skal gjøres med en fastnøkkel som følger med i settet.



## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.10 Tippetisering

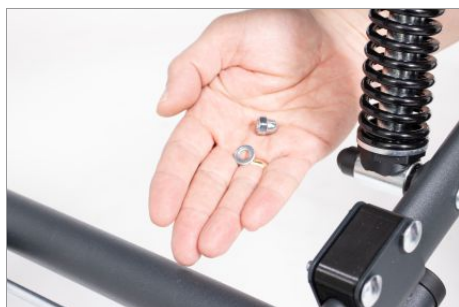

## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.10 Tippetisering



ANTI-TIPP-FUNKSJON



LØTFUNKSJON


nyttig ved kryssing av fortauskanter



HVIS DU IKKE BRUKER - SETT DEN INN

## 5. Hvordan bruke joggevognen



### 5.11 Sammenleggbar kalesje

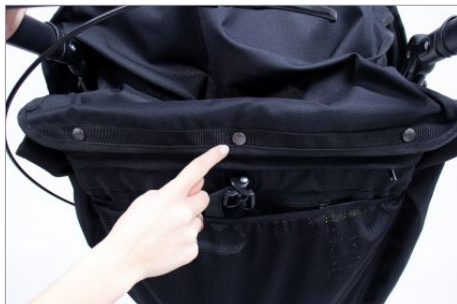

#### **i** INFORMASJON!

For å fjerne kalesjen trykker du på de røde knappene inne i rammen og skyver kalesjen ut.

### 5.12 Regntrekk

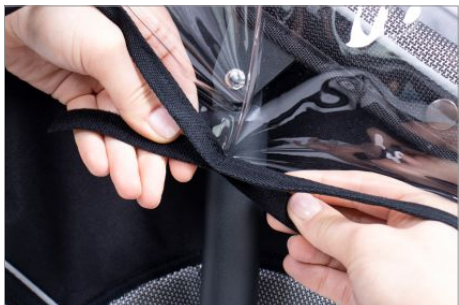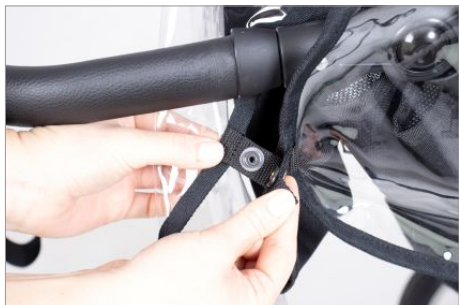


## 5. Hvordan bruke joggevognen

### 5.12 Regnskjerm



### 5.13 Oppbevaringskurv under setet

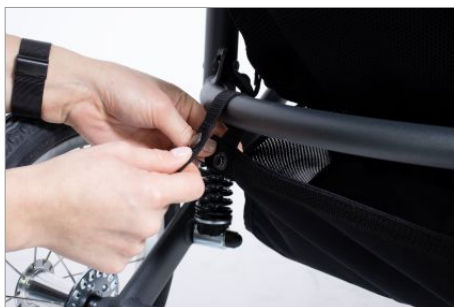

**⚠ OBS!**

Maksimal belastning på oppbevaringskurven under setet er 3 kg!

## 6. Bruk av joggevognen

---

### OBS!

Joggevognen må brukes i samsvar med retningslinjene i denne bruksanvisningen. Husk å kun bruke produktet sammen med en person som har fått opplæring og kunnskap.

Ikke glem å forberede både produkt og bruker før du tar vognen i bruk!

### 6.1 Klargjøring før bruk

Før du bruker produktet, er det viktig å sørge for at:

- brukers antrekk er lette og behagelige sportsklær er å anbefale
- skoene bør være komfortable og dessuten stabilisere ankelen,
- av hygieniske årsaker og for å unngå slitasje anbefales det at brukeren alltid har på seg klær når han/hun bruker vognen, huden må ikke være naken, spesielt ikke på steder der det er regelmessig kontakt med møbeltrekk,
- eventuelle dren, poser, katetre osv. må sikres slik at de fungerer som de skal og ikke forstyrres under bruk av produktet,
- riktige ortopediske hjelpemidler brukes (krage, korsett, ortese, sko) hvis det er anbefalt av lege.

### OBS!

Antrekket skal beskytte brukers hud mot direkte kontakt med polstringen og andre deler av utstyret.

Det er kun legen som kan ta en avgjørelse om bruk av ortopediske hjelpemidler!



## 6. Bruk av joggevognen

### 6.2 Klargjøring av vognen

1. Før bruk er det nødvendig å:

- folde ut enheten,
- plasser enheten på et jevnt underlag,
- sørg for at alle deler er brukbare, korrekt montert og stabile,
- aktiver parkeringsbremsen,
- tilpasse enheten til brukerens mål,
- løsne sikkerhetsbeltene slik at det er enkelt å plassere brukeren i enheten,
- plassere brukeren i enheten,
- fest alle elementer som stabiliserer brukeren, f.eks. sikkerhetsbelter,
- monterer tilleggsutstyr, f.eks. fot- og ankelstabiliserende sandaler.

2. For brukere som har problemer med blæren, er det nødvendig å bruke en spesiell klut på setet. Denne kluten kan kjøpes på apotek eller i medisinske butikker.

#### OBS!

Hvis det finnes hindringer som trinn eller fortauskanter, er det nødvendig å heve forhjulene ved å presse kjørebøylen ned. Sett deretter forhjulene på trinnet og løft deretter opp den bakre delen av vognen ved hjelp av kjørebøylen.

Vær forsiktig så du ikke vipper vognen for mye bakover (når du ikke bruker tippesikring).

Husk å plassere joggevognen forover.

Det er viktig å holde tak i joggevognen ved hjelp av kjørebøylen når du bruker den, ellers kan den rulle.

Før produktet tas i bruk, er det svært viktig å kontrollere at alle belter og sikkerhetsutstyr er riktig festet og justert. I tillegg må du kontrollere at de ikke løsner på grunn av trykket, og at klemmene på de justerbare elementene er strammet godt til!

Utstyret fungerer bare riktig når det er justert i henhold til brukerens høyde og vekt. Husk å ta hensyn til alle disse målene når du kjøper produktet. Riktig justering er det viktigste, for bare da er produktet sikkert. Det er ikke tillatt å tvinge brukeren til å innta en bestemt stilling, da dette vil føles ubehagelig og kan føre til feil holdning.

## 7. Sikkerhetsregler



KUKINI™ joggevognen må brukes i samsvar med retningslinjene i denne bruksanvisningen. Forbered brukeren og enheten før hver bruk.

Det er svært viktig å rådføre seg med lege eller fysioterapeut for å kunne ta en riktig beslutning om valg av joggevogn og størrelse. Det er også viktig å sette seg inn i retningslinjene som er beskrevet i bruksanvisningen før man tar vognen i bruk.

1. Før bruk er det nødvendig å:
  - kontroller at det ikke er skader eller andre feil som kan sette brukerens liv i fare; kontroller at alle deler fungerer og er riktig montert, og kontroller at de ikke er ødelagte,
  - kontroller at alle skruer, knotter og alle limte, sydde eller gjengede deler er strammet til,
  - kontroller at bremsene fungerer som de skal,
  - kontroller at spennene fungerer som de skal,
  - bruk alltid sikkerhetsseler, borrelåsbåndene skal overlappe hverandre minst 8 cm,
  - justere enheten i henhold til brukerens mål og behov, f.eks. justering av fotplaten osv,
  - sikre brukeren ved hjelp av elementer som fotstabiliserende belter, nakkestøtte osv. Det er svært viktig å sikre brukeren slik at han/hun ikke faller ut,
  - kontroller at hjulene er riktig montert og pumpet opp. Hvis det ikke er nok luft, må hjulene pumpes opp til et maksimalt trykk på 2,4 bar.
2. Det anbefales ikke å bruke joggevognen til andre formål enn den er beregnet på.
3. Det anbefales ikke å bruke vognen hvis den er skadet eller mangler deler.
4. Brukeren skal ikke forlates uten tilsyn.
5. Joggevognen skal bare brukes når det er noen som har fått opplæring og har kunnskap om den.
6. Joggevognen og brukeren skal ikke forlates på ustabil underlag uten tilsyn, selv om bremsen er aktivert.
7. Det anbefales å ikke bruke joggevognen i trapper.
8. Det er viktig å aktivere bremsen når du setter bruker i eller ut av vognen.
9. Pass på at brukeren ikke står på fotstøtten når han/hun går inn og ut av vognen.
10. Sørg for at hender eller føtter ikke er i nærheten av eiker eller andre justerbare elementer.
11. Joggevognen bør oppbevares og brukes utilgjengelig for brannkilder og høye temperaturer. Dessuten bør vognen ikke oppbevares i rom med høy luftfuktighet.

## 7. Sikkerhetsregler

12. Sikre vognen under transport for å unngå eventuelle skader. Produsenten tar ikke ansvar for skader som har oppstått på grunn av feilaktig klargjøring av vognen under transport.
13. Fjern all papir- og plastemballasje før du tar vognen i bruk. Emballasjen er ikke et leketøy! Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr.

### OBS!

Feil justering av produktet kan føre til bivirkninger som besvimelse, kroppsdeformiteter, overbelastning av ledd osv. Hvis de ovennevnte symptomene oppstår, må du umiddelbart slutte å bruke produktet, ta brukeren ut av produktet og legge vedkommende ned. Hvis de uønskede symptomene vedvarer, kontakt lege umiddelbart. Hvis symptomene har forsvunnet, må du informere behandlende lege om dette, slik at det kan tas en beslutning om den videre rehabiliteringsprosessen.

Alvorlige hendelser med denne enheten skal rapporteres både til produsenten og til den kompetente myndigheten i ditt land.

Det er ikke tillatt å plassere brukeren i enheten mens han/hun befinner seg i bil.

Produktet inneholder små deler som barn kan svelge.

Ikke bruk et produkt som har tegn på skade, rifter eller slitasje. Bare et uskadet produkt og riktig bruk garanterer at det fungerer korrekt og sikkert. Hvis produktet er skadet, må du slutte å bruke det og kontakte produsenten.

En ukvalifisert person må ikke under noen omstendigheter reparere eller endre produktet og dets konstruksjon, da brukers helse og sikkerhet er avhengig av dette, samt at det vil føre til tap av garantien.

Husk at all belastningen som henger på skyvehåndtaket kan føre til at vognen mister balansen.

Maksimal belastning på oppbevaringslommen bak ryggløset er 1 kg!

Maksimal belastning på oppbevaringskurven under setet er 3 kg!

Brukers vekt må ikke være høyere enn den maksimale vekten som er beskrevet på side 8, der du finner informasjon om dette.

## 8. Garantibetingelser

---

- Akces-MED Ltd. selger produkter som er fri for produksjonsfeil.
- Produsenten gir kjøperen 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Alle feil som oppdages i garantiperioden, vil bli reparert gratis.
- Alle feil som oppstår etter garantiperiodens utløp, kan bare repareres hvis brukeren betaler for det.
- Produktet har en forventet levetid på 48 måneder. Brukeren kan bare bruke produktet etter denne perioden hvis han/hun sender produktet til leverandøren for service. Deretter fastsetter leverandøren på nytt hvor lenge produktet kan brukes, og i tillegg fastsettes datoen for neste service.
- Hvis produktet er skadet, ta kontakt med forhandleren eller Akces-MED Ltd. kundeservice: (tlf. +48 17 864 04 77, e-post: export@akces-med.com).

## 9. Vedlikehold og rengjøring

---

Joggevognen KUKINI™, som er et medisinsk utstyr, skal alltid holdes ren og brukes i samsvar med produsentens anvisninger. Vognen skal oppbevares i et rent, tørt og ventilert rom. Vedlikehold og rengjøring må utføres minst én gang i måneden. Regelmessig rengjøring og vedlikehold av vognen er viktig for at den skal fungere korrekt og være sikker.

Anbefalinger for rengjøring av trekk og andre deler av vognen:


1. Møbeltrekket kan tørr- eller skumvaskes ved maks. 40 °C.
2. Husk å fjerne overflødig fuktighet fra møbeltrekket før neste rengjøring.
3. Ikke bruk harde børster til rengjøring av møbeltrekket.
4. Rengjør ikke møbeltrekket med sterke kjemikalier, f.eks. klorbaserte kaustiske midler.
5. Produktet må ikke rengjøres, skiftes ut eller vedlikeholdes under bruk.
6. Husk at du må fjerne fyllet før du rengjør sitteputen. Det er kun trekket som skal vaskes. Hvis fyllet må rengjøres, må du bruke en fuktig klut - fyllet må ikke bli vått.
7. Metall- og plastelementer skal rengjøres for hånd med egnede rengjøringsmidler etter å ha lest anbefalingene fra produsenten av det aktuelle rengjøringsmiddelet.
8. Det er mulig å desinfisere metall-, plast-, tre- og møbelementer i produktet med et vanlig tilgjengelig desinfeksjonsmiddel. For å desinfisere det valgte elementet sprayer du overflaten med et desinfeksjonsmiddel som er vanlig på markedet, og tørker av med en tørr, ren klut. Etter desinfisering må du vente til elementet er helt tørt, spesielt når det gjelder møbeltrekk. Før du bruker desinfeksjonsmiddelet, må du først sjekke på et usynlig sted om produktet ikke misfarger eller skader den desinfiserte overflaten.

## 9. Vedlikehold og rengjøring

### OBS!

Husk å skru ut sikkerhetsskruene på begge sider av joggevognens ramme før du tar av trekket for vask. Etter at rengjøringen er fullført og trekket er satt på vognen, er det viktig å stramme skruene!



 sekskantnøkkel 3

### OBS!

Husk at møbeltrekket alltid må være tørt før bruk!

Produsenten av joggevognen, Akces-MED. Ltd., er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av uegnede rengjøringsmidler.

Før bruk er det nødvendig å:

- rengjøre hjulene,
- kontroller at understellet og hjulene er riktig montert; kontroller at bremsen stopper hjulet,
- kontroller at vognens konstruksjon er fri for brudd eller deformiteter,
- kontroller at alle bevegelige deler fungerer og at alle skruer, muttere, knotter osv. er korrekt tilstrammet,
- kontroller at belter, vester, bagasjeromsbelter, fotstabiliseringsbelter osv. ikke er frynsete; kontroller at spenner og klemmer fungerer som de skal.

### OBS!

Produsenten tar kun ansvar for skjulte feil eller skader som har oppstått når brukeren har fulgt retningslinjene.

Ved eventuelle skader er det viktig å kontakte den som solgte produktet til deg.



## 9. Vedlikehold og rengjøring

### TEKNISK INSPEKSJON

Tekniske inspeksjoner bør utføres regelmessig. Før service bør produktet rengjøres grundig for å avdekke eventuelle skjulte skader.

Hyppighet	Hva bør kontrolleres?	Hva bør gjøres?	Merknader
Før hver bruk.	Produktets generelle tilstand.	Sjekk: <ul style="list-style-type: none"><li>• hele produktet for synlige skader, sprekker eller mekaniske feil,</li><li>• hvis produktet er komplett,</li><li>• om alle bolter, skruer, knotter, muttere og andre elementer i konstruksjonen er komplette og strammet til.</li></ul>	Hvis det oppstår skader eller defekter, må du slutte å bruke produktet og kontakte leverandøren/distributøren eller produsenten.
	Hjul og bremseser.	Sjekk: <ul style="list-style-type: none"><li>• om hjulene er riktig montert og om de ikke er skadet,</li><li>• hvis bremsen blokkerer det roterende hjulet,</li><li>• hvis hjulene ikke er skitne. Rengjør hjulene om nødvendig.</li></ul>	Hvis det oppstår skader eller defekter, må du slutte å bruke produktet og kontakte leverandøren/distributøren eller produsenten.
	Festing av konstruksjonselementene.	Kontroller alle produktets mekanismer og bevegelige deler. Sjekk spesielt: <ul style="list-style-type: none"><li>• om setet er riktig montert (hvis aktuelt),</li><li>• om hjulene er riktig montert (hvis aktuelt),</li><li>• om elementene som sikrer brukeren er riktig montert og om de fungerer godt (hvis aktuelt),</li><li>• hvis alle bevegelige deler er komplette, fungerer som de skal og ikke klemmer,</li><li>• om justeringsmekanismene for følgende elementer fungerer som de skal (hvis aktuelt): nakkestøtte, ryggstøtte, sete, abduksjonsblokk, armlener, fotstøtter.</li></ul>	Hvis det oppstår skader eller defekter, må du slutte å bruke produktet og kontakte leverandøren/distributøren eller produsenten.
	Elementer til polstring.	Sjekk: <ul style="list-style-type: none"><li>• hvis det er skader, rifter, rifter, løse sømmer eller deformasjoner på polstringselementene,</li><li>• om de stabiliserende stroppene, vestene eller sikkerhetsbeltene ikke er frynsete eller vridd, og om spennene fungerer som de skal,</li><li>• om de stabiliserende stroppene, vestene eller sikkerhetsbeltene fungerer som de skal og ikke løsner under trykk eller ved</li></ul>	Hvis det oppstår skader eller defekter, må du slutte å bruke produktet og kontakte leverandøren/distributøren eller produsenten.
En gang i uken.	Rengjøring av produktet.	Hvis rammen og polstringen blir skitne (støvete, gjørmete osv.) under daglig bruk, tørker du av dem med en fuktig klut uten rengjøringsmidler. Fjern smuss (f.eks. hår, matrester osv.) fra produktets bevegelige deler.	Produktet bør rengjøres ved behov, men minst én gang i uken. Ikke bruk klorbaserte rengjøringsmidler eller sprit. Kontroller at møbeltrekket er tørt før du bruker produktet.

## 9. Vedlikehold og rengjøring

### TEKNISK INSPEKSJON

Tekniske inspeksjoner bør utføres regelmessig. Før service bør produktet rengjøres grundig for å avdekke eventuelle skjulte skader.

Hyppighet	Hva bør kontrolleres?	Hva bør gjøres?	Merknader
En gang i måneden.	Hjulaksler, hurtigkoblinger (hvis aktuelt).	Sjekk: <ul style="list-style-type: none"><li>• om hjulene ruller og om de ikke er løse. Vedlikehold hjulene ved å påføre en liten mengde konserverende smøremiddel mellom akselen og hjulnavet. Kontroller at det er enkelt å ta av og på hjulene.</li></ul>	Rengjør hjulene når de er skitne. Hvis det oppstår skader eller defekter, må du slutte å bruke produktet og kontakte leverandøren/distributøren eller produsenten.
	Produktkonstruksjonskon-takter (sveising, gjenging, lodding).	Sjekk: <ul style="list-style-type: none"><li>• tilstanden til produktrammen på sammenføyingsstedene (sveiser, gjenger, lodding).</li></ul>	Hvis det oppstår skader eller defekter, må du slutte å bruke produktet og kontakte leverandøren/distributøren eller produsenten.
	Dekk og slange (hvis aktuelt).	Sjekk: <ul style="list-style-type: none"><li>• dekkets slitastetilstand. Se etter synlige skader. Kontroller dekktrykket (hvis aktuelt).</li></ul>	Hvis dekktrykket er for lavt, må du pumpe det opp til riktig nivå. Hvis det oppstår skader eller defekter, må du slutte å bruke produktet og kontakte leverandøren/distributøren eller produsenten.
En gang hver 6. måned.	Konstruksjonens bevegelige deler.	Sjekk: <ul style="list-style-type: none"><li>• hvis de bevegelige delene av konstruksjonen ikke er skadet. Vedlikehold dem med et egnet rengjøringsmiddel.</li></ul>	Hvis det oppstår skader eller defekter, må du slutte å bruke produktet og kontakte leverandøren/distributøren eller produsenten.
	Produktmerking.	Sjekk: <ul style="list-style-type: none"><li>• hvis merkingen og etikettene er lesbare.</li></ul>	Hvis det oppstår skader eller defekter, må du slutte å bruke produktet og kontakte leverandøren/distributøren eller produsenten.
Etter at produktets levetid er utløpt.	Detaljert produktkontroll.	Sjekk produktet.	Produsenten oppgir produktets levetid, som er angitt i bruksanvisningen. Etter den angitte perioden kan brukeren bare bruke produktet hvis det først sendes tilbake til produsenten for kontroll. Deretter vil produsenten på nytt definere produktets levetid og datoen for neste kontroll.

## 10. Merking

-  Erklæring om at produktet oppfyller de grunnleggende kravene
-  Katalognummer
-  Serienummer
-  Les bruksanvisningen før bruk
-  Du må ta spesielle forholdsregler!
-  Produsent
-  Produksjonsdato
-  Produktet inneholder ikke lateks
-  Oppbevares på et tørt sted
-  Forbud mot bruk uten festede sikkerhetsbelter
-  Beskytte mot sollys
-  Begrensning av lagringstemperatur
-  Lagring av relativ luftfuktighet
-  Tørk vertikalt
-  Ikke vri
-  Må ikke tørkes i tørketrommel
-  Ikke klorere
-  Ikke stryk
-  Renseri
-  Må ikke renses tørt
-  Alle løsemidler unntatt tetrakloretylen
-  Må ikke blekes
-  Forsiktig! Delikat innhold
-  Vaskes i maskin
-  Vask ved maks. temperatur 40°C
-  Det er forbudt å gå opp eller ned trappene. Det spiller ingen rolle om brukeren er plassert i enheten eller ikke
-  Forbud mot å etterlate brukeren uten tilsyn under bruk av produktet
-  Du må lese tilleggsinformasjonen
-  Du må trykke på knappen som er vist på bildet
-  Du må bruke verktøyene som er angitt i monteringsbeskrivelsen
-  Medisinsk utstyr



# 10. Merking

## Eksempel på dataplate







## PRODUSENT



**Akces-MED Ltd.**

Jasionka 955 B  
36-002 Jasionka  
tel. +48 17 864 04 77  
e-post: [export@akces-med.com](mailto:export@akces-med.com)  
BDO: 000031619

Autorisert forhandler