

Axkid ONE 2 Reha



Bruksanvisning – Rehab-bilsete Axkid ONE 2 Reha

CE


Thomashilfen



1. Illustrasjoner

Axkid ONE 2 Reha



1



2



3






4









5







6

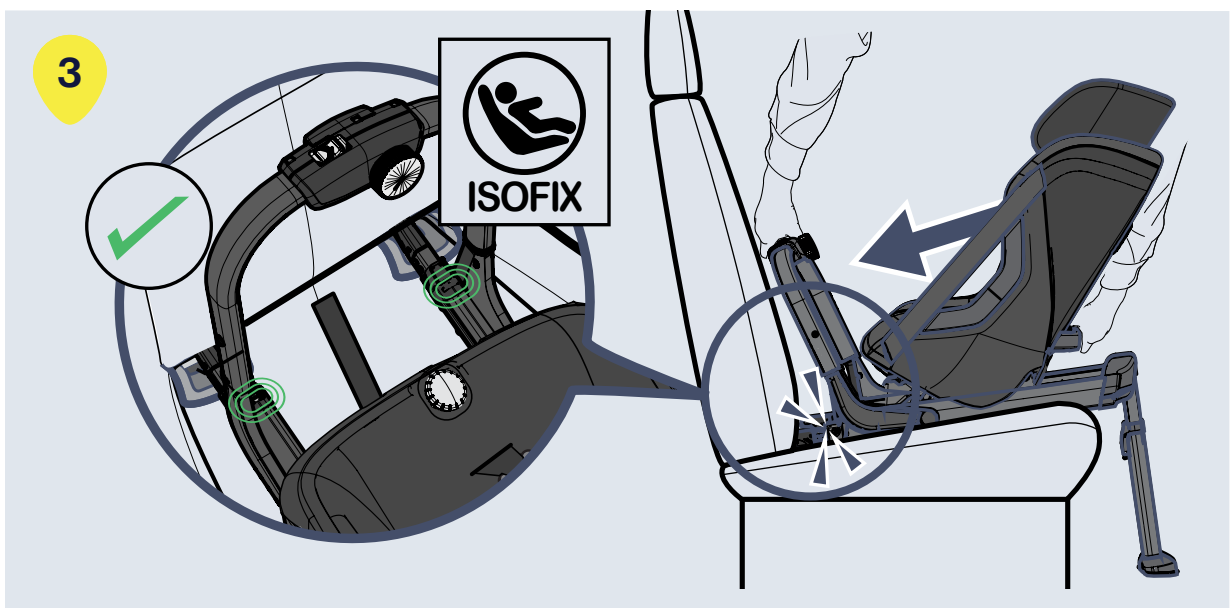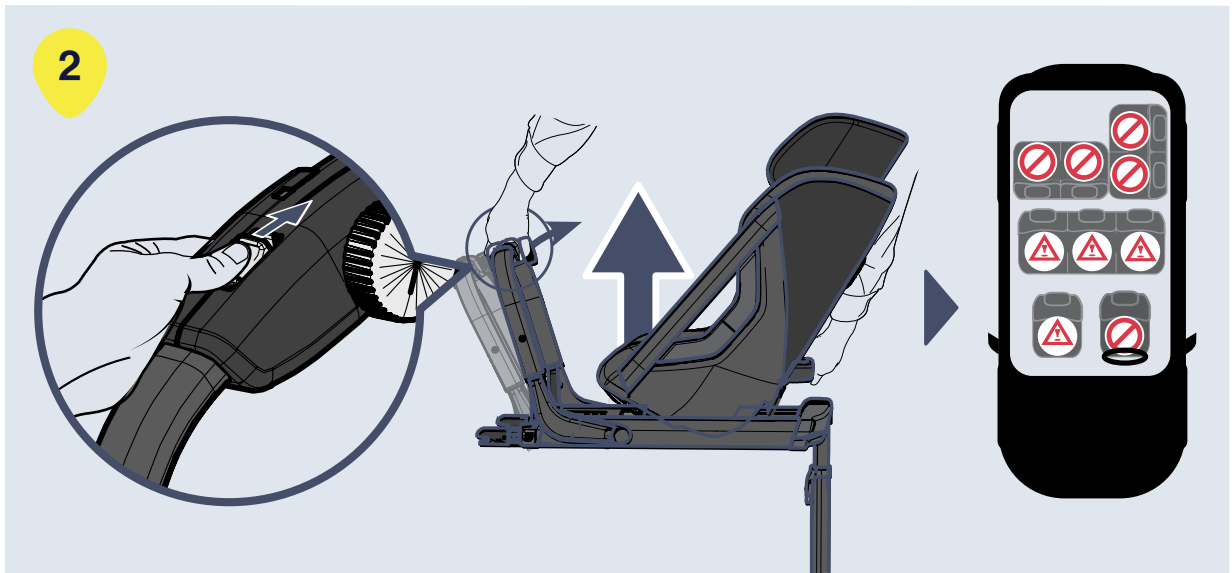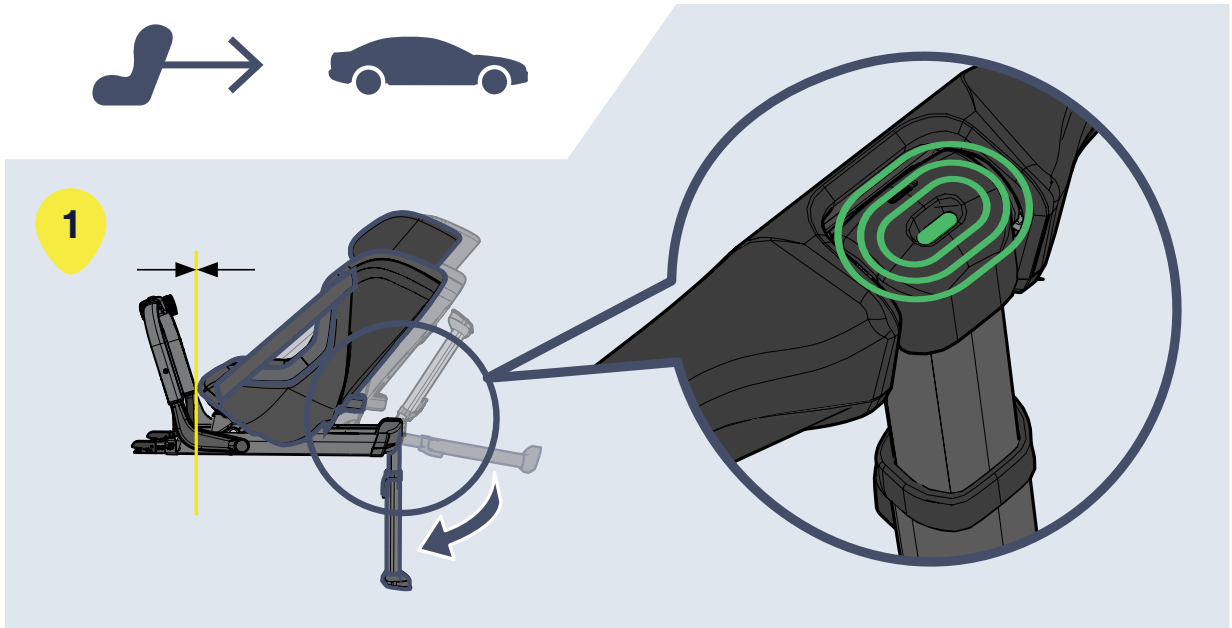


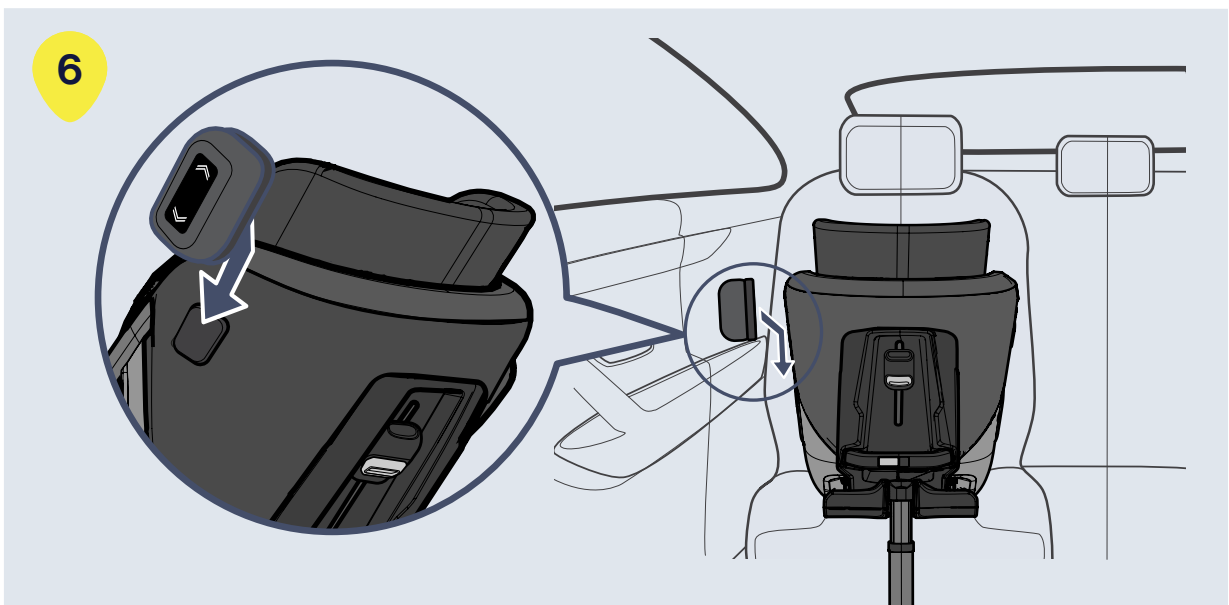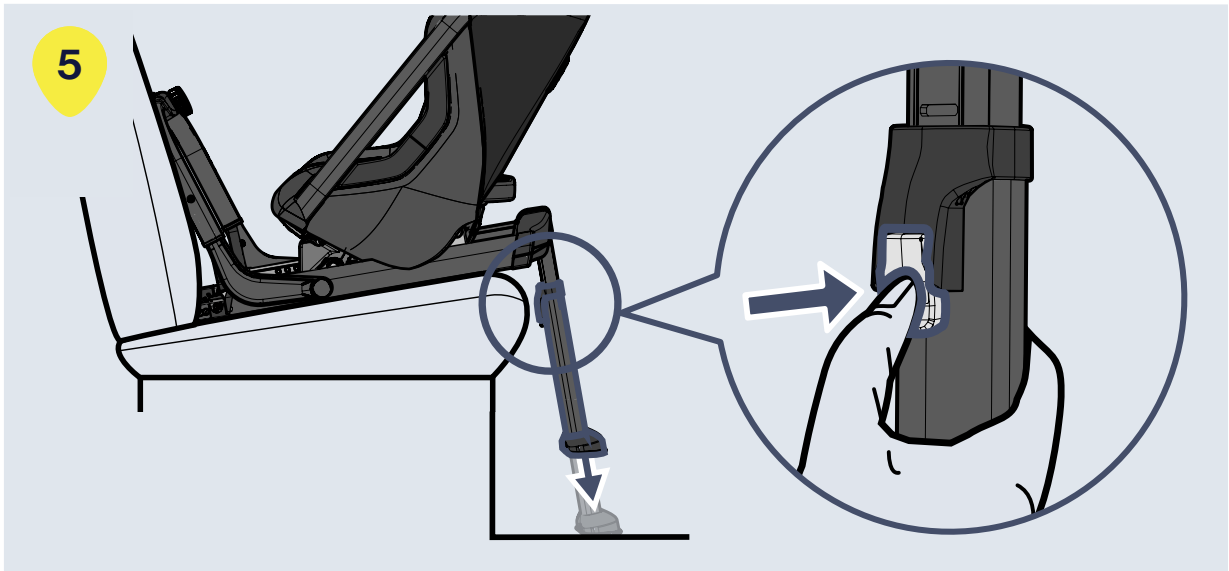
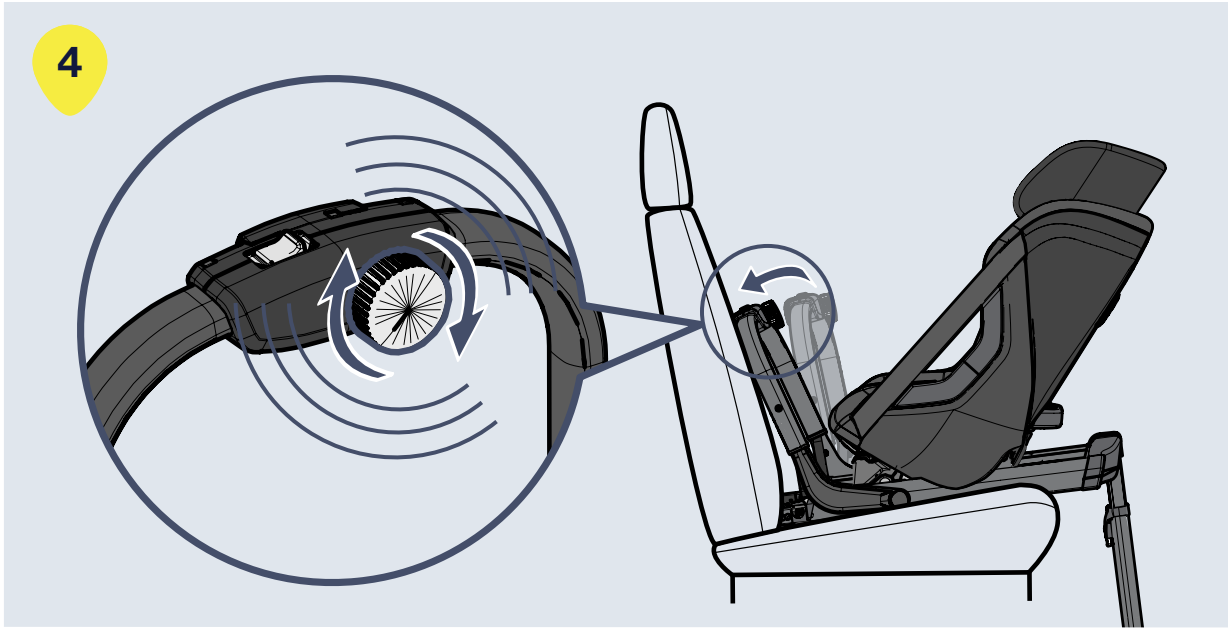


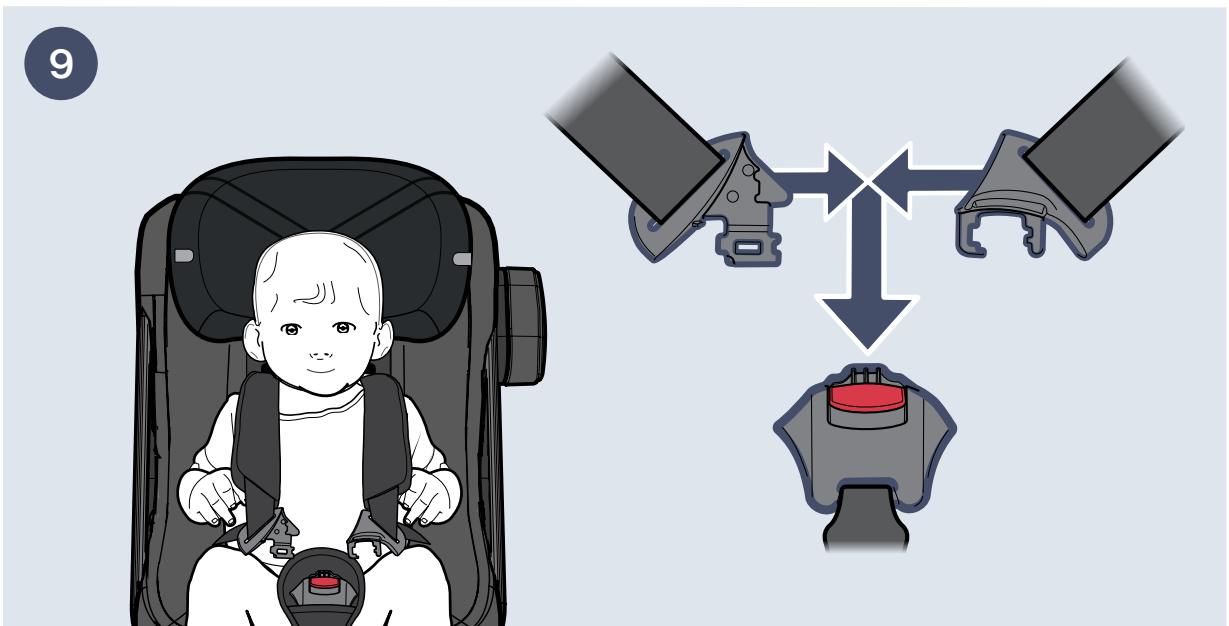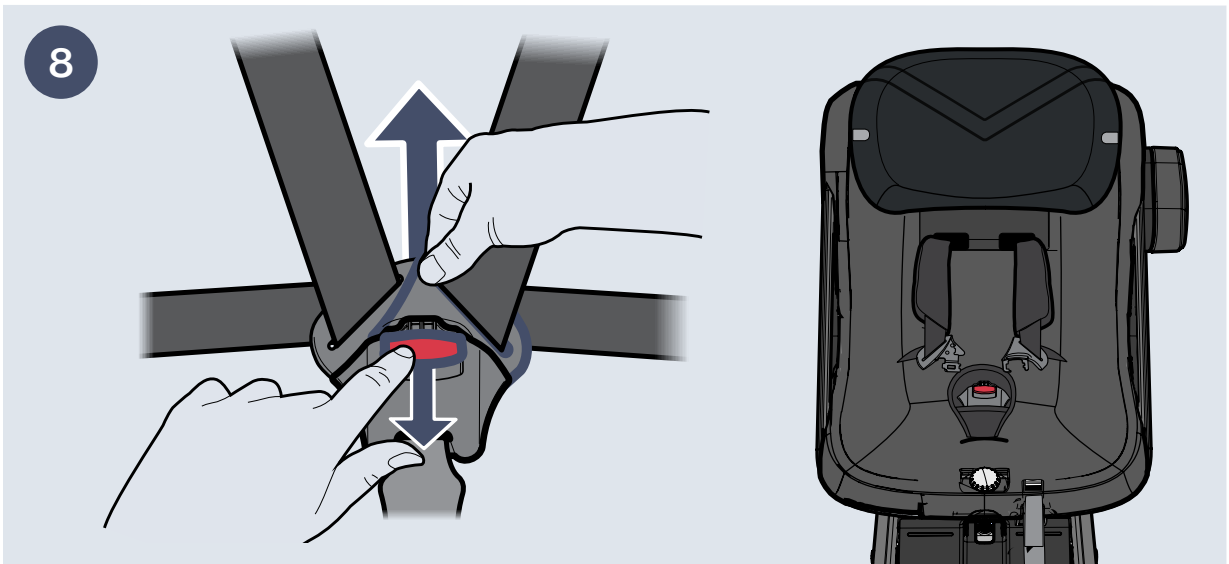
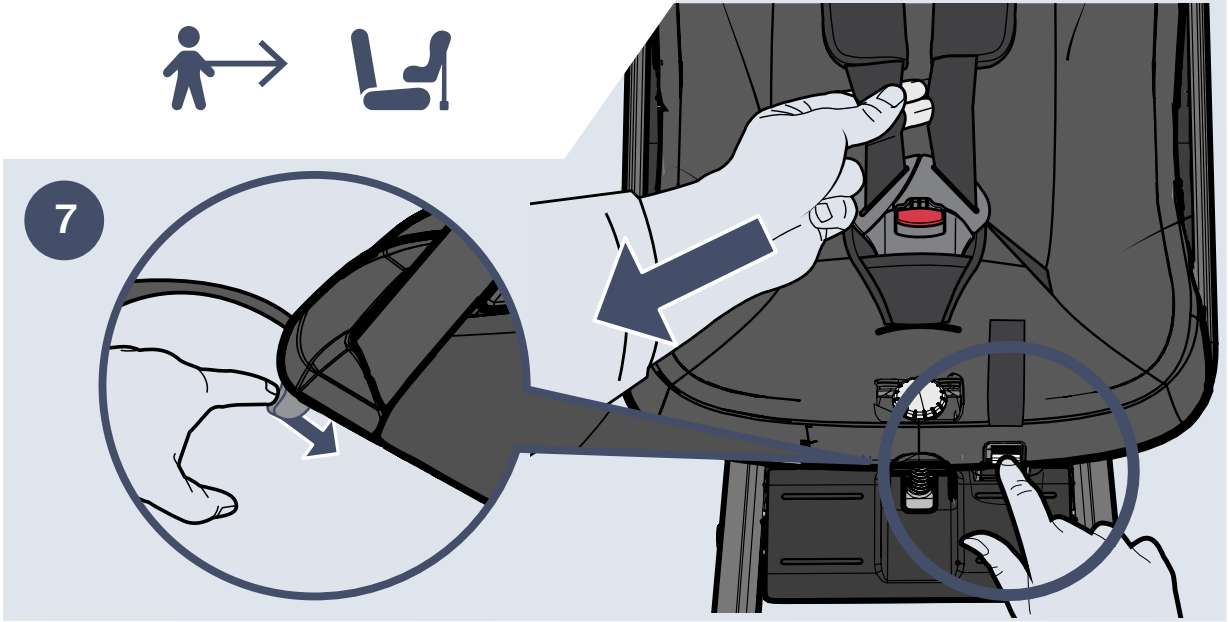


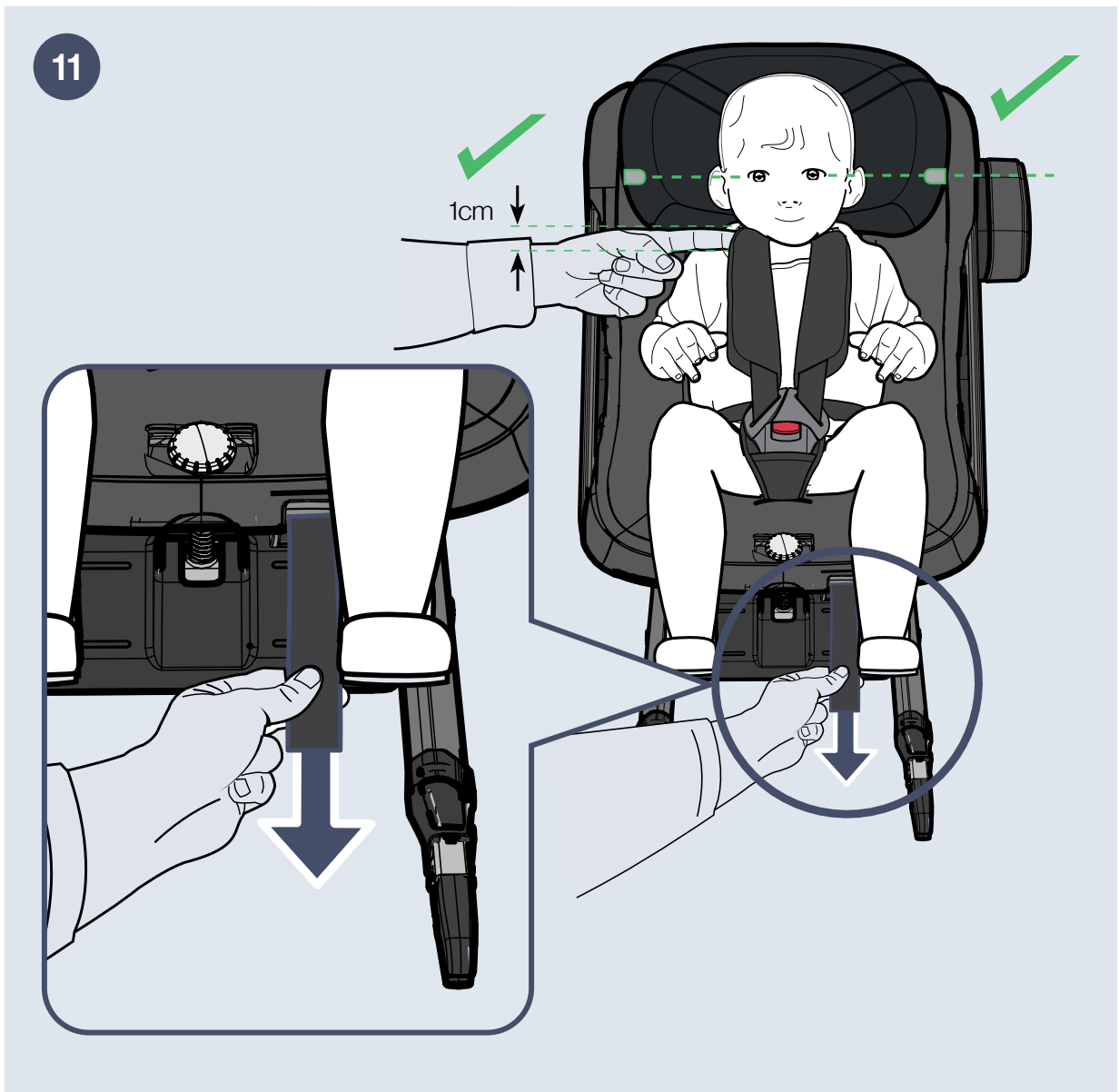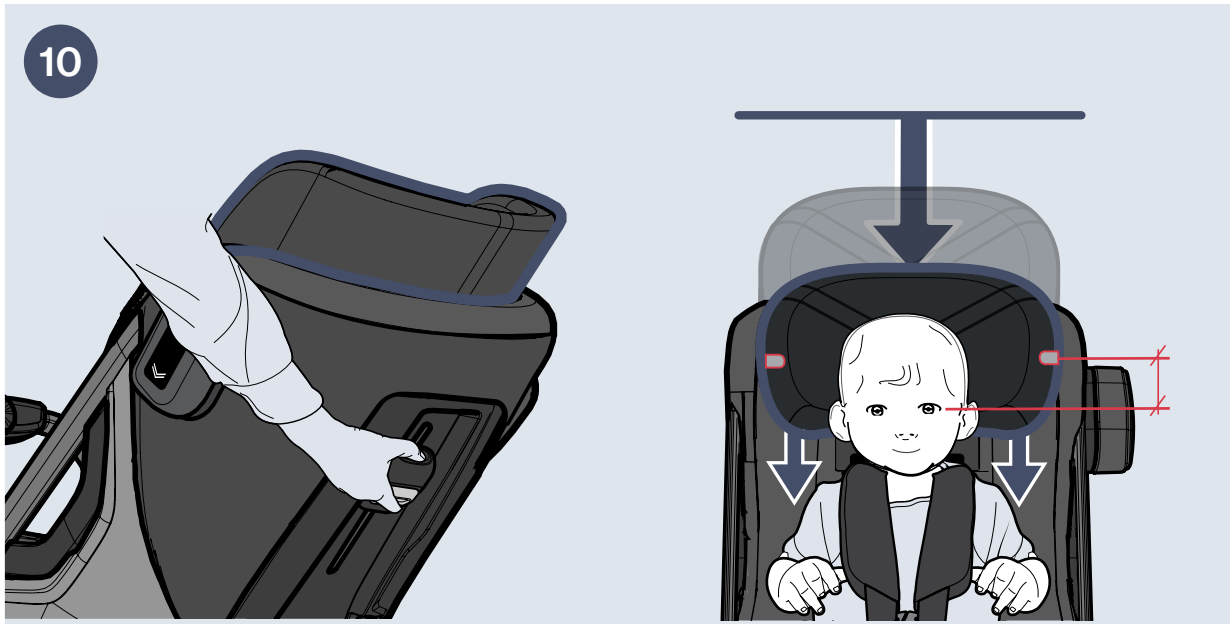

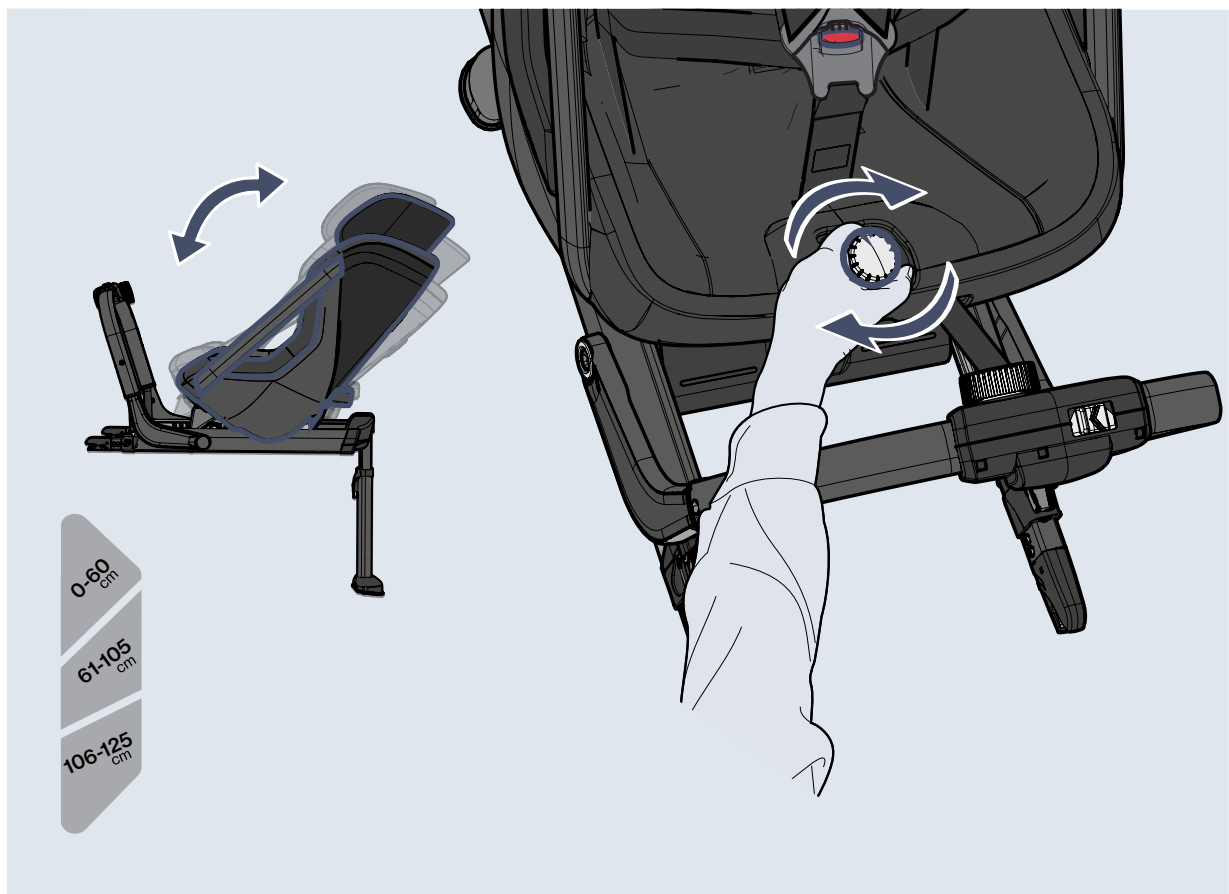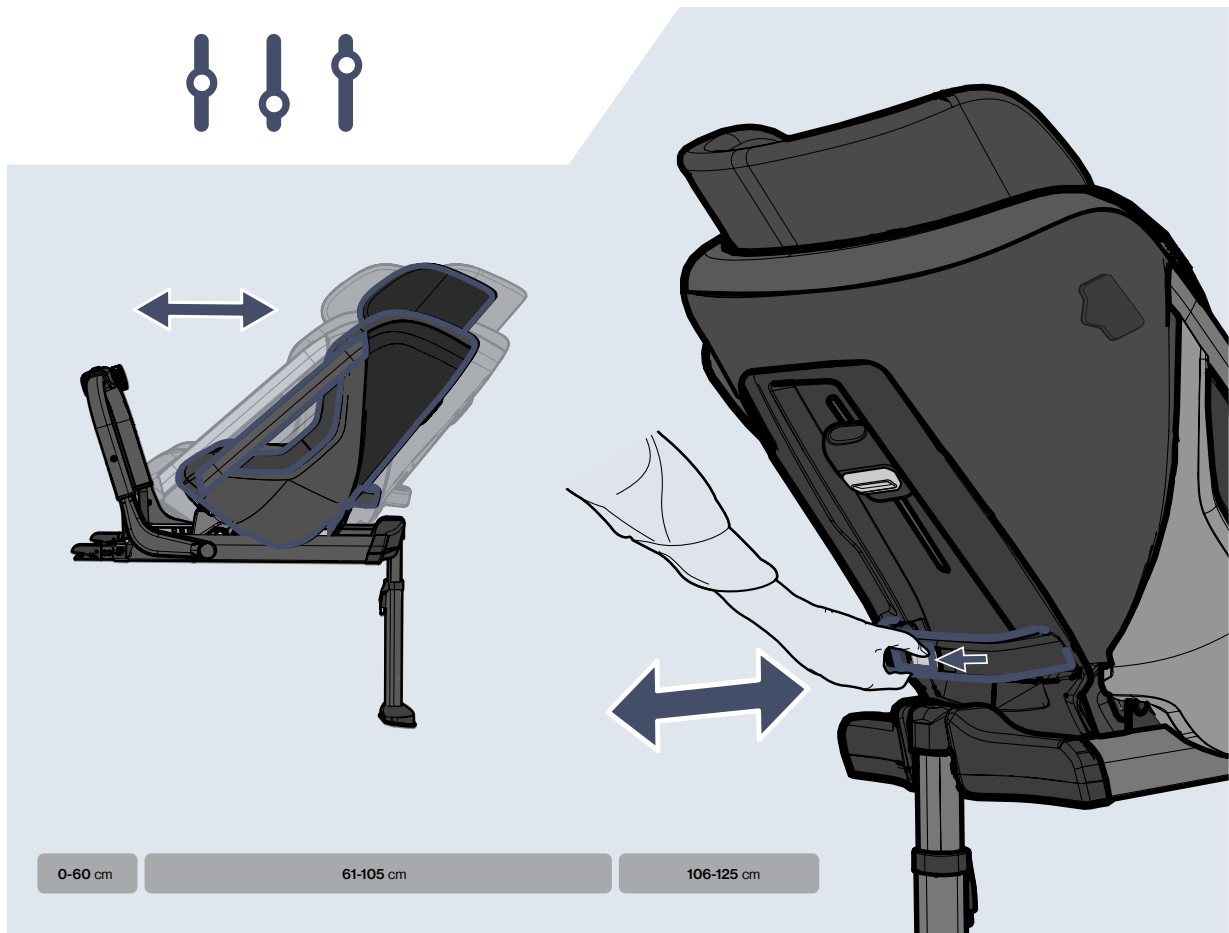

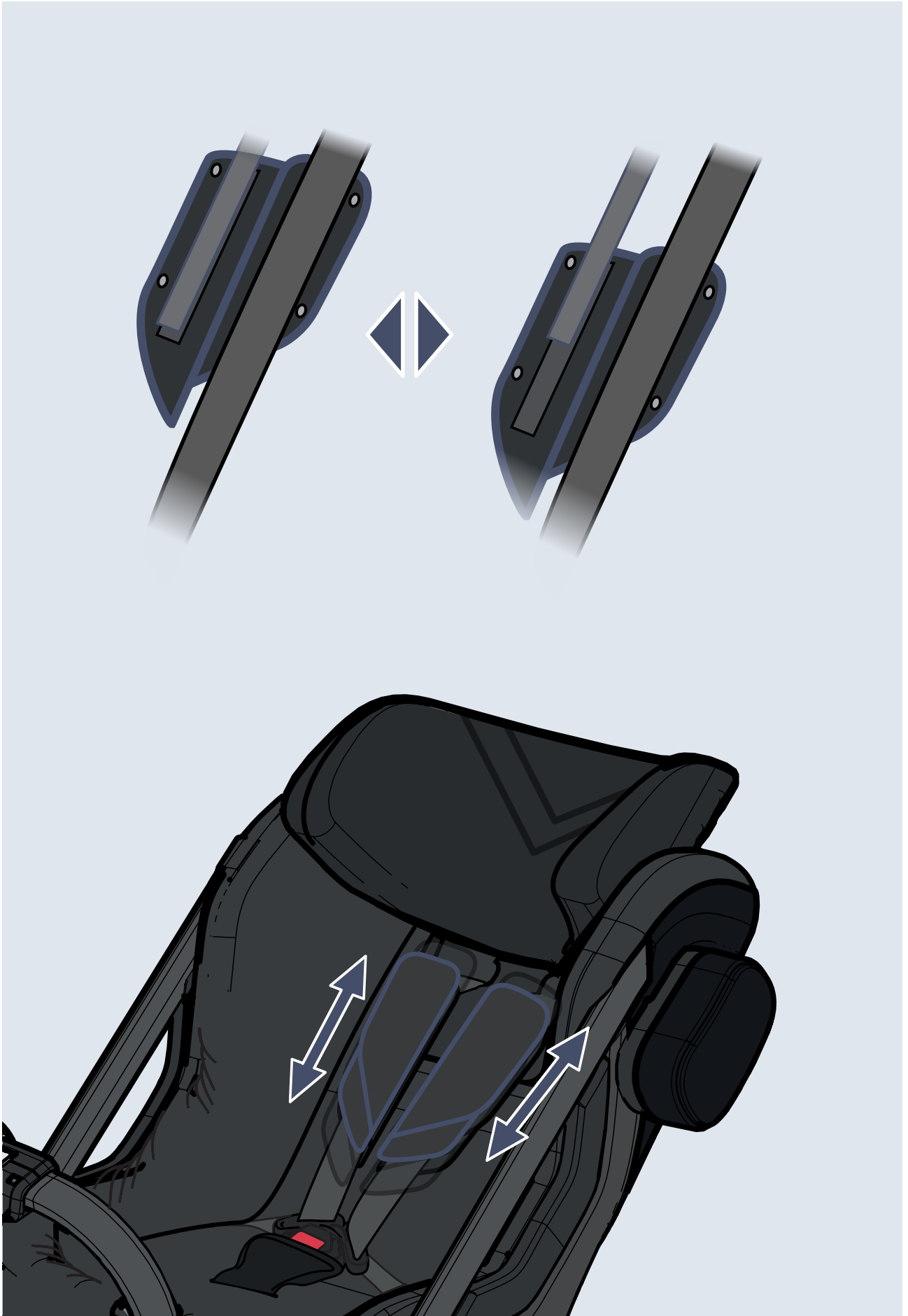

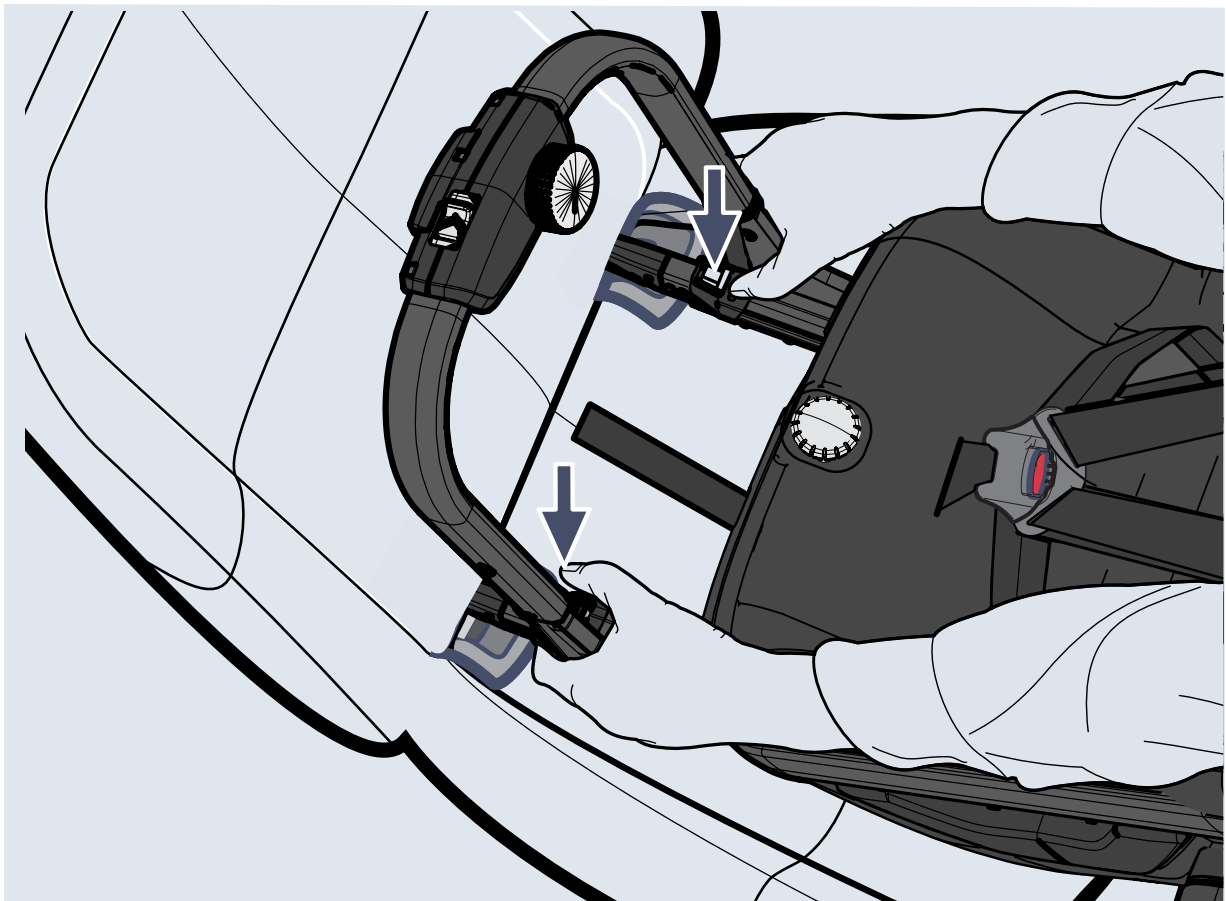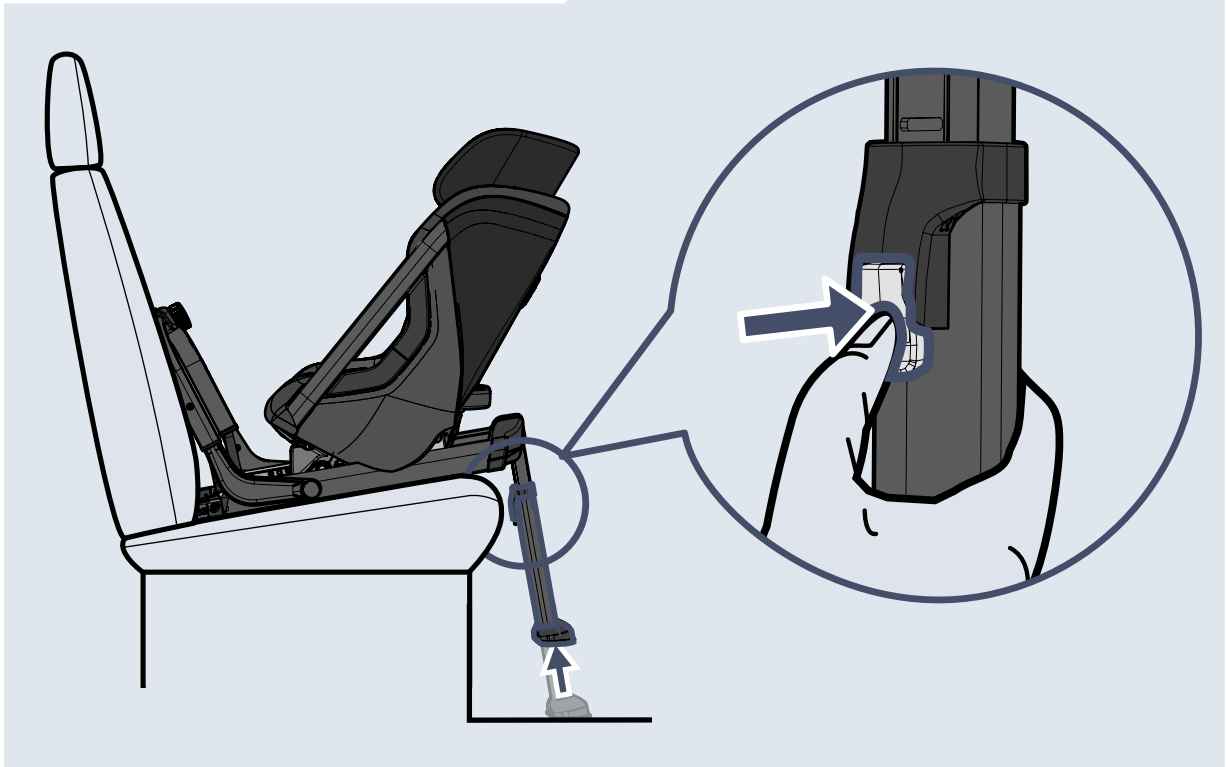

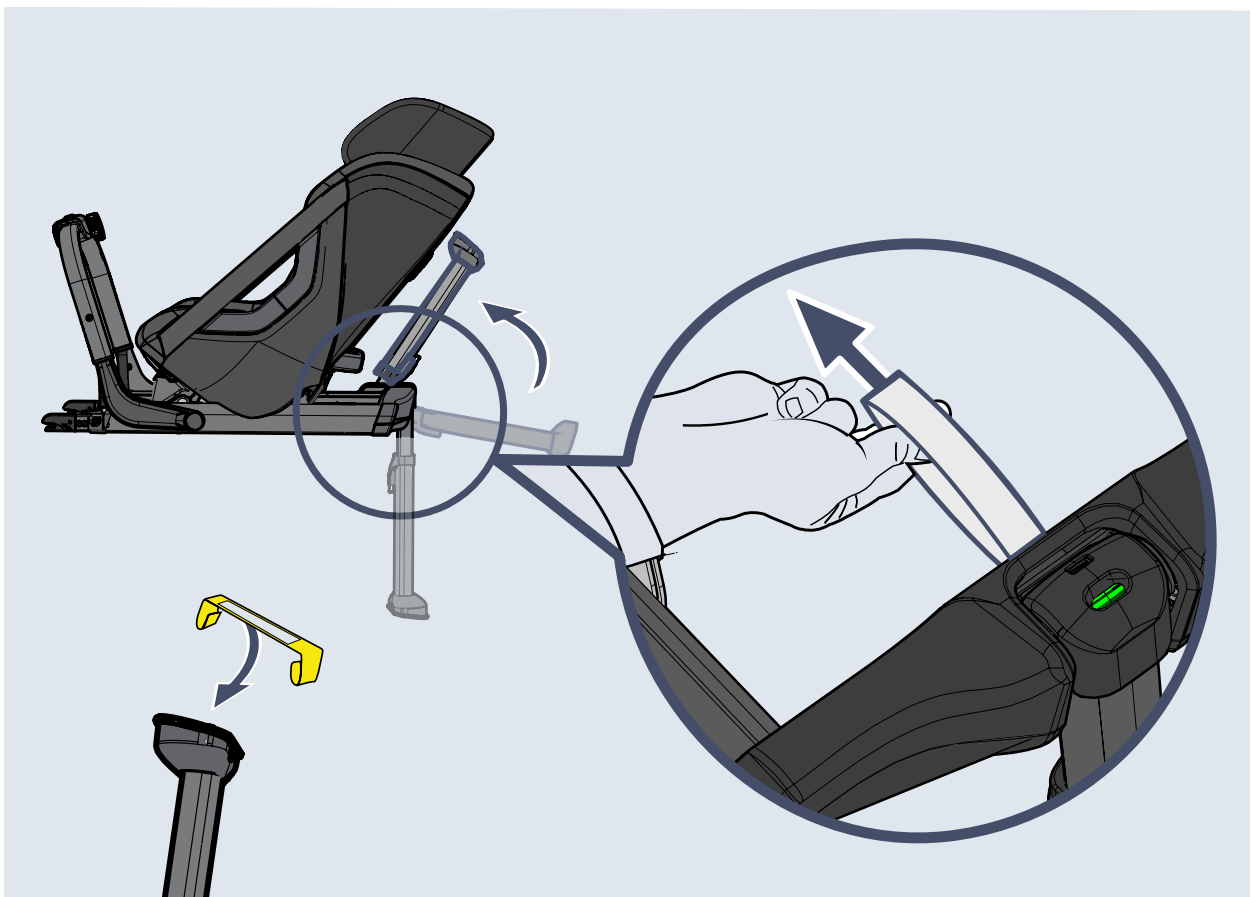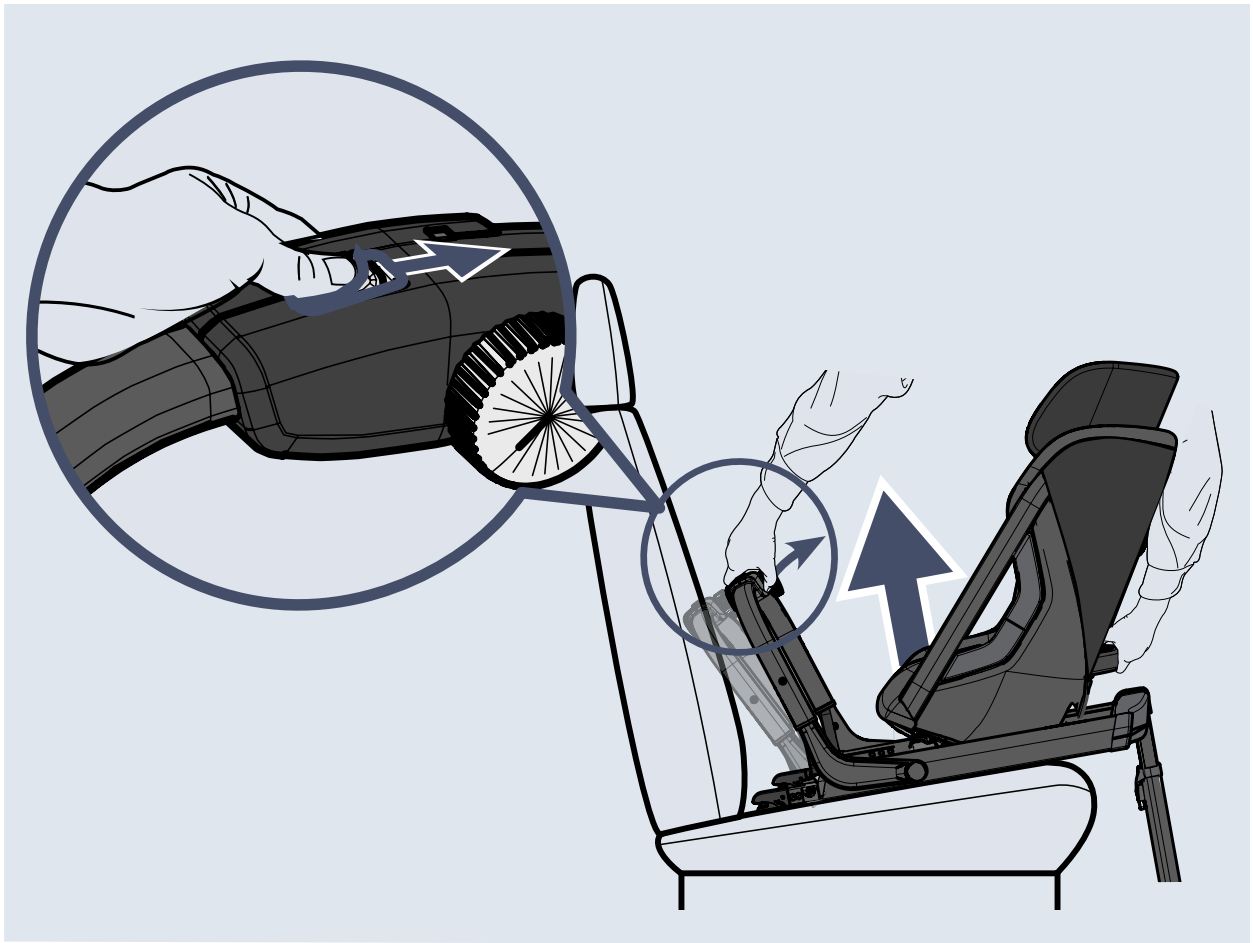



2. Forord / Produsent

Kjære kunde,

Du har valgt vårt produkt, og vi takker for tilliten du har vist oss. For at håndteringen av ditt nye produkt skal være sikker, praktisk og komfortabel for deg og brukeren, ber vi deg lese denne bruksanvisningen først. På den måten unngår du skader og feilbetjening. Sørg for at denne bruksanvisningen følger med produktet og er tilgjengelig for alle brukere.

Modifisering av rehab-bilstolen endrer håndteringen av bilstolen på noen få punkter; det kan være avvik fra forbruker-produktet.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte forhandleren din eller kontakte oss direkte.



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

Walkmühlenstraße 1

27432 Bremervörde

Telefon: +49 (0) 4761 8860

www.thomashilfen.de

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer. Dette kan føre til forskjeller mellom produktet ditt og fremstillingen i media.

Innholdsfortegnelse

1. Illustrasjoner	3
2. Forord / Produsent	12
3. Merking/modellidentifikasjon	13
4. Generell informasjon / sikkerhetsanvisninger	14
5. Tiltenkt bruk	15
5.1 Tiltenkt bruk / bruksområder	15
5.2 Indikasjon / pasientmålgruppe, tiltenkte brukere	15
5.3 Risiko og kontraindikasjoner ved bruk	15
6. Produktbeskrivelse	15
6.1 Leveringsomfang	15
6.2 Grunnleggende utstyr	15
6.3 Idriftsettelse	15
6.4 Brukeropplæring	15
7. Innstillingsalternativer / ytelsesfunksjoner / tilbehør	16
8. Komponenter.	17
8.1 Tillatte og ikke tillatte sitteposisjoner for Axxid ONE 2 Reha barnesete	19
8.2 Installere Axxid ONE 2 Reha i kjøretøyet.	19
8.3 Legge Axxid ONE 2 Reha barnestolen tilbake	20
8.4 Justering av sete.	21
8.5 Justering av setet / fjerning av Axxid ONE 2 Reha fra kjøretøyet	21
9. Tekniske data	22
10. Materialinformasjon	22
11. Rengjøring, vedlikehold og reparasjon	23
11.1 Rengjøring, pleieanvisninger og desinfeksjon i hverdagen.	23
11.2 Vedlikehold og inspeksjon av spesialforhandlere / vedlikeholdsplan	24
11.3 Reservedeler	24
11.4 Lagring/avhending	24
12. EU-samsvarserklæring	25
13. Garanti	25
14. Brukstil/levetid	25
15. Gjenbruk	25
16. Forhandler	25

3. Merking / Identifisering av modell

Klistremerke	Betydning
<p>Thomashilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG Walkmühlenstraße 1 - 27432 Bremervörde - Germany</p> <p>XXXXX XXXXX</p> <p>Reha-Autositze</p> <p>XXX</p> <p>98000XXXXXX</p> <p>MD CE [Symbol] 20XX-XX-XX</p> <p>STD</p> <p>UDI-DI (1)XXXXXXXXXXXX</p> <p>UDI-PI (21)XXXXXX</p> <p>SN XXXXXX</p>	<p>Streckkodeetikett</p> <p>Plassering på produktet (fig. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produsent - Produktnavn - Produktgruppe - Artikelnummer kort/lang - MD = Medisinsk utstyr - Produksjonsdato - Serienummer
<p>Thomashilfen Walkmühlenstraße 1 27432 Bremervörde · Germany</p> <p>Axxid ONE</p> <p>Nutzergri user size 61 - 125 24.02 - 49.11</p> <p>CE [Symbol] Made in Germany</p> <p>Thomashilfen Walkmühlenstraße 1 27432 Bremervörde · Germany</p> <p>Axxid ONE 2 Reha</p> <p>Nutzergewicht / user weight: 0 - 23 kg 0 - 50.71 lbs</p> <p>CE [Symbol] Made in Germany S</p>	<p>Typeskilt</p> <p>Plassering på produktet (fig. 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produsent - Produktnavn - Brukervekt - Brukervekt - CE-merking - Følg bruksanvisningen
<p>Thomashilfen Walkmühlenstraße 1 27432 Bremervörde Germany</p> <p>Axxid ONE 2 Reha</p> <p>Festigkeitsnachweis durch Crashtest in Anlehnung an</p> <p>ECE R129/03 S</p> <p>Frontaufprall Test-Nr. S240304001</p> <p>Seitenaufprall Test-Nr. : S240305003</p> <p>Proof of strength by crash test in accordance to</p> <p>ECE R129/03 S</p> <p>Front impact Test-No. S240304001</p> <p>Side impact Test-No. : S240305003</p>	<p>Etikett for kollisjonstest</p> <p>Plassering på produktet (fig. 2)</p> <p>Informasjon: Produktet har via en styrkeverifisering i Basert på ECE R 129/03.</p>

4. Merknader

4.1 Generell informasjon

- Les bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet for første gang, eller få den lest opp hvis du har problemer med å lese den. Hvis bruksanvisningen mangler, kan du laste den ned fra www.thomashilfen.de. Innholdet i den digitale bruksanvisningen kan forstørres.
- Kontroller emballasjen for transportskader og at produktet er i perfekt stand..
- Endringer av produktet er kun tillatt innenfor rammen av de justeringsmulighetene som er gitt.
- Rengjøring og daglig stell kan utføres av pårørende og pleiere. Vedlikehold og inspeksjon utføres av spesialiserte forhandlere.
- I noen land er det nødvendig å ha med legeattest.
- Rehab-bilstolen kan brukes på ett av baksetene og passasjeret foran. Det valgte bilsetet MÅ være forovervendt og må ha en Isofix-tilkobling.
- All merking må forbli på produktet og må ikke manipuleres.

4.2 Sikkerhetsinstruksjoner

- Kontroller minst hver 3. måned om produktinnstillingene fortsatt stemmer overens med brukerens aktuelle kroppsmål. Hvis det er nødvendig, må innstillingene justeres av en fagforhandler/ortopeditekniker. Kontrollieren Sie regelmäßig (wöchentlich) die Funktionsfähigkeit der Einstellmöglichkeiten am Produkt.
- Kontroller regelmessig (ukentlig) at produktets justeringsmuligheter fungerer som de skal.
- Ikke overbelast produktet og overhold den maksimale brukervekten eller den maksimale lastekapasiteten (se tekniske data).
- Alle brukere må være kjent med produktets funksjoner. Dette sikrer at brukeren raskt kan frigjøres fra produktet i en nødsituasjon.
- Ikke la brukeren være uten tilsyn når han/hun går inn og ut av produktet.
- Brukeren skal alltid plasseres med 5-punkts sikkerhets- og posisjoneringsbelte (grunnutstyr).
- Sterkt sollys og varme kan føre til høye overflatetemperaturer på produktet. Det er da fare for personskader ved kontakt. Bruk ikke produktet igjen før det er tilstrekkelig avkjølt. Beskytt generelt produktet mot direkte sollys.
- For å ivareta brukerens sikkerhet må du følge sikkerhetsstandardene som gjelder for ditt kjøretøy i bruksanvisningen for kjøretøyet.
- Bruksanvisningen må forbli på produktet.
- Hvis det mot formodning skulle inntreffe en alvorlig hendelse med produktet, ber vi deg rapportere dette umiddelbart til vårt selskap og til ansvarlig myndighet.

5. Tiltent bruk

5.1 Tiltent bruk / Bruksområder

Axxid ONE 2 Reha er et medisinsk utstyr i klasse 1.

Den er utviklet for transport av barn med funksjonsnedsettelse og for å opprettholde en sikker sittestilling i motorkjøretøy. Barnet er alltid sikret med rehab-bilstolens 5-punkts sikkerhetsbelte. Rehab-bilstolens 5-punktssele bidrar også til å holde barnet i en oppreist sittestilling. Rehab-bilstolen har også en integrert setevipp.

Rehab-bilstolen gir ekstra støtte for sikker sittestilling, stabilisering av hodekontroll og et stabilt sete i bekkenområdet. Produktet kan også tilpasses med tilbehør. Rehab-bilstolen brukes som en bakovervendt reboarder. All annen bruk eller bruk utover dette anses som utilbørlig bruk.

5.2 Indikasjon / pasientmålgruppe, tiltent Bruker

Rehab-bilstolen brukes til barn med strukturelle og/eller funksjonelle begrensninger eller dårlig holdning i hode- og overkroppsområdet. Det sikrer en stabil og fysiologisk posisjonering når et standard bilbarnestol ikke er tilstrekkelig for en stabil sittestilling i bilen.

5.3 Risiko ved bruk og Kontraindikasjoner

Ved riktig bruk kan risikoer utelukkes under bruk. Det er ingen kjente kontraindikasjoner.

6. Produktbeskrivelse

6.1 Leveringsomfang

Produktet leveres ferdig montert i grunnkonfigurasjonen. Eventuelt bestilt tilbehør følger med produktet og må monteres i etterkant. Bruksanvisning følger med produktet.

6.2 Grunnleggende utstyr

Seteskill (bakovervendt); sete og ryggstøtte med høydejusterbar nakkestøtte i 12 posisjoner; hodepute; sittepute; sittepute på siden av setet; integrert 5-punktssele med sentraljustering; høydejusterbar skuldersele med

Axxid ONE 2 Reha belteskjoldsystem inkl. belteskjoldpute (liten), ekstra bred sidekollisjonsbeskyttelse (ASIP), bærehåndtak, justerbar hvile- og sovestilling, avtakbare bryst- og seteputer, avtakbare trekk, kan vaskes i maskin opp til 40 °C, ikke tørketrommel, stativ med akustisk signal, automatisk veltebøyle, abduksjonsguide, ISOFIX-koblinger, Sleep Well System, Easy Installation System.

6.3 Igangsetting

- Fjern forsiktig transportlåsene og emballasjen.
- Sørg for at emballasjemateriale og små deler ikke kommer i hendene på barn for å unngå svelging eller fare for kvelning.

6.4 Brukeropplæring

Brukeren instrueres i bruken av dette hjelpemiddelet av autorisert fagpersonell ved hjelp av denne bruksanvisningen.

Spesialrådgiveren skal montere setet i kjøretøyet sammen med brukeren og tilpasse setet til den aktuelle brukerens mål.

Det må sikres at brukeren har fått opplæring i alle produktets funksjoner og hvordan det skal monteres og demonteres fra kjøretøyet.



7. Innstillingsalternativer / ytelsesfunksjoner / Tilbehør

Vær oppmerksom på dette:

Axxid ONE 2 Reha er en utvidet i-Size-bilbarnestol. Den er godkjent i henhold til UN R129-direktivet for bruk på i-Size-kompatible seter i bilen i henhold til bilprodusentens bruksanvisning. Hvis du er i tvil, kan du kontakte produsenten av barnesetet (www.axkid.com) eller forhandleren.

Axxid ONE 2 Reha er et sikkerhetssystem for spesielle behov og er derfor merket med en "S".

7.1 5-punkts sele

Endring av beltelengden:

Løft seteputen litt og løsne stoffklaffen ved hjelp av borrelåsen. Du vil nå se beltemidjusteringen som er innfelt i seteskallet. For å endre beltelengden trykker du spaken ned og justerer beltet ved å trekke i beltebandet som henger nederst (forkorting) eller ved å trekke de to beltene fremover (forlengelse). (side 6, fig. 7-8)

7.1.1 Beltefeste:

Trykk på den røde fordypningen på festeanordningen for å åpne den. Skill deretter de to øvre belteholderne fra hverandre. For å lukke beltet fører du de to øvre belteholderne sammen igjen, setter dem inn i toppen av spennen og trykker dem sammen til de går i inngrep med et hørbart "klikk". (side 6, fig. 8)

7.1.2 Veiledning om bortføring

Trekk stroppen på abduksjonsføreren gjennom det bakre sporet i seteinnsetsen for å feste den. Før den frem igjen gjennom det fremre sporet og fest den med trykknappen. (Fig. 1)

7.1.3 Thoraxpute

Høyden og dybden på thoraxpelottene kan tilpasses individuelt på de laterale velurflatene. (Fig. 2)

7.2 Tilbehør

Merk: Informasjon om installasjon finner du i bruksanvisningen som følger med tilbehøret. Hvis bruksanvisningen mangler, kan du laste den ned fra www.thomashilfen.de. Tilbehøret monteres/demonteres ved hjelp av standardverktøy

7.2.1 Hodepute

Den ekstra hodeputen reduserer størrelsen på nakkestøtten og gir mindre brukere mer støtte. (Fig. 3)

7.2.2 Flukthindrende vest

Merk: Informasjon om installasjon finner du i bruksanvisningen som følger med tilbehøret. Hvis bruksanvisningen mangler, kan du laste den ned fra www.thomashilfen.de.

Tilbehøret monteres/demonteres ved hjelp av standardverktøy. (Fig. 4)

7.2.3 Bilsetebeskytter med rygg

Bilsetebeskytteren plasseres under bilbarnestolen på bilens sete og ryggstøtte. Den beskytter seteoverflaten og ryggstøtten på bilsetet mot skader. Små gjenstander kan oppbevares i lommene foran. (Fig. 5)

7.2.4 NapUp




NapUp er en lettmontert hode støtte som kan ettermonteres på nesten alle Thomashilfen rehab-bilstoler. NapUp gir et sikkert grep med minimal kontakt med pannen og maksimal bevegelsesfrihet.

For å montere NapUp føres selestroppene gjennom rehab-setets belteføringer og festes om mulig. Hvis skulder belteføringer ikke gir tilstrekkelig plass, føres beltebandene rundt nakkestøtten og festes. (Fig. 6)

8. Komponenter

Skulderstropper (A)	Justeringsratt for benplass (N)
Beltespenne (B)	Håndtak bak (O)
Utløser for veltebøyle (C)	Indikator for støttefotens posisjon (P)
Veltebøyle (D)	Utløserrem for støttefot (Q)
Nakkestøtte (E)	Støttefot (R)
Merking i øyehøyde (F)	Lydindikator (S)
ASIP-pad (G)	Utløserknapp for belte (T)
Knott for tiltjustering (H)	Remstrammer (U)
Justeringsknott for støttefot (I)	Indikator for ISOFIX-låsing (V)
ASIP-kontakt (J)	ISOFIX-knapp (X)
Knapp for veltebøyle (K)	ISOFIX-kontakter (Y)
Sidedeksel (L)	

Deler

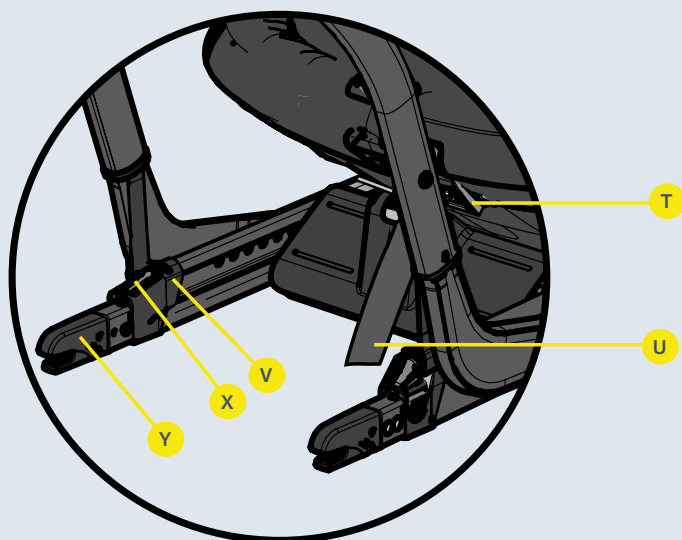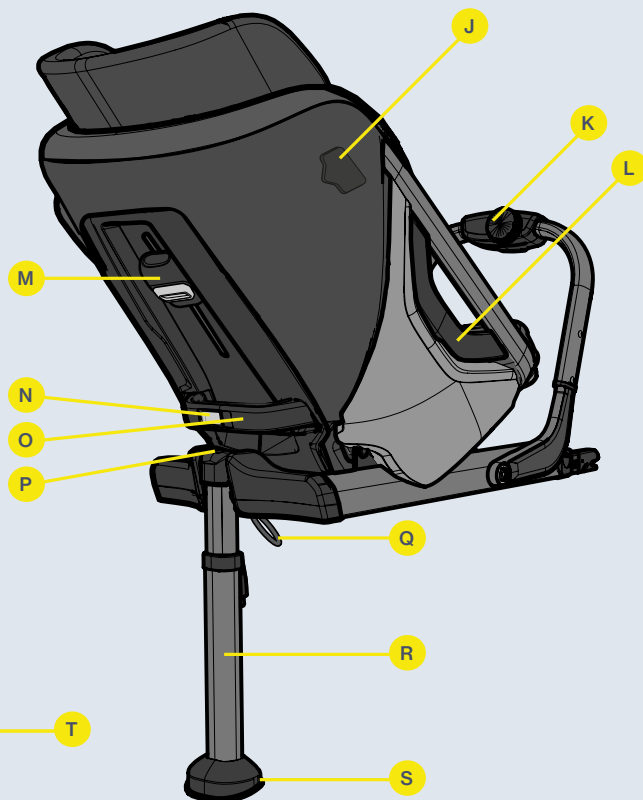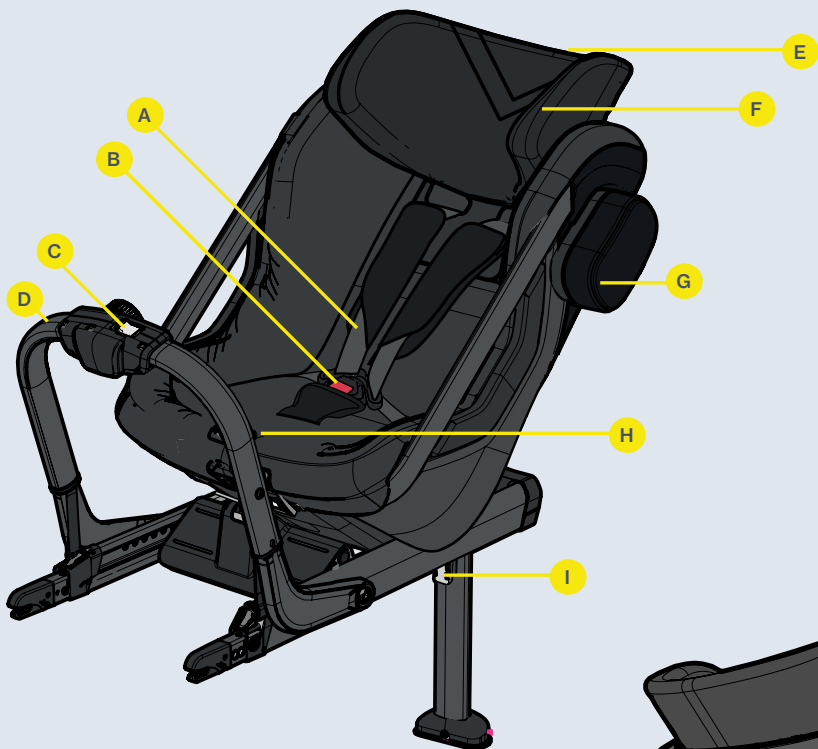

8.1 Tillatte og ikke tillatte sitteposisjoner for Axxid ONE 2 Reha barnesete

Bilbarnestolen Axxid ONE 2 Reha kan kun monteres bakovervendt og med ISOFIX. Den er godkjent for alle i-Size-godkjente seter og kan også passe til ikke-i-Size-godkjente seter.

Se i bilens instruksjonsbok for å finne en egnet plass for barnesetet. Se også biloversikten på www.axkid.com / www.thomashilfen.de.

Passasjersete foran med ISOFIX (deaktivert kollisjonspute)	JA/NEI
Passasjersete foran med ISOFIX (aktivert kollisjonspute)	NEI
Bakre benkesete med ISOFIX	JA
Side- eller bakovervendte bilbarnestoler med ISOFIX	NEI
Bilsete uten ISOFIX NO	NEI



VIKTIG:

Hvis du vil montere Axxid ONE 2 Reha på et bilsete som er utstyrt med frontkollisjonspute, må kollisjonsputen deaktiveres i henhold til bilprodusentens anvisninger. Vær oppmerksom på at noen biler krever et offisielt verksted for dette

* Artikkel 117 i de generelle trafikkreglene i Spania forbyr å reise med barn som **ikke er høyere enn 135 centimeter i forsetene** av kjøretøyet, med noen unntak.



Bruk aldri barnesetet på seter med aktive kollisjonsputer.



8.2 Installere Axxid ONE 2 Reha i kjøretøyet

- 1 Før du monterer Axxid ONE 2 Reha -barnestolen i bilen, må du minimere plassbehovet ved å trykke på knappen for benplassjustering (N) og flytte setet mot veltebøylen (D). Brett ned støttebeinet (R) til du hører et klikk og indikatoren for støttebeinets posisjon vises. (P) er grønn.
- 2 Slipp utløseren for veltebøylen (C) og flytt veltebøylen (D) mot barnesetet. Fortsett å holde tak i veltebøylen (D) med én hånd, ta tak i det bakre håndtaket (O) med den andre hånden og løft Axxid ONE 2 Reha inn i bilen med veltebøylen (D) først. Snu deretter setet til bakovervendt posisjon i bilen.
- 3 Trykk ISOFIX-kontaktene (Y) inn i bilens ISOFIX-forankringer til du hører et klikk og begge ISOFIX-låseindikatorer (V) lyser grønt.
- 4 Slipp veltebøylen (D), som da vil spenne seg mot bilsetet. Så snart den stopper, vrir du veltebøyleknappen (K) med klokken til du hører et klikk. Veltebøylen (D) skal presses fast mot bilsetet. Veltebøyleknappen (K) har en innebygd dreiemomentbegrenser, og klikkelyden indikerer at veltebøylen (D) er korrekt strammet og kan ikke strammes ytterligere.



5 Trykk på knappen for justering av støttebeinet (I) og trekk støttebeinet (R) nedover til det berører bilgulvet. Slipp knappen for justering av støttebeinet (I) og løft barnesetet opp for å trekke støttebeinet (R) lenger ut til du hører et klikk. Støttebeinet (R) skal nå være låst, og stå stødig på bilens gulv. Merk: Barnesetet Axxid ONE 2 Rehab er utstyrt med en lydindikator (S) som piper helt til støttebeinet (R) står fast på bilgulvet, noe som indikerer korrekt montering.

6 Trykk ASIP-puten (G) inn i fordypningene i ASIP-kontakten (J) og trykk den ned til ASIP-puten (G) klikker på plass. En plasthette skal være festet til ASIP-kontakten (J), ta den av og plasser den på ASIP-kontakten (J) på motsatt side av barnesetet før du fester ASIP-puten (G). Pass på at ASIP-puten (G) monteres på den siden som er nærmest bildøren.

8.3 Justering av ryggstøtten på Axxid ONE 2 Reha barnesete

Før du justerer ryggvinkelen for barnet ditt i Axxid ONE 2 Reha, må du forsikre deg om at riktig innlegg er brukt i barnesetet. Axxid ONE 2 Reha er designet for å vokse med barnet og for å ivareta barnets sikkerhet og komfort.

7 Løsne beltet ved å trykke på belteutløserknappen (T) og trekke ut begge skulderstroppene (A) samtidig. Unngå å trekke ut bare én skulderstropp (A), da skulderstroppene (A) ellers kan bli ujevne.

8 Trykk på beltespennen (B), åpne den og plasser skulderstroppene (A) utover over barnesetets sidestøtter.

9 Plasser barnet i barnesetet og plasser skulderstroppene (A) over barnets skuldre. Lukk selelåsen (B) ved først å føre de delene av selelåsen som er festet til skulderstroppene (A) sammen og sette dem inn i selelåsen (B) til du hører et klikk.

10 Juster hodestøtten (E) til markeringen for øyehøyde (F) er i samme høyde som barnets øyne ved å trykke på hodestøttejusteringen (M) og skyve den opp eller ned.

11 Kontroller at skulderstroppene (A) kommer ut av setet akkurat i barnets skulderhøyde eller maksimalt 1 cm høyere. Det kan hende du må justere nakkestøtten (E) igjen, selv om markeringen for øyehøyde (F) da ikke lenger stemmer overens med barnets faktiske øyehøyde. Stram nå skulderstroppene (A) for å stramme stroppene som går over barnets hofter. Hold skulderstroppene (A) strammet mens du nå trekker i beltestrammeren (U) til stroppene er stramme nok. Det skal ikke lenger være mulig å få mer enn én finger mellom skulderstroppene (A) og barnets skuldre.

8.4 Justering av sete

Når du har installert Axkid ONE 2 Reha i bilen, kan du enkelt justere benplassen og ryggstøtten for barnet ditt. Du kan også gjøre disse justeringene når barnet sitter fastspennet i barnesetet.

Thomashilfen anbefaler at du orienterer deg etter posisjonene på siden av barnesetet for å få en hensiktsmessig montering og best mulig sikkerhet for barnet ditt. Det er viktig at du tilpasser setet til barnets vekstprosess ved alltid å justere de tilbaketrente posisjonene til en mer oppreist stilling, da en oppreist stilling gir best mulig beskyttelse for barnets nakke i tilfelle en ulykke. Størrelsesinformasjonen er basert på barnets høyde. Kontroller at begge pilene er i riktig sone

Alder	Størrelse	
Spedbarn 0-3 år	Alle vippeposisjoner Flere benfrie posisjoner	<p>61-105 cm</p>
Barn 3-7 år	Maksimal oppreist stilling Størst mulig benplass	<p>106-125 cm</p>

8.5 Justering av setet / fjerning av Axkid ONE 2 Reha fra kjøretøyet.

- Trykk på knappen for justering av benplass (N) og skyv setet forover eller bakover. Hold Axkid ONE 2 Reha i det bakre håndtaket (O) for å forhindre at barnesetet beveger seg fremover ved et uhell før du trykker på knappen for justering av benplass (N).
- Barnesetets hvileposisjon kan justeres ved å vri på justeringsknappen for hvileposisjon (H).
- Trykk på knappen for justering av støttefoten (I) og skyv støttefoten (R) sammen til korteste posisjon.
- Skyv veltebøyleutløseren (C) til siden og beveg veltebøylen (D) mot barnesetet for å løsne spenningen mot bilsetet.
- Frigjør ISOFIX-kontaktene (Y) ved å trykke på ISOFIX-knappene (X) og trekke dem bakover ut av bilseteveien.
- Fortsett å holde i veltebøylen (D) med den ene hånden, ta tak i det bakre håndtaket (O) med den andre hånden og løft Axkid ONE 2 Reha ut av bilen.
- Brett støttebeinet (R) oppover ved å trekke i utløserstroppen (Q) og deretter brette støttebeinet oppover. (R) foldes opp.

9. Tekniske data

Axxid ONE 2 Reha

Setedybde til skrittstropp	16 cm / 6,3"
Setedybde i forkant	28 cm / 11,0"
Setebredde	21 - 29 cm / 8,3 - 11,4 "
Ryggstøtتهøyde (sete innvendig)	52 - 63 cm / 20,5 - 24,8"
Ryggbredde (sete)	30 cm / 11,8"
Min. rygghøyde	29 - 42 cm / 11,4 - 16,5"
Maks. rygghøyde	50 - 63 cm / 19,7 - 24,8"
Bredde på hodet	16 cm / 6,3"
Skulderhøyde (belteføring)	26 - 37 cm / 10,2 - 14,6"
Skulderbredde	32 cm / 12,6"
Ryggvinkel (maks.)	90 - 145°
Setevipp (grunnmodell)	45° / 65°
Høyde på thorax pelottepute (øvre kant)	28 - 34 cm / 11,0 - 13,4"
Avstand thorax pelottepute (øvre kant)	18 cm / 7,1"
Abduksjonsguide (BxHxD)	7 x 10 x 10 cm / 2,8 x 3,9 x 3,9"
maks. samlede dimensjoner (B x H x D)	44 x 76 x 54 cm / 17,3 x 29,9 x 21,3"
Setets vekt (grunnmodell)	9,9 kg / 21.8 lbs
Brukerhøyde	61 - 125 cm / 24 - 49.2"
maks. brukervekt	23 kg / 50.7 lbs

10. Materialspesifikasjoner

Møbeltrekk materialet som brukes er "flammehemmende", testet i henhold til DIN EN 1021-1 og DIN EN 1021-2. Graden av motstand mot antennelse i materialer og enheter er testet i henhold til standarder og vurdert som ufarlig. Stoffet i 100 % polyester er av høy kvalitet, puster godt og er testet for biokompatibilitet. (DIN EN ISO 10993-5 og 10993-10).

11. Rengjøring, vedlikehold og reparasjon

11.1 Rengjøring, pleie og desinfeksjon i hverdagen

11.1.1 Møbeltapetsering


Trekket til barnesetet kan vaskes på 40 °C på skånsomt program. Ikke legg trekket i tørketrommel, da trekket kan bli skadet og polstringen kan løsne fra trekket.

Du finner instruksjonsvideoer om hvordan du setter på og tar av dekselet på www.thomashilfen.de.

For å fjerne trekket fra barnesetet trekker du sidetrekket (L) av setet og løsner borrelåsen. Åpne glidelåsene på baksiden av barnesetet og ta forsiktig av trekket fra barnesetet. Prøv å huske hvordan trekket er festet til barnesetet, slik at det blir lettere å sette det på. Når du setter på sidetrekket (L) igjen, fører du det under aluminiumsrammen og skyver det på plass. For å ta av hodestøttetrekket åpner du glidelåsen på baksiden av hodestøtten og ar forsiktig av trekket.

Hvis det er nødvendig å bytte ut trekket, må du sørge for at du kjøper et originalt trekk fra Thomashilfen. Hvis du bruker et annet trekk, kan sikkerheten til Axxid ONE Reha bli svekket, noe som kan føre til alvorlige personska-der ved en ulykke.

Axxid ONE 2 Reha

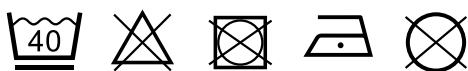

Vi gjør oppmerksom på at selv tekstiler av høy kvalitet kan falme ved langvarig og intensiv eksponering for sollys eller hyppig vask.

11.1.2 Borrelåsfester

For å opprettholde borrelåsfestenes funksjonalitet bør du børste borrelåsstroppene med en børste av og til. Lukk eller dekk alltid til borrelåsene når du vasker.

11.1.3 Plastdeler

Plastdelene på produktet kan rengjøres og desinfiseres med vanlig såpe (nøytral såpe). Ikke bruk aggressive kjemiske rengjøringsmidler som kan skade plasten i setet og dermed svekke sikkerheten til barnesetet. Alle materialene i Axxid ONE 2 Reha er av gjenvunnet plast.

Setet er resirkulerbart og skal resirkuleres i henhold til lokale forskrifter. Ta kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon hvis du ønsker å resirkulere setet.

11.1.4 Lydindikatoren (S)

Lydindikatoren (S) inneholder et utskiftbart CR1632-batteri. Ta ut og resirkuler batteriet i henhold til lokale forskrifter hvis du ikke lenger ønsker å bruke Axxid ONE 2 Reha.

Dette gjør du ved å skru ut de to skruene nederst på støttefoten (R) og fjerne dekselet for å få tilgang til batteriene.

11.1.5 Desinfeksjon

Rengjør møbeltrekk, plast- og metalleder før desinfisering.

Tørk av alle plast- og metalleder på produktet med et fuktig desinfeksjonsmiddel. Bruk kun vannbaserte desinfeksjonsmidler. Følg produsentens bruksanvisning ved desinfisering.

11.2 Vedlikehold og inspeksjon av spesialforhandlere

11.2.1 Forberedelse

Produktet må være ledsaget av en bruksanvisning. Hvis det ikke finnes noen bruksanvisning, kan du be produsenten om å få den. Gjør deg kjent med produktets funksjoner. Hvis du ikke er kjent med produktet, må du lese bruksanvisningen før du starter testen. Rengjør produktet før du starter testen. Følg vedlikeholdsinstruksjonene og de produktspesifikke testinstruksjonene i bruksanvisningen. Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte din autoriserte tekniske rådgiver eller Thomashilfen direkte.

Service og reparasjoner på produktet må kun utføres av spesialisert personell. Brukeren av dette produktet må sørge for at foreskrevne inspeksjoner/vedlikehold utføres regelmessig og i tide. Hvis det oppdages skader, må brukeren aktivt informere oss og umiddelbart få skaden reparert av kvalifisert personell

11.2.2 Vedlikeholdsplan - årlig inspeksjon

	Rekkevidde	Funksjon	Skader	Bytte ut
1	Karosseri av plast	👁	👁	
2	Justeringsmuligheter	👁	👁	
3	Møbeltapetsering		👁	
4	Belter	👁	👁	
5	Plastdeler	👁	👁	
6	Skruer og muttere	👁	👁	
7	Kjennetegn		👁	
Tilbehør				
8	Møbeltapetsering		👁	
9	Belter	👁	👁	
10	Justeringsmuligheter	👁	👁	
11	Plastdeler	👁	👁	
12	Metalldeler	👁	👁	
13	Skruer og muttere	👁	👁	
utført av:			på:	
👁 = Inspeksjon 🔄 = Gjenbruk ✓ = Inspeksjon fullført				

11.3 Reservedeler

Kun originale reservedeler skal brukes til reparasjoner. En liste over reservedeler finner du på www.thomashilfen.de. For å få tak i riktige reservedeler eller for eventuelle tekniske tilbakekallinger, trenger vi alltid serienummeret / UDI-PI og nøyaktig UDI-DI.

Demontering/montering av reservedeler må kun utføres av spesialisert personell! Hvis det er nødvendig å returnere produktet, må du sørge for at det er forsvarlig emballert for transport.

11.4 Lagring / Avfallshåndtering

Oppbevar produktet på et trygt sted når det ikke er i bruk. Ikke plasser tunge gjenstander på produktet under oppbevaring. Beskytt produktet mot værpåvirkninger som regn, sterkt sollys og frost. Hvis produktet er vått, må du tørke av metall- og plastdelene og polstringen før du oppbevarer produktet.

Hvis produktet ikke lenger kan brukes på grunn av sin tilstand eller har nådd slutten av sin levetid, kan det resirkuleres hos det lokale avfallsselskapet. Følg de lokale forskriftene for resirkulering og avfallshåndtering.

12. EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved på eget ansvar at dette produktet, eventuelle varianter og tilbehør er i samsvar med de grunnleggende forskriftene. En aktuell EU-samsvarserklæring kan lastes ned fra www.thomashilfen.de eller bestilles direkte fra oss.

13. Garanti

Thomashilfen gir deg to års lovbestemt garanti på dette produktet. Perioden begynner på tidspunktet for levering av varen. Garantien dekker alle krav som går ut over funksjonen. Dette omfatter ikke skader som skyldes feil bruk (f.eks. overbelastning) eller naturlig slitasje.

14. Bruksvarighet/ Levetid

Produktet har en levetid på opptil 6 år hvis det vedlikeholdes riktig og regelmessig i henhold til produsentens anvisninger. Produktet kan brukes utover denne perioden hvis det er i sikker og teknisk perfekt stand.

Den teoretiske levetiden er ikke en garantert levetid. Den avhenger av bruksintensiteten og må alltid vurderes i hvert enkelt tilfelle av forhandleren.

Bruksperioden avsluttes før den angitte perioden når brukeren har nådd maksimal kroppsvekt eller høyde for sikker bruk av produktet.

Levetiden inkluderer ikke slitasjedeler som polstring, trekk osv.

Produktet har en levetid på 8 år hvis betingelsene som er angitt i levetiden er oppfylt. Levetiden består av brukstid og lagringstid.

15. Gjenbruk

Produktet er ikke egnet for gjenbruk. Bilbarnestolens funksjonelle egnethet kan ikke fastslås med sikkerhet ved et teoretisk brukerskifte. Det kan være ikke-synlige skader på produktet som utelukker videre sikker bruk. Produsenten utelukker derfor kjøp og salg av brukte bilbarnestoler.

16. Detaljist



Hjelpemiddelspesialisten as

Rosenholmveien 22

1252 Oslo, Norway

Phone: +47-40626847

jorgen@hm-spes.no

www.hm-spes.no







Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19
E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.de