



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.



Løfteseil

Introduksjon

Human Care produserer og tilbyr løsninger innen forflytning for mennesker med spesielle behov. Våre produkter streber etter å være en naturlig del av livet for alle brukere.

Human Care ble grunnlagt i 1993, og har siden den gang skapt en historie innen pasientbehandling å være stolt av. 20 års erfaring gjenspeiles i et bredt utvalg av kvalitetsprodukter som tilfredsstiller alle våre kunders behov. Våre hovedproduktområder er: Rullatorer, takløftsystemer, sykehussenger og transportstoler for personer med nedsatt mobilitet.

Vårt hovedkontor ligger i Stockholm, med datterselskap i USA, Canada og Australia. I tillegg samarbeider vi med distributører i mer enn 20 land. Det viktigste for oss er sikkerhet, kvalitet og brukervennlighet. Vi bestreber oss på å sikre og forbedre kvaliteten på alle våre produkter. I hver detalj, i alle aspekt, holder våre produkter det de lover.

Velkommen til Human Care.







Løfteseil

Universalseil	10
Seil for tunge brukere	19
Hygieneseil	20
Reposisjoneringsseil	22
Spesialseil	23
Gåtrening/rehab	24
Oversikt seil	26
Tilbehør	27

Løfteseil

Et bredt spekter av anatomisk utformet seil utviklet med pasientens sikkerhet og komfort i fokus. Vårt produktspekter omfatter mer enn 22 ulike modeller, og tilbys i et godt utvalg av størrelser. Human Care løfteseil dekker alle typer behov.





En behagelig løfteopplevelse

Våre løfteseil er utviklet på det faktum at folk er forskjellige, og at vi alle har våre egne ønsker og behov. For å gjøre alle fornøyde, og at alle våre kunder føler seg så komfortable som mulig ved å bruke våre løfteseil, kan de fleste brukes med 2, 3 eller 4-punkts oppheng.

2-punkts oppheng

Passer i de fleste løftesituasjoner, og gir en god sittestilling. 2-punkts oppheng er tilgjengelig for både flyttbare og faste løftere.



3-punkts oppheng

Gir en utstrakt sittestilling og en jevnere vektfordeling. 3-punkts oppheng er spesielt egnet for pasienter som har en økt risiko for trykksår eller å gli ut av seilet.



4-punkts oppheng

En behagelig sittestilling gjør den egnet for større pasienter eller ved bruk av bære. 4-punkts oppheng er tilgjengelig for både flyttbare og faste løftere.



Det riktige materialet for rett situasjon


Å velge riktig materiale er viktig når du velger et løfteseil, da de ulike materialene har unike egenskaper som passer til ulike løftesituasjoner. Du vil ha materialer som er robuste med lav friksjon slik at seilet er lett å påføre og fjerne. Når du bruker seilet i forbindelse med badekar og dusj, må du ha et materiale som tørker raskt og er enkelt å holde rent.

Hvis du ønsker å la seilet bli værende i rullestolen eller sengen etter løftet, trenger du et pustende materiale og et løfteseil uten forsterkninger, håndtak eller polstringer. Våre seil er tilgjengelig i tre forskjellige materialer, alle med sine egne unike fordeler og funksjoner.



Polyester - Holdbart og lett å vedlikeholde

Et slitesterkt materiale som er lett å rengjøre, og med liten friksjon, noe som gjør påføringen enklere. Polyester bør ikke bli liggende under pasienten i en seng eller stol.

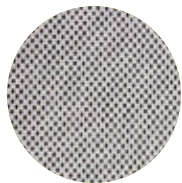

Polyester nett - Fleksibelt og luftig

Et mykt og tynt materiale som puster og tørker raskt. Det har noe elastisitet, og kan bli liggende bak pasienten i en stol eller seng. Polyester nettt er brukt på våre løfteseil for bad og dusj.



Trevira - Mykt, komfortabelt og med høy friksjon

Et unikt, mykt materiale som puster godt. Det kan bli liggende bak /under pasienten i en stol eller i seng. Stoffet har høy friksjon for å hindre glidende bevegelser når du sitter i rullestol eller i seng.

Vaskeanvisning

Human Care løfteseil er ment for individuell bruk. For å unngå infeksjoner eller overføring av sykdom, er det viktig å rengjøre seilene skikkelig. Alle løfteseil bør maskinvaskes og tørkes så snart som mulig etter bruk. Alle våre materialer er vaskbare opp til 60 grader. Detaljerte vaskeanvisninger finnes på produktetiketten.



Føl deg trygg og komfortabel

Vårt utvalg av løfteseil er funksjonelle, komfortable og designet for alle løftebehov og pasienttyper. Seilene er tilgjengelige i størrelser fra Junior Small til XXXL, og er best egnet sammen med vår unike 3-punkts oppheng for optimal komfort. Human Care løfteseil er tilgjengelig i forskjellige materialer for å oppnå sikker og komfortabel løfting i alle situasjoner og miljøer.

Rett størrelse for best bruk

Det er viktig å bruke korrekt størrelse på seilet. Er løfteseilet for lite, kan de gi for lite støtte og bli ubehagelig for brukeren. Med et overdimensjonert seil er risikoen at brukeren kan gli ut av seilet.

Dersom et løfteseil er for lavt eller kort, vil det ikke støtte rygg eller nakke, løftet blir ubehagelig og vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. For å se forskjell på de ulike størrelsene har våre løfteseil en fargekode for rask identifisering. Fargekoden er ved siden av seilets etikett.

Fargekoder :



JuniorS JuniorM S M L XL XXL XXXL



Standardseil


Skulderhøy modell med delte ben

- Ingen forsterkinger, håndtak eller polstring
- Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Oppreist sittestilling



Standardseil er et komfortabel løfteseil uten forsterkninger, håndtak eller polstring. Seilet tilpasser seg pasientens kropp, og gir god støtte for hele ryggen. Dette løfteseilet kan brukes i de fleste situasjoner, passer de fleste pasienter, og er et godt valg for generell, grunnleggende bruk.

Standardseil tilbys i polyester, tynt Polyester nett og Trevira. Trevira og polyester nett har egenskaper som gjør at fuktighet og varme effektivt overføres fra pasienten. Dette gjør at Trevira og polyester nett løfteseil kan bli liggende i rullestol eller seng etter at overføringen er fullført.

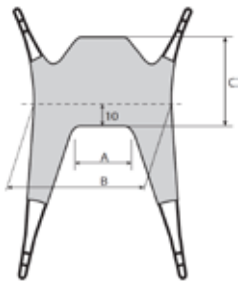

Størrelse:

Materiale:
Trevira Polyester Polyester nett

Art.navn	Art.nr (polyester nett)	Art.nr (Trevira)	Art.nr (Polyester)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Standardseil, JS	25045-JS	25050-JS	25070-JS	Lilla	100	620	490	250 kg
Standardseil, JM	25045-JM	25050-JM	25070-JM	Grå	140	640	530	250 kg
Standardseil, S	25045-S	25050-S	25070-S	Rød	180	770	570	250 kg
Standardseil, M	25045-M	25050-M	25070-M	Gul	230	870	610	250 kg
Standardseil, L	25045-L	25050-L	25070-L	Grønn	280	940	640	250 kg
Standardseil, XL	25045-XL	25050-XL	25070-XL	Blå	320	980	700	250 kg


Silhuett seil

Høy ryggmodell med delte ben

- Ingen forsterkinger, håndtak eller polstring
- Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Gir ekstra støtte till nakke

Silhuett seil er et komfortabel løfteseil uten forsterkninger, håndtak eller polstring. Det tilpasser seg pasientens kropp, og gir god støtte for hele kroppen. Seilet kan brukes i de fleste situasjoner, men er spesielt egnet for forflytning til og fra rullestoler, støpte seter eller skallseter.

Silhuett seil tilbys i et tynt polyester nett og Trevira som gjør at fuktighet og varme effektivt overføres fra pasienten. Silhouette Sling kan bli liggende i rullestol eller seng etter at forflytningen er fullført.

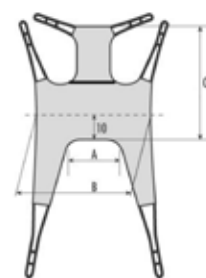

Størrelse: ● ● ● ● ● ●

Materiale:  
Trevira Polyester nett

Art.navn	Silhuett seil (polyester nett)	Silhuett seil (Trevira)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Silhuett seil, JS	25015-JS	25020-JS	Lilla	100	620	630	250 kg
Silhuett seil, JM	25015-JM	25020-JM	Grå	140	640	700	250 kg
Silhuett seil, S	25015-S	25020-S	Rød	180	770	780	250 kg
Silhuett seil, M	25015-M	25020-M	Gul	230	870	870	250 kg
Silhuett seil, L	25015-L	25020-L	Grønn	280	940	960	250 kg
Silhuett seil, XL	25015-XL	25020-XL	Blå	320	980	1050	250 kg


Sitteseil

Skulderhøy modell med delte ben

- Forsterket rygg og ben
- Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Oppreist sittestilling

Sitteseil er en skulderhøy modell med delte ben og forsterket rygg og ben. Seilet er utformet for å gi pasienten ekstra ryggstøtte og er en god løsning for pasienter med lav kroppsstabilitet.

Sitteseil kan brukes i de fleste løftesituasjoner og passer til de fleste pasienter, men er best egnet for pasienter med lav kroppsstabilitet. Den forsterkede ryggen og polyester med lav friksjon gir en rask og enkel anvendelse av løfteseilet.

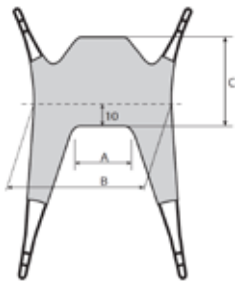

Størrelse: ● ● ● ● ● ●

Materiale:  Polyester

Art.navn	Art.nr (polyester)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Sitteseil, JS	25030-JS	Lilla	90	540	580	250 kg
Sitteseil, JM	25030-JM	Grå	150	600	580	250 kg
Sitteseil, S	25030-S	Rød	300	750	630	250 kg
Sitteseil, M	25030-M	Gul	360	850	630	250 kg
Sitteseil, L	25030-L	Grønn	420	950	630	250 kg
Sitteseil, XL	25030-XL	Blå	470	1020	630	250 kg


Badeseil

Skulderhøy modell med delte ben

- Forsterket rygg og ben
- Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Forsterket rygg gir ekstra støtte

Badeseil er en skulderhøy modell med delte ben og forsterket rygg og ben. Det er utformet for å gi pasienten ekstra støtte i ryggen, noe som gjør badeseilet til en god løsning for pasienter med dårlig kroppsstabilitet.

Badeseil kan brukes i de fleste løftesituasjoner og passer de fleste pasienter, men er best egnet for pasienter med dårlig kroppsstabilitet. Badeseilet er laget i hurtigtørkende polyester nett som gjør det egnet for bruk under bading og dusjing.

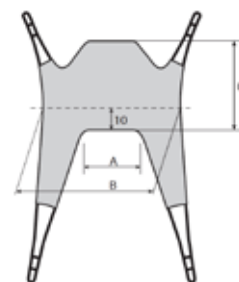

Størrelse:

Materiale: 
Polyester nett

Art.navn	Art.nr (polyester nett)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Badeseil, JS	2535-JS	Lilla	90	540	520	250 kg
Badeseil, JM	25035-JM	Grå	150	600	580	250 kg
Badeseil, S	25035-S	Rød	300	90	63	250 kg
Badeseil, M	25035-M	Gul	360	90	63	250 kg
Badeseil, L	25035-L	Grønn	420	100	63	250 kg
Badeseil, XL	25035-XL	Blå	470	107	63	250 kg


Helkroppsseil

Høy ryggmodell med delte ben

- Ekstra støtte for hodet
- Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Tillbakeleent sittestilling.

Helkroppsseil er et komfortabelt løfteseil uten forstrekninger, håndtak eller polstring i ryggen. Seilet gir god støtte for hele ryggen og ekstra støtte for hodet.

Helkroppsseil kan benyttes til de fleste løftesituasjoner og passer de fleste pasienter. Den forsterkede hodestøtten gjør seilet godt egnet til å løfte pasienter fra f.eks gulv. Helseilet er laget i polyester med lav friksjon som gir en raskt og enkel anvendelse av løfteseilet.

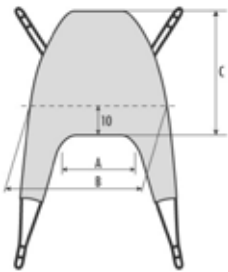

Størrelse: ○ ● ● ● ● ● ●

Materiale:  Polyester

Art. navn	Art.nr [polyester]	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Helkroppsseil, S	25010-S	Rød	280	840	880	250 kg
Helkroppsseil, M	25010-M	Gul	330	910	940	250 kg
Helkroppsseil, L	25010-L	Grønn	380	970	990	250 kg
Helkroppsseil, XL	25010-XL	Blå	440	1040	1050	250 kg
Helkroppsseil, XXL	25010-XL	Hvit	460	1120	1070	250 kg
Helkroppsseil, XXXL	25010-XXL	Pink	510	1130	1050	250 kg


Helkroppsseil Nett

Høy ryggmodell med delte ben

- Ingen forsterkninger, håndtak eller polstring
- Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Tillbakelelt sittestilling.

Helkroppsseil Nett er et komfortabel løfteseil uten forsterkninger, håndtak eller polstring i ryggen. Seilet gir god støtte for hele kroppen, kan brukes i de fleste løftsituasjoner, og passer de fleste pasienter.

Helkroppsseil Nett brukes i vaske- og badesituasjoner. Polyester nett løfteseil kan bli liggende i rullestol eller seng når forflytningen er fullført.

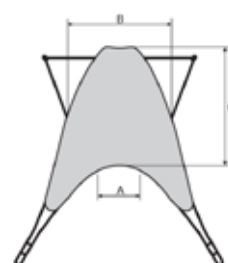

Størrelse: ● ● ● ●

Materiale: 
Polyester nett

Art.navn	Art.nr [polyester nett]	Fargekode	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Vektkapasitet
Helkroppsseil nett, S	25005-S	Rød	280	660	880	250 kg
Helkroppsseil nett, M	25005-M	Gul	310	790	940	250 kg
Helkroppsseil nett, L	25005-L	Grønn	350	920	990	250 kg
Helkroppsseil nett, XL	2500-XL	Blå	380	1060	1045	250 kg


Komfortseil Lav

Skulderhøy modell uten delte ben

- Ingen forsterkninger, håndtak eller polstring
- Egnert for pasienter med smerter
- Tillpasser seg lett pasientens kropp

Komfortseil Lav er et mykt seil uten forsterkninger, håndtak eller polstring som lett tilpasser seg pasientens kropp. Løfteseilet er utformet for å gi pasienten god komfort og en følelse av trygghet.

Komfortseil Lav er et sitteseil uten delte ben, som gir en jevn vektfordeling for å redusere trykk. Komfortseilet tilbys i Trevira materiale, og kan bli liggende i rullestol eller stol etter at forflytningen er fullført. Seilet påføres mens pasienten ligger .

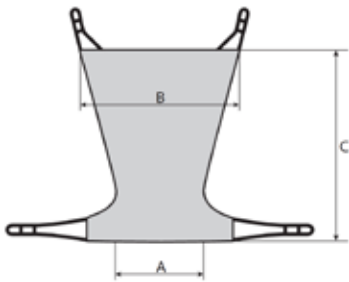

Størrelse: ● ● ● ● ●

Materiale: 
Trevira

Art. navn	Art.nr (Trevira)]	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Komfortseil Lav, JM	25060-JM	Grå	360	750	900	250 kg
Komfortseil Lav, S	25060-S	Rød	360	750	1000	250 kg
Komfortseil Lav, M	25060-M	Gul	480	850	1100	250 kg
Komfortseil Lav, L	25060-L	Grønn	560	950	1150	250 kg
Komfortseil Lav, XL	25060-XL	Blå	640	1050	1200	250 kg

Komfortseil Høy


Høy rygg med delte ben

- Ekstra nakkestøtte
- Egnet for pasienter med smerter
- Tilpasser seg pasientens kropp



Komfortseil Høy er et mykt seil uten forsterkninger, håndtak eller polstring og tilpasser seg pasientens kropp. Det er utformet for å gi pasienten komfort og en følelse av trygghet. Komfort seil er et "sitteseil" uten delte ben, som distribuerer vekt jevnt for å redusere trykk.


Komfortseil Høy tilbys i Trevira stoff, og kan etterlates i stol eller rullestol etter at overføringen er fullført. Seilet er egnet for pasienter med behov for ekstra hodestøtte. Seilet påføres mens pasienten ligger ned.

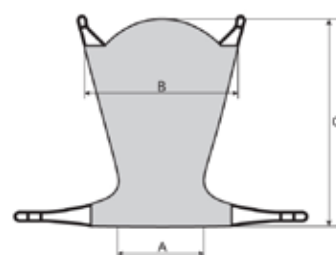

Størrelse: ● ● ● ●

Materiale: 
Trevira

Art.navn	Art.nr (Trevira)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Komfortseil Høy, S	25065-S	Rød	360	750	1210	250 kg
Komfortseil Høy, M	25065-M	Gul	480	850	1330	250 kg
Komfortseil Høy, L	25065-L	Grønn	560	950	1390	250 kg
Komfortseil Høy, XL	25065-XL	Blå	640	1050	1450	250 kg

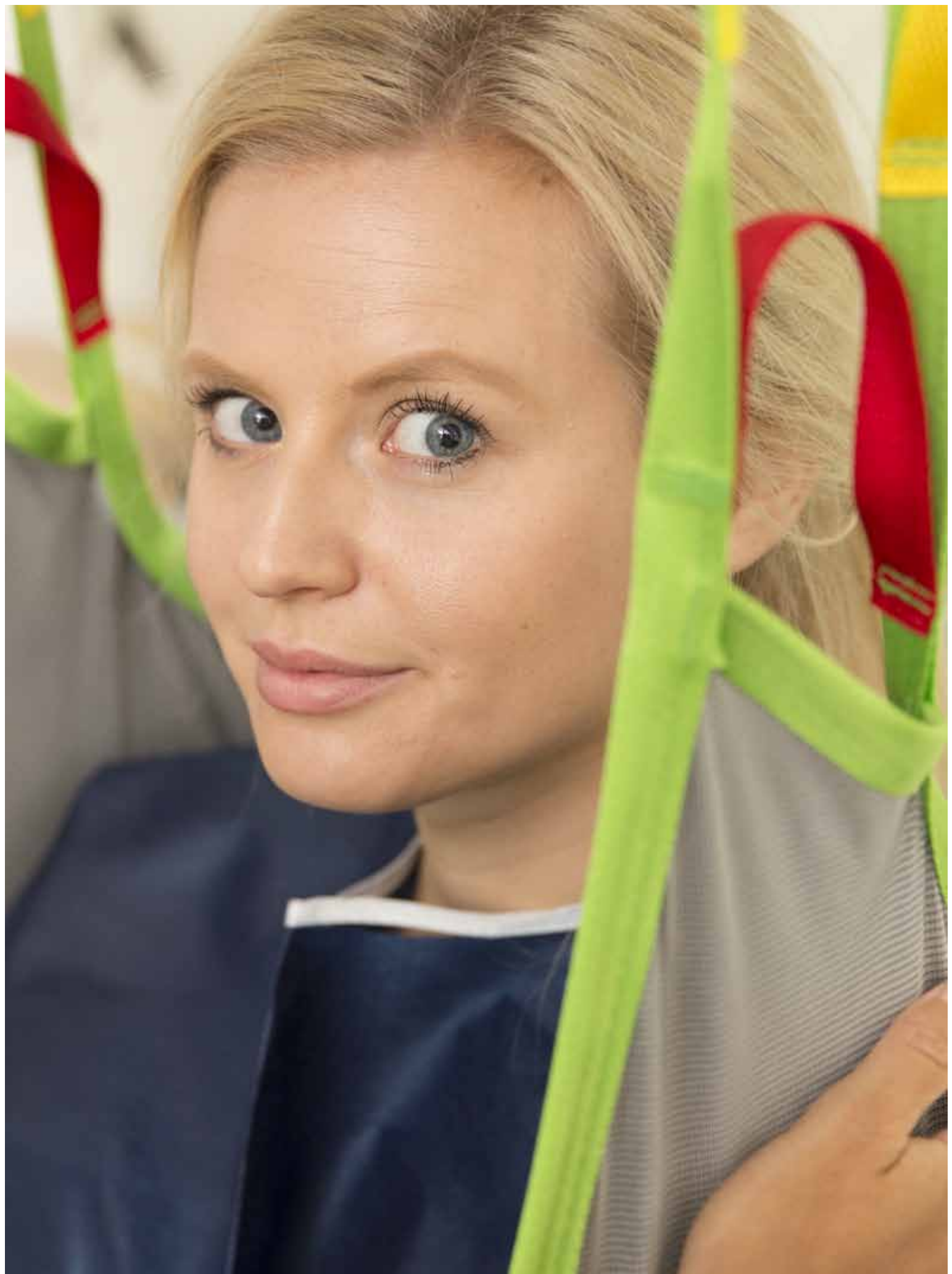


Pluslineseil

Modell med høy rygg og delte ben

- Forsterket hode støtte
- Utviklet for tynge pasienter
- Forsterket trykkfordelende ben

Human Care løfteseil i Pluslineseilen er designet for å løfte tynge pasienter. Seilene har høy brukervekt og generøse størrelser. Highback Pluslineseilet er en modell med høy rygg som gir god støtte for hele kroppen. Løfteseilet har trykkfordelende forsterkede ben og forsterket hode støtte.

Pluslineseil gir en tilbakeleent sittestilling som fører til en mer balansert vektfordeling. Løftestropper ved lårene kan brukes på 2, 3 eller 4-punkts oppheng. 4-punkts oppheng er den beste løsningen for dette seilet, ettersom det vil gi tynge pasienter en mer utstrakt sittestilling.

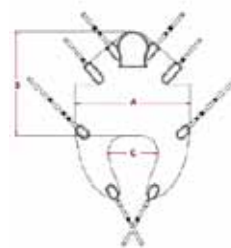

Størrelse: ● ● ● ●

Materiale: 
Polyester og polyester nett

Art.navn	Art.nr	Fargekode	Materiale	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Pluslineseil, S	25120-S	Rød	Stoff: Polyester nett, Polyester, stropper: Polyester	775	838	304	318 kg
Pluslineseil, M	25120-M	Gul	Stoff: Polyester nett, Polyester, stropper: Polyester	972	838	425	318 kg
Pluslineseil, L	25120-L	Grønn	Stoff: Polyester nett, Polyester, stropper: Polyester	1143	1029	533	318 kg
Pluslineseil, XL	25120-XL	Blå	Stoff: Polyester nett, Polyester, stropper: Polyester	1334	1143	679	318 kg


Hygieneseil

Lav modell med delte ben

- Forsterket rygg
- Egnet for pasienter med god kropp- og nakkestabilitet
- Polstret under armene for ekstra komfort

Hygieneseil er en lav modell med delte ben. Seilet har forsterket rygg for god støtte, og polstring under armene for ekstra komfort. Den brede delingen av ben gjør dette seilet anvendelig for rask og enkel av- og påkledning ved toalettbesøk eller bading.

Hygieneseil oppreiste sittestilling gjør forflytning til og fra toaletter enklere, og er godt egnet for pasienter med god kropp- og nakkestabilitet. Midjebelte anbefales for pasienter med lav kroppsstabilitet. Toileting sling er tilgjengelig i polyester og polyester nett.

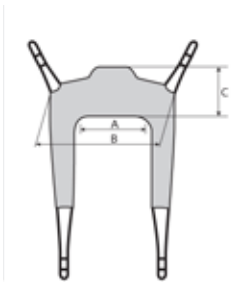

Størrelse: ● ● ● ● ● ●

Materiale:

Polyester

Polyester nett

Art. navn	Art.nr (Polyester)	Art.nr (Polyester nett)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Hygieneseil, JS	25080-JS	-	Lilla	280	620	220	250 kg
Hygieneseil, JM	25080-JM	25085-JM	Grå	300	690	260	250 kg
Hygieneseil, S	25080-S	25085-S	Rød	350	750	300	250 kg
Hygieneseil, M	25080-M	25085-M	Gul	500	870	330	250 kg
Hygieneseil, L	25080-L	25085-L	Grønn	550	940	330	250 kg
Hygieneseil, XL	25080-XL	25085-XL	Blå	610	1000	370	250 kg


Hygieneseil Høy

Høy modell med delte ben

- Forsterket rygg
- Egnet for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Juserbar nakkestøtte som gir ekstra god støtte

Hygieneseil Høy er en høy modell med delte ben. Seilet har forsterket rygg for god støtte, og polstring under armene for ekstra komfort. Seilet har en polstret justerbar nakkestøtte for ekstra stabilitet. Den brede delingen av bena gjør at påføring av seilet går raskt og enkelt, og gjør av- og påkledning ved toalettbesøk eller bading enkelt.

Seilets oppreiste sittestilling gjør overføring til og fra toaletter enklere, og er egnet for pasienter med god kropp- og nakkestabilitet. Midjebelte anbefales for pasienter med lav kroppsstabilitet. Toileting sling er tilgjengelig i hurtigtørkende nettmateriale.

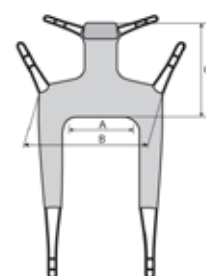

Størrelse:

Materiale: 
Polyester nett

Art.navn	Art.nr (Polyester nett)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Hygieneseil Høy, JM	25090-JM	Grå	260	750	700	250 kg
Hygieneseil Høy, S	25090-S	Rød	350	750/	730	250 kg
Hygieneseil Høy, M	25090-M	Gul	500	870	800	250 kg
Hygieneseil Høy, L	25090-L	Grønn	550	940	880	250 kg
Hygieneseil Høy, XL	25090-XL	Blå	590	1050	990	250 kg

Reposisjoneringsseil

Laken for å snu og reposisjonere

- Både glidelaken og løft/overføringslaken
- Kan brukes som laken i sengen
- Forenkler forflytning og reposisjonering

Reposisjoneringsseil er et allsidig produkt utformet for å gi hel- eller delvis støtte til kroppen ved reposisjonering eller forflytning.

Reposisjoneringsseil tilbyr et bredt spekter av løfte- og posisjoneringsmuligheter: sideposisjonering, vending, justering av sittestilling, trykkfordeling av ben og heler og løft fra gulv. Seilet består av et reposisjoneringslaken og et glidelaken. Butterfly reposisjoneringslaken kan ligge under pasienten i sengen.



Størrelse: En størrelse

Materiale: 
Bomull og polyester

Art. nr.	Materiale	Høyde	Lengde	Bredde	Vektkapasitet
50791	35% bomull, 65% polyester	2200 mm	2200 mm	2400 mm	220 kg


Amputasjonsseil

Lav modell med delte ben

- Forsterket rygg
- Passer for pasienter med amputerte ben
- Lett tilbakelent sittestilling

Amputasjonsseil er designet for en trygg og sikker overføring av pasienter med to- og/eller ensidig benamputasjon. Seilet er også egnet for pasienter med økt tendens til å gli ut av andre typer seil, eller pasienter med hofteproblemer. Bendelene er foldet over hverandre under lårene for å skape en smal åpning, eller, hvis det er bedre, kan bendelene påføres mellom bena.

Amputasjonsseil kan brukes sammen med Human Care sitt midjebelte. Løfteseilet er produsert i lavfriksjons polyester som gir en rask og enkel påføring.

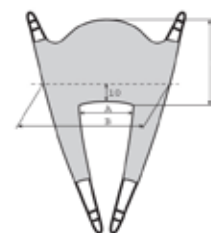

Størrelse: ● ● ● ● ●

Materiale: 
Polyester

Art.navn	Art.nr (Polyester)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Amputasjonseil, JM	25040-JM	Grå	200	670	590	250 kg
Amputasjonseil, S	25040-S	Rød	260	750	590	250 kg
Amputasjonseil, M	25040-M	Gul	340	850	590	250 kg
Amputasjonseil, L	25040-L	Grønn	440	950	590	250 kg
Amputasjonseil, XL	25040-XL	Blå	500	1050	590	250 kg

Multiseil

Seil for gåtrening / rehab

- Et perfekt seil for gåtrening og rehab
- Egnet for pasienter med noe grad av kroppsstabilitet
- Kan brukes ved av-og påkledning



Mutiseil er et allsidig produkt som kan brukes i mange situasjoner. Sammen med et bredt spekter av tilbehør gir multiseilet støtte ved stå- gå- og balansetrening, toalettbesøk eller av- og påkledning.

Mutiseil passer for pasienter med noe kroppsstabilitet. For ekstra støtte kan seilet brukes sammen med hoftebelte.



Størrelse: ● ● ● ●

Materiale:  Polyester

Art. navn	Art.nr (Polyester)	Fargekode	Vektkapasitet
Multiseil, S	25105-S	Rød	150kg
Multiseil, M	25105-M	Gul	150kg
Multiseil, L	25105-L	Grønn	150kg
Multiseil, XL	25105-XL	Blå	150kg

Aktivitetsseil

Gåtrening / rehabseil

- Støtte for gå, stå og balansetrening
- Passer for barn
- Ekstra støtte til nakke



Aktivitetsseil gjør det mulig for barn å stå oppreist og å bevege seg, balansere og gå, avhengig av deres individuelle evner. Seilet gir støtte og trygghet som gir barnet muligheten til fritt å bevege seg.

Aktivitetsseil er laget i polyester nett, og har nakkestøtte og elastiske stropper på begge sider for maksimal fleksibilitet. Seilet påføres mens barnet ligger.

Art.navn	Art.nr	Vektkapasitet
Aktivitetsseil, JS	25100-JS	100 kg
Aktivitetsseil, JM	25100-JM	100 kg
Aktivitetsseil, JL	25100-JL	100 kg

Skulderstøttene er inkludert.

Ryggbelte

Brukes ved oppreisning

- Gir et ergonomisk bevegelsesmønster
- Brukervekt opp til 250 kg
- Løftestropper i ulike lengder for å passe de fleste pasienter



Ryggbelte brukes sammen med en oppreisningsløfter for å trygt kunne heve eller senke pasienten fra toalett, seng eller stol. Seilet støtter den sentrale delen av ryggen og har myk polstring for optimal komfort.

Selen er anbefalt for pasienter med dårlig stabilitet og som har vansker med å stå oppreist. Seilet er produsert i polyester og er egnet for brukere opp til 250 kg.

Art.navn	Art.nr	Vektkapasitet
Ryggbelteseil, S	25130-S	250 kg.
Ryggbelteseil, M	25130-M	250 kg.
Ryggbelteseil, L	25130-L	250 kg.
Ryggbelteseil, XL	25130-XL	250 kg.

Oversikt seil

	Standardseil	Silhuett seil	Sitteseil	Badeseil	Helkroppsseil	Helkroppsseil Nett	Komfortseil Lav	Komfortseil Høy	Pluslineiseil	Hygieneseil	Hygieneseil Høy	Reposisjoningsseil	Amputasjonseil	Aktivitetseil	Mutiseil
Størrelse															
Junior S	x	x	x	x						x				x	
Junior M	x	x	x	x			x			x	x		x	x	
Junior L														x	
S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x
M	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x
L	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x
XL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x
XXL					x										
XXXL					x										
Bariatrisk									x						
Materiale															
Polyester	x		x		x				x	x		x	x		x
Polyester nett	x	x		x		x			x	x	x			x	
Trevira	x	x					x	x							
Type seil															
Med hodestøtte		x			x	x		x	x		x				
Delte ben	x	x	x	x	x	x			x	x	x		x		
Forsterkede ben			x		x				x	x	x		x		
Forsterket rygg			x	x					x	x			x		x
Forsterket hodestøtte					x				x						
Kan brukes med midjebelte			x							x	x		x		
Oppheng															
2-punkt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3-punkt	x	x	x	x	x	x			x	x	x		x		x
4-punkt	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x			
Løftesituasjoner															
Fra sittende posisjon	x	x	x	x	x	x	x ¹	x ¹	x	x	x		x		
Fra seng	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Fra gulv	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x		
Gåtrening														x	x
Reposisjonering												x			
Hygiene				x						x	x				

1 Ikke mulig å påføre sittende

Tilbehør seil

Nakkepute til seil

Pute for ekstra støtte og komfort, brukes som et supplement til seil med lav rygg og multiseil. Art. nr: 25150



Midjebelte

Brukes for ekstra støtte ved forflytning. Elastisk, festes med borrelås. Art.

Nr: 25145-40B (40cm barn), 25145-50B (50cm barn), 25145-60B (60 cm barn), 25145-60 (60cm), 25145-70 (70cm), 25145-80 (80cm), 25145-90 (90cm), 25145-100 (100cm), 25145-110 (110cm), 25145-120 (120cm), 25145-130 (130cm), 25145-140 (140cm)




Midjebelte med spenne

Brukes for ekstra støtte ved forflytning. Elastisk, festes med spenne. (spesifiser lengde ved bestilling) 25146-70 (70cm), 25146-80 (80cm), 25146-90 (90cm), 25146-100 (100cm), 25146-110 (110cm), 25146-120 (120cm)



Forlengerstropp Løkker

som forlenger seilets løftestropper ved endring av sittestilling. Kan også brukes for å holde benene samlet. Art. Nr: 21180-10 (10cm), 21180-15 (15cm), 21180-20 (20cm), 21180-25 (25cm), 21180-35 (35cm)

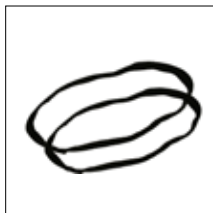

Hoftebelte

Brukes som et supplement til multiseil. Hjelper pasienten når denne skal reise seg opp, og gir et jevnere trykk og trykkfordeling på hoftene. Art. Nr: 25107-L(L), 25107-M(M), 25107-S(S)



Benmuffe

Myk benmuffe utført i syntetisk saueskinn for brukere med sensitiv hud eller for brukere med smerter. Art. Nr: 21146-S (par-S), 21146-M (par M), 21146-L (par L)



Forsterkede benstøtter til seil

Gir ekstra støtte til ben for bedre komfort, og et mer utjevnet trykk. Art. nr: 25102



Båre

Båren er lett, bærbar og enkel å bruke. Maks vekt: 200 kg. Mål (L x B x H): 2040 mm x 740 mm x 40 mm. Produktvekt: 12 kg. Laken til bære selges separat.

Art. Nr. 50730



Vekt

Medisinsk vekt godkjent for å veie pasienter opp til 320 kg. Rask og enkel å bruke, og i overensstemmelse med gjeldende ISO og EN standarder. Fungerer sammen med alle Human Care løftere. Art. nr: 50348



Utdanning og opplæring

I mer enn 20 år har omsorgspersoner og teknikere gitt oss tillit til å levere kvalitetssprodukter sammen med støtte og service når det måtte være behov. Human Care tilstreber god kundetilfredshet ved support, promotering og salg av sine produkter.

Vi kjenner betydningen av å bruke våre løsninger på en best mulig måte. Derfor tilbyr vi workshops og opplæring på, og om, våre produkter. Våre ansatte er spesialister på produktene og dets daglige bruk.

Salgs- og produkttrening

Våre produktkurs gir en god innføring og beherskelse av produktfunksjoner og kliniske fordeler, slik at du kan dra mest mulig nytte av produktets muligheter. Treningen vil gi deg viktig grunnleggende kunnskap om våre produkter og salgsargumenter

Produkt, drift og brukerteknikk

Vårt kurs om produkt, drift og brukerteknikk fokuserer på kliniske brukere, og gir en utmerket grunnstamme å bygge kompetanse og erfaringer på. Dette hjelper helsepersonell å opprettholde høy ytelse av våre produkter i deres hverdag.

Service- og vedlikeholdstrening

Vi tilbyr et komplett spekter av opplæringsprogrammer innen service for skinnesystemer og produkter. Disse programmene gir teknisk personell en god forståelse for produktfunksjoner, som fører til vellykket vedlikehold og service i nært samarbeid med Human Care globale serviceorganisasjon.

Installasjonsopplæring

Få bedre kunnskap til muligheter for installasjon, og gi bedre tilbud. Ved å strukturere vår opplæring på en profesjonell måte, tilbyr vi en hensiktsmessig opplæring for å møte brukerbehovene og å lære opp de ansatte til å gi den servicen du ønsker. Ta kontakt med ditt lokale Human Care-kontor for mer informasjon.





Support og service

Våre produkter er til å stole på for våre kunder. Denne tilliten er grunnlaget for vårt løfte til våre kunder. Vi tilbyr tilpasset support for alle våre produkter gjennom vår globale organisasjon og våre partnere. Vi tilfredsstiller våre kunders behov.

Telefonsupport

Vårt team på Human Care er tilgjengelig på telefon for å sikre at dine spørsmål blir besvart og dine problemer blir løst. Vi kan også hjelpe mens du er på stedet og foretar en installasjon. Nummer til telefonsupport er gitt til alle våre forhandlere.

Teknisk support

Ingeniører og eksperter er tilgjengelige for å svare på vanskelige spørsmål og hjelpe deg med å forberede tilbud og anbud på kortest mulig tid.

Kundeservice

Våre representanter på kundeservice kan svare på dine spørsmål om bestillinger, forsendelse, sporing og levering.

Reparasjoner og service

Våre teknikere er tilgjengelige for å reparere alle heismotorer for en raskere responstid og retur.

Distributor:



Nordisk Helse Design as

Nordisk Helse Design as

Gigstads vei 22, 3511 Hønefoss

Telefon: +47 99 31 61 00

E-post: post@nhd.as

Hjemmeside: www.nhd.as



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.

AUSTRALIA

Unit 9, 271 Wells Road
Chelsea Heights, Victoria 3196

Phone:- +61 3 8773 1111

Fax:- +61 3 9773 4008

Email: info.au@humancaregroup.com

CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1

Phone:- 613.723.6734

Fax:- 613.723.1058

Email: info.ca@humancaregroup.com

SWEDEN

Årstaängsvägen 21C
117 43 Stockholm

Phone:- +46 8 665 35 00

Fax:- +46 8 665 35 10

Email: info.se@humancaregroup.com

UNITED STATES

4210 S. Industrial Drive, Suite 160
Austin, TX 78744

Phone:- 512.476.7199

Fax:- 512.476.7190

Email: info.us@humancaregroup.com