

Amajo



Bruksanvisning

Innholdsfortegnelse:

1 Sikkerhet.....	3
1.1 Viktig informasjon.....	3
1.2 Viktige symboler	3
2 Paletto	4
2.1 Innhold.....	4
2.2 Fremside	4
2.3 Bakside.....	4
3 Bruksanvisning.....	5
3.1 Start	5
3.2 Avspilling.....	5
3.2.1 Avspillingsknapp.....	5
3.3 Innspilling.....	5
4 Lydgrupper	7
5 Språk.....	12
7 Kontakt:	12





1 Sikkerhet

1.1 Viktig informasjon

OBS!

- Ha **ALLTID** god oversikt over små barn og personer på tidlig utviklingsnivå.
- Kvelningsrisiko foreligger om noen får strømledningen rundt halsen eller får løse deler i munnen.
- Bruk ikke Paletto nærme øret! Feilaktig bruk kan forårsake hørselskade. Infrarødt lys kan gi øyeskader. Se till at bruker ikke ligger med hodet hvilende mot Paletto og ser rett inn i IR-øyet samtidig som kontaktplatene aktiveres. Extra stor forsiktighet gjelder barn og personer med mangel på blinkrefleks eller utvidede pupiller.
- Bruk KUN originaldeler.
- Skadet strømforsyning må ikke brukes.
- Strømforsyningen skal alltid tilkobles av en voksen.
- Fukt må på ingen måte komme inn i produktet, mikrofonen eller i strømforsyningen.
- Paletto er kun for innendørs bruk.
- Paletto må ikke mistes i gulvet eller utsettes for støt eller harde slag.
- Dekselet må IKKE åpnes eller fjernes.

1.2 Viktige symboler


	Advarsel! Ikke elmpelig for barn under 3 år, inneholder små deler. Kvelningsrisiko
	Sorteres som elektronisk avfall
	Må ikke komme i kontakt med vann, fukt eller annen væske.
	Produktet er utviklet og testet i samsvar med EU-standarder.

2 Paletto

2.1 Innhold

- 1 st Paletto enhet
- 1 st strømadapter 5V DC
- 4 st USB minner med forhåndsinnspilte lyder
- 1 st mikrofon
- 8 st magneter

2.2 Framside

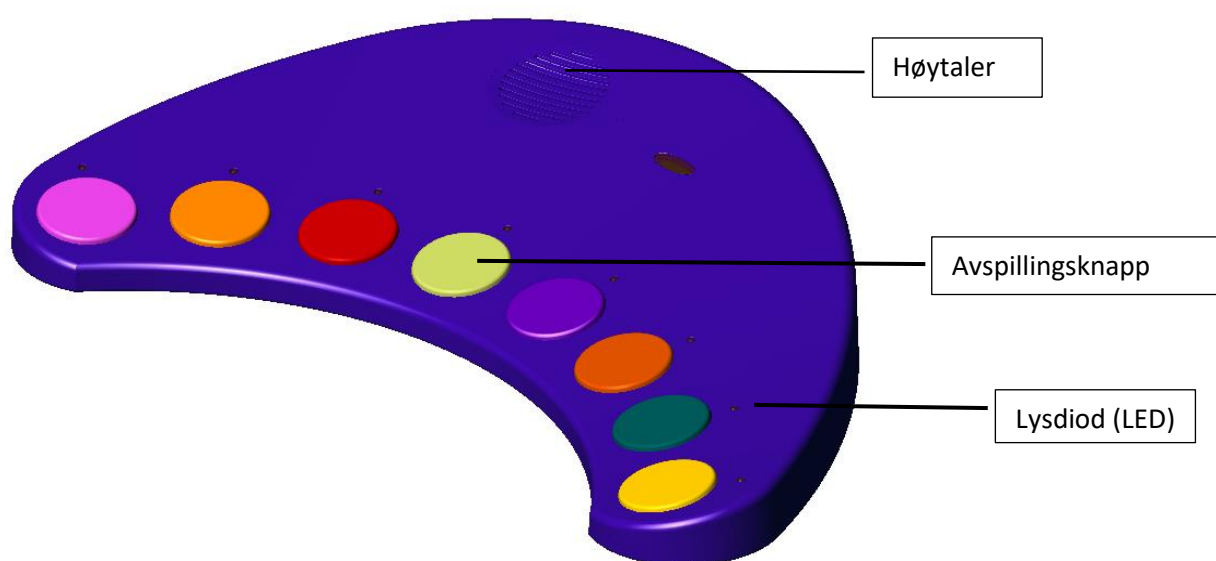

2.3 Bakside



Namn:	Funktion:
Volume ▲	Høyere volum
Volume ▼	Lavere volum
Mode ▲	Funksjonsknapp opp for valg av lydgruppe
Mode ▼	Funksjonsknapp ned for valg av lydgruppe
Rec	Innspillingsmodus
Scan	
Mic	Inngang for mikrofon,telefonplugg 3,5 mm mono
Scan in	
USB	USB - port
IR in	
IR out	
5V DC	Kontakt for tilkobling av strømadapter.

3 Hvordan bruke Paletto

Alle knappetrykk som utføres informeres av en talemelding

3.1 Start

1. Velg det USB-minnet med den lydgruppe du vil bruke. Sett inn USB-minnet i Paletto. Tilkoble DC Power Connection (den lille kontakten på strømadapter) til uttaket 5V DC på baksidan av Paletto.
2. Koble adaptern till et vegguttak
3. Når Paletto er klar for bruk, blinker samtlige LED 2 ganger

3.2 Avspilling

3.2.1 Avspillingsknapp

1. Trykk på en av avspillingsknappene for å starte lydavspilling. Rød LED (Lysdiod) indikerer att panelet har startet.
2. Velg en av lydgruppene med respektive 8 forhåndsinnspilte luder.. En stemme informerer om valgt gruppe.
3. Velg **Volume ▲/Volume ▼** om du vill øke eller senke lyden. Tenk på å ikke ha høyt volum nær øret.

3.3 Innspilling

1. Koble mikrofonen til Paletto.
2. Klikk deg gjennom lydgruppene 1-8, velg gruppe 9–16 ved å bruke pilknappene. En indikasjon av hvilken gruppe du valgt høres.
3. Trykk en gang på **Rec** knappen som finnes på baksiden. Alle LED kanppene skal blinke når det er klart for innspilling.
4. Trykk på en avspillingsknapp yden skal tilhøre. Aktivering av innspillingsfunksjon.

5. Snakk/spill inn lyden som du vil lagre.
LED lyser hele tiden når innspillingen pågår.
6. Stopp innspillingen ved å trykke på avspillingsknappen/ ellers stopper det automatisk etter 20 sekunder.

TENK PÅ;

Om du tidligere har spilt inn lyd på en avspillingsknapp så spilles denne lyden over når du gjør en ny innspilling. Forhåndsinnspilte lyder kan ikke spilles over eller slettes.

4. Lydgrupper

4.1 Tilhørende lydgrupper

Paletto leveres med 4 USB-minner som inneholder ulike lydgrupper.

- Standard
- Menneske lyder (human)
- Dyr og natur (nature)
- Hjemmets lyder (home)

Det USB-minnet du velger å sette i Paletto er den lydgruppen som kommer til å spilles opp.

4.2 Bytte lydgruppe

Første gangen du bruker Paletto, gjør du slik:

1. Sett inn den ønskede USB minnepinnen i Paletto
2. Sett i strømadapteren i Paletto og så videre i vegguttaket.
3. Paletto starter etter noen sekunder å blinke 2 ganger i alle lysiodider.
4. Når lysiodene slutter å blinke er Paletto klar for å brukes. (USB-minnet kan nå tas ut)

Om du vil bytte lydgruppe tar du ut strømadapteren av veggen, setter i i USB-minnet med den lydgruppe du vil bruke og gjentar prosessen nevnt ovenfor.

Standard

Lydgruppe 1: Menneskelyder	Lydgruppe 2: Hygiene	Lydgruppe 3: Lyder i huset	Lydgruppe 4: Dyrellyder
Fryse	Bade i badekar	Person går på hardt gulv	Flue
Barnepludring	Dusje	Dørklokke	Gris
Mann som ler	Snyte seg	Dør som åpnes og lukkes	Hund
Applaus	Gurgle og spytt	Tenne fyrstikk	Hest
Kvinne som gråter	Børste tennene	Drikke som helles opp	Høne og hane
Plystre	Dra ned i do	Telefon som ringer	Ku
Glade barn	Vaske hendene	Gjøkur	Sau

Komikapp[®]

Version 2.0, 2023-4-27

Rap	Skulle opp vann	Glass som knuses	Gjøk
-----	-----------------	------------------	------

Lydgruppe 5: Kjøretøy	Lydgruppe 6: Bylyder	Lydgruppe 7: Hvilket yrke	Lydgruppe 8: Blanda lyder
Buss	Bilkræsje	Urmaker	Klökkespill
Skip	Kirkeklokker	Kasserer	Spilledåse
Ringeklokke på sykkel	Trafikus	Lastebilsjåfør	Prat
Bil	Politibil	Militær	Eksotiske lyder
Helikopter	Gå på grus	Tennisspiller	Gammaldags biltute
Motorsykel	Restaurantmiljø	Snekker	Fyrverkeri
Fly	Brev legges i postkasse	Lege	Glad musikk
Traktor	Kamp på sportsarena	Kokk	Visling

Ljud 9–16
Egen inspelning

Messeskelyder

Gruppe 1 Kroppens lyder 1	Gruppe 2 Kroppens lyder 2	Gruppe 3 Følelser
1 Puste	1 Blåse ballong	1 Sultent barn
2 Fis	2 Plystre melodi	2 Sulten, romlende mage
3 Rap	3 Gurgle	3 Fryse, kjenne kulde
4 Hoste	4 Hicka	4 Trøtt, gjesping
5 Gjespe	5 Synge/tralle	5 Kvinne skriker, redsel, smerte
6 Hikke	6 Klø seg	6 Kvinneler, glede
7 Hjerteslag	7 Snyte seg	7 Spytt
8 Barnepludring	8 Tromme med fingre	8 Slossing, sinne
Gruppe 4 Hygiene	Gruppe 5 -(eng) Ulike stemmer	Gruppe 6 Fotsteg -ulike underlag
1 Tannbørsting	1 Snakke fort- hurtigspoling	1 Hæler mot hardt underlag
2 Gurgle-spytte	2 Rart prat	2 Gange på grus med løv
3 Dusj	3 Politiradio	3 Jogging på grus
4 Snyte seg	4 Telefonsentral	4 Jogging på skogssti

5 Tisse	5 Automatisk telefonsvarer	5 Løping
6 Bæsj	6 Automastik beskjed	6 Marsjere
7 Toalettspyling	7 Mann som skriker	7 Springe på grus
8 Vaske hendene-tørke seg	8 Forsamling	8 Skritt i snø
Gruppe 7 Spise og drikke	Gruppe 8 Lekende barn	
1 Aktivitet ved middagsbordet	1 Spedbarnspludring	
2 Drikke av boks	2 Barn som leker	
3 Tygge gulrot	3 Hoppe paradiset	
4 Helle opp væske	4 Barnelatter	
5 Røre i kopp, drikke og slurpe	5 Barnelek i bymiljø	
6 Drikke av boks i store slurker	6 Barneskrik	
7 Spise is	7 Barnelek, noe knuses	
8 Tygge chips eller kjeks	8 Barnlek -bryting	

Dyr og natur

Gruppe 1 Husdyr	Gruppe 2 Bondegården	Gruppe 3 Naturlyder
1 Hane somgaler	1 Kuer rauter	1 Vann-rennende bekk
2 Flue surrer	2 Spa grus	2 Småsteiner faller
3 Hund bjeffer	3 Hest traver og pruster	3 Storlom
4 Sau bræker	4 Griser grynter	4 Torden
5 Hest knegger	5 Motorgressklipper	5 Fuglekvitte
6 Hunder som gjør	6 Hønsegården	6 Vind
7 Griser grynter	7 Skurtresker	7 Regn
Katt mjauer	8 Traktor starter	8 Havet
Gruppe 4 Fuglesang	Gruppe 5 Lyder fra skogen	Gruppe 6 Hav og sjø
1 I skogen - bokfink	1 Jungellyd	1 Padle kano
2 Løvsanger	2 Motorsag, trefelling	2 Lyd fra seglbåt
3 Lerke	3 Sage	3 Motorbåt

4 Nattergal	4 Hjort	4 Måker
5 Gjøk	5 Fuglekvitter	5 Bade
6 Gjess	6 Myggsverm	6 Rennende vann
7 Ugle	7 Bekk som renner	7 Frosker
8 Kråke	8 Tenne bål	8 Fiske med snelle
Gruppe 7 Dyr på ZOO 1	Gruppe 8 Dyr på ZOO 2	
1 Aper	1 Ulver som uler	
2 Elefanter	2 Sjimpanser	
3 Flodhester	3 Tiger	
4 Sjimpanser	4 Foringstid på Zoo	
5 Vortesvin	Hjort	
6 Løve	6 Hyene	
7 Præriehunderr	7 Sjøløve	
8 Papegøyer	8 Klapperslange	

Hemmets ljud

Gruppe 1 Lyder på badet	Gruppe 2 Husvaske	Gruppe 3 Matlaging - i kjøkkenet
1 Vaske hendene-tørke seg	1 Feie med kost	1 Skjære brød
2 Tappe vann i badekar	2 Støvsuge	2 Helle opp drikke
3 Bada i badekar	3 Skure gulvet	3 Handvisp
4 Dusje	4 Feie med sopelim	4 Mortel
5 Tiss på potte	5 Oppvask for hånd	5 Kokende vann
6 Spyle ned i toalettet	6 Vaske vindu	6 Popcorn
7 Børste tennene	Håndvask av klær	7 Skjære løk
8 Bade i boblebad	8 Vaskemaskin	8 Steke
Gruppe 4 Husholdningsmaskiner	Gruppe 5 Klokker	Grupp 6 Telefon och fax
1 Oppvaskmaskin	1 Elektronisk vekkeklokke	1 Slå nummer på telefon
2 Mixmaster	2 Gjøkurr	2 Opptattsignal
3 Sitronpresse	3 Veggur	3 Telefonsignal

4 Kjøkkenmaskin	4 Pendel	4 Telefonsignal
5 Kjøleskap	5 Trekke opp vekkeklokke	5 Telefonsignal
6 Kjøkkenvifte	6 Vekkeklokke	6 Telefonsignal
7 Mikrobølgeovn	7 Veggur Big Ben	7 Telefonsignal
8 Sette i ovnen	8 Eggklokke	8 Fax
Gruppe 7 Blanda lyder 1	Grupp 8 Blandade ljud 2	
1 Banke på dør	1 Dørklokke	
2 Dør åpnes og lukkes	2 Dør åpnes og lukkes	
3 Bla i avis	3 Vann fra kran	
4 Klippe i papir	4 Skrelle potet	
5 Tenne i ovnen	5 Eggklokke	
6 Mekanisk leke	6 Skåle i glass	
7 Ringeklokke	7 Flue	
8 Helle vann i glass	8 Pipeleke	

5 Språk

Paletto kan bestilles på 18 ulike språk

- Arabisk
- Belgisk
- Danska
- Engelsk
- Hebraisk
- Hollandsk
- Fransk
- Italiensk
- Japansk
- Katalansk
- Koreansk
- Norsk
- Norsk Nynorsk
- Russisk
- Spansk
- Svensk
- Tyrkisk
- Tysk

7 Kontakt:

Amajo as
Industriveien 24
1481 Hagan

[Tel:47-6707434](tel:47-6707434)

Epost: firmapost@amajo.no

www.amajo.no