

Readit Wand – synshjelpemiddel for folk på farten

**Forstørrer og
omgjør trykt og
elektronisk tekst til
tale på sekunder.**



Mange muligheter!

Hos NAV ligger Readit Wand i gruppen lese- hjelpemidler, men produktets aller største fortrinn er at det i tillegg er et synshjelpemiddel. Readit Wand er lett å ta med seg, svært brukervennlig og utfyller annen programvare for blinde og svaksynte på en PC. Du kan lagre alle bøkene og dokumentene dine på PC-en, høre og se på dem når du selv ønsker. Readit Wand

programmet kan i tillegg for eksempel laste ned nesten alle typer filer med tekst/bildetekst, lagre dem, og om man ønsker, eksportere dem til mange andre formater, slik som Word og MP3.

HMSnr:

(hjelpemiddelnummer hos NAV): 173683

Slik fungerer Readit Wand

Readit Wand er et lese- og synshjelpemiddel for alle svaksynte og blinde PC-brukere, som ønsker rask, enkel og nøyaktig tilgang til dokumenter i trykt eller elektronisk format.

Readit Wand består av et kompakt kamera og en avansert programvare, som kobles til din stasjonære eller bærbare PC. På sekunder omgjør den bildetekst, filer og elektronisk tekst til tale.

Readit Wand forstørrer også bilder, og du kan skreddersy og lagre farger, bakgrunner og tekststørrelser, slik at du får en visning som passer deg og dine behov.



Med den uttrekkbare posisjonsspaken plasserer du enkelt dokumentene riktig. Kameraet har også innebygget lys.

Ideelt for
deg som
er på farten

Det kompakte kameraet veier kun 690 gram og er svært lett å ta med seg. Readit Wand er derfor ideell å bruke på skolen, arbeidsplassen eller når du er ute på reise.



Readit Wand kan lese
av hele bøker, lagre dem
og lage bokmerker, slik at
du kan få dem lest opp
når og hvor du vil – for
eksempel på hytta.



THIS RECEIPT FOR
OUR RECORDS
AMOUNT £16.00

Kameraet leser
tekst av alle overflater,
som tykke bøker og runde
gjenstander – uten at du
trenger å rette ut
sidene eller ødelegge
emballasjen.

Du kan importere
alle slags dokumenter
som PDF, Word og ren
tekst og lese dem opp
direkte i programvaren.
Du kan også konvertere og
eksportere dem til formater
programmet støtter.


Multifunksjonell talefunksjon

Readit Wand leveres med norsk og engelsk språk, men kan i tillegg bestilles med 15 ulike talesynteser. Den leser dokumentene for deg på en levende måte og endrer automatisk stemme etter språket i dokumentet. Talefunksjonen er perfekt for blinde og svaksynte som har behov for å hvile øynene.

Seks ulike tekstvisninger


Med **Readit Wand** programvaren og kameraet kan du lese raskere og enklere – og få teksten tilpasset dine behov. De avleste dokumentene kan vises i forstørrelser fra x 0,2 til x 80, og på seks ulike måter. Innstillingene du velger kan du enkelt lagre, slik at du får teksten vist på samme måte hver gang.

Fremhevet

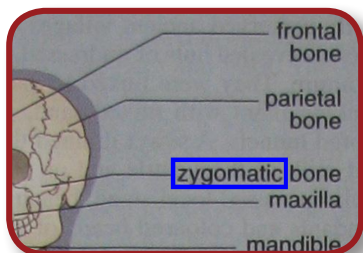

Fremhever tekst på bildet i en ramme

Tekst lagt over

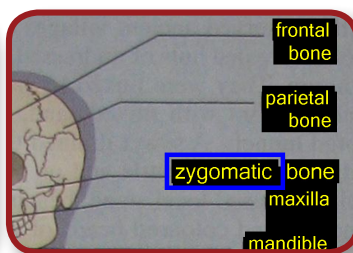


Leser og tilpasser tekst på bildet

Enkeltord




Forstørring og opplesing av enkeltord

Horisontal

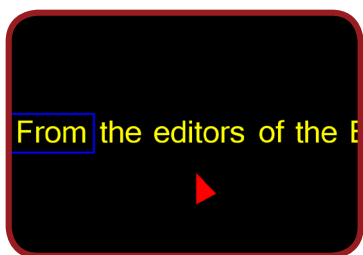


Løpende tekst på én linje

Vertikal

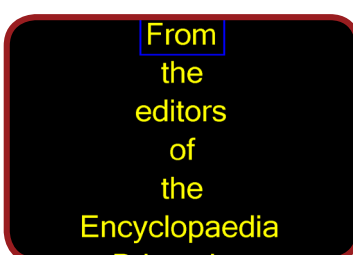

Løpende tekst vertikalt

Kolonne

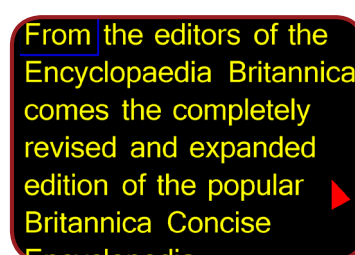

Visning av lengre tekster i én kolonne

Spesifikasjoner:

Forstørrelse, live: Inntil 32 x (på en 22" skjerm)	Dimensjoner: Centimeter: 6,5 x 8,1 x 41,7 (B x D x H)
Forstørrelse, avlest: 0,2–80 x (i praksis ubegrenset)	Vekt: 690 gram
Avlesningsområde: A4, 6 punkts tekst	Tilkopling: 1 x USB 2.0. Strømtilførsel via USP
Avlesningshastighet: Inntil 20 sider per minutt	Språk: Norsk og engelsk. Kan bestilles med 15 andre språk.
Avlesningstid: 2 til 15 sekunder (avhengig av maskinvare)	Lisenser: Inkl. 3 brukerlisenser/fri oppgradering innenfor gjeldene versjon.
Hodetelefoner: Inkludert	

Krav til datamaskinen

Komponent	Minimum	Anbefalt
OS:	Windows XP, Vista 32- eller 64-bit, Win 7 32- eller 64-bit	Windows 7 32- eller 64-bit
CPU:	Intel Atom	Core 1,6 Ghz
RAM:	XP: 512 MB. Vista og 7: 1 GB	XP: 1 GB. Vista og 7: 1,5 GB
HDD:	600 MB	2 GB

TAGARNO

TAGARNO NORGE AS | Østre Aker vei 24 | 0581 OSLO | Tlf: + 47 21 95 16 00

E-post: beskjed@tagarno.no | www.tagarno.no