

# ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

## ALPHA ACTIVE 4 HELMADRAS



...with people in mind





## ENKEL OG EFFEKTIV TRYKAFLASTNING

Designet til forebyggelse og behandling af tryksår er *Alpha Active® 4* helmadrassystemet egnet til en bred vifte af plejemiljøer, herunder hjemme- og plejehjemsmiljøer.

*Alpha Active 4*-systemet er designet som en omkostningseffektiv løsning til forebyggelse og behandling af tryksår, samt til forbedring af plejekvaliteten og reducere af risici for både plejemedtager og plejer.

Systemet tilbyder avancerede funktioner der understøtter høj kvalitet i plejen til sårbare plejemedtagere, er let at betjene for plejeren samt enkel at rengøre og vedligeholde.

# NØGLEFUNKTIONER

1

## AutoFirm



Udgør en stabil understøttelsesflade ved forflytninger- og plejeprocedurer

2

## Dartex®-betræk



Dampgennemtrængelig og vandafvisende med 2-vejsstræk samt bakteriostatiske egenskaber

3

## Celle-på-Celle



Giver yderligere støtte og forbedrer plejemodtagerens stabilitet

4

## Indbyggede audio og visuelle alarmer



Omfatter alarmer ved lavt tryk, strømsvigt og pumpesvigt



# FUNKTIONER

- **Elektronisk trykindstilling** – muliggør præcis og passende trykindstilling i flere vægtområder
- **Variable cyklustider** – udover cyklustiden på 10 minutter tilbyder *Alpha Active 4*-systemet muligheden for en forlænget cyklustid på 20 minutter, der kan være et godt valg når plejemodtageren begynder at rehabiliteres og risikoen reduceres. Dette kan benyttes, hvis en mindre aggressiv behandling er nødvendig eller hvis der behøves en mere stabil overflade (f.eks. om natten)
- **AutoFirm** – giver en stabil understøttelsesflade ved forflytninger- og plejeprocedurer
- **2 funktioner** – supplerer forebyggelses- og behandlingsprocedurerne samtidig med at det opfylder de kliniske præferencer for plejemodtageren  
*Aktiv / Alternierende*: periodisk fordeling af tryk fra sårbare områder ved veksling imellem oppumpning og tømning af cellerne under plejemodtageren. Ideel til forebyggelse hos plejemodtagere med høj risiko, særligt for dem der ikke jævnligt kan skifte stilling<sup>1</sup>.  
*Reaktiv / Statisk tilstand*: celletryk udlignes og fordeler kropsvægten over et større areal – ideel til plejemodtagere, der ikke kan tolerere alternerende systemer eller til dem der rehabiliteres
- **Audio og visuelle alarmer** – herunder alarmer for lavt tryk, strømsvigt og pumpesvigt
- **Modulærkonstruktion** – bidrager til let rengøring og vedligeholdelse
- **Ergonomisk, kompakt og støjsvag pumpe** – ideel hjemmepleje og plejehjem
- **Transportfunktion** – let at benytte til sikker transport af plejemodtager. Celletryk udlignes automatisk og efterlader en komfortabel og jævn overflade
- **Celle-på-Celle** – giver yderligere støtte og forbedrer plejemodtagerens stabilitet
- **Statiske hovedceller** – Forbedrer hoveddelens komfort og stabilitet
- **Dartex-overtræk** – dampgennemtrængelig og vandafvisende med 2-vejsstræk samt bakteriestatiske egenskaber
- **Ventilerede celler** – Aktiv styring af mikroklima reducerer fugtdannelse på huden og reducerer risikoen for maceration
- **CPR-tømning** – hurtig tømningfunktion tillader CPR uden unødvendig ventetid

# PRODUKTSPECIFIKATIONER

Helmadras	
Modelnummer	648324
Dimensioner	850 mm x 1950 mm x 200 mm
Cellehøjde	200 mm
Cellemateriale	Nyloncoated polyuretan (PU)
Betrækmateriale	PU-coated, strikket stof
Pumpe	
Modelnummer	648315
Dimensioner	280 mm x 112 mm x 205 mm
Vægt	2,5 kg
Strøm	230V 50Hz; 12W 1A
Cyklus	10 minutter og 20 minutter
Kabinetmateriale	Brandhæmmende ABS
Filtre	Alle kan udskiftes ved eftersyn
Alarmer	Audio- og visuel ved lavt tryk Audio- og visuel ved strømsvigt Audio og visuel ved pumpevigt
Elsikkerhedsstandarder	EN60601-1, IEC60601-1
Beskyttelsesgrad imod elektrisk stød	TYPE BF, Klasse II med jordforbindelse
Beskyttelsesgrad for indtrængning af væsker	IPX0
Maksimal brugervægt	200 kg

ArjoHuntleigh er en afdeling under Arjo Ltd Med. AB.

Kun ArjoHuntleigh originaldele, der er konstrueret specifikt til dette formål, bør anvendes på udstyr og produkter leveret af ArjoHuntleigh. Det er vores politik løbende at fremme udvikling, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage tekniske ændringer uden varsel.

® og ™ er varemærker tilhørende ArjoHuntleigh virksomhedsgruppen. Dartex® er et varemærke tilhørende Dartex Coatings Ltd

© ArjoHuntleigh, 2010

Referencer:

1. Internationale retningslinjer til forebyggelse af tryksår 2009. [www.epuap.org](http://www.epuap.org)

**ARJOHUNTLEIGH**  
GETINGE GROUP

[www.ArjoHuntleigh.dk](http://www.ArjoHuntleigh.dk)

**GETINGE GROUP** er en førende global leverandør af produkter og systemer, der bidrager til kvalitetsforbedring og omkostningseffektivitet indenfor sundhedssektoren. Vi driver virksomhed under de tre mærkenavne **ArjoHuntleigh**, **GETINGE** og **MAQUET**. **ArjoHuntleigh** fokuserer på plejemodtagermobilitet og sårbehandlings-løsninger. **GETINGE** leverer løsninger til infektionskontrol til hospitaler og forureningsbeskyttelse til sundhedssektoren. **MAQUET** er specialiseret i løsninger, behandlinger og produkter til kirurgiske indgreb og intensivafdelinger.

**ArjoHuntleigh A/S**

Vassingerødvej 52

3540 Lyngby

Telefon: 4913 8486

Fax: 4913 8487

E-mail: [info.dk@arjohuntleigh.com](mailto:info.dk@arjohuntleigh.com)