

ABC løfteseil



1. Fargede stropper

Fargede stropper sikrer et symmetrisk løft.

2. Materiale

Produsert av smussavvisende polyester, som har stor styrke og smidighet.

3. Polstring under lår

Alle seil med delte benstøtter har polstring under lårene. Enklere å legge på – behageligere å ha på. Hindrer at benstroppene vrir seg.

4. Merkelapp for registrering av inspeksjoner.

5. Merkelapp for seilstørrelse

Gjør det lett og oversiktlig å finne den riktige størrelsen på seilet.

6. Instruksjonsmerkelapp

Viser all relevant bruk av seilet.

7. Polstring i ryggen

På modeller med lav rygg for økt komfort.

8. Kobling til hjelpestropper

Det er mulig å bruke hjelpestropper.

9. Typemarkering

Båndets farge angir seiltype.

10. Styrelomme

Alle Basic seilene har en "styrelomme" som gjør det enkelt å legge seilet riktig.

Passform

Forbedret passform og flere størrelser øker både komfort og sikkerhet.

Styrke

Maksimal belastning 250 kg.

Vask

Problemfri håndtering, seilet kan vaskes i 85 °C og tørkes i tørketrommel.

ABC seil Activ



(1) Active Trainer

Funksjon: Støtter rundt brystkassen og øvre del av ryggen ved skuldrene. Med benstroppene støtter den dessuten rundt hoften. Hindrer at bruker "glir gjennom" seilet.

Bruk: Til personer med nedsatt balanse, men med ståfunksjon – brukeren skal ha ståfunksjon i benene. Støtter ved stå- og gåtrening.



(2) Active Micro Plus

Funksjon: Støtter rundt ryggen fra øvre del av bekken til under skulderbladet rundt brystkassen samt høyt oppe på låret ved skrittet. Beltet har en strammefunksjon, hvis man ønsker å etterregulere støtten rundt kroppen.

Bruk: Til løft av personer med lett nedsatt funksjon i overkropp og over hofteledd og lårben, men med kontroll over hodet. I



situasjoner hvor det er bruk for et seil som er lett å legge på og fjerne. Ved løft til og fra liggende stilling. Kan i visse situasjoner brukes ved løft til og fra halvveis liggende stilling sammen med Guldmann nakkestøtte. I situasjoner hvor en stor åpning i seilet er ønskelig, f eks ved toalettbesøk og personlig hygiene.

ABC seil Basic



(3) Basic Basic

Funksjon: Støtter hele kroppen bortsett fra hodet.

Bruk: Til løft av personer med kontroll over hodet, men nedsatt kontroll over overkroppen. Til løft til og fra sittende og halvsittende stilling – fra f eks seng og rullestol.



(4) Basic Low

Funksjon: Støtter rundt korsrygg og hofter.

Bruk: Til løft av personer som har kontroll over hode og overkropp. Til løft til og fra sittende stilling f eks stol og seng.



(5) Basic High

Funksjon: Støtter hele kroppen samt hode.

Bruk: Til løft av personer som ikke har kontroll over hode og overkropp. Til løft til og fra liggende stilling – fra f eks seng og gulv. Kan brukes til løft til og fra sittende stilling.

ABC seil Custom



Custom Sit-On

Funksjon: Støtter over lårbene og rygg. Bør ikke brukes til personer med trykksårproblemer.

Bruk: Til personer som skal bli sittende i seilet pga overvekt eller spesialtilpasset rullestol. Motvirker utglidning av rullestolen. Materialet gjør at brukerens kropp "puster" – seilet rulles på i liggende stilling, men brukes til løft til og fra sittende stilling i seng og rullestol.



Custom Sit-On High

Funksjon: Støtter over lårbene, rygg og hode. Bør ikke brukes til personer med trykksårproblemer.

Bruk: Til personer som skal bli sittende i seilet pga overvekt eller spesialtilpasset rullestol. Motvirker utglidning av rullestolen. Materialet gjør at brukerens kropp "puster" – seilet rulles på i liggende stilling og brukes når man skal løfte til og fra liggende stilling.



Custom Amputee

Funksjon: Støtter hele kroppen opp til og med skulderpartiet samt rundt bekkenet.

Bruk: Til løft av personer som har en ensidig eller dobbelsidig amputasjon over kneledd. Til løft av personer hvor begge ben helt amputerte. Til løft fra liggende stilling støttes hodet med nakkestøtte.

ABC løfteseil Kids



Basic Basic

Funksjon: Støtter hele kroppen men ikke hodet. Det innvendige beltet gir kroppen ekstra støtte.

Bruk: Løft av personer med kontroll over hode og overkropp. Til løft til og fra liggende stilling (seng, stellebenk, gulv etc). Til løft til og fra sittende stilling



Basic High

Funksjon: Støtter hele kroppen samt hodet. Det innvendige beltet gir kroppen ekstra støtte.

Bruk: Til løft av personer som ikke har kontroll over hodet og med eller uten kontroll over overkroppen. Ved løft til og fra sittende eller halvsittende stilling (seng, rullestol etc).

Gåsele til barn



Gåsele uten skrittpolstring

Varenr.	HMS art.nr.
VG29497-1	160185 Spes. gåsele str. 1
VG29497-2	160186 Spes. gåsele str. 2
VG29497-3	160187 Spes. gåsele str. 3



Skrittpolstring for gåsele

Varenr.	HMS art.nr.
PVG29497-1	160182 Polster spes. gåsele str. 1
PVG29497-2	160183 Polster spes. gåsele str. 2
PVG29497-3	160184 Polster spes. gåsele str. 3



Skulderpolster for gåsele

Varenr.	HMS art.nr.
VGM9497-1	160332 Polster skulder, gåsele str. 1
VGM9497-2	160333 Polster skulder, gåsele str. 2
VGM9497-3	160334 Polster skulder, gåsele str. 3

Mål på de tre selene inkl. mål på skrittsele.


Str. 1 (2-4 år) Høyde 23cm 3 strikk i hver side		Str. 2 (5-7år) Høyde 27cm 3 strikk i hver side		Str. 3 (9 år +) Høyde 38cm 4 strikk i hver side	
Bredde ½ forstykket	10 cm	Bredde 1/2 forstykket	12 cm	Bredde 1/2 forstykke	18cm
Bredde bakstykket	20 cm	Bredde bakstykket	25 cm	Bredde bak	37cm
Skrittsele bak	9 cm	Skrittsele bak	9 cm	Skrittsele bak	16cm
Skrittsele foran	8 cm	Skrittsele foran	8 cm	Skrittsele foran	12cm
Lengde skrittsele	14 cm	Lengde Skrittsele	16 cm	Lengde skrittsele	20cm

Oversikt over seilene

Størrelse		Barn	Barn	Barn	XS	S	M	L	XL	XXL
		4 - 6	6 - 10	10 - 14						
ACTIVE										
MicroPlus	Polyester	VG281001	VG281011	VG281021						
MicroPlus	Polyester				VG281531	VG281541	VG281551	VG281561	VG281571	VG281581
Trainer	Polyester	VG283001	VG283011	VG283021	VG283031	VG283041	VG283051	VG283061	VG283071	VG283081
BASIC										
Basic	Polyester	VG270001	VG270011	VG270021	VG270031	VG270041	VG270051	VG270061	VG270071	VG270081
Basic	Netting	VG270102	VG270112	VG270122	VG270132	VG270142	VG270152	VG270162	VG270172	VG270182
Basic Low	Polyester				VG271031	VG271041	VG271051	VG271061	VG271071	VG271081
Basic Low	Netting				VG271132	VG271142	VG271152	VG271162	VG271172	VG271182
Basic High	Polyester	VG272001	VG272011	VG272021	VG272031	VG272041	VG272051	VG272061	VG272071	VG272081
Basic High	Netting	VG272102	VG272112	VG272122	VG272132	VG272142	VG272152	VG272162	VG272172	VG272182
CUSTOM										
Amputee	Polyester					VG290041	VG290051	VG290061		
Sit-On	Netting						VG291052			VG291082
Sit-On High	Netting						VG292052			VG292082

Maksimal løftekapasitet for alle standard ABC seil er 250 kg

Tabell for valg av størrelse

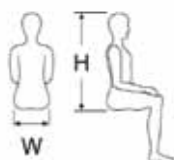

Barn	Barn	Barn	XS	S	M	L	XL	XXL
4 - 6	6 - 10	10 - 14						
45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102
25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52

