



# POSISJONERINGSPUTER


PRODUKTLISTE 2023



INKLUDERT PRODUKTER SOM INNGÅR I RAMMEAVTALE MED NAV



VEILEDNING PÅ VIDEO

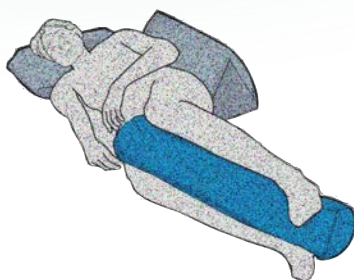

VEILEDNING POSISJONERING

# PRINSIPPER

**Målsettingene for en inngrepen i en brukers "posisjoneringshverdag" skal være å:**

- Optimalisere funksjon
- Redusere og/eller fjerne risiko for sekundærskader
- Forbedre arbeidssituasjonen for omsorgspersonene

**Prinsippene for posisjoneringstiltakene er:**

- Bevegelse er grunnleggende
- Bevegelse, så vel aktiv som passiv, må være balansert og symmetrisk
- Postural stabilitet utgjør basis for funksjonell aktivitet
- Kroppsholdning vil ha innflytelse på de fleste kroppslige funksjoner
- Kroppsholdning påvirker nevrologiske symptomer som for eksempel spasmer
- Tyngdekraften kan påføre stor skade, men kan påvirkes ved adekvat posisjonering
- Ingen ledd skal befinne seg i ytterposisjon over lengre tid
- Fysisk og mental tilstand henger nøye sammen
- Stimulans gjennom aktivitet, både mentalt og fysisk, er viktig
- En god døgnplan gir best mulighet til gjennomføring i henhold til prinsippene
- Bruk bilder når en skal illustrere posisjoner, både med og uten hjelpemidler

**Mangel på postural stabilitet og selvstendig bevegelse kan disponere for:**

- Vevstilpasning (forkorting/forlenging) som fører til kontrakturer og deformiteter
- Vevsødeleggelse, inklusive trykkskader
- Redusert energitilførsel gjennom negativ påvirkning av respirasjon
- Infeksjoner i luftveier og urinveier
- Osteoporose
- Fordøyelsesbesvær
- Redusert funksjon

Pauline Pope sier at "det er sannsynlig at asymmetri i vevsstrukturer først oppstår med utgangspunkt i en liggende stilling med etablering av en "vanestilling". Denne blir så forsterket i en sittestilling."

I vår daglige hverdag ligger utfordringen i å kombinere de "riktige" tiltakene med det som er praktisk mulig. Funksjon og selvstendighet må alltid veie tyngre enn "korrekt" posisjonering. Når dette hensynet fører til at brukeren for ofte og for lenge inntar "vanestillingen", må vi kompensere med noen "mottrekk". Vi må forsøke å motarbeide den skadelige effekten av feilstillinger og kontrakturer ved for eksempel å legge følgende stillinger inn i dagsplanen:

- Daglig mageleie
- Stå/oppreist posisjoner
- Korrigert sideleie (30 og 120-graders leie)
- Sitteposisjon med frontalstøtte

Posisjoneringsarbeidet vårt vil avgjøre våre brukeres utvikling negativt eller positivt avhengig av kvalitet og gjennomføringsevne. Prosessen består av følgende elementer:

- Definerings av problemstilling
- Konsekvensutredning
- Motivering
- Planlegging
- Gjennomføring
- Evaluering

# INNHOOLD



**PRODUKTER I  
RAMMEAVTALE**



**ANDRE  
PRODUKTER**



CAREWAVE UNIVERSALPUTER	SIDE 4
CAREWAVE BUEPUTER	SIDE 5
CAREWAVE NAKKEPUTER	SIDE 6
CAREWAVE S-PUTER	SIDE 7
CAREWAVE SYLINDERPUTER	SIDE 8
CAREWAVE SEMI-FOWLERPUTER	SIDE 9
CAREWAVE TREKANTPUTER	SIDE 10
CAREWAVE KILEPUTER	SIDE 10
CAREWAVE HEMI-ARMPUTER	SIDE 11
CAREWAVE T-PUTER	SIDE 11
CAREWAVE BUTTERFLYPUTER	SIDE 12
CAREWAVE HALVMÅNEPUTE	SIDE 12
CAREWAVE BASISPUTER	SIDE 13
CAREWAVE SPESIALPUTER	SIDE 14
CAREWAVE POSISJONERINGSKIT	SIDE 15
CAREWAVE/FITLEG HÆLAVLASTNING	SIDE 16
CAREWAVE UTPRØVINGSKIT	SIDE 17
CAREWAVE TILBEHØR	SIDE 18
C&S SEATING T-PUTER / ADDUKSJONSPUTER	SIDE 19
MEDCLINE REFLUX-PUTER	SIDE 20
VAKUUM SITTEPUTER	SIDE 21
VAKUUM RYGGPUTER	SIDE 22
VAKUUM HELE SITS	SIDE 23
VAKUUM ARM- OG HODESTØTTER	SIDE 24
VAKUUM MADRASSER OG HELSETER	SIDE 25
VAKUUM SPESIALPUTER	SIDE 26-27
VAKUUMPUTER TILBEHØR	SIDE 28-29
RENGJØRING	SIDE 30



# CAREWAVE | UNIVERSAL



UNIVERSALPUTE 2XL




ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK I ET NON-VOWEN TOVEIS STRETCH-MATERIALE MED INNVENDING INKONTINENSBEKYTTELSE.

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG1636	312424	UNIVERSALPUTE 3XL m/COMBI-TREKK	100	40	12	
NEG0944	312414	UNIVERSALPUTE 2XL m/COMBI-TREKK	70	40	10	
NEG0605	312386	UNIVERSALPUTE XL m/COMBI-TREKK	60	40	11	
NEG0943	312413	UNIVERSALPUTE L m/COMBI-TREKK	60	30	8	
NEG0881	312399	UNIVERSALPUTE M m/COMBI-TREKK	45	30	9	
NEG0606	312387	UNIVERSALPUTE S I TOPAKNING m/COMBI-TREKK	40	30	10	KOMMER KUN PARVIS
NEG0945	312415	UNIVERSALPUTE XS m/COMBI-TREKK	35	20	5	
NEG0946	312416	UNIVERSALPUTE 2XS m/COMBI-TREKK	40	10	3	
NEG1103	312422	UNIVERSALPUTE MED ØREHULL m/COMBI-TREKK	30	30	5	



## RESERVEDELER OG TILBEHØR TIL UNIVERSALPUTER

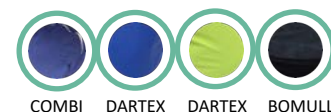

HMS NR	POSISJONERINGSPUTEN UTEN AVTAGBART COMBI-TREKK	COMBI-TREKK HMS NR	DARTEX-TREKK HMS NR	BOMULLSTREKK HMS NR
230506	UNIVERSALPUTE 3XL (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312103	230507	230508
159114	UNIVERSALPUTE 2XL (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	267929	159118	166185
156858	UNIVERSALPUTE XL (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312102	163546	159883
158653	UNIVERSALPUTE L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312101	164264	164249
154816	UNIVERSALPUTE M (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	312100	158674	161091
149197	UNIVERSALPUTE S I TOPAKNING (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312099	148123	-
158619	UNIVERSALPUTE XS (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	269523	160596	158655
161392	UNIVERSALPUTE 2XS (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	269524	164266	164265
174288	UNIVERSALPUTE MED ØREHULL (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312104	-	242698



# CAREWAVE | BUEPUTER



BUEPUTE MED  
HJØRNEEKSTENSJON



ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK I ET NON-VOWEN TOVEIS STRETCH-MATERIALE MED INNVENDING INKONTINENSBEKYTTELSE.

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDD CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0608	312389	BUEPUTE XXL m/COMBI-TREKK	180	30	11	
NEG0939	312409	BUEPUTE XL m/COMBI-TREKK	175	40	11	
NEG0940	312410	BUEPUTE L m/COMBI-TREKK	170	35	11	
NEG0882	312400	BUEPUTE M m/ COMBI-TREKK	140	23	8	
NEG0947	312417	BUEPUTE S m/COMBI-TREKK	125	35	12	
NEG0948	312418	BUEPUTE XS m/COMBI-TREKK	105	25	9	
NEG0941	312411	BUEPUTE MED HJØRNEEKSTENSJON m/COMBI-TREKK	195	30	13	



## RESERVEDELER OG TILBEHØR TIL BUEPUTER



HMS NR	POSISJONERINGSPUTEN UTEN AVTAGBART TREKK	COMBI-TREKK HMS NR	DARTEX-TREKK HMS NR	BOMULLSTREKK HMS NR
145204	BUEPUTE XXL (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312084	164269	145203
158944	BUEPUTE XL (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312083	164250	158947
158945	BUEPUTE L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312081	164270	158948
158946	BUEPUTE M (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	312080	160601	158949
158654	BUEPUTE S (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312078	164272	164271
160599	BUEPUTE XS (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312082	160600	163782
163687	BUEPUTE MED HJØRNEEKSTENSJON (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312079	164273	163688



# CAREWAVE | NAKKEPUTER



ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK I ET NON-VOWEN TOVEIS STRETCH-MATERIALE MED INNVENDING INKONTINENSBEKYTTELSE.

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0612	312393	NAKKEPUTE MED KNEPPING L m/COMBI-TREKK	135	18	9	
NEG0880	312398	NAKKEPUTE MED KNEPPING M m/COMBI-TREKK	105	15	8	
NEG0949	312419	NAKKEPUTE BUEFORM L m/COMBI-TREKK	100	19	7	
NEG0950	312420	NAKKEPUTE BUEFORM M m/COMBI-TREKK	80	12	5	



NAKKEPUTE MED KNEPPING L NEDERST,  
NAKKEPUTE BUEFORM M ØVERST

## RESERVEDELER OG TILBEHØR TIL NAKKEPUTER



HMS NR	POSISJONERINGSPUTEN UTEN AVTAGBART TREKK	COMBI-TREKK HMS NR	DARTEX-TREKK HMS NR	BOMULLSTREKK HMS NR
149196	NAKKEPUTE MED KNEPPING L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312087	163545	149215
158698	NAKKEPUTE MED KNEPPING M (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	312086	160598	164275
158696	NAKKEPUTE BUEFORM L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	254855	159117	164156
158697	NAKKEPUTE BUEFORM M (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	254854	160597	161092



# CAREWAVE | S-PUTER



S-PUTE M




ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK I ET NON-VOWEN TOVEIS STRETCH-MATERIALE MED INNVENDING INKONTINENSBEKYTTELSE.

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG1030	312421	S-PUTE XL m/COMBI-TREKK	220	40	16	ANBEFALT FOR BRUKERE MED HØYDE FRA 180 CM
NEG0610	312391	S-PUTE L m/COMBI-TREKK	180	30	12	ANBEFALT FOR BRUKERE MED HØYDE MELLOM 165-180 CM
NEG0883	312401	S-PUTE M m/COMBI-TREKK	135	25	10	ANBEFALT FOR BRUKERE MED HØYDE MINDRE ENN 165 CM



S-PUTE L

## RESERVEDELER OG TILBEHØR TIL S-PUTER

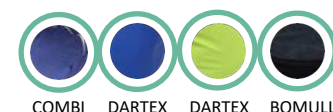

HMS NR	POSISJONERINGSPUTEN UTEN AVTAGBART TREKK	COMBI-TREKK HMS NR	DARTEX-TREKK HMS NR	BOMULLSTREKK HMS NR
163689	S-PUTE XL (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	267931	175578	163690
147073	S-PUTE L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312106	163544	158090
157712	S-PUTE M (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	312105	158671	164274



# CAREWAVE | SYLINDERE




ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK I ET NON-VOWEN TOVEIS STRETCH-MATERIALE MED INNVENDING INKONTINENSBEKYTTELSE.

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0613	312394	SYLINDERPUTE L m/COMBI-TREKK	75	20	20	DIAMETER 20 CM
NEG0884	312402	SYLINDERPUTE M m/COMBI-TREKK	48	17	17	DIAMETER 17 CM
NEG0614	312395	SYLINDERPUTE S I TOPAKNING m/ COMBI-TREKK	35	20	20	DIAMETER 20 CM. KOMMER KUN PARVIS
NEG0609	312390	SYLINDERPUTE FOTENDE m/COMBI-TREKK	90	20	20	FESTEBÅND ER PÅSYDD

SYLINDERPUTE S  
I TOPAKNING

## RESERVEDELER OG TILBEHØR TIL SYLINDERPUTER

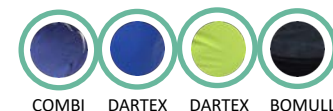

HMS NR	POSISJONERINGSPUTEN UTEN AVTAGBART TREKK	COMBI-TREKK HMS NR	DARTEX-TREKK HMS NR	BOMULLSTREKK HMS NR
149194	SYLINDERPUTE L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312109	164276	149214
154818	SYLINDERPUTE M (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	312108	158672	161093
149195	SYLINDERPUTE S I TOPAKNING (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312107	160595	-
175581	SYLINDERPUTE FOTENDE (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	243100	-	-





# CAREWAVE | SEMI-FOWLER



ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK I ET NON-VOWEN TOVEIS STRETCH-MATERIALE MED INNVENDING INKONTINENSBEKYTTELSE.

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG1391	312423	SEMI-FOWLERPUTE XL m/COMBI-TREKK	88	63	17	ABDUKSJONSKLOSS- LENGDE 14 CM
NEG0611	312392	SEMI-FOWLERPUTE L m/COMBI-TREKK	70	50	13	ABDUKSJONSKLOSS- LENGDE 12 CM
NEG2021	312426	SEMI-FOWLERPUTE FORLENGET ABDUKSJON L m/COMBI-TREKK	70	50	13	ABDUKSJONSKLOSS- LENGDE 25 CM
NEG0886	312403	SEMI-FOWLERPUTE M m/COMBI-TREKK	55	40	11	ABDUKSJONSKLOSS- LENGDE 8 CM
NEG2022	312427	SEMI-FOWLERPUTE FORLENGET ABDUKSJON M m/COMBI-TREKK	55	40	11	ABDUKSJONSKLOSS- LENGDE 16 CM
NEG1743	312425	SEMI-FOWLERPUTE S m/COMBI-TREKK	41	30	9	ABDUKSJONSKLOSS- LENGDE 6 CM

SEMI-FOWLERPUTE L

## RESERVEDELER OG TILBEHØR TIL SEMI-FOWLER



HMS NR	POSISJONERINGSPUTEN UTEN AVTAGBART TREKK	COMBI-TREKK HMS NR	DARTEX-TREKK HMS NR	BOMULLSTREKK HMS NR
230193	SEMI-FOWLERPUTE XL (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	254817	312097	230194
153330	SEMI-FOWLERPUTE L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312096	159576	159575
312073	SEMI-FOWLERPUTE FORLENGET ABD. L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312095	312094	312093
158097	SEMI-FOWLERPUTE M (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	297791	159574	159573
301537	SEMI-FOWLERPUTE FORLENGET ABD. M (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	312092	312091	312090
231899	SEMI-FOWLERPUTE S (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	269525	231901	231900



# CAREWAVE | TREKANTER



TREKANTPUTE L

ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK I ET NON-VOWEN TOVEIS STRETCH-MATERIALE MED INNVENDING INKONTINENSBEKYTTELSE.

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0607	312388	TREKANTPUTE L m/COMBI-TREKK	60	35	35	
NEG0887	312404	TREKANTPUTE M m/COMBI-TREKK	45	28	28	

## RESERVEDELER OG TILBEHØR TIL TREKANTPUTER



HMS NR	POSISJONERINGSPUTEN UTEN AVTAGBART TREKK	COMBI-TREKK HMS NR	DARTEX-TREKK HMS NR	BOMULLSTREKK HMS NR
146924	TREKANTPUTE L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	290162	158620	163691
154817	TREKANTPUTE M (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	312116	158673	164155

# CAREWAVE | KILEPUTER




KILEPUTE L

ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK I ET NON-VOWEN TOVEIS STRETCH-MATERIALE MED INNVENDING INKONTINENSBEKYTTELSE.

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0615	312396	KILEPUTE L m/COMBI-TREKK	30	18	20	
NEG0888	312405	KILEPUTE M m/COMBI-TREKK	23	14	15	

## RESERVEDELER OG TILBEHØR TIL KILEPUTER

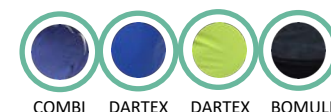

HMS NR	POSISJONERINGSPUTEN UTEN AVTAGBART TREKK	COMBI-TREKK HMS NR	DARTEX-TREKK HMS NR	BOMULLSTREKK HMS NR
150250	KILEPUTE L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312085	160671	166645
160602	KILEPUTE M (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	254818	160603	164295



# CAREWAVE | HEMI-ARM



ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK I ET NON-VOWEN TOVEIS STRETCH-MATERIALE MED INNVENDING INKONTINENSBEKYTTELSE.

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0732	312397	HEMI-ARMPUTE L m/COMBI-TREKK	60	26	35	TO PUTER SOM FESTES TIL HVERANDRE MED BORRELÅS
NEG0889	312406	HEMI-ARMPUTE M m/COMBI-TREKK	50	24	30	TO PUTER SOM FESTES TIL HVERANDRE MED BORRELÅS

## RESERVEDELER OG TILBEHØR TIL HEMI-ARMPUTER



HMS NR	POSISJONERINGSPUTEN UTEN AVTAGBART TREKK	COMBI-TREKK HMS NR	DARTEX-TREKK HMS NR	BOMULLSTREKK HMS NR
155132	HEMI-ARMPUTE L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312077	163749	163750
164262	HEMI-ARMPUTE M (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	312076	164268	164267


# CAREWAVE | T-PUTER



ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK I ET NON-VOWEN TOVEIS STRETCH-MATERIALE MED INNVENDING INKONTINENSBEKYTTELSE.

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG3006	312428	T-PUTE L m/COMBI-TREKK	65	25	13	ABDUKSJONSKLOSS-LENGDE 25 CM
NEG3007	312429	T-PUTE M m/COMBI-TREKK	49	20	11	ABDUKSJONSKLOSS-LENGDE 20 CM

## RESERVEDELER OG TILBEHØR TIL T-PUTER

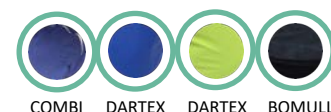

HMS NR	POSISJONERINGSPUTEN UTEN AVTAGBART TREKK	COMBI-TREKK HMS NR	DARTEX-TREKK HMS NR	BOMULLSTREKK HMS NR
312075	T-PUTE L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312115	312114	312113
312074	T-PUTE M (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	312112	312111	312110



# CAREWAVE | BUTTERFLY



BUTTERFLYPUTE L

ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK I ET NON-VOWEN TOVEIS STRETCH-MATERIALE MED INNVENDING INKONTINENSBEKYTTELSE.

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0919	312408	BUTTERFLYPUTE L m/COMBI-TREKK	40	30	11	
NEG0890	312407	BUTTERFLYPUTE M m/COMBI-TREKK	30	20	8	

## RESERVEDELER OG TILBEHØR TIL BUTTERFLYPUTER



HMS NR	POSISJONERINGSPUTEN UTEN AVTAGBART TREKK	COMBI-TREKK HMS NR	DARTEX-TREKK HMS NR	BOMULLSTREKK HMS NR
161660	BUTTERFLYPUTE L (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312089	161743	163622
160604	BUTTERFLYPUTE M (GRØNN) UTEN AVTAGBART TREKK	312088	160605	164441

# CAREWAVE | HALVMÅNEPUTE



ALLE PRISFORHANDLEDE PUTER LEVERES MED AVTAGBART COMBI-TREKK I ET NON-VOWEN TOVEIS STRETCH-MATERIALE MED INNVENDING INKONTINENSBEKYTTELSE.

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
NEG0942	312412	HALVMÅNEPUTE m/COMBI-TREKK	46	22	5	

## RESERVEDELER OG TILBEHØR TIL HALVMÅNEPUTE



HMS NR	POSISJONERINGSPUTEN UTEN AVTAGBART TREKK	COMBI-TREKK HMS NR	DARTEX-TREKK HMS NR	BOMULLSTREKK HMS NR
159115	HALVMÅNEPUTE (BLÅ) UTEN AVTAGBART TREKK	312098	159116	175577

# CAREWAVE | BASISPUTER

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV OG LEVERES UTEN AVTAGBARE TREKK

OBS!  
DISSE PRODUKTENE ER PÅ  
VEI UT AV VÅRT SORTIMENT.

PRODUKTENE TILBYS  
INN TIL LAGERHOLDET  
ER TOMT.



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	DIAMETER
5-NEG0619	149753	BASISPUTE 130 CM	130 CM
5-NEG0990	158617	DARTEX-TREKK MED HÅNDTAK TIL BASISPUTE 130 CM	
5-NEG1474	IKKE REG	BOMULLSTREKK TIL BASISPUTE 130 CM	
5-NEG0618	153112	BASISPUTE 110 CM	110 CM
5-NEG0989	158616	DARTEX-TREKK MED HÅNDTAK TIL BASISPUTE 110 CM	
5-NEG1475	IKKE REG	BOMULLSTREKK TIL BASISPUTE 110 CM	



# CAREWAVE | SPESIALPUTER

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV OG LEVERES UTEN AVTAGBARE TREKK

OBS!  
DISSE PRODUKTENE ER PÅ  
VEI UT AV VÅRT SORTIMENT.

PRODUKTENE TILBYS  
INN TIL LAGERHOLDET  
ER TOMT.



KILEPUTE



TREKANTPUTE

ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
5-NEG1079	175558	FORLENGET TREKANTPUTE	180	35	35	
5-NEG1079HLEN	IKKE REG	COMBI-TREKK TIL FORLENGET TREKANTPUTE				
5-NEG1473	IKKE REG	DARTEX-TREKK TIL FORLENGET TREKANTPUTE				
5-NEG1080	IKKE REG	BOMULLSTREKK TIL FORLENGET TREKANTPUTE				
5-NEG0811	161762	FORLENGET KILEPUTE	95	30	45	
5-NEG0811HLEN	IKKE REG	COMBI-TREKK TIL FORLENGET KILEPUTE				
5-NEG0812	175580	DARTEX-TREKK TIL FORLENGET KILEPUTE				
5-NEG1097	164263	BOMULLSTREKK TIL FORLENGET KILEPUTE				
5-NEG1075	170451	STABILEGS	80	70		SETT MED 4 PUTER
5-NEG1740	IKKE REG	LÅRPUTE MED FLEKSIBEL HØYDE	90	40	15-35	SETT MED 4 INNLEGG



STABILEGS



LÅRPUTE

# CAREWAVE | POS.KIT

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV OG LEVERES UTEN AVTAGBARE TREKK

OBS!  
DISSE PRODUKTENE ER PÅ  
VEI UT AV VÅRT SORTIMENT.

PRODUKTENE TILBYS  
INN TIL LAGERHOLDET  
ER TOMT.



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	EVENTUELT
5-NEG0658	153122	POSISJONERINGSKIT L	150	95	MADRASS MED 4 PUTER
5-NEG0620	159961	POSISJONERINGSKIT M	110	95	MADRASS MED 4 PUTER



# CAREWAVE | HÆLAVLASTERE

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV OG LEVERES UTEN AVTAGBARE TREKK



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	TYKKELSE CM	EVENTUELT
5-NEG0616	149146	HÆLBESKYTTER L (BLÅ)	32	25		
5-NEG0885	175136	HÆLBESKYTTER M (GRØNN)	25	20		
5-NEG774429	198454	HÆLAVLASTER FITLEG L	58	55	12	
5-NEG1386	IKKE REG	BOMULLSTREKK TIL FITLEG L				
5-NEG777398	198457	HÆLAVLASTER FITLEG M	55	40	12	
5-NEG1628	IKKE REG	BOMULLSTREKK TIL FITLEG M				
5-NEG774430	198455	HÆLAVLASTER FITLEG EVO	58	55	12	MED ABDUKSJON
5-NEG1385	292767	BOMULLSTREKK TIL FITLEG EVO				
5-NEG777161	198456	HÆLAVLASTER FITLEG NON-SLIP	58	55	12	TO DELER
5-NEG1387	IKKE REG	BOMULLSTREKK TIL FITLEG NON-SLIP				



FITLeG

FITLEG

FITLEG EVO

FITLEG NON-SLIP



# CAREWAVE | UTPRØV.KIT

DISSE PRODUKTENE I SAMLEDE KIT INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV OG LEVERES UTEN AVTAGBARE TREKK

ART.NR	INNHold I UKITV
5-NEG1056	BAG TIL UKITV
5-NEG0944	UNIVERSALPUTE 2XL
5-NEG0607	TREKANTPUTE L
5-NEG0608	BUEPUTE XXL
5-NEG0610	S-PUTE L
5-NEG0611	SEMI-FOWLERPUTE L
5-NEG0732	HEMI-ARMPUTE L
5-NEG0947	BUEPUTE S
5-NEG0949	NAKKEPUTE BUEFORM L



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	EVENTUELT
5-UKITV	166844	UTPRØVINGSKIT FOR VOKSNE	SETT MED 8 POSISJONERINGSPUTER I EGEN BAG
5-UKITV-COM	IKKE REG	COMBI-TREKK UKITV	SETT MED 8 COMBI-TREKK TIL UTPRØVINGSKIT FOR VOKSNE
5-UKITV-INK	IKKE REG	DARTEX-TREKK UKITV	SETT MED 8 DARTEX-TREKK TIL UTPRØVINGSKIT FOR VOKSNE
5-UKITV-BOM	IKKE REG	BOMULLSTREKK UKITV	SETT MED 8 BOMULLSTREKK TIL UTPRØVINGSKIT FOR VOKSNE
5-UKITB	166843	UTPRØVINGSKIT FOR BARN	SETT MED 9 POSISJONERINGSPUTER I EGEN BAG
5-UKITB-COM	253531	COMBI-TREKK UKITB	SETT MED 9 COMBI-TREKK TIL UTPRØVINGSKIT FOR BARN
5-UKITB-INK	IKKE REG	DARTEX-TREKK UKITB	SETT MED 9 DARTEX-TREKK TIL UTPRØVINGSKIT FOR BARN
5-UKITB-BOM	IKKE REG	BOMULLSTREKK UKITB	SETT MED 9 BOMULLSTREKK TIL UTPRØVINGSKIT FOR BARN




ART.NR	INNHold I UKITB
5-NEG0891	BAG TIL UKITB
5-NEG0605	UNIVERSALPUTE XL
5-NEG0881	UNIVERSALPUTE M
5-NEG0882	BUEPUTE M
5-NEG0948	BUEPUTE XS
5-NEG0883	S-PUTE M
5-NEG0886	SEMI-FOWLERPUTE M
5-NEG0887	TREKANTPUTE M
5-NEG0888	KILEPUTE M
5-NEG0950	NAKKEPUTE BUEFORM M

# CAREWAVE | TILBEHØR

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	EVT
5-NEG0891	158099	CAREWAVE BAG, GRØNN			STR M
5-NEG0617	149198	CAREWAVE BAG, BLÅ			STR L
5-NEG1056	<i>IKKE REG</i>	CAREWAVE BAG TIL UTPRØVINGSKIT FOR VOKSNE, BLÅ			STR XL
5-SIDESTAB	163751	SIDESTABILISERINGSSTØTTE SKUM, TREKANT	200		

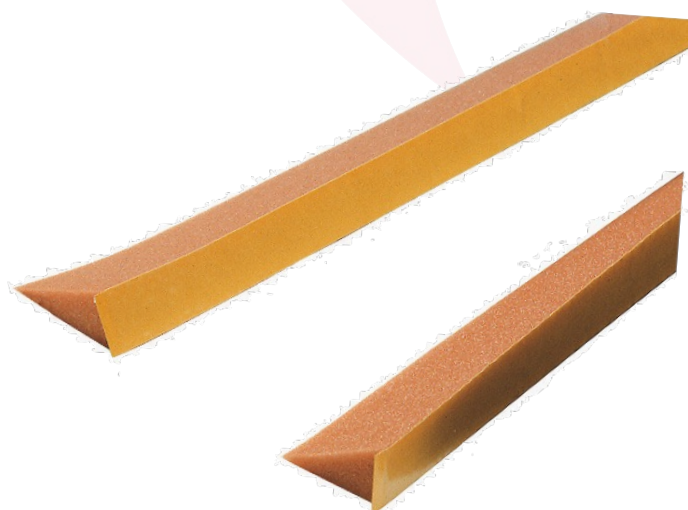


# C&S SEATING | T-PUTER

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV OG LEVERES UTEN AVTAGBARE TREKK

OBS!  
DISSE PRODUKTENE ER PÅ  
VEI UT AV VÅRT SORTIMENT.

PRODUKTENE TILBYS  
INN TIL LAGERHOLDET  
ER TOMT.

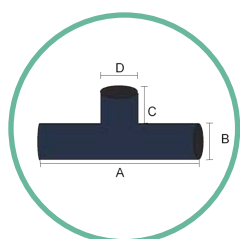

ART.NR	PRODUKT	HMS NR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-3WP	T-PUTE 3WP	149972	71	25	20	20
5-3WP-SK	BOMULLSTREKK TIL T-PUTE 3WP	IKKE REG				
5-2WP	T-PUTE 2WP	149971	71	20	20	20
5-2WP-SK	BOMULLSTREKK TIL T-PUTE 2WP	267930				
5-6WP	T-PUTE 6WP	149975	71	20	20	15
5-6WP-SK	BOMULLSTREKK TIL T-PUTE 6WP	217352				
5-1XL	T-PUTE 1XL	213313	71	15	20	15
5-1XL-SK	BOMULLSTREKK TIL T-PUTE 1XL	213314				
5-1WP	T-PUTE 1WP	149970	51	15	15	15
5-1WP-SK	BOMULLSTREKK TIL T-PUTE 1WP	231022				
5-7WP	T-PUTE 7WP	149976	46	10	15	10
5-7WP-SK	BOMULLSTREKK TIL T-PUTE 7WP	265846				
5-APS-S	ADDUKSJONSPUTE S	149730	50	28		
5-APS-L	ADDUKSJONSPUTE L	IKKE REG	57	34		



# MEDCLINE | REFLUXPUTE

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV


MEDCLINE REFLUXPUTER VIL GI PASIENTER MED REFLUX-PROBLEMATIKK EN VESENTLIG FORBEDRET TILVÆRELSE NÅR DE SKAL SOVE.

PRODUKTET KAN OGSÅ BRUKES TIL PASIENTER SOM HAR BEHOV FOR VINKEL I HOFTE, OG PÅ DENNE PUTEN VIL DE HELLER IKKE GLI NED I SENGA.




ART.NR	HMS NR	PRODUKT	EVENTUELT
5-AH-1267-07	IKKE REG	MEDCLINE REFLUX-PUTE LARGE	SETT MED 3 PUTER
5-AH-1304-07	IKKE REG	MEDCLINE REFLUX-PUTE MEDIUM	SETT MED 3 PUTER
5-AH-1247-07	IKKE REG	MEDCLINE REFLUX-PUTE SMALL	SETT MED 3 PUTER

## STØRRELSESANBEFALINGER

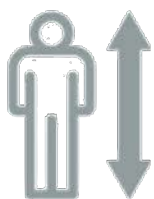


Høyde ca 146-165 cm  
Maks vekt ca 80 kg

**SMALL**

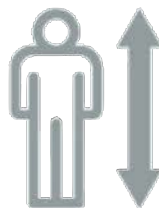

Høyde ca 166-180 cm  
Maks vekt ca 102 kg

**MEDIUM**

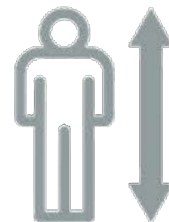


Høyde over 180 cm  
Maks vekt ca 120 kg

**LARGE**

# VAKUUM | SITTEPUTER



DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV

## BASE

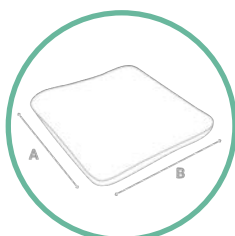


ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990583/V	269795	S	25	38		
5-STAB2990585/V	269797	S+	35	35		
5-STAB2990584/V	269796	M	40	40		
5-STAB2991160/V	202186	M+	45	45		
5-STAB2990586/V	269809	L	50	50		

## BASE HILO

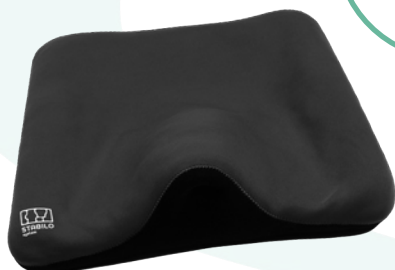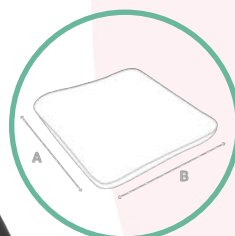

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990776/V	IKKE REG	S	25	38		
5-STAB2990777/V	IKKE REG	S+	35	35		
5-STAB2990778/V	IKKE REG	M	40	40		
5-STAB2990779/V	IKKE REG	M+	45	45		
5-STAB2990780/V	IKKE REG	L	50	50		


## BASE DORO

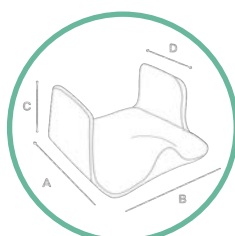

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990798/V	IKKE REG	S	25	30	21	14
5-STAB2990799/V	IKKE REG	S+	35	35	23	18
5-STAB2990800/V	IKKE REG	M	40	40	27	20
5-STAB2990801/V	IKKE REG	M+	45	45	30	29


# VAKUUM | RYGGPUTER

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV

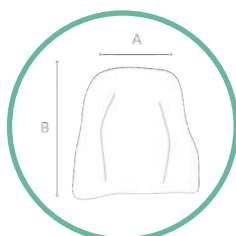

## CONFORTABLE

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990587/V	202457	S	52	40		
5-STAB2990588/V	248813	M	56	50		
5-STAB2990589/V	IKKE REG	L	70	50		

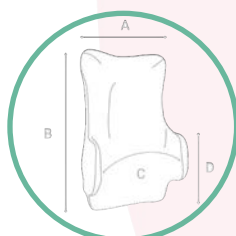


## CONFORTABLE PLUS

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2991031/V	215542	S	30	50	58	28
5-STAB2991032/V	269953	M	35	60	65	28
5-STAB2991033/V	206861	L	40	75	75	35
5-STAB2991034/V	257024	XL	45	75	85	35




# VAKUUM | HELE SITS

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV

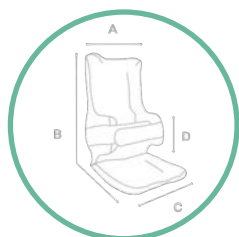


## CONFORTABLE PLUS DUO

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2991035/V	213190	S	30	80	58	28
5-STAB2991036/V	192360	M	35	95	65	28
5-STAB2991037/V	209768	L	40	115	75	35
5-STAB2991038/V	213189	XL	45	120	85	35
5-STAB2990795/V	IKKE REG	XXL	50	140	95	35

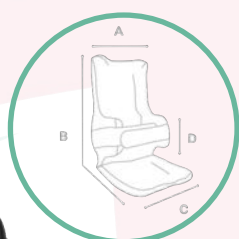

## CONFORTABLE PLUS DUO HILO

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990781/V	IKKE REG	S	30	80	58	28
5-STAB2990782/V	IKKE REG	M	35	95	65	28
5-STAB2990783/V	IKKE REG	L	40	115	75	35
5-STAB2990784/V	IKKE REG	XL	45	120	85	35
5-STAB2990797/V	IKKE REG	XXL	50	140	95	35

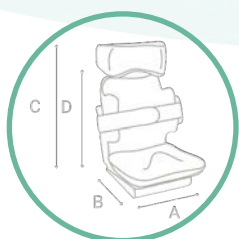


## MULTISEAT

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2991296	IKKE REG	M	38	35	53-62	49-58
5-STAB2991297	IKKE REG	L	42	40	73-82	69-78


# VAKUUM | STØTTEPUTER

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV

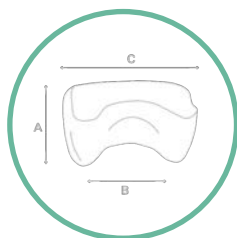


## HEADREST

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990618/V	286488	S	15	30	32	
5-STAB2990708/V	IKKE REG	M	20	35	42	

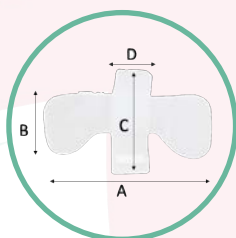

## HEADREST WITH METAL PLATE

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990708MP	236404	M	45	16	31	10

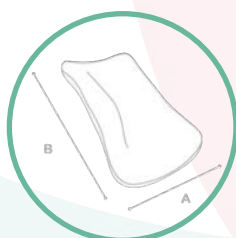

## ARMREST


ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2991261/V	207054	M	20	30		
5-STAB2991262/V	239751	L	25	45		
5-STAB2990700/V	254816	XL	25	65		






# VAKUUM | MADRASS

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV

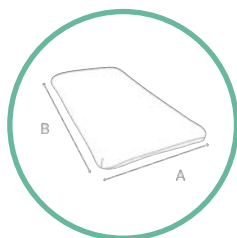

## GRANDE

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990872/V	217271	M	70	160		
5-STAB2991163/V	201720	M+	90	200		
5-STAB2990591/V	IKKE REG	L	130	200		

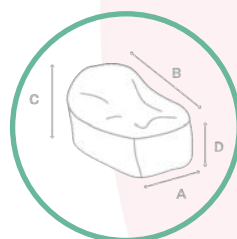


## BEANSEAT

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2991281/V	211717	M	60	80	50	40
5-STAB2991282/V	213187	L	70	100	70	50
5-STAB2990796/V	IKKE REG	XL	70	100	100	80




# VAKUUM | SPESIAL

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV

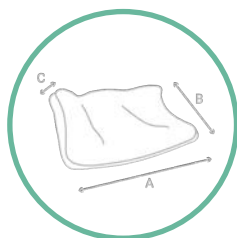


## FLAT

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990745/V	IKKE REG	M	80	50	6	
5-STAB2990746/V	IKKE REG	L	100	50	8	

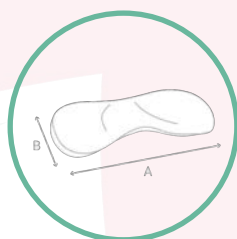

## BANANA

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990737/V	IKKE REG	S	50	25		
5-STAB2990738/V	IKKE REG	M	55	35		
5-STAB2990739/V	IKKE REG	L	80	35		

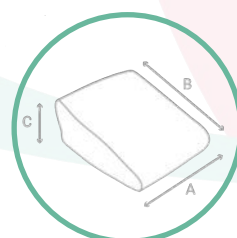


## WEDGE

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990611/V	IKKE REG	M	40	40	25	
5-STAB2990613/V	IKKE REG	L	45	60	40	




# VAKUUM | SPESIAL

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV

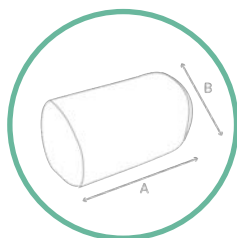

## ROLL

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990740/V	IKKE REG	S	50	25		
5-STAB2990741/V	IKKE REG	M	50	35		
5-STAB2990742/V	IKKE REG	M+	80	18		
5-STAB2990743/V	IKKE REG	L	80	25		
5-STAB2990744/V	IKKE REG	XL	80	35		

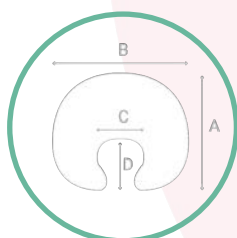


## BATH BAGEL

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990755/V	IKKE REG	S	30	35	10	12
5-STAB2990754/V	IKKE REG	M	35	37	12	17
5-STAB2990768/V	IKKE REG	M+	45	55	12	17
5-STAB2990753/V	IKKE REG	L	45	60	17	22



# VAKUUM | TILBEHØR

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV

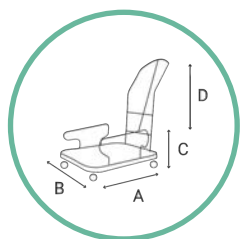

## BEANROLLER, VOGN TIL BEANSEAT

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990770	IKKE REG	M	80	60	44	66
5-STAB2990769	288291	L	100	70	50	66



## SPIDY, TUBESETT

ART.NR	HMS NR	STR	A/cm	B/cm	C/cm	D/cm
5-STAB2990804	IKKE REG		59	34	43	

# VAKUUM | TILBEHØR

DISSE PRODUKTENE INNGÅR IKKE I RAMMEAVTALE MED NAV

STABILISERINGSSHORTS



FESTEBÅND NEOPREN



ELEKTRISK PUMPE



TUBO STØTTESTANG



SPLINT



STABILISERINGSVEST



FESTEBÅND NYLON



MANUELL PUMPE



ART.NR	HMS NR	PRODUKT	LENGDE CM	BREDDE CM	EVT
5-STAB2990641	IKKE REG	VAKUUMPUMPE, MANUELL			
5-STAB2990605	201721	VAKUUMPUMPE, ELEKTRISK			
5-STAB2990610	IKKE REG	STABILISERINGSVEST TIL VAKUUMPUTE			
5-STAB2991263	IKKE REG	SPLINT TIL FESTE AV VAKUUM ARMSTØTTE			
5-STAB2990784	IKKE REG	TUBO STØTTESTANG TIL VAKUUMPUTER			
5-STAB2991269/V1	IKKE REG	FESTEBÅND NEOPREN (MED VELCRO) TIL VAKUUM-PUTER	130	9	STR M
5-STAB2991269/V2	IKKE REG	FESTEBÅND NEOPREN (MED VELCRO) TIL VAKUUM-PUTER	160	9	STR L
5-STAB2991273	IKKE REG	FESTEBÅND NYLON (MED VELCRO) TIL VAKUUMPUTER	140	5	
5-STAB2990805	IKKE REG	FRIKSJONSMATTE TIL VAKUUMPUTER	25	30	STR S
5-STAB2990806	IKKE REG	FRIKSJONSMATTE TIL VAKUUMPUTER	35	35	STR M
5-STAB2990807	IKKE REG	FRIKSJONSMATTE TIL VAKUUMPUTER	45	45	STR L
5-NEG2990730	IKKE REG	SHORTS TIL STABILISERING AV BEKKEN, FOR VAKUUM-PUTER	40	28	STR M
5-NEG2990731	IKKE REG	SHORTS TIL STABILISERING AV BEKKEN, FOR VAKUUM-PUTER	50	35	STR L

# PRODUKTER | RENGJØRING



## CAREWAVE-PUTER:

PUTENE KAN VASKES I VASKEMASKIN PÅ 60°C, MEN VÆR OPPMERKSOM PÅ AT TØRKETIDEN KAN TA OPP TIL FLERE DAGER FØR PUTEN OPPNÅR SIN NORMALE KONSISTENS. TØRKETROMMEL PÅ SVAK VARME KAN BENYTTES MEN ANBEFALES IKKE.

GRUNNET DEN LANGE TØRKETIDEN NEVNT OVENFOR ANBEFALER VI AT PUTENE I STEDET FOR VASK TØRKES AV UTENPÅ MED EN FUKTIG KLUT TILSATT ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL. EN ANNEN ÅRSÅK ER AT POLYURETANET I PUTENES TREKK KAN SMELTE I STERK VARME.



## CAREWAVE AVTAGBARE PUTETREKK:

COMBI-TREKKET KAN VASKES I VASKEMASKIN PÅ 95°C OG KAN OGSÅ TØRKES I TØRKETROMMEL PÅ LAV VARME. VI ANBEFALER DOG DRYPPTØRKNING SIDEN POLYURETAN KAN SMELTE I STERK VARME.

EVENTUELLE EKSTRA PUTETREKK I BOMULLSFROTTÉ ELLER DARTEX POLYURETAN KAN VASKES I VASKEMASKIN PÅ 60°C (BOMULL) / 95°C (DARTEX POLYURETAN) OG KAN OGSÅ TØRKES I TØRKETROMMEL (DARTEX PÅ LAV VARME). VI ANBEFALER DRYPPTØRKNING FOR DARTEX-TREKKET SIDEN POLYURETAN KAN SMELTE I STERK VARME.



COMBI BOMULL DARTEX DARTEX

## VACUSHAPE/STABILO VAKUUMPUTER:

- SKRU PÅ LUFTKORKEN FØR RENHOLD
- VANLIGE VASKEMIDLER KAN BENYTTES, DOG IKKE SYREBASERTE
- VANLIGE DESINFESJONSMIDLER KAN BENYTTES
- PUTENE KAN VASKES I VASKEMASKIN PÅ MAKS 60°C
- PUTENE TØRKES VED OPPHENG ELLER MED PAPIR/TEKSTIL. NB! SKAL IKKE TØRKES I TØRKETROMMEL



## REFLUXPUTER:

PUTENE MED TREKK KAN VASKES I MASKIN PÅ OPPTIL 30°C. KAN OGSÅ TØRKES I TØRKETROMMEL PÅ LAV VARME.







TOGEMO AS  
HALSETSVEA 18  
2323 INGERBERG

TLF: 62 52 62 72  
E-POST: POST@TOGEMO.NO



PRODUKTER I RAMMEAVTALE MED NAV FINNER MAN PÅ  
[WWW.HJELPEMIDDELDATABASEN.NO](http://WWW.HJELPEMIDDELDATABASEN.NO)



VEILEDNING PÅ VIDEO

[WWW.TOGEMO.NO](http://WWW.TOGEMO.NO)



VEILEDNING POSISJONERING