



Shape modeling system™
for

POSISJONERING

Produktliste
v.2014.1



Tlf: 625 26 272 Faks: 625 21 211 E-post: post@togemo.no

Grunnleggende prinsipper

Målsettingene for en inngrepen i en brukers "posisjoneringshverdag" skal være å:

- Optimalisere funksjon
- Redusere og/eller fjerne risiko for sekundærskader
- Forbedre arbeidssituasjonen for omsorgspersonene

Prinsippene for posisjoneringstiltakene er:

- Bevegelse er grunnleggende
- Bevegelse, så vel aktiv som passiv, må være balansert og symmetrisk
 - Postural stabilitet utgjør basis for funksjonell aktivitet
 - Kroppsholdning vil ha innflytelse på de fleste kroppslige funksjoner
- Kroppsholdning påvirker nevrologiske symptomer som for eksempel spasmer
- Tyngdekraften kan påføre stor skade, men kan påvirkes ved adekvat posisjonering
 - Ingen ledd skal befinne seg i ytterposisjon over lengre tid
 - Fysisk og mental tilstand henger nøye sammen
 - Stimulans gjennom aktivitet, både mentalt og fysisk, er viktig
- En god døgplan gir best mulighet til gjennomføring i henhold til prinsippene
- Bruk bilder når en skal illustrere posisjoner, både med og uten hjelpemidler

Mangel på postural stabilitet og selvstendig bevegelse kan disponere for:

- Vevstilpasning (forkorting/forlenging) som fører til kontrakturer og deformiteter
 - Vevsødeleggelse, inklusive trykkskader
- Redusert energitilførsel gjennom negativ påvirkning av respirasjon
 - Infeksjoner i luftveier og urinveier
 - Osteoporose
 - Fordøyelsesbesvær
 - Redusert funksjon

Pauline Pope sier at "det er sannsynlig at assymetri i vevsstrukturer først oppstår med utgangspunkt i en liggende stilling med etablering av en "vanestilling". Denne blir så forsterket i en sittestilling."

I vår daglige hverdag ligger utfordringen i å kombinere de "riktige" tiltakene med det som er praktisk mulig. Funksjon og selvstendighet må alltid veie tyngre enn "korrekt" posisjonering. Når dette hensynet fører til at brukeren for ofte og for lenge inntar "vanestillingen", må vi kompensere med noen "mottrekk". Vi må forsøke å motarbeide den skadelige effekten av feilstillinger og kontrakturer ved for eksempel å legge følgende stillinger inn i dagplanen:

- Daglig mageleie
- Stå/oppreist posisjoner
- Korrigert sideleie (30 og 120-graders leie)
- Sitteposisjon med frontalstøtte

Posisjoneringarbeidet vårt vil avgjøre våre brukeres utvikling negativt eller positivt avhengig av kvalitet og gjennomføringssevne. Prosessen består av følgende elementer:

- Definerings av problemstilling
- Konsekvensutredning
 - Motivering
 - Planlegging
- Gjennomføring
- Evaluering

Kilder: Bodil Uhlmoen, Jan Pool og Pauline Pope



Innholdsfortegnelse

Produkter	Side
Sitteputer	4
Ryggputer	5
Ryggputer m/ bekkenstøtte	6
Ryggputer m/ bekkenstøtte og sittepute	7
Madrasser	8
Arm- og hodestøtteputer	9
Vakuumpumper	10
Renhold	11



Sitteputer



Sitteputer som passer for alle med behov for trykkavlastning eller hjelp til stabilisering. Sitteputene brukes i alle typer stoler fra rullestoler til hvilestoler. Putene kan formes slik at de blir trykkavlastende på bestemte deler av bekken/sete, man kan forme dem slik at det blir en forhøyning mellom bena for å sikre abduksjon av hoftene og putene gir mulighet for å sikre ønsket vinkel eller høyde på hofteddet. Putenes hardhet reguleres ved å justere vakuuemet. Base-putene har neopren-trekk, Elite Membramed-putene har avtakbart inkontinenstrekk mens Elite Denim-putene har avtakbart jeans-trekk. Alle putegruppene har puter i flere størrelser.

VacuShape / Sittepute	Art.nr	Hj.m.nr	A/B cm
Base Small	5-STAB2990583		25x38
Base Small Plus	5-STAB2990585		35x35
Base Medium	5-STAB2990584		40x40
Base Medium Plus	5-STAB2991160	202186	45x45
Base Large	5-STAB2990586		50x50



VacuShape / Sittepute	Art.nr	Hj.m.nr	A/B cm
Elite Membramed Medium	5-STAB2991156		40x40
Elite Membramed Medium Plus	5-STAB2991164		45x45
Elite Membramed Large	5-STAB2991157		50x50



VacuShape / Sittepute	Art.nr	Hj.m.nr	A/B cm
Elite Denim Medium	5-STAB2991158		40x40
Elite Denim Medium Plus	5-STAB2991165		45x45
Elite Denim Large	5-STAB2991159		50x50



Ryggputer



Ryggputer som kan formes slik at de gir god støtte og stabilitet til rygg og hofter. Tilpasningsmulighetene vakuumputene gir gjør at de kan formes og brukes til ulike ryggkurvaturer og skolioser. Ryggputene gir en behagelig stilling og god støtte også i rullestoler med lav rygg og sportsrullestoler. Kan brukes alene eller sammen med sitteputer. Putenes hardhet reguleres ved å justere vakuomet. Finnes i 3 størrelser.

MÅL




VacuShape / Ryggpute	Art.nr	Hj.m.nr	A/B cm
Comfortable Small	5-STAB2990587	202457	52x40
Comfortable Medium	5-STAB2990588		56x50
Comfortable Large	5-STAB2990589		70x50

Ryggputer m/ bekkestøtte



Ryggputer for brukere med lav muskeltonus og behov for ekstra støtte for hode og hele truncus. Putene har sidestøtte som festes foran med velcro-bånd. Putene kan formes til et passende korsett og brukerens kropp kan få støtte på eksakt ønskede punkter. Kan brukes i ulike type stoler og rullestoler innendørs og utendørs. Putenes hardhet reguleres ved å justere vakuemet. Finnes i 4 størrelser.

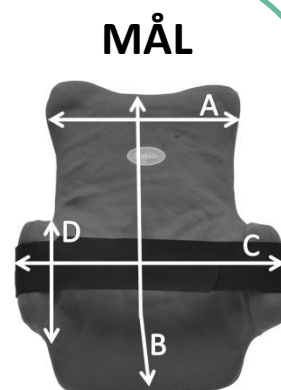

VacuShape / Ryggpute m/ bekkenstøtte	Art.nr	Hj.m.nr	A/B/C/D cm
Comfortable Plus Small	5-STAB2991031		30x50x58x28
Comfortable Plus Medium	5-STAB2991032		35x60x65x28
Comfortable Plus Large	5-STAB2991033		40x75x75x35
Comfortable Plus X-Large	5-STAB2991034		45x75x85x35


Ryggputer m/ bekkestøtte og sittepute



Kombinasjon av sittepute og ryggpute med sidestøtte. Putene gir et komplett sete som gir mulighet for individuell tilpasset støtte for hode, nakke, rygg, bekken og hofter. Kan flyttes mellom rullestol, hvilestol, sofa og bil. Putenes hardhet reguleres ved å justere vakuemet. Finnes i 4 størrelser.



MÅL

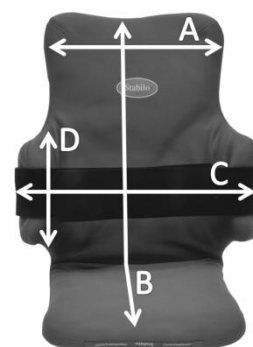


VacuShape / Ryggpute m/ bekkenstøtte og sittepute	Art.nr	Hj.m.nr	A/B/C/D cm
Comfortable Plus Duo Small	5-STAB2991035		30x80x58x28
Comfortable Plus Duo Medium	5-STAB2991036	192360	35x95x65x28
Comfortable Plus Duo Large	5-STAB2991037		40x115x75x35
Comfortable Plus Duo X-Large	5-STAB2991038		45x120x85x35

Madrasser



Vakuumputer i madrass størrelse. Gir gode trykkavlastende og stabile liggestillinger, hvilestillinger og sitte-stillinger. Passer for alle med behov for madrass med jevnt lav trykk, trykkavlastning bestemte steder og ekstra støtte på bestemte steder. Gir flere gode muligheter for svært stabile sideliggende stillinger. Formet som en stol tillater de brukeren å komme opp med overkroppen, oppnå ønsket fleksjon og abduksjon i hofter og ønsket fleksjon i knær. Putenes hardhet reguleres ved å justere vakuuet med elektrisk pumpe. Finnes i 4 størrelser.

MÅL

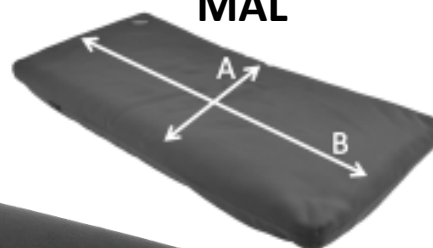

NB! Ved bestilling av madrass må elektrisk vakuumpumpe bestilles i tillegg. Se side 10.

VacuShape / Madrass	Art.nr	Hj.m.nr	A/B cm
Grande Small	5-STAB2990160		40x60
Grande Medium	5-STAB2990872		70x160
Grande Medium Plus	5-STAB2991163	201720	90x200
Grande Large	5-STAB2990591		130x200

Arm- og hodestøtteputer




Vakuumputer som gir god støtte og stabilitet til arm eller hode. Putenes hardhet reguleres ved å justere vakuomet. Armstøtteputene finnes i 2 størrelser, mens hodestøtteputen kommer i 1 størrelse.

VacuShape / Hodestøtte	Art.nr	Hj.m.nr	A/B cm
Headrest	5-STAB2990618		15x30



MÅL

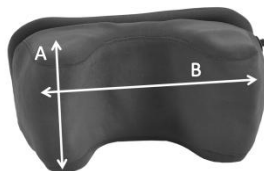

VacuShape / Armstøtte	Art.nr	Hj.m.nr	A/B cm
Armrest Medium	5-STAB2991161		25x30



MÅL



VacuShape / Armstøtte	Art.nr	Hj.m.nr	A/B cm
Armrest Large	5-STAB2991162		25x45



MÅL



Vakuumpumper



Alle vakuumputene, bortsett fra for madrassene (Grande), leveres med 1 stk manuell vakuumpumpe som er inkludert i prisen. Men det er naturligvis mulig å bestille ekstra vakuumpumper, manuell og/eller elektrisk. Desto større pute, desto mer anbefales elektrisk pumpe. Ved bestilling av madrass må pumpe bestilles separat (anbefalt elektrisk vakuumpumpe).



Elektrisk vakuumpumpe til bruk ved tilpassing og støping av vakuummadrassene. Gir mulighet for raskt og enkel endring av putens form. Kan også benyttes til andre vakuumputer.



Manuell vakuumpumpe til bruk ved tilpassing og støping av sitteputen, ryggputen, ryggputen med sidestøtte og duo puten. Suger luft ut av puten. Svært enkel i bruk.

VacuShape / Vakuumpumpe	Art.nr	Hj.m.nr
Vakuumpumpe Elektrisk	5-STAB2990605	201721
Vakuumpumpe Manuell	5-STAB2990641	

Renhold

1. Kontroller jevnlig putens forfatning
2. Skru på luftkorken før renhold
3. Vanlige vaskemidler kan benyttes, dog ikke syrebaserte
4. Alle vanlig benyttede desinfeksjonsmidler kan benyttes
5. Kan vaskes i vaskemaskin på maks 60°C
6. Tørkes ved oppheng eller med papir/tekstil
NB! Skal ikke tørkes i tørketrommel

Det er 2 års garanti på produktene.

VacuShape-produktene er CE-merket



Togemo as

Postadresse

Birkebeinervegen 21
2316 Hamar

Besøksadresse

Birkebeinervegen 21
2316 Hamar

Telefon 625 26 272

Faks 625 21 211

Epost post@togemo.no

www.togemo.no

