


Ståstativ HML



DELTA2004

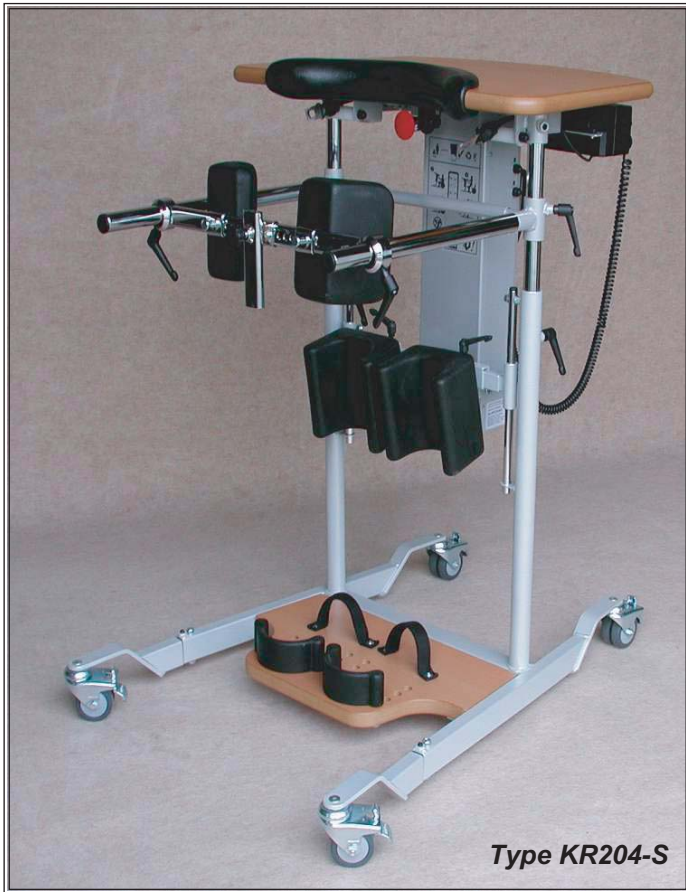

Type KR204-S

DELTA2004 Evolution



Type KR214-S

Art.nr. KR204-B (RTV.nr. 146707) **Ståstativ DELTA2004** har elektrisk optrekk

Art.nr. KR214-B (RTV.nr. 146280) **Ståstativ DELTA2004 Evolution** har elektrisk optrekk og tiltefunksjon

Tekniske data (Med forbehold om endringer.)

Lengde: 118 cm
Bredde: 77 cm
Høyde: 99 cm - 127 cm
Vekt: 58 kg

Standard strømstyrke: 230V / 50Hz
Effektforbruk: 120 VA
Brukers høyde: 140 cm - 200 cm
Brukers maksimumsvekt: 120 kg



HML Hjelpemiddel-leverandøren AS

Branderudvn. 90, 2015 Leirsund, Tlf. 63870580, Faks 63870581

E-post: firmapost@hml.no, Web: www.hml.no

NYHET!




Ståstativet "Delta Evolution", som har vippefunksjon, gir mer komfort for brukeren når man reiser seg opp, enn ståstativ med standarddesign. Armstøtter, knestøtter og fotplate bøyes mot pasienten før han reiser seg.

Hvordan man kommer seg opp i stående stilling ved bruk av "Delta 2004 Evolution", type KR-214-B/S



Oppreisnings Prosess:

- Tilt stativet bakover ved å trykke tast som vist på håndkontrollen.
- Klikk inn de to beltespennene i pasientens løfteseil.
- Stram inn beltetauene ved å det trykke tast som vist på håndkontrollen til tauene er strammet. Pasienten er ikke blitt løftet enda.
- Ved å trykke på stå-tasten, blir de to motorene aktivert samtidig og prosessen med å reise seg til stående stilling har begynt (ill. 9-12).

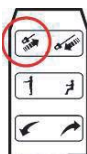

De bakre hjulfestene kan svinges ut for å gi plass til stoler som er ekstr brede, eller har brede drivringer.

Det kan selvsagt også brukes ekstrautstyr som hoftestøtte og rygg og bolstøtte på Ståstativet Delta 2004 Evolution