

VICAIR[®]

Vector O2

Vår mest stabile pute for rullestolbrukere



Tilpasser seg kroppens konturer

For optimal posisjonering og trykkavlastning



Yes, you can.[®]

Hvorfor Vicair?

Vicair sitteputer gir den optimale kombinasjonen av trykkavlastning, høy kvalitet og stabil posisjonering for brukere med middels og høy risiko for å utvikle trykksår.

Sitteputene, som er klinisk testet, kan tilpasses individuelt og krever svært lite vedlikehold. De trenger ingen daglig kontroll, og er derfor enkle å benytte både av brukere og pleiere. Vekten på putene er lav med et gjennomsnitt på mindre enn 750 gram.

Putene fra Vicair gir maksimal hudbeskyttelse, optimal postural støtte og er i tillegg svært brukervennlige. Kort oppsummert **#theperfectpackage!**

Unikt design

I Vicair sitteputer og ryggputer brukes Vicair Technology™, en unik og innovativ metode som gir en dynamisk overflate og støtte. Putene inneholder flere hundre små pyramideformede luftfylte celler, SmartCells, med lav friksjon og avrundede hjørner. Cellene glir lett mot hverandre, og former seg etter kroppens form. Resultatet gir en optimal kombinasjon av trykkavlastning, støtte og stabilitet. Putene er delt inn i flere seksjoner med ulik fyllingsrate for å minimere trykk og forskyvning.

Optimal posisjonering og trykkavlastning

Vicair sitteputer og ryggputer er klinisk testet med meget gode resultater. Putene kan brukes til å forhindre trykksår for brukere med middels eller høy risiko. De gir en høy grad av stabilitet, noe som gir komfort og bevegelsesfrihet for brukeren.

Mange muligheter

Det er flere behov som skal dekkes i sittende posisjon. Putene skal være trykkavlastende samtidig som det ofte er behov for posisjonering, som for eksempel å korrigere feilstillinger eller å forhindre at nye oppstår. For å dekke de fleste behov har Vicair en rekke ulike modeller som kan justeres individuelt. Alle sitteputene har et slitesterkt, strekkbart og komfortabelt trekk. Trekket finnes i standard og som inkontinestrekk. Til Vector O2, Adjuster O2 og Active O2 finnes et ekstra pustende trekk.

SmartCells

Tynt og følsomt materiale i en ny farge med avrundede hjørner for økt komfort. Cellene kan vaskes i vaskemaskinen på 60°.



Vicair Vector O2

På anbud med NAV

Vicair Vector O2 er en forhåndsformet pute bestående av 9 individuelle kamre. Hvert kammer er designet for å støtte og påvirke ulike områder av bekkenet, og puten gir med det en unik balanse mellom å bevare huden rundt sitteknutene og halebeinet, omfordele trykket, stabilisere bekkenet og oppnå en hensiktsmessig plassering av lårbeina.

For individuell tilpasning og ved spesifikke behov kan fyllingen av de ni kamrene enkelt justeres. Dette kan være en fordel for brukere som: (1) trenger korrigerende eller tilpasning av bekkenskjevhet, (2) Ønsker (delvis) avlastning av sitteknuter og halbeinsområdet eller (3) Trenger korrigerende eller tilpasning for bedre posisjonering av lårene (f.eks. abduksjon eller ved ensidig fotfremdrift).

1. plass i delkontrakt 4 (6 cm)

1. plass i delkontrakt 5 (10 cm)

2. plass i delkontrakt 7 (10 cm)

- ✓ Ni justerbare kamre for optimal stabilitet
- ✓ Forbedrer brukerens rekkevidde
- ✓ Gir ekstra støtte og posisjonering av lårene

› **Bekkenbrønn** - To kamre for eksepsjonell trykkavlastning i området rundt halebeinet samt ekstra posisjoneringsmuligheter

› **God støtte til trochanter**
Faster tetthet for bedre sidestabilitet | Omfordeler trykket og bidrar til å skape en bekkenbrønn

› **Frontkamrene** gir god støtte og stabilitet for beina | Lett å justere for individuelle posisjoneringsbehov

› **Medium høy glidelåslukking** for enkel justering når brukeren sitter | Puten holder på fasongen og bidrar til forbedret hudbeskyttelse



Kan inngå i behandlingsplan ved trykksår



100 % pustende



Solid og holdbar fasong



Kan maskinvaskes



Klar til bruk - rett ut av esken!

Vicair Vector Junior

På anbud med NAV

Vicair Vector Junior er velegnet for barn, og gir god komfort samtidig som den reduserer risikoen for trykksår. Sitteputen er delt opp i 6 individuelle kamre med hundrevis av luftfylte SmartCells for god individuell tilpasning. Puten gir gode justeringsmuligheter ved komplekse posisjoneringsbehov og ønske om optimal trykkavlastning.

5. plass i delkontrakt 7 (Vector Junior)

- ✓ Ni justerbare kamre for optimal stabilitet
- ✓ Forbedrer brukerens rekkevidde
- ✓ Gir ekstra støtte og posisjonering av lårene

› **God støtte til trochanter**

Faster tetthet for bedre sidestabilitet | Omfordeler trykket og bidrar til å skape en bekkenbrønn

› **Bekkenbrønn** - To kamre for eksepsjonell trykkavlastning i området rundt halebeinet samt ekstra posisjoneringsmuligheter

› **Medium høy glidelåslukking** for enkel justering når brukeren sitter | Puten holder på fasongen og bidrar til forbedret hudbeskyttelse

› **Frontkamrene** gir god støtte og stabilitet for beina | Lett å justere for individuelle posisjoneringsbehov

Putestørrelser Vector O2

Standard (Strl >53 cm, kun tykkelse 10 cm)

På forespørsel

Inch	bredde										
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
15	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
16	40	43	45	48	50	53	55	58	60		
17	43	45	48	50	53	55	58	60			
18	45	48	50	53	55	58	60				
19	48	50	53	55	58	60					
20	50	53	55	58	60						
21	53	55	58	60							
22	55	58	60								
23	58	60									
24	60										

Tekniske data ▼



Størrelse ▼

Bredde og dybde mellom 35 og 60 cm. Se oversikt over kombinasjoner for ulike putehøyder



Høyde ▼

6 og 10 cm



Maks brukervekt ▼

250 kg



Vekt ▼

725 g (vil variere noe ut i fra putens høyde og størrelse)



Maskinvask ▼

Maks 60°C



Trekk ▼

Vicair O2 topptrekk (standard), komforttrekk, inkontinestrekk og vendbart trekk

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo