

Contoured BBXS (ekstra myk med bredere sittegropp) for mennesker med ekstra sensitiv hud

BBXS Contour



Stimulite Contoured Ekstra Myk med bredere sittegropp er en trelags sittepute beregnet for personer med høy risiko for å utvikle trykksår. Det dypeste punktet i sittegroppen er tre centimeter bredere enn på Stimulite Contoured Ekstra Myk for bredere bekkener. Putens myke topplag av føyelig termoplastisk polyuretan (100%) med bikakestruktur (Honeycomb) gjør den særlig egnet for personer med ekstra følsom hud. Konstruksjonen gjør at puten er meget luftig å sitte på. Putens konturnorm er spesielt beregnet for para- og tetraplegikere med behov for en optimal sittstilling og trykkavlastning. Puten er fremstilt av et avansert, medisinsk godkjent materiale og er naturlig anti-bakteriell, allergifri, hindrer soppdannelse og holder seg luktfri etter rengjøring. Puten veier bare ca. 1,5 kilo og kan vaskes og tørkes i maskin i vaskeposen som følger med (se vaskeanvisning). Stimulite-putene er punkterings sikre, har ingen ventiler, ingen pumpe, og ingen løse deler. Putens luftvolum eller konsistens endres ikke over tid eller ved skiftende temperatur. Puten leveres alltid komplett utstyrt og krever ingen tilleggs kjøp for å oppnå optimal funksjon. Stimulite-putene er konstruert med tanke på minimale servicekostnader og vedlikeholdsbehov. Det gir stor trygghet for brukere og rekvirenter, og optimal kontroll med kostnader.

Maks. brukervekt 130 kg. Min. brukervekt 25 kg.

Trykkavlastning: Sitteputene Stimulite avlaster trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdeler. Stimulite Contoured Ekstra Myk med bredere sittegropp fordele trykk fra sete- og lårknuter til mykdeler under lårene, og behandler trykksår opptil sårgrad 3. En mykere lag beskytter ischial og haleben og hindrer "sitte gjennom".

Hindrer hudskjørhet: Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår. Stimulites cellekonstruksjon med bikakestruktur (honeycomb) er perforert og tillater dermed luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. Stimulites pustende trekk lufte ut fuktighet og holder huden tørr. Både Stimulite-puten og trekket kan vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel. Det gjør det enklere å opprettholde god hud- og kroppshygiene. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni det pustende trekket på undersiden av grunnputen. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin, og ved regelmessig rengjøring oppstår det ikke lukt. Puten er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.

Redusere shear: Den laterale stivheten til cellene i Stimulite Contoured Ekstra Myk med bredere sittegropp avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Stimulite sitteputens unike bikakeceller gir full bevegelighet i alle retninger. Seteknutene synker ned i puten og omslutes av cellene, slik at trykket blir likt på alt vev. Cellen er anisotrop, det vil si at den har full bevegelighet i alle retninger. Selve cellene gir ikke absolutt "stopp", men kan alltid bevege seg. Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av bevegelige celler som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.

VASKEINSTRUKSJONER FOR PUTE OG TREKK

StimuLITE sittepute kan enten håndvaskes eller vaskes i maskin, avhengig av størrelsen på din vaskemaskin. Hvis du velger maskinvask, følg instruksjonene nedenfor! Maskinvask (30°- 40°) finvask, tørketromles tørr/lav varme

1. For lengre holdbarhet på sitteputen vask og tørk den i en vaskepose.
2. For å unngå at sitteputen og trekket skal farge av, bør de vaskes separat.
3. Fest sammen borrelåsen.
4. Bruk små mengder finvaskemiddel uten blekemiddel.
5. Etter vask legger du på trekket med trekkjeden bakover mot den runde baksiden og åpner cellene oppad.
6. Det kan brukes virkonløsning for å rengjøre StimuLITE-produkter for MRSA-bakterien.
7. Ved behov kan StimuLITE-produktene vaskes ved 60°, i ca. 30 min.
8. Jo oftere du vasker puten, desto bedre er det for Putens form og egenskaper.
9. Puten og trekket kan tørketromles.
10. **Ved rekondisjonering** Putens kjerne er utstyrt med artikkelnummer, og det er også dynetrekket, og de stemmer overens med hverandre. Når produktet er forbrukt, leveres det inn til plastresirkulering.

Rehabshopen er ikke ansvarlig for skader som oppstår ved vask eller tørking!

FLAMMESIKKERHET

Samtlige StimuLITE sitteputer er branntestet og godkjente i henhold til NSEN 1021, samt CE-merket. Trekkets flammebeskyttelse er et tynt strekketøy i kevlar (samme materiale som brannmenn har i sine underklær), som er festet under trekkets overside. Trekkets tøy består av porøst polyestermateriale som slipper gjennom væske og luft.

GARANTI

2 års garanti gjelder for StimuLITE sitteputer. Garantien inkluderer skader som er avhengig av produksjon eller materialfeil. Garantien dekker ikke normal håndtering og slitasjeskader, eller skader som har oppstått i forbindelse med vasking og tørking da vaskeråd ikke har medfulgt.

VIKTIG!

StimuLITE sitteputer er produsert for å forebygge trykksår. Når det gjelder Slimline sittepute (lav profil), skal personer uten følelse eller som har høy risiko for å få trykksår overveie å anskaffe StimuLITE Countoured eller StimuLITE Classic sittepute. Hvis du oppdager ubehag med sitteputen eller rødhet på huden: Avbryt bruken og ta kontakt med din lege eller terapeut.

BRUKSANVISNING

StimuLITE sitteputer er beregnet til rullestoler.

- Rund bunn for hengekøyesete.
 - Standard bunn for plant sete.
1. Plasser puten med de åpne cellene oppover og den rundede siden bakover med uttak for ryggstøtterørene.
 2. Spesielle tilpasninger (bekåring bredde, dybde, churning av fordympningen for rullstolsrør, eller stubbe) av grundputen kan gjøres ved hjelp av en varm kniv. Det er ikke anbefalt å beskjære StimuLITE pad på toppen, fordi det reduserer trykkutjevningsevne til pute. Rehabshop er ikke ansvarlig for sår som følge av feil beskjæring.
 3. Borrelåsen på trekket plasseres under Puten, slik at trekkjeden kommer bak.
 4. StimuLITE sittdynor är gjorda av thermoplastisk polyurethanplast (cellplast).
 5. Trekket består av Cordura og polyester.
 6. Brukervekt- ca 130 kg
 7. Inkontinensinnlegg hvit side opp! Plasseres under puten på innsiden av trekket.

StimuLITE Contoured BBXS (Ekstra Myk Brederer Sittegrop) StimuLITE Contoured BBXS avrundet bunn +S

Art. nr.	Størrelse	Art. nr.	Størrelse
CDBBXS1414	b36 d36 h8	CDBBXS1716	b43 d41 h8
CDBBXS1416	b36 d41 h8	CDBBXS1717	b43 d43 h8
CDBBXS1418	b36 d46 h8	CDBBXS1718	b43 d46 h8
CDBBXS1420	b36 d51 h8	CDBBXS1720	b43 d51 h8
CDBBXS1516	b38 h41 h8	CDBBXS1816	b46 d41 h8
CDBBXS1517	b38 d43 h8	CDBBXS1817	b46 d43 h8
CDBBXS1518	b38 d46 h8	CDBBXS1818	b46 d45 h8
CDBBXS1520	b38 d51 h8	CDBBXS1820	b46 d51 h8
CDBBXS1616	b41 d41 h8	CDBBXS2016	b51 d41 h8
CDBBXS1617	b41 d43 h8	CDBBXS2018	b51 d46 h8
CDBBXS1618	b41 d46 h8	CDBBXS2020	b51 d51 h8
CDBBXS1620	b41 d51 h8		

avrundet bunn +S: for eksempel CDBBXS1416S

Cordura trekk: COVCD + størrelse kode f.eks COVCD1517

Ull trekk: WCOVCD + størrelse kode

Vanntett trekk: WPC + størrelse kode

Alle CDBBXS modellene kommer med to Corduraöverdrag, 1 inkontinensinnlegg og en vaskepose

StimuLITE Inkontinensinnlegg Størrelse (Sittbredde x Sittdybde)

Art. nr.	Størrelse
IN1010	b26 d26
IN1212	b31 d31
IN1414	b36 d36
IN1616	b41 d41
IN1618 / IN1816	b41 d46 / b46 d41
IN1818	b46 d46
IN2020	b51 d51



GÖRAN SJÖDÉN'S REHABSHOP NORGE AS

Henrik Ibsens gt 90 0255 OSLO tel +47 40 55 37 40 Fax +47 22 83 70 11

www.rehabshop.com info@rehabshop.com

