



# Simple Stuff Works



# Simple Stuff Works posisjoneringssystem

## Et lydløst og behagelig posisjoneringssystem som er enkelt i bruk

Simple Stuff Works posisjoneringssystem gjør det enkelt å posisjonere. Ved hjelp av stabiliseringslaken, behagelig overmadrass, lateralstøtter og puter, posisjoneres personen på enkel og behagelig måte. Stabiliseringslakenet holder alt på plass, og materialet i putene er faste og komprimeres ikke ved bruk.

Ved bruk av Simple Stuff Works posisjoneringssystem opplever man ingen forstyrrende lyder ved plassering av lateralstøtter eller puter. Innholdet i alle puter er lydløst. Pasienten kan repositioneres uten å bli vekket. Ingen lyder skremmer pasienten eller utløser spastisitet ved flytting av de laterale støttene.

Simple Stuff Works posisjoneringssystem kan brukes til barn og voksne. Du velger selv hvilke komponenter du vil bruke; stabiliseringslaken, overmadrass, frottélaken, lateralstøtter, kileputer hesteskopute, sylindrerputer, stabiliseringspute for knær eller fotstøtter.

Vi anbefaler at man alltid velger stabiliseringslaken sammen med det romslige frottélakenet og overmadrass når man skal posisjonere med lateralstøtter eller kileputer. Stabiliseringslakenet inneholder et stoff som hindrer fremvekst av bakterier og mugg. Alle komponenter produseres i pustende materiale, og kan bestilles hver for seg.

### Simple Stuff Works stabiliseringslaken

Stabiliseringslakenet skal brukes over og under lateralstøtten for å holde den på plass. Puter vil også kunne benyttes i kombinasjon med stabiliseringslakenet. Stabiliseringslakenet til Simple Stuff Works inneholder Steri Touch som hemmer fremvekst av bakterier og mugg, og er produsert i perforert materiale som gir god ventilasjon.

Leveres som et sett, med to stk. laken i ulike størrelser. Settene kommer i tre ulike størrelser; barneseng, enkelseng og dobbelseng. Stabiliseringslakenet kan vaskes.

### Simple Stuff Works overmadrass

Overmadrassen til Simple Stuff Works forenkler posisjoneringen slik at man kan løfte og rotere pasienten, og enkelt plassere lateralstøtter eller puter når man posisjonere. Tykkelsen på overmadrassen gir god komfort, og er ikke for tykk. De sikrer at den holder formen ved posisjonering og ikke krøller. Overmadrassen er laget av pustende fibre som er fukt- og temperaturregulerende. Den gir et behagelig sengeklimate. Denne tynne overmadrassen har en perfekt størrelse for vaskemaskin. Overmadrassen til Simple Stuff Works leveres i to ulike størrelser, og kommer i et sett med to overmadrasser. Kan vaskes.



Simple Stuff Works stabiliseringslaken, overmadrass og frottélaken



# Simple Stuff Works posisjoneringssystem

## Simple Stuff Works frottélaken

Det romslige frottélakenet gjør det enklere å få plassert lateralstøtter og puter. Det er produsert i brannhemmende fibre. Frottélakenet er av meget god kvalitet, og holder på formen etter mange vask. Lakenet tilbys i tre ulike størrelser.



Simple Stuff Works frottélaken

## Simple Stuff Works lateralstøtter

Simple Stuff Works lateralstøtter gir stabil støtte til personen som skal posisjoneres. Lateralstøttene plasseres mellom de to stabiliseringslakenene som holder støttene på plass. Lateralstøttene kommer uten polster, og dette bestilles separat. Både lateralstøtter og polster fra Simple Stuff Works bestilles parvis, og kommer i tre ulike størrelser. Polstrene kan vaskes.



Simple Stuff Works lateralstøtter

## Simple Stuff Works stabiliseringspute for sideleie

Stabiliseringspute for sideleie fordeler kroppsvekten over bekkenet slik at hoftene holdes i en nøytral posisjon. Vekten av det øverste benet støttes av puten. Personen legges i sideleie og puten plasseres bak det underste benet slik at buen på puten følger buen på benet.



Simple Stuff Works stabiliseringspute for sideleie

## Simple Stuff Works stabiliseringspute for bekken

Simple Stuff Works stabiliseringspute for bekken støtter femur (lårben), og holder hofter og bekken i en symmetrisk og komfortabel posisjon, men den gir også mulighet for bevegelse. Ved ekstensjonsspasmer legger knærne seg tilbake til utgangsstillingen igjen.

Stabiliseringsputen er fukt- og temperaturregulerende. Den tilbys i fire ulike størrelser og kan vaskes; både som én enhet eller ved å ta av trekket. Pute og trekk kan vaskes.



Simple Stuff Works stabiliseringspute for bekken

## Simple Stuff Works fotstøtter

Fotstøttene til Simple Stuff Works støtter foten i en nøytral posisjon og hindrer at foten faller ut til siden eller faller fremover. De forebygger også utvikling av trykksår på hælene, da trykket direkte på hælene minskes. I kombinasjon med stabiliseringspute for knær holdes føttene i nøytral stilling. Simple Stuff Works fotstøtter er laget av pustende fibre som er fukt- og temperaturregulerende. Fotstøttene tilbys i tre ulike størrelser og leveres i par; en høyre og en venstre fot. De kan vaskes.



Simple Stuff Works fotstøtter

## Simple Stuff Works kileputer

Kileputene fra Simple Stuff Works kan benyttes i kombinasjon med stabiliseringslakenet, sammen med lateralstøttene eller alene. Disse putene er i et fast materiale slik at de ikke beveges ut av posisjon. Stabile puter reduserer forskyvningskreftene som kan gi trykksår. Kileputene er laget av pustende fibre med god fuktregulering. Kan vaskes.



Simple Stuff Works kileputer



## Simple Stuff Works hesteskopute og sylinderpute

Simple Stuff Works hesteskoputer og sylinderputer brukes for å støtte og korrigere posisjonene som man ønsker å oppnå hos personen som posisjoneres. Kan vaskes.

Putene er laget av pustende fibre med god fuktregulering, og gir et behagelig sengeklime. Putene fra Simple Stuff Works er produsert i lydløst materiale og er noe mykere enn kileputene til Simple Stuff Works. Hesteskoputene og sylinderputene tilbys i to ulike størrelser.

Innholdet i produktene fra Simple Stuff Works heter Cirrus, og dette stoffet er fukt- og temperaturregulering.

Det anbefales at Simple Stuff Works stabiliseringslaken, overmadrass, frottélaken og lateraltstøtter bestilles sammen for å oppnå best mulig posisjonering av de ulike komponentene.



Simple Stuff Works hesteskopute



Simple Stuff Works sylinderpute

## Simple Stuff Works posisjoneringssystem

## Tekniske data

HMS nr.	Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Mål cm	Teknisk data	Vaskeanvisning
206920	DY1	SSW stabiliseringslaken enkelseng	Sett	BxL	183x250/183x100	40°
198624	DY2	SSW stabiliseringslaken barneseng	Sett	BxL	183x130/150x70	40°
198628	SC	SSW frottélaken barneseng	Stk	BxL	70x140	40°
201917	SS	SSW frottélaken enkelt seng	Stk	BxL	90x190	40°
233819	SD	SSW frottélaken dobbel seng	Stk	BxL	135x190	40°
198883	T1	SSW overmadrass barneseng	Stk	BxLxH	60x100x1,8	95°
198627	T2	SSW overmadrass enkelt seng	Stk	BxLxH	110x100x1,8	95°
	F1	SSW fotstøtter str. 1	Par	Skostørrelse	Opp til 33	40°
198629	F2	SSW fotstøtter str. 2	Par	Skostørrelse	33-38	40°
198882	F3	SSW fotstøtter str. 3	Par	Skostørrelse	38-42	40°
200165	HSP	SSW pute hesteskoformet str. L	Stk	DxBxH	50x40x15	40°
201590	HSP/S	SSW pute hesteskoformet str. S	Stk	DxBxH	40x35x12	40°
198625	LS1	SSW lateraltøttestr. S	Par	DxBxH	10x10x10	Polster 95°
198880	LS2	SSW lateraltøttestr. M	Par	DxBxH	14x14x14	Polster 95°
201433	LS3	SSW lateraltøttestr. L	Par	DxBxH	20x20x20	Polster 95°
201990	SR	SSW kileputer myke, str. S smal	Par	DxBxH	16x8x8	40°
206951	SRW	SSW kileputer myke, str. S bred	Par	DxBxH	21x12x12	40°
206950	MR	SSW kileputer myke, str. M smal	Par	DxBxH	28x8x9	40°
217497	MRW	SSW kileputer myke, str. M bred	Par	DxBxH	32x12x12	40°
	LR	SSW kileputer myke, str. L smal	Par	DxBxH	37x8x9	40°
233818	LRW	SSW kileputer myke, str. L bred	Par	DxBxH	50x12x12	40°
213119	SL/1	SSW stabiliseringspute for sideleie str. 1	Stk	LxDxBxB	38x30x12x50	40°
198666	SL/2	SSW stabiliseringspute for sideleie str. 2	Stk	LxDxBxB	60x40x12x80	40°
198667	SL/3	SSW stabiliseringspute for sideleie str. 3	Stk	LxDxBxB	60x40x14x100	40°
198630	SS/1	SSW stabiliseringspute for bekken str. 1	Stk	BxHxD	45x25x13	40°
199102	SS/2	SSW stabiliseringspute for bekken str. 2	Stk	BxHxD	45x30x15	40°
199103	SS/3	SSW stabiliseringspute for bekken str. 3	Stk	BxHxD	50x30x20	40°
198884	SS/4	SSW stabiliseringspute for bekken str. 4	Stk	BxHxD	60x35x22	40°
	SS/5/C	SSW stabiliseringspute for bekken str. 5	Stk	BxHxD	75x35x22	40°
	NSP	SSW nakkepute	Stk	DxBxH	30x35x10	40°
200718	SAPS	SSW pute sylinderformet str. S	Stk	OxL	30x40	40°
200166	SAPL	SSW pute sylinderformet str. L	Stk	OxL	50x50	40°

## Tilbehør

HMS nr.	Art.nr	Beskrivelse
	DSB	SSW bag for produkter, m/snor
198626	SPC	SSW trekk til lateraltøttestr. LS1, par
198881	MPC	SSW trekk til lateraltøttestr. LS2, par
201916	LPC	SSW trekk til lateraltøttestr. LS3, par
235129	HC1	SSW pute hesteskoformet standard, ekstra trekk
	HC2	SSW pute hesteskoformet, str. small, ekstra trekk

## Tilbehør

HMS nr.	Art.nr	Beskrivelse
	SAPS-1	SSW ekstra trekk til SAPS pute sylinderformet str. small
	SAPL-1	SSW ekstra trekk til SAPL pute sylinderformet str. large
216911	SL/SC2	SSW stabiliseringspute for sideleie str.2, ekstra trekk
215645	SL/SC3	SSW stabiliseringspute for sideleie str.3, ekstra trekk
199101	SC2	SSW ekstra trekk for stabiliseringspute for bekken, oppgi str