



## PLUS-serien

Det fleksible baderommet

# Mennesker ønsker å klare seg selv

Vi sørger for at de kan

Hos Pressalit Care lager vi løsninger som forbedrer både livskvalitet og økonomi. Livskvalitet for de mennesker som bruker våre produkter og økonomi for de som skal investere i dem. Vi utvikler løsninger med respekt for både brukere, pleiere og byggherrer, samt gir råd til alle grupper om både innredning og optimal utnyttelse av produktene.

Våre løsninger har god kvalitet og fleksibilitet i tillegg til lang levetid. Flexibiliteten betyr at både produktene og rommet kan tilpasse seg brukerne - ikke omvendt. Enkelt, universelt og ukomplisert. Dette gir frihet til brukerne, og til arkitektene som skal sikre optimal utnyttelse av plass og budsjetter. Samtidig er produktenes brukervennlige design med på å sikre et bedre liv for både brukere og pleiere gjennom deres hverdag.

Til sammen kan dette best uttrykkes gjennom vår grunnleggende filosofi:

keep living

## Innhold

<b>Frihet i arkitektur og økonomi</b>	Side 4
<b>Baderommet som arbeidsplass</b>	Side 7
<b>Helt enkelt – helt rent</b>	Side 8
<b>Hemmeligheten ligger i detaljene</b>	Side 10
<b>Fleksibilitet – enkelt og greit</b>	Side 13
<b>En verden av farger</b>	Side 14
<b>Grenseløse muligheter</b> Veggskinner	Side 16
<b>Sans for komfort</b> Oppheng til vask, håndvasker, armatur og hyllemoduler	Side 20
<b>Fokus på trygghet</b> Toalettstøtter, toalettskåler, ryggstøtter og toalettseter	Side 28
<b>Drømmen om velvære</b> Dusjseter og tilbehør til dusj	Side 36
<b>Sikker funksjonalitet</b> Håndgrep, tilbehør til baderommet og klappseter	Side 44
<b>Mål, montering og tilbehør</b>	Side 50
<b>Vanninstallasjon</b> Fleksible vann- og avløpssystemer	Side 72
<b>Elektrisk installasjon</b> Oppheng til vask og dusjsete 450	Side 74
<b>Testmetoder</b>	Side 75

# Frihet i arkitektur og økonomi

Pressalit Cares skinneresystem er unikt. Med det skaper vi løsninger som er så fleksible at de kan tilpasses et hvilket som helst badeværelse og en hvilken som helst brukersituasjon. Nå har vi videreutviklet dette systemet og gjort det enda bedre – med nytt design og et stort utvalg av farger.

Med både vannrette og loddrette justeringsmuligheter er PLUS-serien et komplett innredningssystem som gjør det mulig å planlegge, innrede og endre alle baderom etter aktuelle behov. Dette gjør serien til en sunn og langsiktig investering. Vår filosofi "keep living" gjelder nemlig ikke bare for brukerne, men også for våre produkter. Kvaliteten og fleksibiliteten sikrer langsiktige økonomiske fordeler og en stor frihet til innredning av baderom.

Vi stiller gjerne med rådgivning når det kommer til innredning av baderom. PLUS-serien er et resultat av mer enn 20 års utvikling, og vi stiller gjerne våre erfaringer til rådighet for deg. Vi hjelper deg med å tilpasse løsninger etter behov. Med vår viden bidrar vi til at den riktige løsningen velges hver gang. Benytt vår kunnskap helt fra planleggingsstadiet og test ut dine idéer i samarbeid med en av våre konsulenter.

● Skinneresystemets innebygde fleksibilitet gir økonomiske fordeler på både kort og lang sikt

● Baderommet innredes logisk i forhold til den enkelte brukers behov

# Baderommet som arbeidsplass

PLUS-serien setter mennesket i fokus. Også når det gjelder pleiepersonale som skal betjene produktene hver dag gjennom et langt arbeidsliv. For pleierne er intuitiv betjening, loddrett og vannrett justering, ergonomiske grep og et generelt gjennomtenkt design ensbetydende med et bedre arbeidsmiljø og færre sykedager.

Hos Pressalit Care kjenner vi kravene til de beste arbeidsbetingelsene på baderommet. Derfor leverer vi ikke bare selve løsningen, men også rådgivning om hvordan riktig bruk av plass og innredning sikrer at brukere og pleiere får den optimale løsningen.

Fleksibilitet og et godt arbeidsmiljø er elementer i en sunn investering. PLUS-produktene kan justeres etter ulike brukere, men også etter skiftende personale. Enkelt og greit. Man oppnår bedre arbeidsstillinger, mindre belastning og sunnere medarbeidere der det er mulighet for å tilpasse produktene.



Produkter som kan justeres både sideveis og i høyden egner seg spesielt til rom med skiftende brukere eller der brukernes forutsetninger endres fortløpende. Som for eksempel på grunn av voksenalder eller skiftende stadier ved sykdom.



Produkter som kan justeres sideveis er velegnet til rom der man har behov for individuelle tilpasninger av avstanden mellom produktene. For eksempel tilpasning etter størrelse på brukerne og pleierne, eller der hvor produktene må kunne flyttes eller fjernes for å gjøre plass til pleiepersonale eller andre hjelpemidler.



Produkter som kan justeres i høyden er velegnet til rom der det er behov for å stille inn produktene til skiftende brukere i samme brukersituasjon, eller til brukere med et stabilt sykdomsforløp.



Fastmonterte produkter egner seg spesielt til selvhjulpne brukere i et stabilt sykdomsforløp.



# Helt enkelt – helt rent

Vi har designet PLUS-serien slik at både innstilling og betjening av produktene kan gjøres intuitivt, enkelt og uten bruk av verktøy. Serien er selvfølgelig også designet for god komfort. Produktene er behagelige å sitte på, gode å gripe tak i og enkle å betjene.

Baderommet skal være rent og hygienisk. Derfor er PLUS-serien også enkel å rengjøre. Vi har minimert antall riller, spor og hull for å eliminere så mange bakteriefeller som mulig. Resultatet er jevne overflater som samler mindre smuss og gir bedre betingelser for både hurtig og mer effektiv rengjøring.



Glatte overflater og innkapslet mekanikk forhindrer smuss i å samle seg.



Avrundede former og stramt design sikrer god og enkel rengjøring.



De nøye utvalgte materialene er robuste og tåler daglig rengjøring.

# Hemmeligheten ligger i detaljene

Med PLUS-serien har vi gått i detaljer med helheten. Designet er gjennomtenkt og løpende testet for stabilitet og styrke. Den samme grundigheten gjelder i valg av materialer til alle våre løsninger. Vi har fokus på å skape hjelpemidler som er ukompliserte og intuitive å betjene og ikke minst fleksible i forhold til den enkelte brukers behov.

PLUS-serien gir stor frihet i innredningen og skaper sammenheng i baderommets funksjoner. Systemet har en høy grad av brukervennlighet basert på godt design, solide materialer og fremtidsrettet funksjonalitet.

● Tokomponentplast gir en myk og sklisikker overflate på toalett- og armstøtter

● Frontplaten på de loddrette og vannrette veggskinnene er harde og motstandsdyktige for trykk og slag

● Aluminium er både formbart og lett, samtidig som det signalerer styrke og stabilitet. Materialet har en sterk overflate med et elegant utseende

● PUR-skum anvendes der det ønskes myke og varme overflater

# Fleksibilitet – enkelt og greit

## Toalettstøtter og manuelle dusjseter

Skal produktet heves er det enkelt å løfte opp til ønsket høyde. Skal høyden være lavere aktiveres låseknappen på siden av produktet, mens produktet kjøres ned til ønsket posisjon. Slipp knappen så er innstillingen låst.

## Oppheng til vask – manuelt

Løft låsearmen, still inn vasken i ønsket høyde og slipp deretter låsearmen. Sørg samtidig for at låsearmen kommer på plass i hakket i vannrett posisjon.

## Vannrett innstilling

Produktet kan fritt beveges frem og tilbake på skinnen når låsegrepet på siden av produktet åpnes. Når produktet er stilt inn til ønsket posisjon lukkes låsegrepet igjen. Da er produktet festet til skinnen og klart til bruk.

## Oppheng til vask – elektrisk eller gassdrevet

Elektrisk: Knappen på enden av grepet trykkes lett opp eller ned når høyden på vasken skal justeres.  
Gass: Man frigjør opphenget til vasken ved å trykke ned knappen på enden av grepet. Da bæres vekten av gassylindere og vasken kan enkelt heves eller senkes til ønsket høyde. Vasken låses i ønsket posisjon ved å trykke knappen tilbake i nøytral posisjon.

## Armstøtter på dusjseter

For å justere armstøttene oppover løftes de enkelt og greit opp til ønsket posisjon. Dersom de skal senkes må støttene først løftes helt opp til øverste posisjon og deretter senkes helt ned. Derfra kan armstøttene løftes til ønsket høyde.

Ved hjelp av de vannrette og loddrette skinnene kan hvert enkelt produkt flyttes til ønsket høyde tilpasset hver enkelt bruker – uten bruk av verktøy.

Vi har gjort PLUS-seriens justeringsgrep så intuitive at de enkelt kan betjenes av forskjellige brukere. Det betyr at fleksibiliteten kan utnyttes fullt ut av både brukere og pleiere. Det er enkelt å stille inn produktene – både vannrett og loddrett.

Fleksibiliteten har vi med hele veien. Skulle det i en periode ikke være bruk for et eller flere av produktene i rommet, kan de enkelt løftes av skinnen og lagres en annen plass. Tanken bak det fleksible baderommet er at rommet bør tilpasses brukerne og ikke omvendt.



# En verden av farger



PLUS-seriens fleksibilitet gjelder også fargevalget. Et bredt utvalg av både diskrete og intense farger gjør det enkelt å finne den rette fargekombinasjonen, som tilfredsstiller brukernes behov for estetikk og orienteringspunkter.

Farger kan være med å gi badet et personlig og individuelt preg, og samtidig hjelpe brukeren med å orientere seg i forhold til badets funksjoner. Som i likhet med trafikken, kan fargene på badet gi støtte til bruker og fungere som effektive veivisere i hverdagen.

Spesielt for mange eldre og synshemmede er bruken av fargekontraster en viktig og uvurderlig hjelp i det daglige.

NCS Fargekoder  
 000 = S0502-Y  
 026 = S1080-Y60R  
 035 = S4050-R  
 108 = S8010-R70B  
 112 = S6500-N  
 182 = S3000-N  
 277 = S1075-G50Y  
 279 = S1020-R90B  
 289 = S4050-R50B

## Veggskinner - standardfarger



182 LYSEGRÅ



112 ANTRASITTGRÅ



000 HVIT



112 ANTRASITTGRÅ

## Toalettstøtter og dusjseter - standardfarger

## Toalettstøtter og dusjseter - spesialfarger



282 LYSEBRUN



279 LYSEBLÅ



108 MØRKEBLÅ



277 LIMEGRØNN



026 ORANGE



035 RØD



289 LILLA



Noe lenger leveringstid på spesialfarger kan forekomme

## Håndgrep, dusjholder og stang til dusjforheng - standardfarger



000 HVIT



112 ANTRASITTGRÅ



035 RØD



108 MØRKEBLÅ

## - spesialfarger

## Toalettseter, klappseter samt front- og ryggstøtter - standardfarger



000 HVIT



112 ANTRASITTGRÅ



035 RØD



108 MØRKEBLÅ

## - spesialfarger



# Grenseløse muligheter



Design og funksjon går hånd i hånd i veggskinneresystemet. Både ved håndvasken, toalettet og dusjhjørnet gir innstillingsmulighetene optimale arbeidsbetingelser for personalet. De kan for eksempel skyve produkter til side og på den måten få bedre plass, eller stille høyden på et produkt slik at det passer til den enkelte brukers behov for komfort og støtte.

Også for brukere av mobile hjelpemidler er det mulig å manøvrere seg i baderommet, fordi arealet på gulvet kan utnyttes maksimalt ved å flytte på produkter.

● Ved å kombinere vannrette og loddrette skinner oppnås maksimal fleksibilitet – gunstig for både brukere og pleiere

● Enkelt og rengjøringsvennlig design uten skarpe kanter

● Vannrette veggskinner gjør innredningen fleksibel. Produktene kan skyves sidelengs på skinnen slik at plasseringen oppfyller krav til plassbehov og manøvrering

## Veggskinner

S. 14-15

FARGER

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 50-51



● Frontplaten skjuler monteringsbolter og eventuelle ledninger

● Produktene kan låses fast til skinnen med enkle justerings- og låsefunksjoner

● Ved hjelp av skinnen blir vekten av hvert produkt fordelt jevnt utover hele skinnens lengde

Veggskinnen er ryggraden i den fleksible PLUS-serien. Den vannrette skinnen gjør det mulig å skyve produktene langs veggene, den loddrette å justere produktenes høyde. Kombinert de to typene skinner kan plassen i baderommet utnyttes optimalt til nytte for både bruker og pleier. I miljøer med skiftende brukere gjør skinnen det lett å tilpasse innredningen til den enkelte brukers spesifikke behov – uten bygningsmessige inngrep.

**Vannrette veggskinner**

Skinnen lagerføres i intervaller av 300 mm, men kan leveres i alle lengder på spesialordre.

<b>R9806yyy</b>	Veggskinne, 600 mm
<b>R9809yyy</b>	Veggskinne, 900 mm
<b>R9812yyy</b>	Veggskinne, 1200 mm
<b>R9815yyy</b>	Veggskinne, 1500 mm
<b>R9818yyy</b>	Veggskinne, 1800 mm
<b>R9821yyy</b>	Veggskinne, 2100 mm
<b>R9824yyy</b>	Veggskinne, 2400 mm
<b>R9827yyy</b>	Veggskinne, 2700 mm
<b>R9830yyy</b>	Veggskinne, 3000 mm
<b>R9833yyy</b>	Veggskinne, 3300 mm
<b>R9836yyy</b>	Veggskinne, 3600 mm
<b>R9839yyy</b>	Veggskinne, 3900 mm

**Loddrette veggskinner**

<b>R9864yyy</b>	Veggskinne til høyderegulerbare produkter, 400 mm
<b>R9866yyy</b>	Veggskinne til høyderegulerbare produkter, 600 mm

yyy = fargevalg til skinner

**Materialer:** Aluminium, kunststoff

**Maks. belastning:** Tåler – avhengig av veggens konstruksjon – en vertikal belastning opp til 1000 kg

# Sans for komfort

Mennesker med ulik størrelse og fysisk evne kan uten problem anvende det samme baderommet så sant at innredningen er fleksibel og enkel å tilpasse etter behov. En håndvask som kan stilles i høyden gir både stående og sittende brukere de beste betingelser, fordi man unngår å belaste kropp og holdning. Dette er en fordel i alle miljøer med skiftende brukere som for eksempel i pleiesektoren eller i familier bestående av både barn og voksne.

● En rullestolbruker vil kunne komme helt under håndvasken og senke den til en komfortabel høyde

● En ergonomisk håndvask med flat bunn gir sittende brukere de beste betingelsene

● Opphenget til vasken monteres enten direkte på veggen eller på en vannrett veggskinne. Dette avhenger av hvilken modell man benytter

● Med et elektrisk eller gassdrevet oppheng er det enkelt for en pleier eller bruker å stille inn håndvasken i ønsket høyde

## Oppheng til vask – elektrisk eller gassdrevet

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 52-53



● Elektrisk eller gassdrevet oppheng leveres med betjeningsgrep. Elektrisk drevet oppheng kan også leveres med fjernkontroll eller håndbetjening

● Betjeningsgrepet kan fungere som håndkleholder. Grepet kan plasseres på høyre eller venstre side av vasken

● Opphenget gir mulighet for høyderegulering opp til 300 mm

Med et elektrisk eller gassdrevet oppheng til vask er det enkelt for en pleier å stille inn håndvasken til ønsket høyde. Samtidig vil også mange selvhjulpne brukere uten problemer være i stand til å foreta de nødvendige justeringene på egenhånd. Et elektrisk eller gassdrevet oppheng tar høyde for alle behov og sikrer innredningens bæredyktighet mange år frem i tid.



### ⬆️ Høyderegulerbare oppheng til vask - vannrett veggskinne

Med den vannrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan håndvasken høydereguleres 300 mm, fra 668 til 968 mm over gulv.

R4680 leveres som standard med gassylinder til vasker på 16-22 kg. Kan også bestilles med gassylinder til vasker på hhv. 8-12 kg og 12-16 kg.

- R4782** Elektrisk drevet oppheng med fjernkontroll
- R4781** Elektrisk drevet oppheng med håndbetjening
- R4780** Elektrisk drevet oppheng med betjeningsgrep
- ◀ **R4680** Gassdrevet oppheng med betjeningsgrep

For informasjon om installasjon av vann og elektrisitet se s. 72-74.

### ⬆️ Høyderegulerbare oppheng til vask

Med oppheng montert i anbefalt høyde kan håndvasken høydereguleres 300 mm, fra 668 til 968 mm over gulv.

R4650 leveres som standard med gassylinder til vasker på 16-22 kg. Kan også bestilles med gassylinder til vasker på hhv. 8-12 kg og 12-16 kg.

- ◀ **R4752** Elektrisk drevet oppheng med fjernkontroll
- R4751** Elektrisk drevet oppheng med håndbetjening
- R4750** Elektrisk drevet oppheng med betjeningsgrep
- R4650** Gassdrevet oppheng med betjeningsgrep

For informasjon om installasjon av vann og elektrisitet se s. 72-74.

**Materialer:** Aluminium, kunststoff  
**Maks. belastning oppheng til vask:** 100 kg inklusive håndvask

## Oppheng til vask – manuelt

S. 14-15

FARGER

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 52-53



● Avrundet og slankt design gjør rengjøringen lett og ukomplisert

● Opphenget passer til alle typer håndvasker med boltmontering

● Opphenget gir mulighet for høydejustering på opp til 240 mm

Skal håndvaskens høyde justeres sjeldent kan et manuelt regulerbart oppheng være den riktige løsningen. Dette kan for eksempel være et opplagt valg til badrom der vaskens høyde kun skal endres i forbindelse med endringer i brukerens fysiske tilstand, eller ved en ny brukers ankomst.



⊕ **Høydejusterbare oppheng til vask - vannrett veggskinne**

Med den vannrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan håndvasken høydejusteres 240 mm, fra 680 til 920 mm over gulv.

**R4580yyy** Manuelt regulerbart oppheng med betjeningsgrep

For informasjon om installasjon av vann se s. 72-73.

⊖ **Høydejusterbart oppheng til vask**

Med oppheng montert i anbefalt høyde kan håndvasken høydejusteres 240 mm, fra 728 til 968 mm over gulv.

**R4550yyy** Manuelt regulerbart oppheng med betjeningsgrep

For informasjon om installasjon av vann se s. 72-73.

yyy = fargevalg til skinner  
**Materialer:** Aluminium, kunststoff  
**Maks. belastning oppheng til vask:** 100 kg inkl. håndvask

## Håndvasker og armatur



S. 52-53

### MATRIX Small

Matrix Small er en smal vask med to integrerte håndgrep foran på vasken. Vasken er utformet med en flat bunn slik at det er plass til benene under vasken.

I bakkant og på sidene av vasken er det en liten, oppbygd kant som forhindrer vann i å renne utenfor vasken.

Armaturhull: Ø 36 mm

- ◀ **R2020000** Håndvask med overløp
- R2021000** Håndvask uten overløp

### MATRIX Curve

Vaskens buede forkant stabiliserer både stående og sittende brukere. De avrundede kantene er gode å gripe tak i og støtte seg til.

For den sittende bruker gir hjørnens design plass og støtte til albuen på vasken, og den flate bunnen gir plass til benene under vasken.

Armaturhull: Ø 35 mm

- ◀ **R2050000** Håndvask med overløp
- R2051000** Håndvask uten overløp

### Berøringsfritt armatur til håndvask

Det berøringsfrie armaturet er enkelt å montere fordi det er batteridrevet (6 Volt). Batteriet har en levetid på 4-5 år. Infrarød sensorteknologi gjør armaturet meget brukervennlig. Vanntemperaturen stilles inn på siden av armaturet.

VA-godkjent

- RT631** Berøringsfritt armatur

### Armatur til håndvask

Det ringformede betjeningsgrepet er egnet til brukere med nedsatt funksjonsevne. Den lange, svingbare tuten gjør det enklere for sittende brukere å nå vannet. Tuten kan svinges til siden dersom den er i veien.

VA-godkjent

- RT622** Armatur med lang, svingbar tut



**Materialer:** Knust marmor med høyglanspolert, porefri overflate, porselen, forkrommet messing  
**Maks. belastning håndvask:** 200 kg

## Hyllemoduler



S. 54-55



### Hyllemoduler til vannrett veggskinne

Med en hyllemodul montert på vannrett veggskinne kan artikler til personlig hygiene flyttes dit man har bruk for dem, for eksempel ved dusjen eller håndvasken.

- ◀ **RT476** 600 mm søyle, 2 hyller, håndkleholder, 2 plastbakker
- RT474** 400 mm søyle, 1 hylle, håndkleholder, 1 plastbakk



### Hyllemoduler til montering på oppheng til vask

Hyllen monteres på vaskens oppheng og vil derfor følge vaskens bevegelser opp og ned, samt sideveis.

- ◀ **RT481** 600 mm søyle, 2 hyller, håndkleholder, 2 plastbakker
- RT480** 400 mm søyle, 1 hylle, håndkleholder, 1 plastbakk



### Fastmonterte hyllemoduler

Trådkurv RT765 (se s. 48) passer i hyllens håndkleholder. Hyllen kan enkelt flyttes mellom for eksempel bad og soverom, dersom det skulle være behov for det.

- ◀ **RT491000** 600 mm søyle, 2 hyller, håndkleholder, 2 plastbakker
- RT490000** 400 mm søyle, 1 hylle, håndkleholder, 1 plastbakk

**Materialer:** Aluminium, kunststoffaminat, rustfritt stål, kunststoff  
**Maks. belastning:** 4 kg

# Fokus på trygghet



● Toalettstøttenes ende gir god støtte når man setter eller reiser seg. Samtidig får man en klar indikasjon på hvor støtten slutter

● Et stabilt toalettsete med solide styrebuffer (se s. 60) i front som sikrer en trygg sideveis forflytning, for eksempel fra rullestol

● Toalettstøttene kan leveres med fjærbelastning som tar noe av vekten til støtten når man løfter den opp mot veggen

● En sklisikker overflate som er behagelig å ta på sikrer et godt, fast grep

Området rundt toalettet er en sentral del av badet og bør innredes med tanke på brukers behov. Det er viktig med god plass rundt toalettet slik at hjelpemidler, som for eksempel en rullestol, kan manøvreres rundt. I tillegg skal eventuelle pleiere unngå belastende arbeidsstillinger. Uansett om rommet er lite eller stort, gir det mening å innrede badet med vannrette veggskinner som gjør det mulig å justere avstanden mellom håndvask, toalett og toalettstøtter.

## Toalettstøtter

S. 14-15

FARGER

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 56-57

Stabil støtte i form av ergonomisk korrekt utformede toalettstøtter gir trygghet for den sittende bruker og letter samtidig daglige forflytninger fra og til hjelpemidler. En god toalettstøtte gir behagelig hvile til armene og optimal støtte når man skal reise og sette seg. PLUS-toalettstøttene er utstyrt med et dreieledd som gjør dem oppfellbare mot veggen.

● Toalettstøtter montert på veggskinner gir stor fleksibilitet i forhold til den enkelte brukers behov for plass og støtte

● Oppfellbare toalettstøtter gir god plass i rommet når de ikke er i bruk



#### ⬆ Høyderegulerbare toalettstøtter til vannrett veggskinne

Med den vannrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan toalettstøtten høydereguleres 240 mm, fra 645 til 885 mm over gulv.

<b>R3585yyyxxx</b>	Toalettstøtte, lengde 850 mm
<b>R3560yyyxxx</b>	Toalettstøtte, lengde 600 mm
<b>RF585yyyxxx</b>	Toalettstøtte med fjær, lengde 850 mm
<b>RF560yyyxxx</b>	Toalettstøtte med fjær, lengde 600 mm



#### ⬆ Toalettstøtter til vannrett veggskinne

Med den vannrette veggskinnen montert i anbefalt høyde vil toalettstøttens høyde være 854 mm over gulv.

<b>R3285xxx</b>	Toalettstøtte, lengde 850 mm
<b>R3260xxx</b>	Toalettstøtte, lengde 600 mm



#### ⬆ Høyderegulerbare toalettstøtter til loddrett veggskinne

Med den loddrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan toalettstøtten høydereguleres 240 mm, fra 645 til 885 mm over gulv.

<b>R3185yyyxxx</b>	Toalettstøtte, lengde 850 mm
<b>R3160yyyxxx</b>	Toalettstøtte, lengde 600 mm
<b>RF185yyyxxx</b>	Toalettstøtte med fjær, lengde 850 mm
<b>RF160yyyxxx</b>	Toalettstøtte med fjær, lengde 600 mm

<b>R3108xxx</b>	Toalettstøtte, lengde 850 mm. Uten veggskinne
<b>R3106xxx</b>	Toalettstøtte, lengde 600 mm. Uten veggskinne
<b>RF108xxx</b>	Toalettstøtte med fjær, lengde 850 mm. Uten veggskinne
<b>RF106xxx</b>	Toalettstøtte med fjær, lengde 600 mm. Uten veggskinne

Toalettstøtter uten veggskinne er beregnet til ettermontering på eksisterende loddrett skinne.



#### ● Fastmonterte toalettstøtter

Med veggbeslaget montert i anbefalt høyde vil toalettstøttens høyde være 850 mm over gulv.

<b>R3085xxx</b>	Toalettstøtte, lengde 850 mm
<b>R3060xxx</b>	Toalettstøtte, lengde 600 mm
<b>RF085xxx</b>	Toalettstøtte med fjær, lengde 850 mm
<b>RF060xxx</b>	Toalettstøtte med fjær, lengde 600 mm

yyy = fargevalg til skinne  
xxx = fargevalg til toalettstøtte  
**Materialer:** Aluminium, kunststoff, tokomponentplast  
**Maks. belastning:** 150 kg




## Toalettskåler



S. 58-59

## Ryggstøtte

S. 14-15

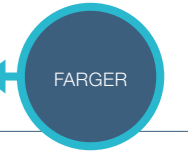

### Vegghengt toalett

En 700 mm vegghengt toalettskål anbefales til badrom der det foretas forflytninger fra en rullestol. En lang toalettskål gir også bedre plass til pleierne. Ryggstøtte anbefales.

Et vegghengt toalett gir mulighet for montering i individuell høyde.

Under toalettet er det plass til rullestolens fotstøtter og pleierens føtter.

Enklere rengjøring av gulv.

- ◀ **R2090000** Toalett, 700 mm
- R2091000** Toalett, 550 mm



### Gulvstående toalett

Sittehøyde uten toalettsete: 460 mm.

Leveres med dobbel skylning, innstilt til 3/6 liter.  
Kan omstilles til 2/4 liter.

- R2092000** Toalett, høy modell, S-lås



### Gulvstående toalett

Sittehøyde uten toalettsete: 420 mm.

Leveres med dobbel skylning, innstilt til 3/6 liter.  
Kan omstilles til 2/4 liter.

Fås også med fast enkel skylning. Innstilt til 4 eller 6 liter.

- ◀ **R2095000** Toalett, standard høyde, S-lås
- R2096000** Toalett, standard høyde, P-lås

Materialer: Porselen



### Høyderegulerbar ryggstøtte til vannrett veggskinne

Anbefales til vegghengte toaletter der avstanden vegg-front = 700 mm.

- R6530yyyxxx** Ryggstøtte til toalett uten sistene, 150 mm høyderegulerbart



### Ryggstøtte til vannrett veggskinne

Anbefales til vegghengte toaletter der avstanden vegg-front = 700 mm.

- R6520xxx** Ryggstøtte til toalett uten sistene



### Ryggstøtte, fastmontert

Til toalettskåler med høysittende sistene.  
Må ikke benyttes ved innebygget sistene.

- R6510xxx** Ryggstøtte til toalett uten sistene

yyy = fargevalg til skinne  
xxx = fargevalg til ryggstøtte  
Materialer: Aluminium, mykt PUR-skum med trekjerne

## Toalettseter

## Forhøyede toalettseter

S. 14-15

FARGER

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 60-63



### Dania

Et anatomisk velformet sete som er egnet for de fleste. Sideveis forflytninger er enkle fordi setet er relativt flatt. Lokket er godt å sitte på. I oppfelt stilling gir det også god støtte til ryggen.

Dania fås også med åpen front. Noe som gjør det egnet til bidésete med lett adgang for en hånddusj. Egner seg til sykehøus fordi de fleste bekkener passer ned i skålen, mens hanken plasseres i den åpne fronten.

Leveres med universalfeste B82/B83. Kan også leveres med institusjonsfeste D92 eller tyverisikkert feste BZ7.

- R27xxx** Dania uten lokk, med feste
- R37xxx** Dania med lokk og feste
- R28000** Dania uten lokk, med åpen front og feste
- R38000** Dania med lokk, åpen front og feste



### Ergosit

Stor, bred sitteflate og gode støtteflater. Spesielt egnet til "store" voksne.

Leveres med institusjonsfeste D92.  
Kan også leveres med tyverisikkert feste BZ7.

- R29000** Ergosit uten lokk, med feste
- R30000** Ergosit med lokk og feste



### Colani

Den kurvede skålformen støtter og stabiliserer bekkenregionen og er derfor egnet til barn (fra 6 års alderen) med for eksempel muskelsykdommer.

De forhøyede kantene er gode å holde fast i når man trenger å stabilisere balansen. Lokket er godt å sitte på. I oppfelt stilling gir det god støtte til ryggen.

Leveres med universalfeste B82/B83. Kan også leveres med institusjonsfeste D92 eller tyverisikkert feste BZ7.

- R26000** Colani uten lokk, med feste
- R36000** Colani med lokk og feste



### Forhøyede toalettseter, 50 mm

Dania R43000 leveres med sprutskjerm.  
Til andre Dania-seter kan sprutskjerm T9516 bestilles separat.

- R21000** Dania uten lokk, med åpen front
- R31000** Dania med lokk og åpen front
- R23000** Dania uten lokk
- R33000** Dania med lokk
- R43000** Dania med lokk og sprutskjerm
- R19000** Ergosit uten lokk
- R20000** Ergosit med lokk



### Forhøyede toalettseter, 100 mm

Dania 100 mm leveres med sprutskjerm T9515.

- R22000** Dania uten lokk, med åpen front
- R32000** Dania med lokk og åpen front
- R24000** Dania uten lokk
- R34000** Dania med lokk



### Forhøyet, skråstilt toalettsete, 50/100 mm

Dania 50/100 mm leveres med sprutskjerm T9515.

- R35000** Dania skråstilt toalettsete med lokk

# Drømmen om velvære

Det er fint og avslappende å ta en dusj – spesielt hvis man sitter behagelig og føler seg trygg. For den sittende bruker henger komforten på badet sammen med gode og fleksible hjelpemidler, som for eksempel et høyderegulerbart dusjsete og et flyttbart dusjarmatur. Med dusjarmatur, hyller og dusjsete plassert på en vannrett skinne tilrettelegger man for optimale forhold både til selvhjulpne og ikke-selvhjulpne brukere.

● En hånddusj skal være lett å håndtere – også for hender med nedsatt funksjon

● Dusjstangen kan integreres i et sterkt og stabilt håndgrepssystem som gir støtte og gjør brukere mer selvhjulpne

● Dusjsetet kan enkelt flyttes dersom en stående bruker skal bruke badet. Det er oppfellbart, slik at det tar liten plass og gir ekstra gulvplass

## Dusjsete 450

S. 14-15

FARGER

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 64-65



Med elektrisk betjening er det mulig for pleieren å stille inn setet til en god arbeidshøyde, mens brukeren sitter på setet

Sete, rygg- og armstøtter justeres samtidig via et enkelt og sikkert klikksystem. Armstøtter kan også høydereguleres uavhengig av sete og ryggstøtte

Setet er produsert i et mykt og sklissikkert materiale som sikrer god sittekomfort og aldri føles kaldt mot huden

Setet kan leveres i en variant med hull for enklere intimhygiene

Med sine mange kombineringsmuligheter er dusjsetet et godt eksempel på fleksibiliteten i Pressalit Cares PLUS-serie. Setet kan stilles inn slik at det passer nøyaktig til hver enkelt brukers situasjon. Med flott design, utført med myke og sklissikre materialer, utstråler dusjsetet høy kvalitet og sittekomfort.



#### Høyderegulerbare dusjseter til vannrett veggskinne

Med den vannrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan dusjsetet høydereguleres:  
Elektrisk: 500 mm, 200-700 mm over gulv.  
Manuelt uten armstøtte: 380 mm, 350-730 mm over gulv.  
Manuelt med armstøtte: 195 mm, 350-545 mm over gulv.

- ◀ **R7480xxx** Elektrisk drevet dusjsete med rygg- og armstøtter og håndbetjening
- R7481xxx** Elektrisk drevet dusjsete med hull, rygg- og armstøtter og håndbetjening
- R7450yyyxxx** Manuelt regulerbart dusjsete med rygg- og armstøtter
- R7451yyyxxx** Manuelt regulerbart dusjsete med hull, rygg- og armstøtter
- R7440yyyxxx** Manuelt regulerbart dusjsete med ryggstøtte
- R7441yyyxxx** Manuelt regulerbart dusjsete med hull og ryggstøtte

For informasjon om elektrisk installasjon se s. 74.

#### Høyderegulerbare dusjseter til loddrett veggskinne

Med den loddrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan dusjsetet høydereguleres:  
Elektrisk: 500 mm, 200-700 mm over gulv.  
Manuelt uten armstøtter: 380 mm, 355-735 mm over gulv.  
Manuelt med armstøtter: 195 mm, 355-550 mm over gulv.

- R7470xxx** Elektrisk drevet dusjsete med rygg- og armstøtter og håndbetjening
- R7471xxx** Elektrisk drevet dusjsete med hull, rygg- og armstøtter og håndbetjening
- R7430yyyxxx** Manuelt regulerbart dusjsete med rygg- og armstøtter
- ◀ **R7431yyyxxx** Manuelt regulerbart dusjsete med hull, rygg- og armstøtter
- R7420yyyxxx** Manuelt regulerbart dusjsete med ryggstøtte
- R7421yyyxxx** Manuelt regulerbart dusjsete med hull og ryggstøtte

For informasjon om elektrisk installasjon se s. 74.

#### Høyderegulerbare dusjseter til loddrett veggskinne

Med den loddrette veggskinnen montert i anbefalt høyde vil dusjsetet kunne høydereguleres 240 mm, fra 380 til 620 mm over gulv.

- ◀ **R7410yyyxxx** Manuelt regulerbart dusjsete
- R7411yyyxxx** Manuelt regulerbart dusjsete med hull

yyy = fargevalg til skinne

xxx = fargevalg til dusjsete, rygg- og armstøtter

**Materialer:** Aluminium, mykt PUR-skum med trekjerne, kunststoff, tokomponentplast

**Maks. belastning: Sete:** 150 kg. **Armstøtter:** 45 kg

## Dusjsete 310

S. 14-15

FARGER

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 66-67



● Sete, rygg- og armstøtter justeres samtidig via et enkelt og sikkert klikksystem. Armstøtter kan også høydereguleres uavhengig av sete og ryggstøtte

● Setet kan høydereguleres opp til 250 mm

Dusjsete som passer til barn og små voksne utført i myke og varme materialer som gjør det å dusje til en god opplevelse. Innstillingen av høyden på den regulerbare modellen gjøres manuelt. Både sete og armstøtter er oppfellbare.



#### ⬆️ Høyderegulerbart dusjsete til vannrett veggskinne

Med den vannrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan dusjsetet høydereguleres 250 mm, fra 305 til 555 mm over gulv.

**R7330yyyxxx** Manuelt regulerbart dusjsete med rygg- og armstøtter

#### ⬆️ Høyderegulerbart dusjsete til loddrett veggskinne

Med den loddrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan dusjsetet høydereguleres 250 mm, fra 305 til 555 mm over gulv.

**R7320yyyxxx** Manuelt regulerbart dusjsete med rygg- og armstøtter

#### ● Fastmontert dusjsete

Ved montering i anbefalt høyde vil dusjsetets høyde være 400 mm over gulv.

**R7310xxx** Dusjsete  
**R6310xxx** Ryggstøtte 300 mm

yyy = fargevalg til skinne  
xxx = fargevalg til dusjsete, rygg- og armstøtter  
**Materialer:** Aluminium, mykt PUR-skum med trekjerne, kunststoff, tokomponentplast  
**Maks. belastning:** Sete: 150 kg. Armstøtter: 45 kg. Ryggstøtte R6310: 100 kg

## Tilbehør til dusj

S. 14-15

FARGER




### ▶ **Armaturolder til montering på vannrett veggskinne**

1200 mm vannslanger medfølger. Holderen til hånddusjen kan monteres på høyre eller venstre side etter behov.

Armaturolder passer til alle blandingsbatterier som overholder alminnelig VVS-standard.

Den flyttbare armaturholderen gir mulighet for individuell plassering av hånddusj og armatur. Utenfor dusjområdet kan enheten brukes ved håndvasken i forbindelse med hårvask, ved toalettet som bidétfunksjon eller ved en stellebenk.

**RT760** Armaturolder

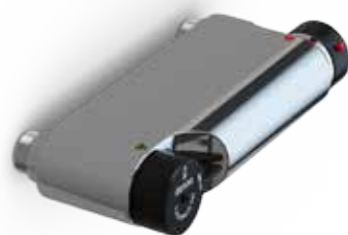

### **Dusjarmatur**

Betjeningsvennlige grep i kontrastfarger som er enkle å se.

De ekstra lange grepene på RT641 er i kontrastfarge.

En skoldingsikring hindrer vanntemperatur over 38°.

Armaturet er varmeisolert.

Kan monteres på armaturholder RT760.

VA-godkjent

◀ **RT640** Dusjarmatur med termostat

**RT641** Dusjarmatur med termostat og ekstra lange grep

### **Hånddusjer**

Grepets buede form, samt vektbalansen mellom dusjhode og grep, gjør at dusjen er velegnet for hender med nedsatt funksjon.

Strålejustering med tapp gjør det enkelt å skifte stråletype.

Slangens lengde på 2000 mm gir stor rekkevidde, og har en anti-tvinn funksjon som hindrer slangen i å krolle seg.

VA-godkjent

◀ **RT610** Hånddusj, én stråletype

◀ **RT611** Hånddusj, 3 stråletyper (standard, myk, massasje)



### **Svingbar stang til dusjforheng**

Anvendes i rom der det benyttes takheis. De 2 svingbare stengene kan dreies 90° til begge sider slik at en takheis kan passere.

Kan også brukes som romdeler.

Inkluderer 2x12 ringer til å henge dusjforhenget i.

**RT225** Svingbar stang til dusjforheng, 1500 x 1500 mm



### **Stang til dusjforheng**

Inkluderer 2x12 ringer til å henge dusjforhenget i, samt takoppheng, 600 mm (kan kuttes til ønsket lengde).

**RT212xxx** Stang til dusjforheng, 1200 x 1200 mm



### **Dusjholder**

Dusjholderens utforming og låsesystem gjør det enkelt å stille dusjen i riktig høyde – også for svake hender.

Et enkelt klikk-system gjør at hånddusjens – og dermed strålens – vinkel kan stilles etter ønske.

Ved å montere dusjholderen på et loddrett håndgrep egner den seg til både sittende og stående brukere, og man kan samtidig dra nytte av støtten fra håndgripen.

Håndgrep se s. 46.

**RT600xxx** Dusjholder til loddrett grep

# Sikker funksjonalitet

Et baderom skal ofte tilfredsstille brukere med vidt forskjellige behov og samtidig leve opp til mange overordnede krav i forhold til arbeidsmiljø og økonomiske rammer. Med Pressalit Cares PLUS-serie er de fleste av disse utfordringene allerede løst, også der baderommene er små.


I tillegg til skinnerystemet tilbyr Pressalit Care et bredt utvalg av funksjonelt tilbehør designet for å gi økt sikkerhet og komfort. Produktene kan kombineres på utallige måter og fyller innredningens krav til funksjonelle og fleksible baderom.

● Kurver til å henge på vannrette veggskinner er ideelle til oppbevaring av toalettartikler som håndklær eller såper

● En stabil håndgripsløsning med mange muligheter øker fleksibiliteten og kan lette veien til økt selvhjelpenhet

● Med en papirholder montert på toalettstøtten er toalettspapiret alltid innen rekkevidde

# Håndgrep

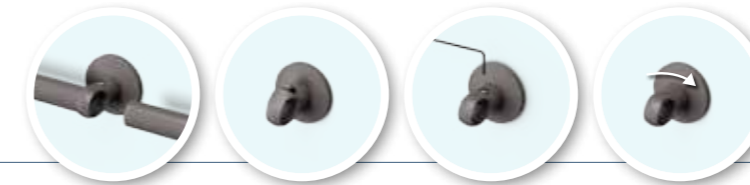


S. 14-15

FARGER

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 68-69

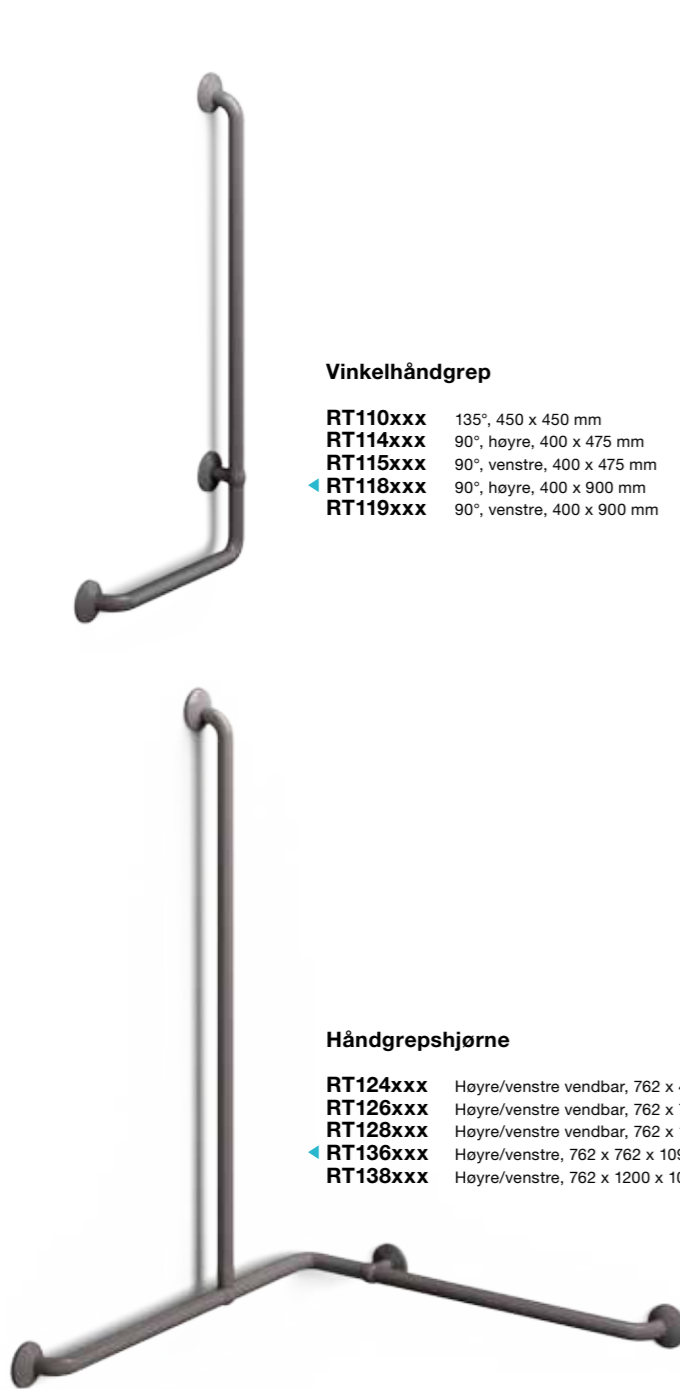

### Håndgrep

<b>RT100xxx</b>	300 mm
<b>RT101xxx</b>	450 mm
▲ <b>RT102xxx</b>	600 mm
<b>RT103xxx</b>	800 mm
<b>RT104xxx</b>	1000 mm

### Vinkelhåndgrep

<b>RT110xxx</b>	135°, 450 x 450 mm
<b>RT114xxx</b>	90°, høyre, 400 x 475 mm
<b>RT115xxx</b>	90°, venstre, 400 x 475 mm
◀ <b>RT118xxx</b>	90°, høyre, 400 x 900 mm
<b>RT119xxx</b>	90°, venstre, 400 x 900 mm

### Håndgrep/dusjstang

I dusjen kan man med fordel montere en dusjholder RT600 på de lodrette håndgrepene, se s. 43.

<b>RT144xxx</b>	1000 x 1090 mm
-----------------	----------------

### Håndgrepshjørne

<b>RT124xxx</b>	Høyre/venstre vendbar, 762 x 475 mm
<b>RT126xxx</b>	Høyre/venstre vendbar, 762 x 762 mm
<b>RT128xxx</b>	Høyre/venstre vendbar, 762 x 1200 mm
◀ <b>RT136xxx</b>	Høyre/venstre, 762 x 762 x 1090 mm
<b>RT138xxx</b>	Høyre/venstre, 762 x 1200 x 1090 mm



### Rørstykke

<b>RT300xxx</b>	300 mm
▲ <b>RT303xxx</b>	1200 mm
<b>RT307xxx</b>	2400 mm



### Rørstykke med stropp

Inklusive veggrosett.

<b>RT330xxx</b>	365 mm
◀ <b>RT331xxx</b>	652 mm
<b>RT332xxx</b>	790 mm
<b>RT333xxx</b>	1090 mm



### Vinkelrørstykke med vannrett vinkel

Inklusive veggrosett.

<b>RT345xxx</b>	762 x 154 mm
-----------------	--------------



### Rørstykke

Inklusive veggrosett.

<b>RT320xxx</b>	321 mm
▲ <b>RT321xxx</b>	608 mm
<b>RT322xxx</b>	746 mm
<b>RT323xxx</b>	1046 mm



### Vinkelrørstykke med lodrett vinkel


Inklusive veggrosett.

▲ <b>RT340xxx</b>	Høyre 400 x 154 mm
<b>RT341xxx</b>	Venstre 400 x 154 mm



### Vinkel 90°

<b>RT350xxx</b>	154 x 154 mm
-----------------	--------------

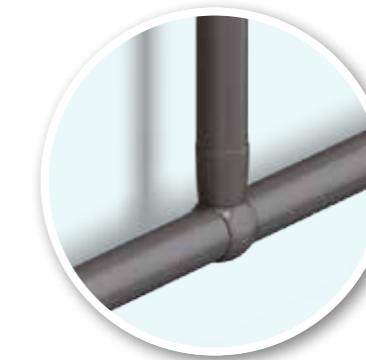

### Fittings

<b>RT360xxx</b>	Konsoll med stropp
<b>RT361xxx</b>	Konsoll med stropp og samlelenhet
◀ <b>RT362xxx</b>	Endestykke med stropp
<b>RT363xxx</b>	Konsoll

xxx = fargevalg til håndgrep

Materialer: Pulverlakkert aluminium, kunststoff

Maks. belastning: Ved spendvidde opp til 1000 mm: 210 kg. Ved spendvidde opp til 1300 mm: 150 kg



## Tilbehør til baderommet

## Klappseter

S. 14-15

FARGER

MÅL  
MONTERING  
TILBEHØR

S. 70-71



### Trådkurver til vannrett skinne

RT765 passer i hyllemodulens håndkleholder, se s. 27.

- RT764 Trådkurv til avfall, 297 x 222 x 344 mm
- RT765 Universal kurv, 326 x 116 x 136 mm
- RT766 Trådkurv til kluter, 212 x 212 x 174 mm
- RT767 Trådkurv til avfall, 402 x 212 x 174 mm
- RT769 Universal hylle, 430 x 148 x 136 mm



### Oppheng til skap

RT770 Oppheng til skap



### Knaggrekke

RT944 Knaggrekke med 3 kroker, 229 x 55 mm



### Kroker og speilholdere

- RT943 Håndklekroker, 2 stk.
- RT922 Speilholdere, 4 stk.
- RT923 Speil 1000 x 600 mm
- RT924 Speil inklusive 4 speilholdere



### Holdere og toalettborste

- RT945 Toalettpaperholder
- RT946 Reservecapirholder
- RT947 Toalettborste til veggmontering



### Høyderegulerbart klappsete til vannrett veggskinne

Med den vannrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan klappsetet høydereguleres 440 mm, fra 445 til 885 mm over gulv.

Klappsetet er ideelt der det er behov for en ekstra sitteplass, samt i rom med minimal plass. Dette kan typisk forekomme i rom der det ofte er behov for hvile – for eksempel på kjøkkenet, i heisen, korridoren eller til av- og påkledning på badet.

Anbefaling: Bør kun benyttes til brukere som i stor grad er selvhjulpne.

R5530yyyxxx Sete




### Høyderegulerbart klappsete til loddrett veggskinne

Med den loddrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan klappsetet høydereguleres 240 mm, fra 365 til 605 mm over gulv.

Klappsetet er ideelt der det er behov for en ekstra sitteplass, samt i rom med minimal plass. Dette kan typisk forekomme i rom der det ofte er behov for hvile – for eksempel på kjøkkenet, i heisen, korridoren eller til av- og påkledning på badet.

Anbefaling: Bør kun benyttes til brukere som i stor grad er selvhjulpne.

R5520yyyxxx Sete

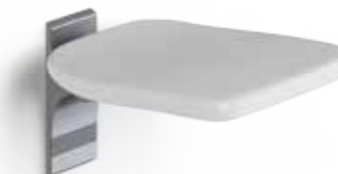

### Fastmontert klappsete

Ved montering i anbefalt høyde vil klappsetets høyde være 440 mm over gulv.









Klappsetet er ideelt der det er behov for en ekstra sitteplass, samt i rom med minimal plass. Dette kan typisk forekomme i rom der det ofte er behov for hvile – for eksempel på kjøkkenet, i heisen, korridoren eller til av- og påkledning på badet.

Anbefaling: Bør kun benyttes til brukere som i stor grad er selvhjulpne.

R5510xxx Sete

# Veggskinner
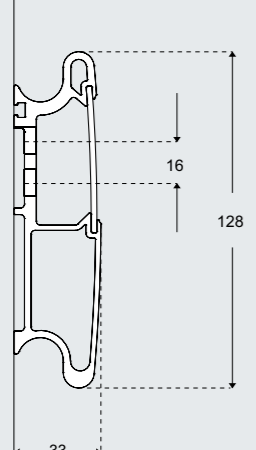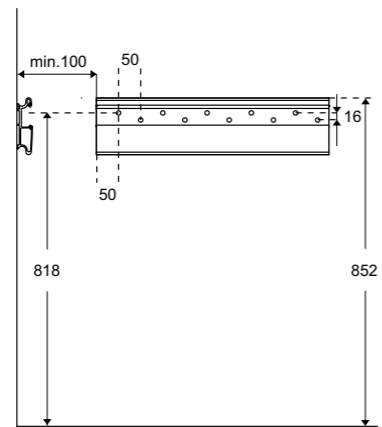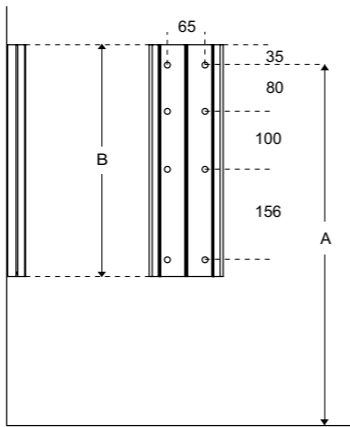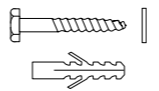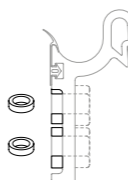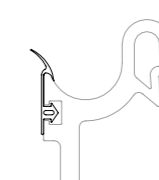
## – mål, montering og tilbehør

Mål veggskinner		Montering av veggskinner		Tilbehør					
<b>Vannrett veggskinne</b> R9806 R9809 R9812 R9815 R9818 R9821 R9824 R9827 R9830 R9833 R9836 R9839 		<b>Montering – vannrett skinne</b>  <p>Monteres med 2 skruer pr. løpende 100 mm. Avstand til hjørner: 100 mm</p> <p>Avstanden sikrer at frontplaten kan gli på plass uten problemer.</p> <p>Den anbefalte avstanden fra gulv til øverste bolt er 818 mm.</p> <p>NB: Skruer til montering medfølger ikke, men kan bestilles separat.</p>		<b>Montering – loddrett skinne</b>  <p>De loddrette skinnene monteres i forskjellige høyder avhengig av produkt:</p> <p>Høydemål A er avstanden fra gulv til øverste hull. Lengde B er skinnens lengde.</p> <p>NB: Skruer til montering medfølger ikke, men skal bestilles separat.</p>		<b>Monteringssett</b> V8501 6 stk. V8502 10 stk. Skruer M8 x 70 med skiver SX10. Maks behov: 20 stk. pr. meter. 	<b>Tetningsskiver</b> LA8817 10 stk. myke tetningskiver til tetning rundt monteringskruser. 	<b>Tetningslister</b> V8530 3000 mm lang. Til tetning mellom vannrett skinne og vegg. 	<b>Produktstopper</b> RT761 Til vannrett skinne. 
<b>Loddrett veggskinne</b> R9864 R9866 									

# Oppheng til vask – elektrisk, gass og manuelt – mål, montering og tilbehør

**Mål oppheng til vask - elektrisk og gass**

**Høyde- og sideveisregulerbart**  
R4782 ▶  
R4781  
R4780  
R4680

A-mål elektrisk: 658 mm  
A-mål gass: 536 mm

**Høyderegulerbart**  
R4752  
R4751  
R4750 ▶  
R4650

A-mål elektrisk: 658 mm  
A-mål gass: 536 mm

**Montering av oppheng til vask - elektrisk og gass**

**Montering elektrisk**

Monteringssett til massiv mur medfølger.

**Montering gass**

Monteringssett til massiv mur medfølger.

**Montering av håndvask – boltoppheng**

Boltavstand: Min. 50 mm – maks. 470 mm.

Tilbehør			
<p><b>MATRIX Small håndvask</b></p> <p>R2020 Håndvask med håndgrep og overløp R2021 Håndvask med håndgrep uten overløp</p>	<p><b>MATRIX Curve håndvask</b></p> <p>R2050 Håndvask med overløp R2051 Håndvask uten overløp</p>	<p><b>Armatyr</b></p> <p>RT622 Lang, svingbar tut</p>	<p><b>Armatyr</b></p> <p>RT631 Berøringsfritt</p>
<p><b>Hyllemodul</b></p> <p>RT481 RT480 Monteres på oppheng til håndvask. Følger håndvaskens innstilling lodderett og vannrett.</p>	<p><b>Vann- og avløpssystem</b></p> <p>R2061 R2064 R2065 R2071 R2074 R2075</p> <p>Fleksibelt. Nødvendig ved alle oppheng til vask.</p>	<p><b>Vannlås</b></p> <p>R2058</p>	<p><b>Vakuumentil</b></p> <p>R2059</p>

**Mål oppheng til vask - manuelt**

**Høyde- og sideveisregulerbart**  
R4580

**Høyderegulerbart**  
R4550

**Montering av oppheng til vask - manuelt**

**Montering – loddrett skinne**

Skruer til vegg bestilles separat, se s. 51.

**Montering av håndvask – boltoppheng**

Boltavstand: Min. 50 mm – maks. 470 mm.


# Hyllemoduler

## – mål, montering og tilbehør

### Mål hyllemodul


#### Regulerbar

RT474  
RT476 ▶

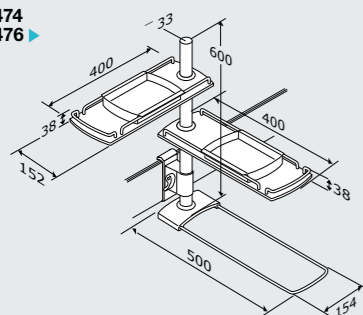


#### Til montering på oppheng til vask

RT480  
RT481 ▶

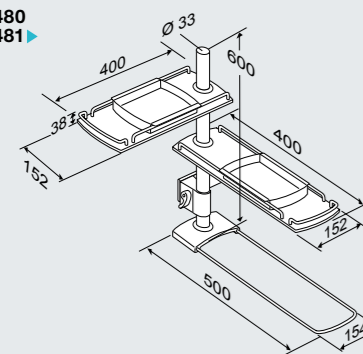


#### Fastmontert

RT490  
RT491 ▶

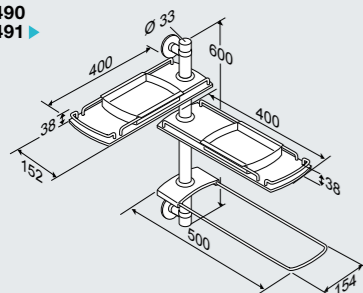


### Montering av hyllemodul

#### Montering på oppheng

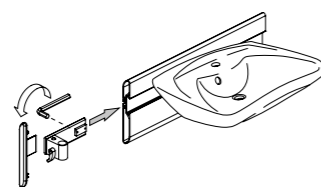

Kan monteres på begge sider av opphenget.

#### Montering på vegg

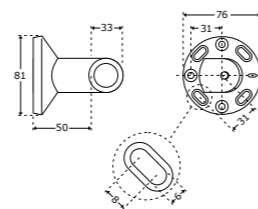

Monteringskruser til massiv mur medfølger.

### Tilbehør

#### Plastbakk


RT440000

Til hylle, håndkleholder og universalhylle.

A: 180 mm

B: 130 mm

C: 36 mm

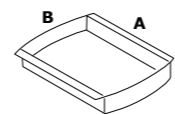

#### Universal kurv

RT765

Kan plasseres i håndkleholderen eller direkte på veggskinnen.



# Toalettstøtter

## – mål, montering og tilbehør

**Mål toalettstøtter**

**Høyde- og sideveisregulerbar**  
**R3560**  
**R3585 ▶**  
**RF560**  
**RF585**

I oppfelt stilling: 250 mm

**Sideveisregulerbar**  
**R3260**  
**R3285 ▶**

I oppfelt stilling: 210 mm

**Høyderegulerbar**  
**R3160 ▶**  
**R3185**  
**RF160**  
**RF185**  
**R3106**  
**R3108**  
**RF106**  
**RF108**

I oppfelt stilling: 215 mm

**Fastmontert**  
**R3060 ▶**  
**R3085**  
**RF060**  
**RF085**

I oppfelt stilling: 186 mm

**Montering av toalettstøtter**

**Montering – veggskinne**

Monteringssett til vegg bestilles separat, se s. 51.

**Montering – fastmontert**

Monteringssett til massiv mur medfølger.

Tilbehør			
<p><b>Gulvsøyle</b></p> <p><b>R9430</b> Til fastmonterte støtter  <b>R9431</b> Til 240 mm høyderegulerbare støtter</p> <p>Anvendes ved frittstående toaletter, eller der det ikke er mulig å montere støtten på veggen.</p>	<p><b>Papirholder</b></p> <p><b>R9321</b> Til montering under toalettstøtten.</p>	<p><b>Dusjforheng</b></p> <p><b>R9311000</b> Til 850 mm toalettstøtte. Monteres direkte under støtten. 830 x 1000 mm.</p>	<p><b>Skylleknapper</b></p> <p><b>R9342</b> Fungerer sammen med utvalgte Geberit innbyggingsstøtter.</p>
<p><b>Høyderegulerbar ryggstøtte - vannrett veggskinne</b></p> <p><b>R6530</b> Anbefales ved vegghengte toaletter der avstanden vegg-front = 700 mm.</p>	<p><b>Ryggstøtte - vannrett veggskinne</b></p> <p><b>R6520</b> Anbefales ved vegghengte toaletter der avstanden vegg-front = 700 mm.</p>	<p><b>Ryggstøtte - fastmontert</b></p> <p><b>R6510</b> Til toalettskåler med høysittende sisterner. Må ikke benyttes ved innbyggingsstøtter.</p>	<p><b>Front- og ryggstøtte til dusjsete og toalettstøtter</b></p> <p><b>RT835</b> Til toalettstøtter  <b>RT873</b> Til dusjsete 310 og toalettstøtter  <b>RT874</b> Til dusjsete 450 og toalettstøtter</p> <p>Benyttes foran eller bak brukeren for å stabilisere og korrigere kroppsbalansen.</p>

# Toalettskåler

## – mål, montering og tilbehør

**Mål toalettskåler**

**Vegghengt toalett**

**R2090**

**R2091**

**Gulvstående toalett**

**R2092**

**Gulvstående toalett**

**R2095**

**R2096**

**Montering av toalettskåler**

**Montering vegghengt toalett R2090**

**Montering vegghengt toalett R2091**

**Montering gulvstående toalett R2092 og R2095**

\* Standard avstand / \*\* Anbefalt i bl.a. DK

**Montering gulvstående toalett R2096**

Tilbehør			
<p><b>Toalettsete</b></p> <p>R26 R27 R28 R36 R37 R38</p>	<p><b>Toalettstøtte</b></p> <p>R3585 For maksimal støtte.</p>	<p><b>Høyderegulerbar ryggstøtte - vannrett veggskinne</b></p> <p>R6530 Anbefales ved vegghengte toaletter der avstanden vegg-front = 700 mm.</p>	<p><b>Papirholder</b></p> <p>R9321 Til montering under toalettstøtten.</p>
<p><b>Tilbehør til badetrommet</b></p> <p>RT945 Toalett-papirholder RT946 Reservepapirholder RT947 Toalett-børste</p>			


# Toalettseter

## – mål, montering og tilbehør

### Mål toalettseter


#### Dania

R27  
R37  
R28  
R38

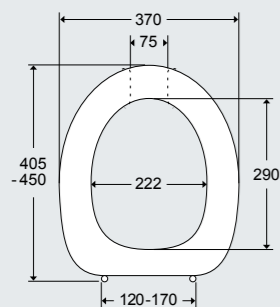


#### Ergosit

R29  
R30

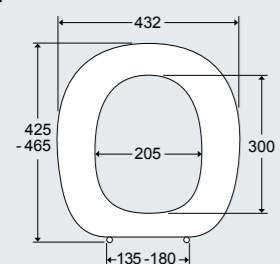


#### Colani

R26  
R36

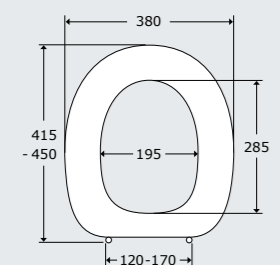


### Montering av toalettseter


#### Montering – feste, A-posisjon

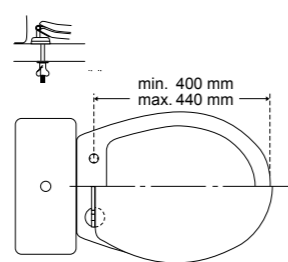

#### Montering – feste, B-posisjon

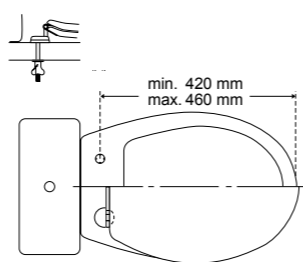

#### Montering – styrebuffer

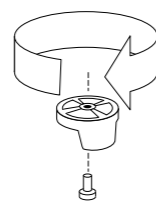


Sikrer trygg sideveis forflytning for eksempel fra rullestol

### Tilbehør

#### Institusjonsfeste

##### D92


Feste med gjennomgående stang.  
Monteres der det ønskes økt stabilitet i bakkant. Anbefales til Dania og Colani. Rustfritt stål.

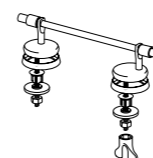

#### Tyverisikkert feste

##### BZ7

Anbefales til montering på offentlige toaletter. Rustfritt stål.

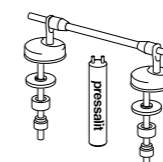

#### Universalfeste

##### B82P

Standardfeste til Dania og Colani. Rustfritt stål.





# Forhøyede toalettseter

## – mål, montering og tilbehør

### Mål forhøyede toalettseter



#### Forhøyede toalettseter, 50 mm

R19  
R20  
R21  
R23  
R31  
R33  
R43

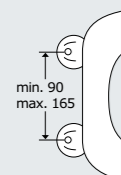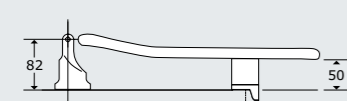



#### Forhøyede toalettseter, 100 mm

R22  
R24  
R32  
R34

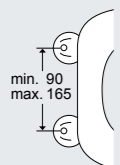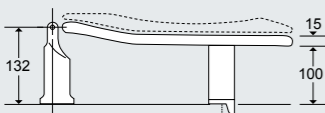


#### Forhøyet, skråstilt toalettsete, 50/100 mm

R35

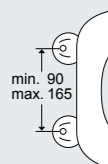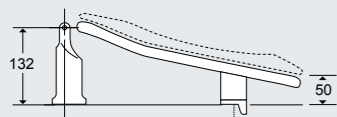


### Montering av forhøyede toalettseter


#### Montering – feste, A-posisjon

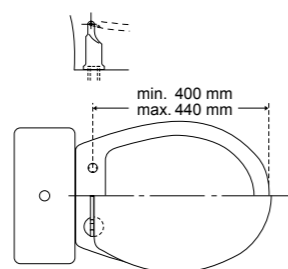

#### Montering – feste, B-posisjon

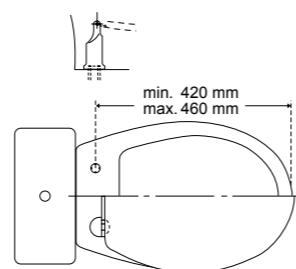

#### Montering – styrebuffer

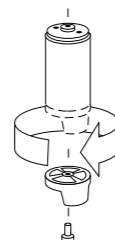

Sikrer trygg sideveis forflytning for eksempel fra rullestol

### Tilbehør

#### Sprutskjerm, 100 mm

T9515


Materiale transparent kunststoff. Enkelt å ta av ved for eksempel rengjøring og utskiftnig.



#### Sprutskjerm, 50 mm

T9516

Materiale transparent kunststoff. Enkelt å ta av ved for eksempel rengjøring og utskiftnig.

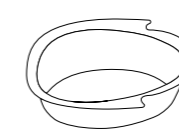



# Dusjsete 450

## – mål, montering og tilbehør

**Mål dusjsete 450**

**Høyde- og sideveisregulerbart**

R7480 ▶  
R7481  
R7450  
R7451  
R7440  
R7441

A-mål: Manuelt: 650 mm  
Elektrisk: 744 mm

B-mål: Manuelt: 624 mm  
Elektrisk: 855 mm

I oppfelt stilling: Manuelt: 261 mm  
Elektrisk: 353 mm

**Høyderegulerbart**

R7470  
R7471  
R7430  
R7431  
R7420  
R7421 ▶

A-mål: Manuelt: 606 mm  
Elektrisk: 700 mm

B-mål: Manuelt: 624 mm  
Elektrisk: 855 mm

I oppfelt stilling: Manuelt: 219 mm  
Elektrisk: 311 mm

**Høyderegulerbart**

R7410 ▶  
R7411

I oppfelt stilling: 219 mm

**Montering av dusjsete 450**

**Montering – elektrisk**

Monteringssett til massiv mur medfølger.

**Montering – manuelt loddrett skinne**

Monteringssett til vegg bestilles separat, se s. 51.

**Montering – dusjsete loddrett skinne**

Monteringssett til vegg bestilles separat, se s. 51.

Tilbehør			
<p><b>Armatuurholder</b></p> <p>RT760</p>	<p><b>Hånddusjer</b></p> <p>RT610 RT611</p>	<p><b>Stang til dusjforheng 1200 x 1200 mm</b></p> <p>RT212 Inklusive 2x12 ringer til å henge dusjforhenget i og takoppheng 600 mm</p>	<p><b>Svingbar stang til dusjforheng 1500 x 1500 mm</b></p> <p>RT225 Anvendes i rom der det benyttes takheis.</p> <p>De 2 svingbare stengene kan dreies 90° til begge sider, slik at en takheis kan passere.</p> <p>Kan også benyttes som romdeler.</p> <p>Inklusive 2x12 ringer til å henge dusjforhenget i.</p>
<p><b>Dusjarmatur</b></p> <p>RT640 RT641</p>	<p><b>Dusjforheng</b></p> <p>R9311000 Til 850 mm toalettstøtte. Monteres direkte under støtten. 830 x 1000 mm.</p>	<p><b>Dusjforheng</b></p> <p>RT202000 Str. 1500 x 2000 mm, 2 stk. RT205000 Str. 1800 x 2000 mm, 2 stk.</p>	
<p><b>Dusjholder</b></p> <p>RT600 Til loddrett grep.</p>	<p><b>Håndgrepshjørne</b></p> <p>RT136 Til dusj</p>	<p><b>Håndgrep</b></p> <p>RT144 Håndgrep til dusj. Kan brukes sammen med dusjholder RT600.</p>	<p><b>Håndgrep</b></p> <p>RT104 1000 mm.</p>
<p><b>Hyllemodul</b></p> <p>RT474 RT476</p>	<p><b>Bekken</b></p> <p>RT651: Bekken med bøylebeslag LA8855: Bekken</p> <p>Anvendes i forbindelse med sete med hull.</p>	<p><b>Front- og ryggstøtte</b></p> <p>RT874 For optimal sittestilling.</p>	<p><b>Toalettstøtte</b></p> <p>R3585 For maksimal støtte ved dusjsetet. Ved frontal forflytning anbefales 2 toalettstøtter i stedet for armstøtte på dusjsetet.</p>

# Dusjsete 310

## – mål, montering og tilbehør

Mål dusjsete 310		Montering av dusjsete 310		Tilbehør			
<p><b>Høyde- og sideveisregulerbart</b> R7330</p> <p>I oppfelt stilling: 216 mm</p>	<p><b>Montering – loddrett skinne</b></p> <p>Monteringssett til vegg bestilles separat. Se s. 51.</p>	<p><b>Montering – fastmontert</b></p> <p>Monteringssett til massiv mur medfølger.</p>	<p><b>Armatuurholder</b> RT760</p>	<p><b>Hånddusjer</b> RT610 RT611</p>	<p><b>Stang til dusjforheng</b> 1200 x 1200 mm</p> <p>RT212 Inklusive 2x12 ringer til å henge dusjforhenget i og takoppheng 600 mm</p>	<p><b>Svingbar stang til dusjforheng</b> 1500 x 1500 mm</p> <p>RT225 Anvendes i rom der det benyttes takheis.</p> <p>De 2 svingbare stengene kan dreies 90° til begge sider, slik at en takheis kan passere.</p> <p>Kan også benyttes som romdeler.</p> <p>Inklusive 2x12 ringer til å henge dusjforhenget i.</p>	
<p><b>Høyderegulerbart</b> R7320</p> <p>I oppfelt stilling: 173 mm</p>			<p><b>Dusjarmatur</b> RT640 RT641</p>	<p><b>Dusjforheng</b> R9311000 Til 850 mm toalettstøtte. Monteres direkte under støtten. 830 x 1000 mm.</p>	<p><b>Dusjforheng</b> RT202000 Str. 1500 x 2000 mm, 2 stk. RT205000 Str. 1800 x 2000 mm, 2 stk.</p>		
<p><b>Fastmontert</b> R6310</p>			<p><b>Dusjholder</b> RT600 Til loddrett grep.</p>	<p><b>Håndgrepshjørne</b> RT136 Til dusj</p>	<p><b>Håndgrep</b> RT144 Håndgrep til dusj. Kan brukes sammen med dusjholder RT600.</p>	<p><b>Håndgrep</b> RT104 1000 mm.</p>	
<p>R7310</p> <p>I oppfelt stilling: 145 mm</p>			<p><b>Hyllemodul</b> RT474 RT476</p>	<p><b>Bekken</b> RT651: Bekken med bøylebeslag LA8855: Bekken</p> <p>Anvendes i forbindelse med sete med hull.</p>	<p><b>Front- og ryggstøtte</b> RT874 For optimal sittestilling.</p>	<p><b>Toalettstøtte</b> R3585 For maksimal støtte ved dusjsetet. Ved frontal forflytning anbefales 2 toalettstøtter i stedet for armstøtte på dusjsetet.</p>	


# Håndgrep

## – mål, montering og tilbehør


### Mål håndgrep og fittings

#### Håndgrep


RT100: 300 mm  
RT101: 450 mm  
RT102: 600 mm  
RT103: 800 mm  
RT104: 1000 mm

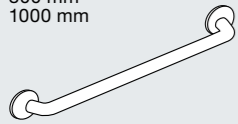

#### Håndgrepshjørne

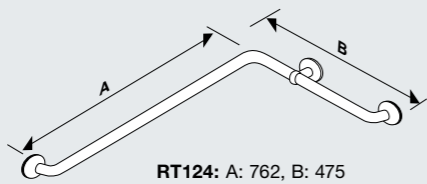


RT124: A: 762, B: 475  
RT126: A: 762, B: 762  
RT128: A: 762, B: 1200

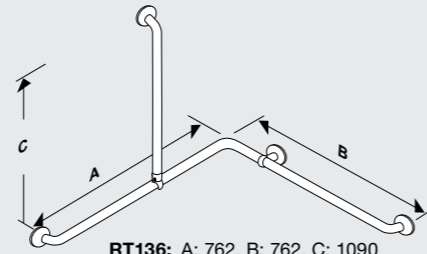


RT136: A: 762, B: 762, C: 1090  
RT138: A: 762, B: 1200, C: 1090


#### Vinkelhåndgrep

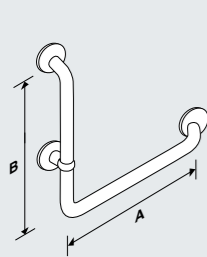

RT115: A: 400, B: 475  
RT119: A: 400, B: 900

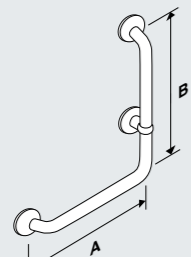


RT114: A: 400, B: 475  
RT118: A: 400, B: 900

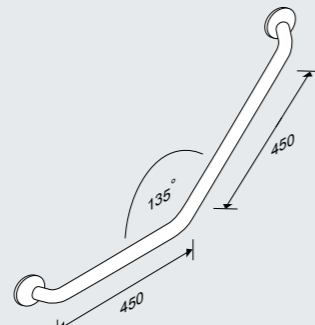

RT110

#### Håndgrep/dusjstang


RT144

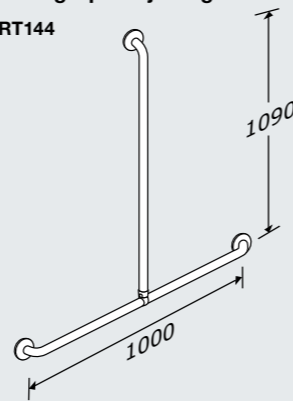

#### Vinklerørstykke med lodrett vinkel


RT340: Høyre  
RT341: Venstre

Inklusive veggrosett.

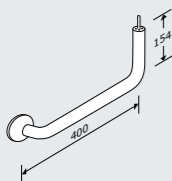

#### Vinkel 90°

RT350

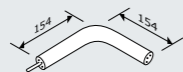

#### Rørstykke

RT320: 321 mm  
RT321: 608 mm  
RT322: 746 mm  
RT323: 1046 mm

Inklusive veggrosett.



#### Rørstykke


RT300: 300 mm  
RT303: 1200 mm  
RT307: 2400 mm




#### Vinklerørstykke med vannrett vinkel

RT345

Inklusive veggrosett.

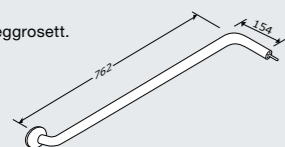

#### Fittings

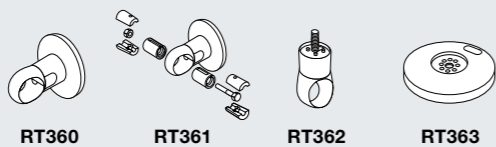

RT360

RT361

RT362

RT363

#### Rørstykke med stropp


RT330: 365 mm  
RT331: 652 mm  
RT332: 790 mm  
RT333: 1090 mm

Inklusive veggrosett.



### Montering av håndgrep

#### Montering på vegg

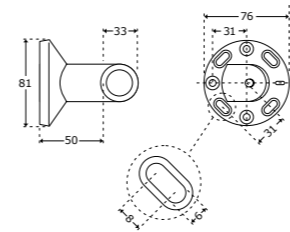

Monteringskruer til massiv mur medfølger.

### Tilbehør

#### Dusjholder

RT600

Til lodrett grep.



# Klappseter

## – mål, montering og tilbehør

**Mål klappseter**

**Høyde- og sideveisregulerbart**  
R5530

I oppfelt stilling: 160 mm

**Høyderegulerbart**  
R5520

I oppfelt stilling: 118 mm

**Fastmontert**  
R5510

I oppfelt stilling: 91 mm

**Montering av klappsete**

**Montering – loddrett skinne**

Monteringssett til vegg bestilles separat. Se s. 51.

**Montering – fastmontert**

Monteringssett til massiv mur medfølger.

Tilbehør		
<p><b>Hyllemodul</b></p> <p>RT471 RT470</p>	<p><b>Tilbehør til badetrom</b></p> <p>RT944 Knaggrekke med 3 kroker</p> <p>For mer tilbehør til badetrom se s. 48.</p>	<p><b>Håndgrep</b></p> <p>RT104xxx 1000 mm</p>

# Vanninstallasjon

## Fleksible vann- og avløpssystemer

Vann

De fleksible vann- og avløpssystemene er nødvendige for å muliggjøre justering av håndvasker og dusjarmatur. For å oppnå fult fleksible produkter er det viktig at vanninstallasjonene er plassert riktig slik at de for eksempel ikke sperrer for bevegelsen. Monteringsveiledning følger med hvert enkelt produkt.

R2061, R2064 og R2065 er VA-godkjent og har 3/8" slanger.

Vann- og avløpssystemene kan leveres i spesialmål.

Monteringshøyden er bl.a. tilpasset til fotstøtter på rullestoler.

Fleksible vann- og avløpssystemer kan suppleres med:


Vannlås: R2058

Vakuumentil: R2059

Pressalit Care anbefaler at vann- og avløpstilkoblinger på vegg er 90° vinkler som peker nedover.


### Fleksibelt vann- og avløpssystem, 1200 mm

R2064: A = T4626

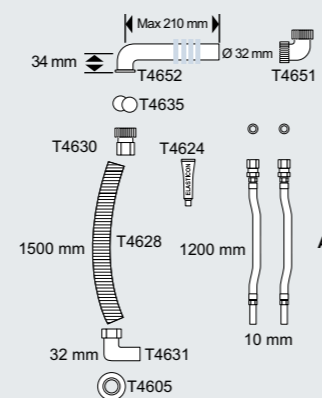

#### ⊕ Plassering av R2064 – elektrisk og gass


R4680, R4780, R4781 og R4782

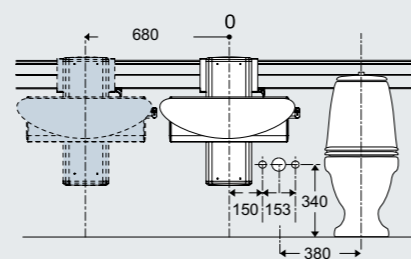

NB: Elektriske oppheng og gassoppheng kan ikke flyttes forbi vann- og avløpsinstallasjonen. Vær derfor oppmerksom på hvilken side dette monteres på.

#### Plassering av R2064 – manuelt

R4580

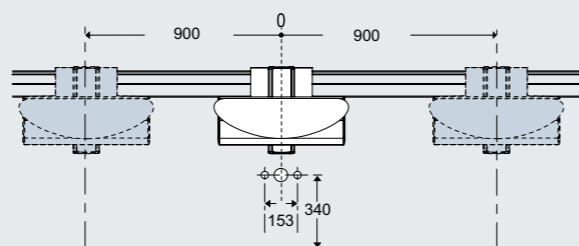


Ved anbefalt monteringshøyde og vannuttak 340 mm over gulv, kan opphenget flyttes forbi vann- og avløpsinstallasjonen.

Vann


### Fleksibelt vann- og avløpssystem, 700 mm

R2065: A = T4627

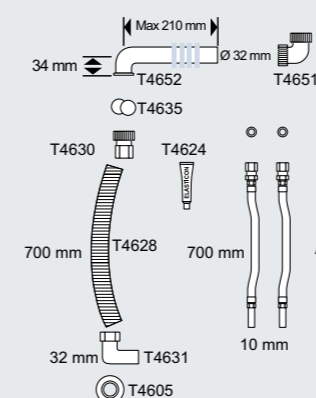

#### ⊕ Plassering av R2065 – elektrisk og gass


R4680, R4780, R4781 og R4782

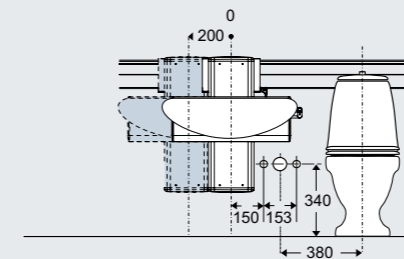

NB: Elektriske oppheng og gassoppheng kan ikke flyttes forbi vann- og avløpsinstallasjonen. Vær derfor oppmerksom på hvilken side dette monteres på.

#### Plassering av R2065 – manuelt


R4580

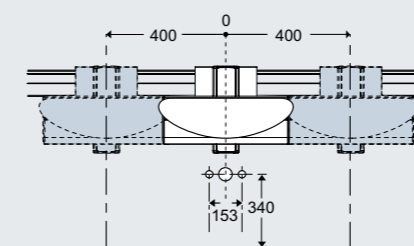

Ved anbefalt monteringshøyde og vannuttak 340 mm over gulv, kan opphenget flyttes forbi vann- og avløpsinstallasjonen.


### Fleksibelt vann- og avløpssystem, 500 mm

R2061: A = T4604

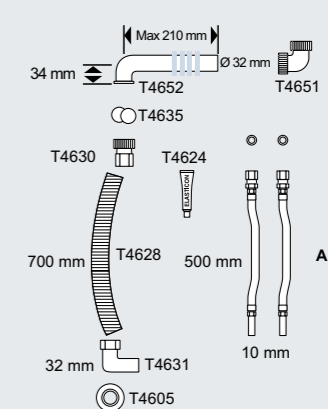


#### ⊕ Plassering av R2061 – elektrisk og gass

R4650, R4750, R4751 og R4752

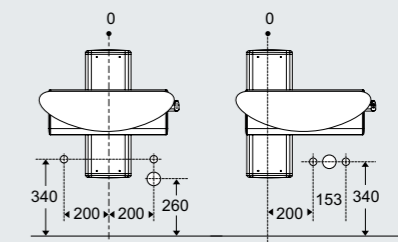

#### Plassering av R2061 – manuelt

R4550

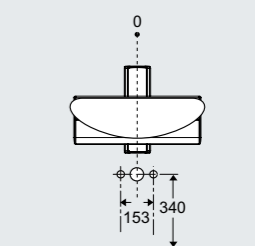

Ved anbefalt monteringshøyde og vannuttak 340 mm over gulv, kan opphenget flyttes forbi vann- og avløpsinstallasjonen.

## Elektrisk installasjon

### Oppheng til vask og dusjsete 450

#### Elektrisk

Det er viktig å gjøre alt av elektriske installasjoner riktig helt fra begynnelsen – både av funksjonelle og estetiske grunner. Installeringen foretas av autoriserte elektrikere og skal følge gjeldene nasjonal lovgivning. Monteringsveiledning følger med hvert enkelt produkt.

#### Oppheng til vask

Transformator 230 V/24 VDC likestrøm monteres i et tørt rom adskilt fra baderommet eller under taket.


For produkter på vannrett skinne er det viktig at det elektriske uttaket plasseres motsatt av bevegelsesretningen og så nærme produktets normalplassering som mulig for ikke å begrense den vannrette bevegelsen.

#### ⬆️ Høyderegulerbare oppheng til vask - vannrett veggskinne

- R4780** Elektrisk drevet oppheng til vask med betjeningsgrep
- R4781** Elektrisk drevet oppheng til vask med håndbetjening
- R4782** Elektrisk drevet oppheng til vask med fjernkontroll

#### ⬇️ Høyderegulerbare oppheng til vask

- R4750** Elektrisk drevet oppheng til vask med betjeningsgrep
- R4751** Elektrisk drevet oppheng til vask med håndbetjening
- R4752** Elektrisk drevet oppheng til vask med fjernkontroll

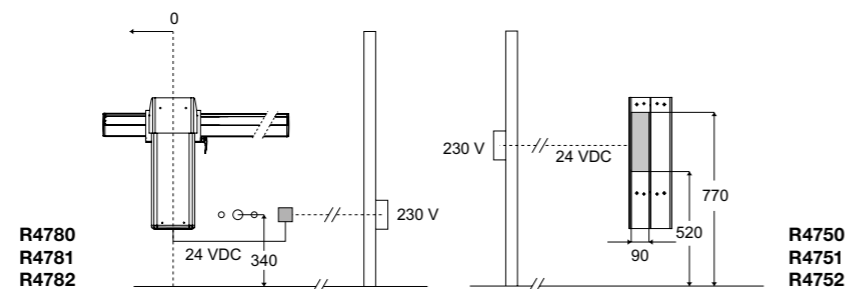

#### Dusjsete 450

Transformator 230 V/24 VDC likestrøm monteres i et tørt rom adskilt fra baderommet eller under taket.


For produkter på vannrett skinne er det viktig at det elektriske uttaket plasseres motsatt av bevegelsesretningen og så nærme produktets normalplassering som mulig for ikke å begrense den vannrette bevegelsen.

#### ⬆️ Høyderegulerbare dusjseter til vannrett veggskinne

- R7480** Elektrisk drevet dusjsete med rygg- og armstøtter og håndbetjening
- R7481** Elektrisk drevet dusjsete med hull, rygg- og armstøtter og håndbetjening
- R7482** Elektrisk drevet dusjsete med rygg- og armstøtter og fjernkontroll
- R7483** Elektrisk drevet dusjsete med hull, rygg- og armstøtter og fjernkontroll

#### ⬇️ Høyderegulerbare dusjseter


- R7470** Elektrisk drevet dusjsete med rygg- og armstøtter og håndbetjening
- R7471** Elektrisk drevet dusjsete med hull, rygg- og armstøtter og håndbetjening
- R7472** Elektrisk drevet dusjsete med rygg- og armstøtter og fjernkontroll
- R7473** Elektrisk drevet dusjsete med hull, rygg- og armstøtter og fjernkontroll

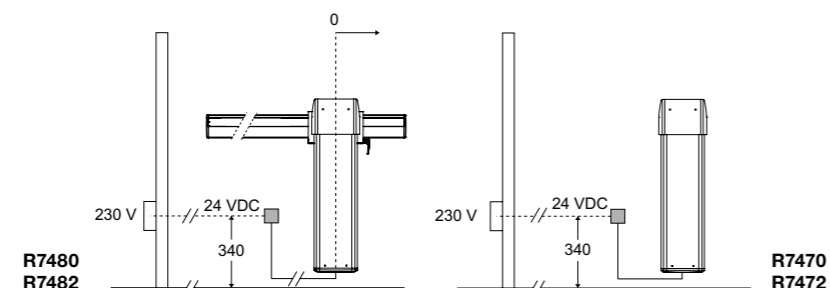

# Testmetoder

Hos Pressalit Care tester vi naturligvis våre produkter slik at vi er helt sikre på at de holder til selv ekstreme forhold i det virkelige liv. Vi går eksempelvis etter produktets svakeste punkt når vi utsetter det for en rekke harde tester. Vi vet at produktene i praksis aldri vil bli like hardt belastet som det blir i vårt testprogram, og kan derfor stå inne for de verdier vi opplyser.

Nedenfor er det vist et eksempel på vår testmetode av en toalettstøtte. Som det fremgår, øker grensen for den maksimale belastningen jo lenger man beveger seg inn på produktet i forhold til veggen. Dette betyr at produktet uten problemer kan klare de kravene som stilles til daglig, fordi det sjeldent belastes på ytterpunktet.

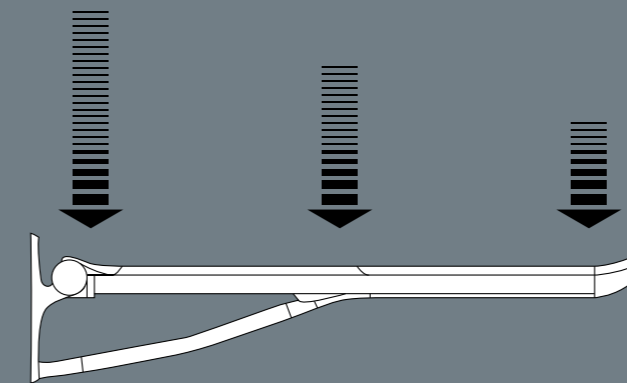

Alle testene er gjennomført med produkter montert på en stabil vegg, slik Pressalit Care anbefaler at det skal gjøres. Produktenes styrke i seg selv er ikke avhengig av typen vegg, men det er viktig å påpeke at den samlede løsningens holdbarhet og styrke vil påvirkes av veggens konstruksjon. Derfor anbefaler vi alltid forsterkninger dersom veggen ikke er stabil.



## Dynamisk test

Vi tester produktene dynamisk ved å påvirke de vertikalt 10.000 ganger med et trykk på 2 sekunders varighet. Maksimal vekt, angitt til hvert produkt, tilsier hvor mange kilo produktet kan motstå på det ytterste punktet, der det er svakest.



## Statisk test

Våre produkter utsettes også for en statisk test. Derfor vet vi nøyaktig hvor mange kilo produktet kan tåle ved en konstant belastning i 1 minutt. Som ved de andre testene, er det også her snakk om en test som påvirker produktets svakeste punkt.



## Test sideveis

På toalettstøttene og armlenene blir det, i tillegg til de to testene ovenfor, gjennomført en test med trykk på sidene. Dette trykket simulerer belastningen ved for eksempel en forflytning fra rullestol til toalett. I denne testen belastes produktet i en 45 ° vinkel 10.000 ganger med et trykk på 2 sekunders varighet.

# PRESSALIT® CARE

*Nedsatt funksjonsevne behøver ikke begrense et menneskes utfoldelse. I mer enn 35 år har keep living-filosofien vært styrende for Pressalit Cares utvikling av fleksible løsninger til kjøkken og bad for mennesker med handicap.*

*Pressalit Care er med sin forskningsbaserte viten ledende innen spesielløsninger til kjøkken og bad, og rådfører i dag kunder over hele verden.*

*Grunnleggende respekt for enkeltmenneske og dets muligheter avspeiler seg også i forhold til samfunnet og omgivelsene virksomheten er en del av. Hos Pressalit er Corporate Social Responsibility (CSR) dypt forankret i virksomhetens strategi og verdier, og utgjør retningslinjene for alle deler av organisasjonen.*

*Pressalit Care har hovedkontor i Danmark.*

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

## Distributør i Norge



### Funksjonsutstyr AS

Martin Linges vei 25  
0692 Oslo  
Norge

**Tlf:** +47 23 38 00 00  
**Fax:** +47 23 38 00 05

**E-mail:** [firmapost@funksjonsutstyr.no](mailto:firmapost@funksjonsutstyr.no)  
**Web:** [www.funksjonsutstyr.no](http://www.funksjonsutstyr.no)

