

Molift Raiser

FOR AKTIV FORFLYTNING.

Etac Molift Raiser er laget for å gi brukeren en aktiv og sikker forflytning fra stol til stol, og pleieren mulighet for ergonomisk riktig arbeidsstilling.

Å komme opp i stående stilling og forflytte seg på en trygg måte, er en utfordring for mange eldre. Samtidig utsettes pleieren ofte for belastninger som kan forårsake rygg-, skulder- og nakkeplager. Molift Raiser gir brukeren trygghet under oppreisning og god støtte for føtter og knær i stående stilling.


Det unike håndtaket gir mange gripemuligheter for brukeren, og fotplaten har en sklisikker overflate som sikrer en trygg og sikker forflytning.

Tilbehør




Molift soft handle

Hvis brukeren har problemer med å nå gripebøylen, kan Soft Handles forlengelseshåndtak hjelpe brukeren å nå helt frem.

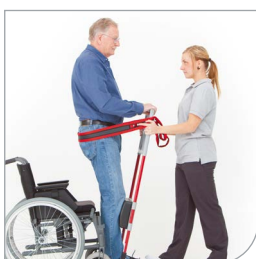

Molift Raiser Strap

Hvis brukeren føler seg usikker under forflytningen kan Raiser Strap gi støtte i stående stilling

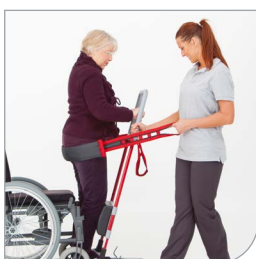

Molift Raiser Strap+

For dem som trenger en ekstra håndstrekning for å reise seg opp, kan man bruke Raiser+ beltet. Beltet brukes ikke bare for å sikre brukeren i stående stilling, men takket være den innovative glidehyslen kan en pleier hjelpe brukeren opp i stående stilling - uten å løfte!



BRUKSOMRÅDE

- Forflytning fra seng til rullestol / dusjstol
- Forflytning fra rullestol til toalett
- Flytte bakover / fremover i stol / rullestol
- Forflytning fra stol til rullestol / dusjstol

BESKRIVELSE

BREDDE X LENGDE X HØYDE

ART. NR.

SPESIFIKASJONER

MOLIFT

CM

~ Raiser 58x63x120

16090202

TILBEHØR –MOLIFT

- ~ Myke håndtak, 2-pack 82511
- ~ Raiser Stropp S/M 82508
- ~ Raiser Stropp L/XL 82509
- ~ Raiser Stropp+ S/M 82528
- ~ Raiser Stropp+ L/XL 82529

MATERIALE: Stål, plastikk, aluminium, TPR

TOTAL VEKT: 14.2 kg



VASKEANVISNING

Bruk et løsemiddelfritt vaskemiddel med pH-nivå mellom 5 og 9. Kan vaskes ved 80°C i tre minutter (ikke med kneplaten).

Bruk en våtserviett til å tørke av kneplaten. Ikke spill direkte på lagrene og benstøtten med en høytrykksvasker.



Molift Raiser Belt

Gir ekstra støtte ved oppreisning til stående

Molift Raiser Belt er en videreutvikling av Raiser Strap +. Raiser Belt forenkler arbeidet for pleiere som assisterer en bruker ved oppreisning til stående. Beltet kan enkelt plasseres ved baken eller i midjen, avhengig av hva som passer best for bruker og situasjonen. Raiser Belt er stabilt og sitter trygt på plass når det er fastspent, noe som minimerer risikoen for at beltet sklir ned når brukeren lener seg fremover.

Innsiden av beltet har antiskli.

Utsiden har glatt stoff som forenkler plassering. Beltet er stabilt og formfast takket være polstringen og kantbåndene.

De sorte faste håndtakene brukes når to pleiere assisterer bruker ved oppreisning til stående.

Det røde bevegelige håndtaket brukes når en pleier assistere bruker ved f.eks. toalettbesøk.



Informativ etikett.



Risikoen for at beltet kan gli ned minimeres når spennen er fastspent.



Momentet ved toalettbesøk forenkles når Raiser Belt plasseres i midjen. Buksene kan enkelt dras opp eller ned uten at beltet er i veien.



To pleiere kan enkelt assistere brukeren ved oppreisning til stående når Raiser Belt er plassert rundt midjen.

Molift Raiser Belt

Small / Medium
Large / X-Large

Art.nr

82964
82965