



# Immedia glidebrett

Et bredt spekter av løsninger for sittende forflytninger

Glidebrett er ment å bygge bro over korte åpninger når du utfører sittende forflytninger. Brettets overflate har lav friksjon som gjør at bruker kan forflytte seg selvstendig eller med hjelp av andre. Immedia glidebrett brukes ved forflytning mellom seng og rullestol/dusjstol, mellom rullestol/stol/toalettstol eller inn- og ut av bil. Alle glidebrett har sklisikring på undersiden. Kombineres et glidebrett med en glidematte gir det enda lavere friksjon, anbefales når forflytningen foretas med bar hud, for eksempel til og fra dusjstol eller toalett.

## Bruksområder

- Forflytning fra seng til rullestol/dusjstol
- Forflytning inn- og ut av bil
- Forflytning mellom rullestol, stol, toalett, dusjstol eller lignende



## Immedia E-Board

Immedia E-Board er et tynt og fleksibelt glidebrett som er enkelt å plassere og fjerne.



### Immedia E-Board med en vinge

Kanten som brettes opp beskytter mot hjulets friksjon, slik at det er lett å gli over. Den foldede kanten gir brettet stivhet og stabilitet i forflytningen.



### Immedia E-Board uten vinge

Et mindre og lettere glidebrett som er enkelt å ta med seg. Passer til mer aktive og selvstendige pasienter. Immedia E-Board uten vinge fås i to lengder, 45 og 60 cm.

## Immedia E-Board Oval

Immedia E-Board Oval er egnet ved forflytning mellom f.eks. to liggeflater, seng til rullestol/mobil dusjstol. E-Board Oval har lav friksjon på begge sider noe som forenkler plassering og fjerning av brettet.



### Immedia E-Board Oval L

E-Board Oval er egnet ved forflytning mellom to senger eller forflytning i sittende posisjon.





### Immedia E-Board Oval S

E-Board Oval S er et lite glidebrett som brukes til å flytte lenger bak i stol.

## Immedia Butterfly

Immedia Butterfly er et langt, bredt og stabilt glidebrett. Det har utskjæring for posisjonering mot hjulet på en rullestol og en sklisikker underside, som sikrer at brettet forblir på plass under forflytningen.

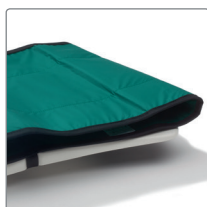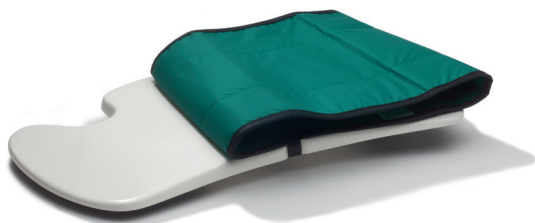

### Immedia Butterfly GlideWing

Butterfly kan brukes med den spesielle Butterfly GlideWing, som er montert på brettet. GlideWing glir langs brettet og forminsker friksjonen enda mer.

## Immedia 3B - Board

Immedia 3B-Board er et stabilt glidebrett med en tradisjonell buet form. Brettet kan plasseres enten med buen fremover, eller med buen bakover, avhengig av forflytningssituasjonen og omkringliggende hindringer, f. eks: hjulet på rullestolen.



## Immedia Dolphin

Dolphin er et solid og stabilt glidebrett designet for forflytning til toalett. Brettet har utsparinger for posisjonering mot hjulet på rullestolen og en sklisikker underside. Utsparingen lar brukeren forbli på brettet under toalettbesøket.



### Godt å vite!

Ved forflytning med et glidebrett, sørg for at overflaten du skal flytte til er litt lavere, og når bevegelsen startes, skyves brukerens tyngdepunkt mot brettet for å gjøre forflytningen enklere.



Se våre videoer på [www.etac.no](http://www.etac.no)

Lær mer om bruk av forflytningsbrett.

Beskrivelse	B x L	HMS nr.	Art. nr.	Spesifikasjoner	
<b>Immedia E-Board</b>	<b>(cm)</b>			<b>Immedia E-board og 3B-Board</b>	<b>Immedia 3B-Board/ E-Board og Dolphin</b>
Small	20x45	154188	IM410	<b>Materiale:</b> Polyetylen	<b>Maks brukervekt:</b> 150kg
Medium	25x60	164187	IM408		
Large 1 vinge	33x60	255737	IM404	<b>Immedia Butterfly og Dolphin</b>	<b>Immedia Butterfly</b>
XL 1 vinge	33x75	255738	IM405		
Large E-Board oval, 2 stk, sort, H3mm	39x85		IM411		
Small E-Board oval, 2 stk, sort, H3mm,	20x45		IM412	<b>Materiale:</b> Glassfiber	<b>Immedia Butterfly</b>
<b>Immedia Butterfly</b>	<b>(cm)</b>			<b>Immedia Butterfly GlideWing</b>	<b>Maks brukervekt:</b> 250kg
Brett	32x66	069575	IM401	<b>Materiale utside og innside:</b> Nylon	<b>Polstring:</b> Polyester
GlideWing L	35x40	069576	IM4001		
GlideWing XL	35x47.5		IM4002		
<b>Immedia 3B - Board</b>	<b>(cm)</b>				
Glidebrett med kurvet form	23x77		IM403		
<b>Immedia Dolphin</b>	<b>(cm)</b>				
Toalett Brett	L69	074255	IM409		