



# Immedia Glidebrett

## ET BREDT SPEKTER AV LØSNINGER FOR SITTENDE FORFLYTNINGER

Glidebrett er ment å bygge bro over kortere åpninger når du utfører sittende forflytninger. Brettets overflate har en lav friksjon som gjør at brukeren kan forflytte seg selv, eller med hjelp. Immedia glidebrett brukes ved forflytning mellom seng og rullestol / dusjstol, mellom rullestol / stol / toalettstol eller til og fra bilen. Alle glidebrett har sklisikring på undersiden. Kombineres et glidebrett med en glidepute gir det enda lavere friksjon, og er anbefalt når forflytningen foretas med bar hud, for eksempel til og fra en dusjstol eller toalett.



Butterfly med  
GlideWing.



## Immedia Butterfly

Immedia Butterfly er et langt, bredt og stabilt glidebrett. Det har utskjæring for posisjonering mot hjulet på en rullestol og en sklisikker underside, som sikrer at brette forblir på plass under forflytningen.

### Immedia Butterfly GlideWing

Butterfly kan brukes med den spesielle Butterfly GlideWing, som er montert på brettet. GlideWing glir langs brettet og forminsker friksjonen enda mer.



Lengden på 3B-Boards tillater forflytning over brede åpninger.


## Immedia 3B-Board

Immedia 3B-Board er et stabilt glidebrett med en tradisjonell buet form. Brettet kan plasseres enten med buen fremover, eller med buen bakover, avhengig av forflytningssituasjonen og omkringliggende hindringer, f. eks: hjulet på rullestolen.

### ANBEFALT BRUK!



1. Plasser Immedia Butterfly nær brukers sete, og skyv GlideWing under en av sitteknoene.

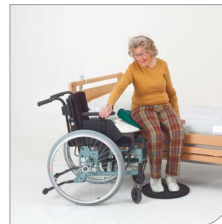

2. Hvis det er mulig bør brukeren holde i det motsatte armlenet når hun begynner å gli mot rullestolen. Bruk Immedia Peditum for å lette vending.



3. Når forflytningen er fullført, fjernes Immedia Butterfly, og rullestolens armlener og benstøtter monteres

### TIPS!

Ved forflytning med et glidebrett, sørg for at overflaten du skal flytte til er litt lavere, og når bevegelsen startes, skyves brukers tyngdepunkt mot brettet for å gjøre forflytningen enklere.

## Immedia E-Board

Immedia E-Board er et tynt og fleksibelt glidebrett som er enkelt på plassere og fjerne.



Immedia E-Board med en vinge.

### E-Board med en vinge


Immedia E-Board er et fleksibelt glidebrett som er lett å bøye, noe som gjør det enkelt å plassere og fjerne. Kanten som brettes opp beskytter mot hjulets friksjon, slik at det er lett å gli forbi. Den foldede kanten gir brettet stivhet og stabilitet ved forflytningen.



Immedia E-Board uten vinger

### E-Board Compact

Et mindre og lettere brett som er egnet for de mer aktive og selvstendige. Finnes i to lengder.

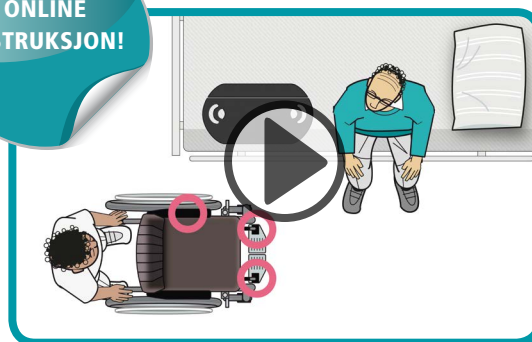

### Lær mer ...

... om hvordan du bruker glidebrett.  
Vår nye animerte video om Transferboards E-Board gir deg nyttige instruksjoner til bruk i hverdagen.



## Immedia Dolphin

Dolphin er et solid og stabilt glidebrett designet for forflytning til toalett. Brettet har utsparinger for posisjonering mot hjulet på rullestolen og en sklisikker underside. Utsparingen lar brukeren forbli på brettet under toalettbesøket



Immedia Dolphin er spesielt designet for forflytning til toalett.

### BRUKSOMRÅDE

- Forflytning fra seng til rullestol / dusjstol
- Forflytning inn og ut av bil
- Forflytning mellom rullestol, stol, toalett, dusjstol, toalettstol

#### BESKRIVELSE

#### B X L X H

#### HMS NR.

#### ART. NR.

#### SPESIFIKASJONER

#### IMMEDIA

- ~ 3B-Board, buet, hvit
- ~ E-Board Small, sort, u/vinge
- ~ E-Board Medium, sort, u/vinge
- ~ E-Board Bred, sort, en vinge
- ~ E-Board Lang, sort, en vinge
- ~ Butterfly
- ~ Butterfly GlideWing L
- ~ Butterfly GlideWing XL
- ~ Dolphin Toilet Board, hvit

#### CM

- 23 x 77
- 20 x 45 x 0,5
- 25 x 60 x 0,5
- 33 x 60 x 0,5
- 33 x 75 x 0,6
- 32 x 66
- 35 x 40
- 35 x 47,5
- Lengde: 69

- 194428
- 164188
- 164187
- 164185
- 164186
- 069575
- 069576
- 069576
- 074255

- IM403
- IM410
- IM408
- IM404
- IM405
- IM401
- IM4001
- IM4002
- IM409

#### Immedia E-board og 3B-board

MATERIALE: Polyetylen

#### Immedia Butterfly og Dolphin

MATERIALE: Fiberglass

#### Immedia Butterfly GlideWing

MATERIALE UTSIDE OG INNSIDE: Nylon

POLSTRING: Polyester

#### VASKEANVISNING

GLIDEBRETT: Rengjøres med såpevann eller desinfeksjonsmiddel.



BUTTERFLY GLIDEWING: Tørkes av med såpevann eller desinfeksjonsmiddel. Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.

