



# Immedia SlingOn

## GLIDELAKEN FOR APPLISERING AV LØFTESEIL OG POSISJONERING

Immedia SlingOn er konstruert for enkel applisering av seil i seng på brukere som av ulike årsaker ikke kan vendes på siden for tradisjonell applisering. SlingOn består av to separate MultiGlide-glidestykker med ultralav friksjon. De holdes sammen av trykknapper i hjørnene, og har håndtak langs sidene. SlingOn er et ideelt hjelpemiddel for meget immobile brukere som trenger hyppige løft, tunge brukere eller brukere som ikke bør vendes ved applisering av seil. I tillegg kan det anvendes som et tradisjonelt glidelaken ved reposisjonering i seng.

SlingOn plasseres under brukeren ved hjelp av en enkel foldeteknikk, enten ved applisering av seil eller for posisjonering. Seilet tres deretter mellom de to lagene av SlingOn.



*Immedia SlingOn er den optimale løsning for applisering av seil uten å vende brukeren.*




*Ved legging av seil på store tunger brukere som fyller ut hele sengen, er det ofte svært begrenset plass til å vende brukeren på siden. Immedia SlingOn muliggjør legging av seil med brukeren liggende på ryggen.*

**ANBEFALT  
BRUK!**



1. Fold sammen Immedia SlingOn fra den korte siden i 20-30 cm trinn. Fold ut SlingOn under brukeren i etapper. Det er viktig å at begge hjelpere drar i SlingOn samtidig.

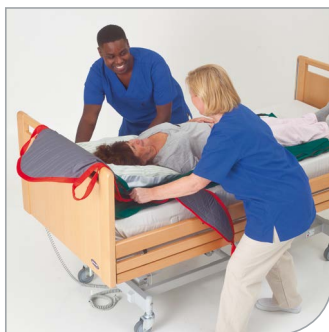

2. Når Immedia SlingOn er på plass, dras seilet inn under brukeren mellom de to lagene av SlingOn, fra hodeenden mot setet i små steg. Når seilet er på plass, fjernes den øverste delen av SlingOn. Brukeren kan nå løftes med personløfter.

## TIPS!

Bruk Immedia SlingOn som tradisjonelt glidelaken. De to delene er utstyrt med håndtak for å gjøre reposisjonering lett. Immedia SlingOn kan også foldes ut under brukeren fra knenivå og mot hodeenden.



## BRUKSOMRÅDE

- Legging av seil uten å vende brukeren
- Minimerer friksjon under friksjonspunktene
- Vending
- Posisjonering
- Flytte høyere opp i seng

### BESKRIVELSE

#### Immedia SlingOn

- ~ Small
- ~ Medium
- ~ Large

### B X L

#### CM

- 80 x 100
- 80 x 170
- 120 x 150

### HMS NR.

- 173567
- 173568

### ART. NR.

- IM437/S
- IM438
- IM437

### SPESIFIKASJONER

MATERIALE: Nylon  
STROPPER: Polyester  
Trykknapper

### VASKEANVISNING

Kan tørkes av med desinfeksjonsmiddel  
Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.

