

Immedia 4WayGlide

FORFLYTNING AV SELVSTENDIGE ELLER DELVIS SELVSTENDIGE BRUKERE

4WayGlide System består av to deler: Nylonlaken som er festet til madrassen og en overmadrass som ligger på toppen.

4WayGlide Mini

4WayGlide Mini er den korteste variant (100 cm) egnet for brukere med noe redusert mobilitet, for eksempel i bekkenområdet.

Systemet fremmer selvstendig eller assistert bevegelse. Sklisikring langs sidene av nylonlakenet minimerer risikoen for at brukeren sklir ut av sengen.




Immedia 4WayGlide Mini komplett system (140 x 100 cm).

4WayGlide Midi

4WayGlide Midi er en medium variant (150 cm) i-seng system egnet for tunge brukere med delvis mobilitet i bena. 4WayGlide Midi er utstyrt med LPL funksjon (se side 12)



Immedia 4WayGlide Midi komplett system (140 x 150 cm).

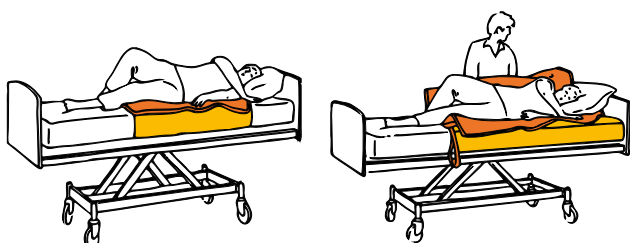

BRUKSOMRÅDE

- Integret i sengen
- Vending, enten selvstendig eller assistert
- Posisjonering
- Flytte høyere opp i seng
- Kan brukes med en løfter

BESKRIVELSE	B X L X H	HMS NR.	ART. NR.	SPESIFIKASJONER			
IMMEDIA 4WAYGLIDE MINI	CM			Glidemadrass, MINI & MIDI TOPP: Polyester/bomull POLSTRING: Polyesterfiber UNDERSIDE: Nylon HÅNDTAK: Polyester			
~ Glidemadrass	140 x 100		IM140/100				
~ Nylonlaken med sklisikre side	140 x 100		IM140/100NS				
~ Sett – inkludert IM140/100 + IM140/100NS			IM4301				
IMMEDIA 4WAYGLIDE MIDI	CM						
~ Glidemadrass	140 x 150		IM140/150				
~ Nylonlaken med sklisikre sider	140 x 150		IM140/150NS				
~ Sett – inkludert IM140/150 +IM140/150NS			IM4313				
TILBEHØR – Positioning Wedge							
~ Med sklisikkert trekk	30 x 20 x 53	170036	IM53NS				
~ Med sklisikkert trekk	30 x 20 x 80	173420	IM53/80NS				
VASKEANVISNING Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.							