


ToppAir

Statisk overmadrass
med justeringsmulighet

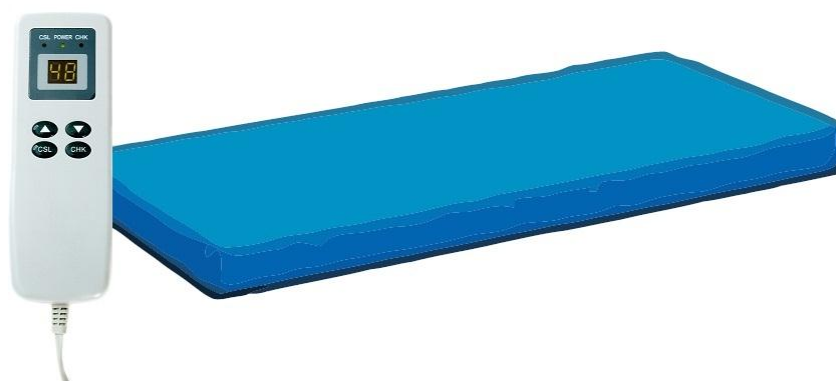

 *Sofies AS*

Justeringsmuligheter

Madrassens luftkammer justeres ved hjelp av håndpanelet til pumpen mens bruker ligger på madrassen. Brukeren kan selv justere fastheten i madrassen. Hos pasienter med smerter og sårproblematikk kan det være særlig behov for å forandre fastheten i madrassen til stadighet. Det er også en fordel å utføre stell og forflytning på fast underlag.

Pumpen

Elektrisk pumpe med en trykkmåler som viser fastheten i madrassen på håndpanelet. Pumpen har også en egen CLS-knapp (Comfort Set Level) som automatisk stiller inn på det trykket man er kommet fram til gir den optimale trykkavlastning for brukeren. På den måten er det lettere for pleiepersonell og bruker å stille tilbake madrassen etter bruk.



Trekk

Materialet er Polyurethane.

Det er elastisk, vanntett, flammehemmende, pustende og resistent mot blod, urin, olje, fett og tåler desinfeksjonsmidler.

Trekket består av to deler slik at man enkelt kan ta av den øverste delen for å vaske. Man slipper dermed å demontere madrassen. ToppAir er også meget egnet til bruk på sykehus og institusjoner.

Vask

Trekket kan vaskes på 95c°, tørketromles, renses, steriliseres med damp og desinfiseres. Luftkammer, skum og pumpe desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel.

Overpolster

ToppAir har et spesialdesignet overpolster som sikrer optimal ventilasjon i madrassen og god trykkavlastning. Dette bidrar til å forhindre liggesår og skaper en god komfort.

Bilde av overpolster:



Brukervekt

Fra 20-210 kg.

Størrelser

Bredden: 75/80/85/90/120 cm

Lengden: 190/200 cm

Høyde: 9 cm

Målgruppe

ToppAir er rettet mot brukere med mindre trykksår eller fare for sår og smerteproblematikk.

Pumpeoppheng

Pumpen kan henges på sengen. Høyden på opphenget kan reguleres.

Delkomponenter

ToppAir kommer som delkomponenter slik at den enkelt kan flyttes eller pakkes bort. Dette er også en økonomisk gevinst ved at man kan erstatte deler i stedet for hele madrassen hvis noe skulle bli ødelagt.

Husk å legge overmadrassen på et godt underlag! Det vil si et fast og rett underlag.