



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.



Løfteseil

Introduksjon


Human Care produserer og tilbyr løsninger innen forflytning for mennesker med spesielle behov. Våre produkter streber etter å være en naturlig del av livet for alle brukere.

Human Care ble grunnlagt i 1993, og har siden den gang skapt en historie innen pasientbehandling å være stolt av. 20 års erfaring gjenspeiles i et bredt utvalg av kvalitetsprodukter som tilfredsstillende alle våre kunders behov. Våre hovedproduktområder er: Rullatorer, takløftsystemer, sykehussenger og transportstoler for personer med nedsatt mobilitet.

Vårt hovedkontor ligger i Stockholm, med datterselskap i USA, Canada og Australia. I tillegg samarbeider vi med distributører i mer enn 30 land. Det viktigste for oss er sikkerhet, kvalitet og brukervennlighet. Vi bestreber oss på å sikre og forbedre kvaliteten på alle våre produkter. I hver detalj, i alle aspekt, holder våre produkter det de lover.

Velkommen til Human Care.



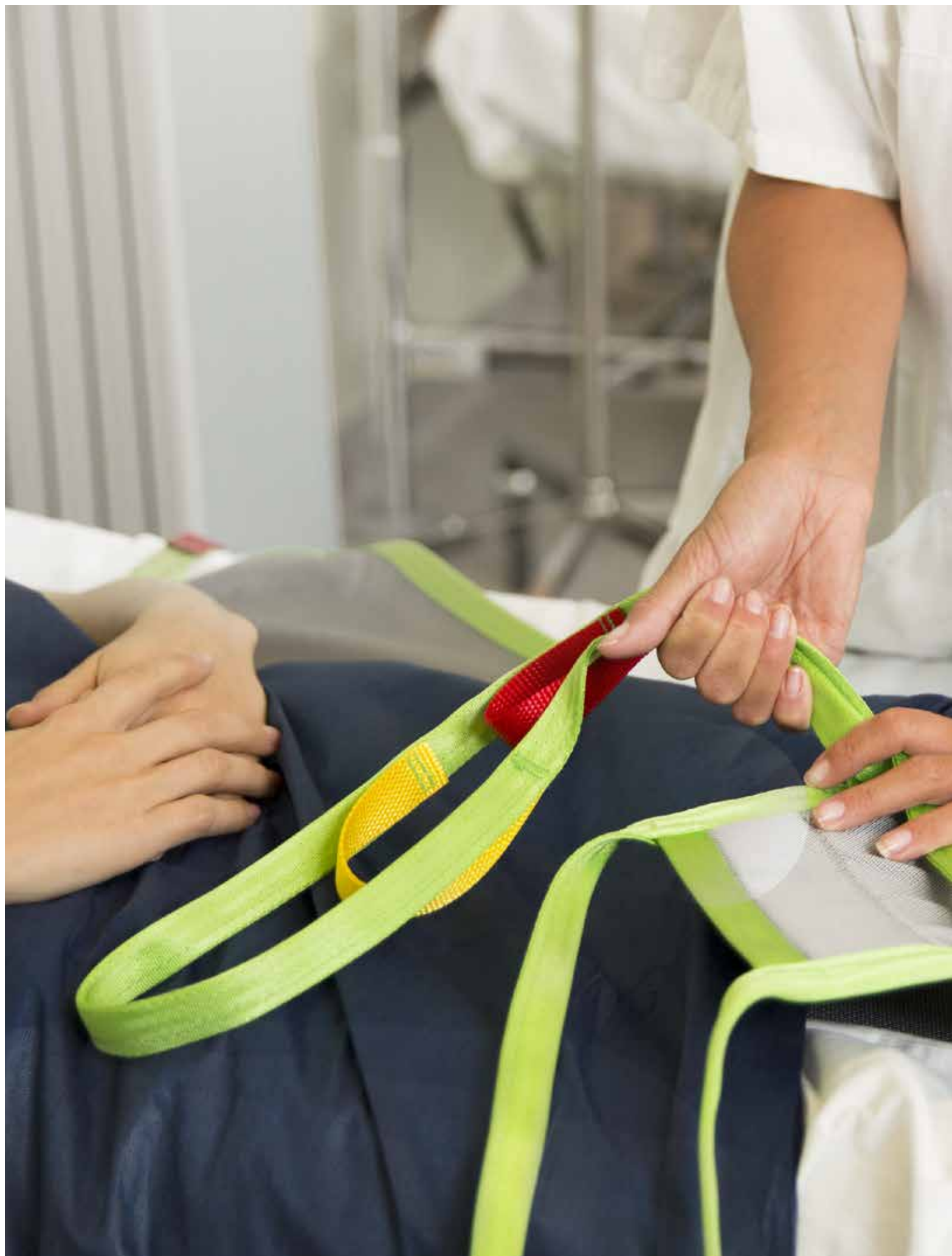



Løfteseil

Universalseil	10
Seil for tunge brukere	18
Hygiene seil	20
Reposisjoneringsseil	22
Spesialseil	23
Gåtrening/rehab	24
Tilbehør	27

Løfteseil

Et bredt spekter av anatomisk utformet seil utviklet med pasientens sikkerhet og komfort i fokus. Våre produkter omfatter mer enn 22 ulike modeller og tilbys i et godt utvalg av størrelser. Human Care løfteseil dekker alle typer behov.





En behagelig løfteopplevelse

Våre løfteseil er utviklet på det faktum at folk er forskjellige, og at vi alle har våre egne ønsker og behov. For å gjøre alle fornøyde, og at alle våre kunder føler seg så komfortable som mulig ved å bruke våre løfteseil, kan de fleste brukes med 2, 3 eller 4-punkts oppheng.

2-punkts oppheng

Passer i de fleste løftesituasjoner, og gir en god sittestilling. 2-punkts oppheng er tilgjengelig for både flyttbare og faste løftere.



3-punkts oppheng

Gir en utstrakt sittestilling og en jevnere vektfordeling. 3-punkts oppheng er spesielt egnet for pasienter som har en økt risiko for trykksår eller å gli ut av seilet.



4-punkts oppheng

En behagelig sittestilling gjør den egnet for større pasienter eller ved bruk av bære. 4-punkts oppheng er tilgjengelig for både flyttbare og faste løftere.



Bruk riktig stoff for ulike løft

Å velge riktig materiale er viktig ved valg av et løfteseil, da de ulike materialene har unike egenskaper som passer til ulike løftesituasjoner. Du vil ha materialer som er robuste med lav friksjon slik at seilet er lett å påføre og fjerne. Når du bruker seilet i forbindelse med badekar og dusj, må du ha et materiale som tørker raskt og er enkelt å holde rent.

Dersom seilet skal bli liggende i rullestolen eller sengen etter løftet, trenger du et pustende materiale og et løfteseil uten forsterkninger, håndtak eller polstringer. Våre seil er tilgjengelig i tre forskjellige materialer, alle med sine egne unike fordeler og funksjoner.



Polyester - Holdbart og lett å vedlikeholde

Et slitesterkt materiale som er lett å rengjøre og har lav friksjon, som gjør påføringen enklere. Polyester bør ikke bli liggende under pasienten i en seng eller stol.




Polyester nett - Fleksibelt og luftig

Et mykt og tynt materiale som puster og tørker raskt. Det har noe elastisitet, og kan bli liggende bak pasienten i en stol eller seng. Polyester nettt er brukt på våre løfteseil for bad og dusj.




Trevira - Mykt, komfortabelt og med høy friksjon

Et unikt, mykt materiale som puster godt. Seilet kan bli liggende bak /under pasienten i en stol eller i seng. Stoffet har høy friksjon for å hindre glidende bevegelser når du sitter i rullestol eller i seng.

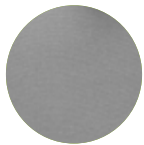

Bomull - Engangs seil

Våre engangsseil er produsert i sterk, men myk bomull. Disse seilene skal ikke vaskes men destrueres etter bruk.

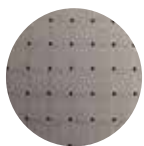

Polyester / non woven - Ventilert materiale

Våre polyester / non woven er et gjenbrukbart materiale som er meget skånsomt mot pasientens hud. Det gir maksimal luftstrøm og pusteevne og kan bli liggende hos pasienten.

Vaskeanvisning

Human Care løfteseil er ment for individuell bruk. For å unngå infeksjoner eller overføring av sykdom er det viktig å rengjøre seilene skikkelig. Løfteseil bør maskinvaskes og tørkes så snart som mulig etter bruk. Alle stoffer er vaskbare opp til 60 grader. Detaljerte vaskeanvisninger finnes på produktetiketten.



Føl deg trygg og komfortabel

Våre løfteseil er funksjonelle, komfortable og designet for alle løftebehov og pasienttyper. Seilene er tilgjengelige i størrelser fra Junior Small til XXXL, og er best egnet sammen med vår unike 3-punkts oppheng for optimal komfort. Human Care løfteseil er tilgjengelig i forskjellige materialer for å oppnå sikker og komfortabel løfting i alle situasjoner og miljøer.

Rett størrelse for best bruk

Det er viktig å bruke korrekt størrelse på seilet. Er løfteseilet for lite, kan de gi for lite støtte og bli ubehagelig for brukeren. Med et overdimensjonert seil er risikoen at brukeren kan gli ut av seilet.

Dersom et løfteseil er for lavt eller kort vil det ikke støtte rygg eller nakke, løftet blir ubehagelig og vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. For å se forskjell på de ulike størrelsene har våre løfteseil en fargekode for rask identifisering. Fargekoden er ved siden av seilets etikett.

Fargekoder :



JuniorS JuniorM S M L XL XXL XXXL



Standardseil


Skulderhøy modell med delte ben

- Ingen forsterkinger, håndtak eller polstring
- Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Oppreist sittestilling



Standardseil er et komfortabel løfteseil uten forsterkninger, håndtak eller polstring. Seilet tilpasser seg pasientens kropp og gir god støtte for hele ryggen. Dette løfteseilet kan brukes i de fleste situasjoner, passer de fleste pasienter, og er et godt valg for generell grunnleggende bruk.

Standardseil tilbys i polyester, polyester nett og Trevira. Trevira og polyester nett har egenskaper som gjør at fuktighet og varme effektivt overføres fra pasienten. Dette gjør at Trevira og polyester nett løfteseil kan bli liggende i rullestol eller seng etter at overføringen er fullført.

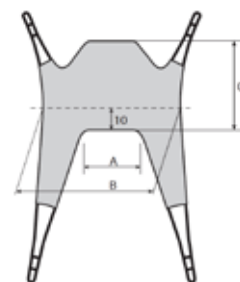

Størrelse:

Materiale:



Trevira

Polyester

Polyester nett

Art.navn	Art.nr (polyester nett)	Art.nr (Trevira)	Art.nr (Polyester)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Standardseil, JS	25045-JS	25050-JS	25070-JS	Lilla	100	620	490	250 kg
Standardseil, JM	25045-JM	25050-JM	25070-JM	Grå	140	640	530	250 kg
Standardseil, S	25045-S	25050-S	25070-S	Rød	180	770	570	250 kg
Standardseil, M	25045-M	25050-M	25070-M	Gul	230	870	610	250 kg
Standardseil, L	25045-L	25050-L	25070-L	Grønn	280	940	640	250 kg
Standardseil, XL	25045-XL	25050-XL	25070-XL	Blå	320	980	700	250 kg


Silhuett seil (Skall seil)

Høy ryggmodell med delte ben

- Ingen forsterkinger, håndtak eller polstring
- Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Gir ekstra støtte till nakke

Silhuett seil (Skall seil) er et komfortabel løfteseil uten forsterkninger, håndtak eller polstring. Det tilpasser seg pasientens kropp, og gir god støtte for hele kroppen. Seilet kan brukes i de fleste situasjoner, men er spesielt egnet for forflytning til og fra rullestoler, støpte seter eller skallseter.

Silhuett seil (Skall seil) tilbys i et tynt polyester nett og Trevira som gjør at fuktighet og varme effektivt overføres fra pasienten. Silhouette seil kan bli liggende i rullestol eller seng etter at forflytningen er fullført.

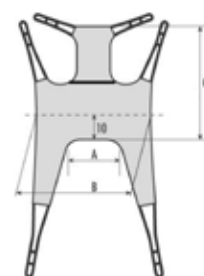

Størrelse: ● ● ● ● ● ●

Materiale:  
Trevira Polyester nett

Art.navn	Silhuett seil (Trevira)	Silhuett seil (polyester nett)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Silhuett seil, JS	25020-JS	25015-JS	Lilla	100	620	630	250 kg
Silhuett seil, JM	25020-JM	25015-JM	Grå	140	640	700	250 kg
Silhuett seil, S	25020-S	25015-S	Rød	180	770	780	250 kg
Silhuett seil, M	25020-M	25015-M	Gul	230	870	870	250 kg
Silhuett seil, L	25020-L	25015-L	Grønn	280	940	960	250 kg
Silhuett seil, XL	25020-XL	25015-XL	Blå	320	980	1050	250 kg

Sitteseil


Skulderhøy modell med delte ben

- Forsterket rygg og ben
- Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Oppreist sittestilling



Sitteseil er en skulderhøy modell med delte ben og forsterket rygg og ben. Seilet er utformet for å gi pasienten ekstra ryggstøtte og er en god løsning for pasienter med lav kroppsstabilitet.

Sitteseil kan brukes i de fleste løftesituasjoner og passer til de fleste pasienter, men er best egnet for pasienter med lav kroppsstabilitet. Den forsterkede ryggen og polyester med lav friksjon gir en rask og enkel anvendelse av løfteseilet.

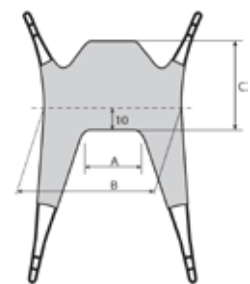

Størrelse: ● ● ● ● ● ●

Materiale:  Polyester

Art.navn	Art.nr (polyester)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Sitteseil, JS	25030-JS	Lilla	90	540	580	250 kg
Sitteseil, JM	25030-JM	Grå	150	600	580	250 kg
Sitteseil, S	25030-S	Rød	300	750	630	250 kg
Sitteseil, M	25030-M	Gul	360	850	630	250 kg
Sitteseil, L	25030-L	Grønn	420	950	630	250 kg
Sitteseil, XL	25030-XL	Blå	470	1020	630	250 kg


Badeseil

Skulderhøy modell med delte ben


- Forsterket rygg og ben
- Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Forsterket rygg gir ekstra støtte

Badeseil er en skulderhøy modell med delte ben og forsterket rygg og ben. Det er utformet for å gi pasienten ekstra støtte i ryggen, noe som gjør badeseilet til en god løsning for pasienter med dårlig kroppsstabilitet.

Badeseil kan brukes i de fleste løftesituasjoner og passer de fleste pasienter, men er best egnet for pasienter med dårlig kroppsstabilitet. Badeseilet er laget i hurtigtørkende polyester nett som gjør det egnet for bruk under bading og dusjing.

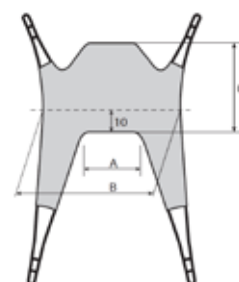

Størrelse:

Materiale: 
Polyester nett

Art.navn	Art.nr (polyester nett)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Badeseil, JS	25035-JS	Lilla	90	540	520	250 kg
Badeseil, JM	25035-JM	Grå	150	600	580	250 kg
Badeseil, S	25035-S	Rød	300	90	63	250 kg
Badeseil, M	25035-M	Gul	360	90	63	250 kg
Badeseil, L	25035-L	Grønn	420	100	63	250 kg
Badeseil, XL	25035-XL	Blå	470	107	63	250 kg


Helkroppsseil Nett

Høy ryggmodell med delte ben


- Ingen forsterkninger, håndtak eller polstring
- Passer for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Tillbakelelt sittestilling.

Helkroppsseil Nett er et komfortabel løfteseil uten forsterkninger, håndtak eller polstring i ryggen. Seilet gir god støtte for hele kroppen, kan brukes i de fleste løftesituasjoner, og passer de fleste pasienter.

Helkroppsseil Nett brukes i vaske- og badesituasjoner. Polyester nett løfteseil kan bli liggende i rullestol eller seng når forflytningen er fullført.

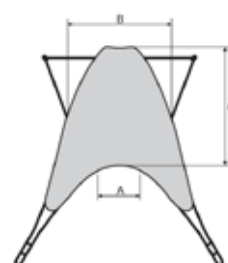

Størrelse: ● ● ● ●

Materiale: 
Polyester nett

Art.navn	Art.nr [polyester nett]	Fargekode	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Vektkapasitet
Helkroppsseil nett, S	25005-S	Rød	280	660	880	250 kg
Helkroppsseil nett, M	25005-M	Gul	310	790	940	250 kg
Helkroppsseil nett, L	25005-L	Grønn	350	920	990	250 kg
Helkroppsseil nett, XL	25005-XL	Blå	380	1060	1045	250 kg


Komfortseil Lav

Skulderhøy modell uten delte ben

- Ingen forsterkninger, håndtak eller polstring
- Eget for pasienter med smerter
- Tillpasser seg lett pasientens kropp

Komfortseil Lav er et mykt seil uten forsterkninger, håndtak eller polstring som lett tilpasser seg pasientens kropp. Løfteseilet er utformet for å gi pasienten god komfort og en følelse av trygghet.

Komfortseil Lav er et sitteseil uten delte ben, som gir en jevn vektfordeling for å redusere trykk. Komfortseilet tilbys i Trevira materiale, og kan bli liggende i rullestol eller stol når forflytningen er fullført. Seilet påføres mens pasienten ligger.

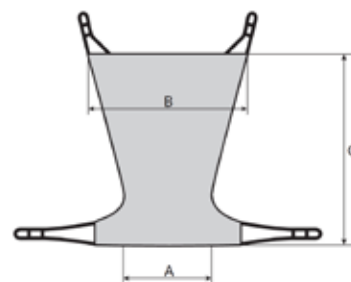

Størrelse: ● ● ● ● ●

Materiale: 
Trevira

Art. navn	Art.nr (Trevira)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Komfortseil Lav, JM	25060-JM	Grå	360	750	900	250 kg
Komfortseil Lav, S	25060-S	Rød	360	750	1000	250 kg
Komfortseil Lav, M	25060-M	Gul	480	850	1100	250 kg
Komfortseil Lav, L	25060-L	Grønn	560	950	1150	250 kg
Komfortseil Lav, XL	25060-XL	Blå	640	1050	1200	250 kg

Komfortseil Høy


Høy rygg uten delte ben

- Ekstra nakkestøtte
- Egnet for pasienter med smerter
- Tilpasser seg pasientens kropp



Komfortseil Høy er et mykt seil uten forsterkninger, håndtak eller polstring og tilpasser seg pasientens kropp. Det er utformet for å gi pasienten komfort og en følelse av trygghet. Komfort seil er et "sitteseil" uten delte ben, som distribuerer vekt jevnt for å redusere trykk.

Komfortseil Høy tilbys i Trevira og kan etterlates i stol eller rullestol når overføringen er fullført. Seilet er egnet for pasienter med behov for ekstra hodestøtte. Seilet påføres mens pasienten ligger.

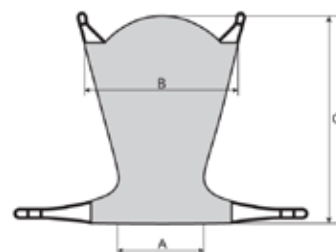

Størrelse: ● ● ● ●

Materiale: 
Trevira

Art.navn	Art.nr (Trevira)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Komfortseil Høy, S	25065-S	Rød	360	750	1210	250 kg
Komfortseil Høy, M	25065-M	Gul	480	850	1330	250 kg
Komfortseil Høy, L	25065-L	Grønn	560	950	1390	250 kg
Komfortseil Høy, XL	25065-XL	Blå	640	1050	1450	250 kg

Universalseil

Medium ryggghøyde med delte ben


- Tilgjengelig både som engangs- og gjenbruks seil
- Løftekapasitet 318 kg

Universal seilet har medium høy rygg og delte ben. Seilet er enkelt å tilpasse og har fleksibilitet for korrekt posisjonering av ben og overkropp for pasienter med liten kontroll i overkropp.

Universalseilet leveres både som engangs- og gjenbruks modell. I motsetning til noen gjenbruks seil, kan denne modellen bli liggende under pasienten da de transportere bort væsker og bistår med infeksjonskontroll.



Universalseil med klips

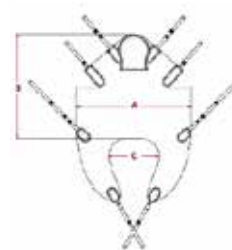

Størrelse: ● ● ● ●

Materiale:



Art.navn	Art.nr. gjenbruks seil, 4 stropper, klips (polyester)	Art.nr. engangs seil, 4 stropper, klips (bomull)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Universalseil S	NSB-103C-S	NSB-104C-S	775 mm	838 mm	304 mm	318 kg
Universalseil M	NSB-103C-M	NSB-104C-M	972 mm	883 mm	425 mm	318 kg
Universalseil L	NSB-103C-L	NSB-104C-L	1143 mm	1029 mm	533 mm	318 kg
Universalseil XL	NSB-103C-XL	NSB-104C-XL	1334 mm	1143 mm	679 mm	318 kg


Pluslineseil

Modell med høy rygg og delte ben


- Forsterket hodestøtte
- Utviklet for tyngre pasienter
- Forsterket trykkfordelende ben

Human Care løfteseil i Pluslineseieren er designet for å løfte tyngre pasienter. Seilene har høy brukervekt og generøse størrelser. Highback Pluslineseilet er en modell med høy rygg som gir god støtte for hele kroppen. Løfteseilet har trykkfordelende forsterkede ben og forsterket hodestøtte.

Pluslineseil gir en tilbakeleant sittestilling som fører til en mer balansert vektfordeling. Løftestropper ved lårene kan brukes på 2, 3 eller 4-punkts oppheng. 4-punkts oppheng er den beste løsningen for dette seilet, ettersom det vil gi tyngre pasienter en mer utstrakt sittestilling.

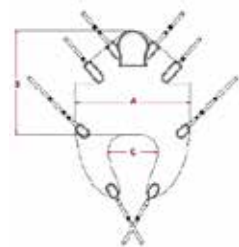

Størrelse: ● ● ● ●

Materiale: 
Polyester og polyester nett

Art.navn	Art.nr	Fargekode	Materiale	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Pluslineseil, S	25120-S	Rød	Stoff: Polyester nett, Polyester, stropper: Polyester	775	838	304	318 kg
Pluslineseil, M	25120-M	Gul	Stoff: Polyester nett, Polyester, stropper: Polyester	972	838	425	318 kg
Pluslineseil, L	25120-L	Grønn	Stoff: Polyester nett, Polyester, stropper: Polyester	1143	1029	533	318 kg
Pluslineseil, XL	25120-XL	Blå	Stoff: Polyester nett, Polyester, stropper: Polyester	1334	1143	679	318 kg


Hygieneseil

Lav modell med delte ben

- Forsterket rygg
- Egnet for pasienter med god kropp- og nakkestabilitet
- Polstret under armene for ekstra komfort

Hygieneseil er en lav modell med delte ben. Seilet har forsterket rygg for god støtte, og polstring under armene for ekstra komfort. Den brede delingen av ben gjør dette seilet anvendelig for rask og enkel av- og påkledning ved toalettbesøk eller bading.

Hygieneseil oppreiste sittestilling gjør forflytning til og fra toaletter enklere, og er godt egnet for pasienter med god kropp- og nakkestabilitet. Midjebelte anbefales for pasienter med lav kroppsstabilitet. Hygieneseilet er tilgjengelig i polyester og polyester nett.

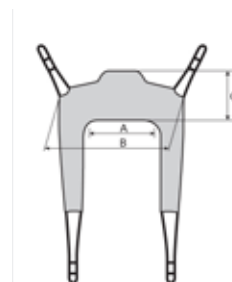

Størrelse: ● ● ● ● ● ●

Materiale:  Polyester  Polyester nett

Art. navn	Art.nr (Polyester)	Art.nr (Polyester nett)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Hygieneseil, JS	25080-JS	-	Lilla	280	620	220	250 kg
Hygieneseil, JM	25080-JM	25085-JM	Grå	300	690	260	250 kg
Hygieneseil, S	25080-S	25085-S	Rød	350	750	300	250 kg
Hygieneseil, M	25080-M	25085-M	Gul	500	870	330	250 kg
Hygieneseil, L	25080-L	25085-L	Grønn	550	940	330	250 kg
Hygieneseil, XL	25080-XL	25085-XL	Blå	610	1000	370	250 kg


Hygieneseil Høy

Høy modell med delte ben

- Forsterket rygg
- Egnet for pasienter med lav kroppsstabilitet
- Juserbar nakkestøtte som gir ekstra god støtte

Hygieneseil Høy er en høy modell med delte ben. Seilet har forsterket rygg for god støtte, og polstring under armene for ekstra komfort. Seilet har en polstret justerbar nakkestøtte for ekstra stabilitet. Den brede delingen av bena gjør at påføring av seilet går raskt og enkelt, og gjør av- og påkledning ved toalettbesøk eller bading enkelt.

Seilets oppreiste sittestilling gjør overføring til og fra toaletter enklere, og er egnet for pasienter med god kropp- og nakkestabilitet. Midjebelte anbefales for pasienter med lav kroppsstabilitet. Hygieneseilet er tilgjengelig i hurtigtørkende nettmateriale.

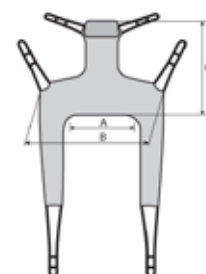

Størrelse:

Materiale: 
Polyester nett

Art.navn	Art.nr (Polyester nett)	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Vektkapasitet
Hygieneseil Høy, JM	25090-JM	Grå	260	750	700	250 kg
Hygieneseil Høy, S	25090-S	Rød	350	750	730	250 kg
Hygieneseil Høy, M	25090-M	Gul	500	870	800	250 kg
Hygieneseil Høy, L	25090-L	Grønn	550	940	880	250 kg
Hygieneseil Høy, XL	25090-XL	Blå	590	1050	990	250 kg

Posisjoningsseil

Seil for reposisjonering og vending

- Enkel og trygg reposisjonering
- Vektkapasitet 318 kg



Posisjoningsseil for horisontale forflytninger eller vende pasienten i sengen. Gir mulighet for reposisjonering, vende eller forflytte pasient fra seng til bære eller seng til seng.

Posisjoningsseilet gir en trygg og komfortabel forflytning for pasienten samtidig som det letter arbeid for helsepersonell. Det pustende materialet gjør at seilet kan bli liggende under pasienten.

Modell	Art.nr	Bredde	Lengde	Vektkapasitet
Standard, gjenbruk og pustende	NSB-401-S	1041 mm	1702 mm	318 kg

Reposisjoningsseil

Laken for å snu og reposisjonere

- Både glidelaken og løft/overføringslaken
- Kan brukes som laken i sengen
- Forenkler forflytning og reposisjonering



Reposisjoningsseil er et allsidig produkt utformet for å gi hel- eller delvis støtte til kroppen ved reposisjonering eller forflytning.

Reposisjoningsseil tilbyr et bredt spekter av løfte- og posisjoningsmuligheter: sideposisjonering, vending, justering av sittestilling, trykkfordeling av ben og heler og løft fra gulv. Seilet består av et reposisjoningslaken og et glidelaken. Reposisjoningsseilet kan ligge under pasienten i sengen.

Art. nr.	Materiale	Høyde	Lengde
50791	35% bomull, 65% polyester	2200 mm	2200 mm
Bredde	Vektkapasitet	Vaskeinstruksjon	
2400 mm	220 kg	90 °C Ikke benytt blekemidler eller tøymykner. Tørketrommel medium varme.	

Posisjoneringsseil ventilert materiale

Seil for reposisjonering og vending

- Pustende og ventilerende materiale
- Vekt kapasitet på 454 kg
- Det pustende materialet gjør at seilet kan bli liggende under pasienten



Posisjoneringsseil med ventilerende materiale benyttes til horisontale forflytninger. Seilet gir en trygg og komfortabel forflytning.

Materialet er skånsomt mot pasientens hud og gir god ventilasjon og pusteevne. Seilet er designet for å transportere fuktighet bort fra pasienten.

Art.navn	Art. nr	Bredde	Lengde	Vektkapasitet
Posisjoneringsseil pustende materiale	NSB-401-ST	1065 mm	1980 mm	454 kg
Bariatrisk posisjoneringsseil pustende materiale L	NSB-410-ST-L	1320mm	2080mm	454 kg
Bariatrisk posisjoneringsseil pustende materiale XL	NSB-410-ST-XL	1470 mm	2080mm	454 kg

8 stropper, 454 kg. Materiale: Polyester/nonwoven

Amputasjonsseil

Lav modell med delte ben

- Forsterket rygg
- Passer for pasienter med amputerte ben
- Lett tilbakeleent sittestilling



Amputasjonsseil er designet for trygg og sikker overføring av pasienter med to- og /eller ensidig benamputasjon. Seilet er også egnet for pasienter med økt tendens til å gli ut av andre typer seil, eller pasienter med hofteproblemer. Bendelene er foldet over hverandre under lårene for å skape en smal åpning, Dersom det er mer hensiktsmessig kan bendelene også påføres mellom bena.

Amputasjonsseil kan brukes sammen med midjebelte fra Human Care. Løfteseilet er produsert i lavfriksjons polyester som gir en rask og enkel påføring.

Art.navn	Art. nr	Fargekode	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Junior M	25040-JM	Grå	200	670	590
S	25040-S	Rød	260	750	590
M	25040-M	Gul	340	850	590
L	25040-L	Grønn	440	950	590
XL	25040-XL	Blå	500	1050	590

Vektkapasitet: 250 kg

Multiseil

Seil for gåtrening / rehab

- Et perfekt seil for gåtrening og rehab
- Egnert for pasienter med noe grad av kroppsstabilitet
- Kan brukes ved av- og påkledning



Multiseil er et allsidig produkt som kan brukes i mange situasjoner. Sammen med et bredt spekter av tilbehør gir multiseilet støtte ved stå- gå- og balansetrening, toalettbesøk eller av- og påkledning.

Multiseil passer for pasienter med noe kroppsstabilitet. For ekstra støtte kan seilet brukes sammen med hoftebelte.



Størrelse: ● ● ● ●

Materiale:  Polyester

Art. navn	Art.nr (Polyester)	Fargekode	Vektkapasitet
Multiseil, S	25105-S	Rød	150kg
Multiseil, M	25105-M	Gul	150kg
Multiseil, L	25105-L	Grønn	150kg
Multiseil, XL	25105-XL	Blå	150kg

Aktivitetsseil

Gåtrening / rehabseil

- Støtte for gå, stå og balansetrening
- Passer for barn
- Ekstra støtte til nakke



Aktivitetsseil gjør det mulig for barn å stå oppreist og å bevege seg, balansere og gå, avhengig av deres individuelle evner. Seilet gir støtte og trygghet som gir barnet muligheten til fritt å bevege seg.

Aktivitetsseil er laget i polyester nett, og har nakkestøtte og elastiske stropper på begge sider for maksimal fleksibilitet. Seilet påføres mens barnet ligger.

Art.navn	Art.nr	Vektkapasitet
Aktivitetsseil, JS	25100-JS	100 kg
Aktivitetsseil, JM	25100-JM	100 kg
Aktivitetsseil, JL	25100-JL	100 kg

Skulderstøttene er inkludert.

Ryggbelte

Brukes ved oppreisning

- Gir et ergonomisk bevegelsesmønster
- Brukervekt opp til 250 kg
- Løftestropper i ulike lengder for å passe de fleste pasienter



Ryggbelte brukes sammen med en oppreisningsløfter for å trygt kunne heve eller senke pasienten fra toalett, seng eller stol. Seilet støtter den sentrale delen av ryggen og har myk polstring for optimal komfort.

Selen er anbefalt for pasienter med dårlig stabilitet og som har vansker med å stå oppreist. Seilet er produsert i polyester og er egnet for brukere opp til 250 kg.

Art.navn	Art.nr	Vektkapasitet
Ryggbelteseil, S, gjenbruk	25130-S	250 kg.
Ryggbelteseil, M, gjenbruk	25130-M	250 kg.
Ryggbelteseil, L, gjenbruk	25130-L	250 kg.
Ryggbelteseil, XL, gjenbruk	25130-XL	250 kg.
Ryggbelteseil, S, engangs seil	NSB-501-S	250 kg.
Ryggbelteseil, M, engangs seil	NSB-501-M	250 kg.
Ryggbelteseil, L, engangs seil	NSB-501-L	250 kg.

Oversikt seil

	Standardseil	Silhuett seil (skall seil)	Siteseil	Badeseil	Helkroppseil	Helkroppsseil Nett	Komfortseil Lav	Komfortseil Høy	Universalseil	Pluslineseil	Hygieneseil	Hygieneseil Høy	Reposisjoneringsseil Butterfly	Posisjoneringsseil	Posisjoneringsseil, ventilert	Amputasjonsseil	Aktivitetseil	Mutiseil	Ruggbelte
Size																			
Junior S	x	x	x	x							x						x		
Junior M	x	x	x	x			x				x	x				x	x		
Junior L																	x		
S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x		x	x
M	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x		x	x
L	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x		x	x
XL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x		x	x
XXL					x														
XXXL					x														
Bariatrisk									x	x									
Materiale																			
Polyester	x		x		x				x	x	x		x	x		x		x	x
Polyester nett	x	x		x		x				x	x	x					x		
Trevira	x	x					x	x											
Bomull - Engangs seil									x					x					
Polyester/nonwoven															x				
Type seil																			
Med hodestotte		x			x	x		x	x	x		x							
Delte ben	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x				x			
Forsterkede ben			x		x				x	x	x	x				x			
Forsterket rygg			x	x					x	x	x					x		x	
Forsterket hodestotte					x				x	x									
Kan brukes med midjebelte			x								x	x				x			
Oppheng																			
2-punkt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	
3-punkt	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x				x		x	
4-punkt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x				
Løftesituasjoner																			
Fra sittende posisjon	x	x	x	x	x	x	x ¹	x ¹	x	x	x	x				x			x
Fra seng	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x			
Fra gulv	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				x			
Gåtrening																	x	x	
Reposisjonering													x	x	x				
Hygiene				x							x	x							

1 Ikke mulig å påføre sittende

Tilbehør seil

Nakkepute for seil

Pute for ekstra støtte og komfort, brukes som et supplement til seil med lav rygg og multiseil. Art. nr: 25150



Midjebelte

Brukes for ekstra støtte ved forflytning. Elastisk, festes med borrelås. Art. nr:

40 cm barn: 25145-40B
50 cm barn: 25145-50B
60 cm barn: 25145-60B
60 cm: 25145-60
70 cm: 25145-70
80 cm: 25145-80
90 cm: 25145-90
110 cm: 25145-110
120 cm: 25145-120



Midjebelte med spenne

Brukes for ekstra støtte ved forflytning. Elastisk, festes med spenne. Art.nr:

40 cm, barn: 25146-40B
50 cm, barn: 25146-50B
60 cm, barn: 25146-60B
60 cm: 25146-60
70 cm: 25146-70
80 cm: 25146-80
90 cm: 25146-90
100 cm: 25146-100
110 cm: 25146-110
120 cm: 25146-120
130 cm: 25146-130



Forlengerstropper

Stropper som forlenger seilets løftestropper ved endring av sittestilling. Kan også brukes for å holde benene samlet.

Art. nr:

10 cm: 21180-10
15 cm: 21180-15
20 cm: 21180-20
25 cm: 21180-25
35 cm: 21180-35



Hoftebelte

Brukes som et supplement til multiseil. Hjelper pasienten oppreisning og gir et jevnere trykk og trykkfordeling på hoftene. Art. Nr: 25107-L(L), 25107-M (M), 25107-S (S)



Benmuffe

Myk benmuffe utført i syntetisk saueskinn for brukere med sensitiv hud eller smerter. Art. nr: 21146-S (par S), 21146-M (par M), 21146-L (par L)



Forsterkede benstøtter til seil

Gir ekstra støtte til ben for bedre komfort, og utjevnet trykk. Art. nr: 25102



Båre

Båren er lett, bærbar og enkel å bruke. Maks vekt: 200 kg. Mål (L x B x H): 2040 mm x 740 mm x 40 mm. Produktvekt: 12 kg. Art nr: 50700. Laken til båre selges separat. Art. Nr. 50730



Vekt

Medisinsk vekt godkjent for å veie pasienter opp til 320 kg. Rask og enkel å bruke, og i overensstemmelse med gjeldende ISO og EN standarder. Fungerer sammen med alle Human Care løftere. Art. nr: 50348





Distributør:



NHD AS

Gigstadsvei 22, 3511 Hønefoss
Telefon: +47 99 31 61 00
E-post: post@nhd.as
Hjemmeside: www.nhd.as



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.

AUSTRALIA

Unit 9, 271 Wells Road
Chelsea Heights, Victoria 3196
Phone:- +61 3 8773 1111
Fax:- +61 3 9773 4008

Email: info.au@humancaregroup.com

CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone:- 613.723.6734
Fax:- 613.723.1058

Email: info.ca@humancaregroup.com

SWEDEN

Årstaängsvägen 21C
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10

Email: info.se@humancaregroup.com

UNITED STATES

4210 S. Industrial Drive, Suite 160
Austin, TX 78744
Phone:- 512.476.7199
Fax:- 512.476.7190

Email: info.us@humancaregroup.com