



# Rogue TTL og Rogue

Aktiv rullestoler



# Rogue TTL / Rogue

Aktiv rullestoler

## Resist conformity. Go Rogue

The Rogue experience introduserer en enestående innovativ design som gir deg den høyeste graden av respons. Du vil bli imponert av den optimale responsen og den presisjonen som oppleves hver gang du svinger eller kjører. Rogue møter dine behov og ambisjoner ved sin høye kvalitet og presise tilpasningsmuligheter.

Med en vekt på kun 4,8 kg runder Rogue enhver sving og kjører lange distanser med minimal bruk av kraft.



Rogue TTL  
Bildet avviker fra  
standard konfigurasjon

### Ultralett

Ekstremt stiv og lett ramme med optimal respons. Transportvekt kun 4,81 kg\*.

\*Oppgitt uten hjul og klesbeskytter

### Smarte løsninger

Unike tilpasningsmuligheter integrert i rullestolen

### Skreddersydd

Bestilles etter brukerens mål og behov for støtte, kjøreegenskaper og komfort. Blant annet muligheter for ulik vinkel og bredde i front av ramme.

### Passer "alle"

Setebredde fra 30,5 - 51 cm.  
Setedybde 35,5 - 51 cm.  
Maks brukervekt 125 kg.

### Enkel håndtering

Rammekonstruksjon som tar minimalt med plass.



Det tas forbehold om trykkfeil og endringer



# Rogue - presisjon i alle ledd



## Kjøreegenskaper i toppklasse!

Ramme i minimalistisk design. Produsert i aluminium (7000-serien). Utviklet for å være så lett, stiv og vibrasjonsdempende som overhodet mulig.

## Lett å transportere

Ikke bare lett i vekt (transportvekt 4,81 kg), Rammens enkle design og dobbel låsemekanisme av stolryggen gjør det svært enkelt å transportere rullestolen, f.eks. inn- og ut av bil.



## RP Tuning

Unik patentert mekanisme for enkel justering av svinghjuls-gaffel (RP Tuning). Perfekt loddlinje uansett setevinkel. Solid konstruksjon og stilrent utseende.

## Individuell tilpasning

Rogue har alle justeringsmuligheter uten at det går på bekostning av vekt og design. Dette er mulig med bruk av lette materialer, innovative og skreddesydde løsninger.



## Rammevinkel og innsving

Rogue har mulighet for ulike rammevinkler (fra 70-90 grader), og gradert innsving i fronten. Dette gir en tight og presis kjørestilling.



# Rogue TTL

Prisforhandlet i post 1

*Rogue er like unik som deg.*

*Rogue TTL er en ultra lett rullestol med minimalistisk design som lages til din individuelle passform. Stolen er ideell å flytte inn og ut av bil. Rogue TTL har flere valgmuligheter når det gjelder design og vinkler på rammen og et bredt spekter av lett vekt tilbehør for å tilpasses dine personlige behov for sitting, kjøring og forflytning.*

## Standard konfigurasjon:

- Velcroygg med overdrag
- Dobbelt låsbar rygg
- Drivhjul, 24", høytrykk (Kenda 1")
- Drivringer, aluminium, eloksert
- Cambring 4grader
- Brems, sakselås kompakt, lettvekt
- Rammevinkel front 80grader
- Svinghjul, poly, 4"
- Fotplate, lettvekt rørmmodell
- Maks brukervekt 125 kg
- Farge, velg mellom 20 forskjellige farger, uten tillegg i prisen.



HMS art. nr.

221384

Art. nr.

13700000

# Rogue

Prisforhandlet i post 2

*Rogue er like unik som deg.*

*Rogue er en meget lett rullestol med minimalistisk design som lages til din individuelle passform. Rogue har flere valgmuligheter når det gjelder design og vinkler på rammen og et bredt spekter av lett vekt tilbehør for å tilpasses dine personlige behov for sitting, kjøring og forflytning. Stolen er lett å flytte inn og ut av bil. Stolens nedfellbare kjørehåndtak er ikke i veien når du kjører selv men finnes enkelt tilgjengelig ved behov.*

## Standard konfigurasjon:

- Kjørehåndtak, nedfellbare
- Velcroygg med overdrag
- Dobbelt låsbar rygg
- Drivhjul, 24", høytrykk (Kenda 1" )
- Drivringer, aluminium, eloksert
- Cambring 4grader
- Brems, std skyvmodell
- Rammevinkel front 80grader
- Svinghjul, poly, 4"
- Fotplate, lettvekt rørmmodell
- Maks brukervekt 125 kg
- Farge, velg mellom 20 forskjellige farger, uten tillegg i prisen



HMS art. nr.

221383

Art. nr.

13710000

# Rogue - Enkel å tilpasse



## Trinnløs justering

Enkel trinnløs justering av tyngdepunktet fra 0-11 cm. Amputasjonsstilling 0-4 cm.



## Ryggen

Ryggvinkelen justeres enkelt ved å flytte to skruer. Rogue har også en unik hvilestilling av seteryggen som utløses enkelt med utløserwiren.



## Setehøyde

Justering av setehøyde bak (setevinkel) i intervaller på 1,25 cm fra 32\*-51 cm.  
\*Avhengig av hjulstørrelse.



## Gaffeljustering

Gaffelens vinkeljustering justeres enkelt ved å løsne og stramme to skruer. Enklere blir det ikke!



## Sakselås

Lavprofil sakselås er standard på Rogue TTL. Lett i vekt, enkel i bruk og er ikke i veien hverken ved kjøring eller forflytning. Justeres trinnløst på seteramme.



## Transportbeslag

Krasjtestet og godkjent for bruk i bil med påmontert transportbeslag iht.. ISO 7176-19. Transportbeslag kan ikke ettermonteres. Må bestilles ved ny rullestol.



## Mål og vekt

### Rogue/Rogue TTL

Setebredde	30,5-50,5 cm (m/2,5 cm intervaller)
Setedybde	35,5-51 cm (m/2,5 cm intervaller)
Setehøyde foran*	35-53,5 cm (m/2,5 cm intervaller)
Setehøyde bak	30,5-52 cm
Legglengde	20-49,5 cm (m/2,5 cm intervaller)
Ryggghøyde	28,5-51 cm
Ryggvinkel	-12° - + 9°
Camber	0°, 2°, 4°, 6°, 8°
Maks brukervekt	125 kg
Transportvekt	4,8 kg (TTL) setemål 40,5 x 40,5cm
(uten drivhjul og klesbeskytter)	5,3 (Rogue) setemål 40,5 x 40,5cm

### Blank finish



### Matt finish



Velg mellom 20 ulike farger - uten pristillegg

Krasjtestet og godkjent i henhold til kravene i ISO 7176-19



## Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se [www.etac.no](http://www.etac.no).



### Kjørehåndtak

Modell	Beskrivelse
Rett	
Kort	
Nedfellbart	Standard post 2 Avbildet modell.



### Klesbeskytter, justerbar

Modell	Beskrivelse
Lettvekt	Justerbar i dybden.
Buet	Justerbar i dybde. Buet over hjulet.



### Armlen

Modell	Beskrivelse
Polstret m/klesbeskytter. Lang	Høydejusterbar 21,5-34 cm. Avtagbar.
Polstret m/klesbeskytter. Kort	Høydejusterbar 19-29 cm. Avtagbar.
Utsvingbar rørmodell	
Utsvingbar rørmodell m/klesbeskytter	Avbildet modell
Armlenepolster	Standard
Armlenepolster, kort	Fossefall
Armlenepolster lang.	Fossefall



### Bremser

Beskrivelse	Beskrivelse
Kneledd skyv	Skyv for å låse. Standard post 2.
Kneledd, trekk	Trekk for å låse.
Forlengerstag til kneledd	Skyv og trekk. Brukes ved nedsatt kraft.
Kneledd skyv kort	m/kort, tykkere håndtak
Saksebrems under setet	Håndtak under setet.
Saksebrems lavprofil	Avbildet modell. Standard post 1.
Saksebrems kort	Med kort vandring



### Ryggør

Modell	Beskrivelse
Fast	Oppgi høyde
Høydejusterbar	Kort 28-35 cm Medium 33-43 cm Lang 43-51 cm



### Ryggbøyle

Modell	Beskrivelse
Standard	
Høydejusterbar	



### Utløserwire for rygg

Modell	Beskrivelse
	Fås i ulike farger



### Krykkeholder

Modell	Beskrivelse
Krykkeholder	Monteres bak på rullestolen



### Svinghjulsgaffel

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Standard		
Ensidig innfesting		Avbildet modell
Frog legs		Dynamisk m/støtdemping



### Leggbånd

Modell	Beskrivelse
Standard	Velcrobånd. Justerbart.



## Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se [www.etac.no](http://www.etac.no).



### Drivhjul

Modell	Beskrivelse
Standard	Post 1 og post 2. 24", 25", 26"
Superlight	Lettvektshjul. 24", 25".
Spinergy Spox	Meget lette og stive. 24", 25", 26". Kan fås med fargede eiker.
Spinergy LX	Ekstremt lette og stive. 24", 25", 26". Kan fås med fargede eiker.
Mag m/enhåndsdrift	4 store eiker. 24".



### Svinghjul

Modell	Beskrivelse
Rollerblade	3", 4".
Poly (std )	4", 5".
Poly aluminiums-felg 1"	4", 5". Avbildet modell
Poly 1"	4", 5", 6"
Softroll aluminium 1,5"	4", 5", 6"
Luft 1 <sup>1/4</sup> "	3", 4", 5", 6"



### Drivringer

Modell	Beskrivelse
Aluminium	Std. post 1 og 2. Avbildet. 24", 25", 26"
Superlett aluminium	Sparer nesten 0.5 kg pr. par. 24", 25"
Plastbelagt	For bedre grep. 24", 25", 26".
Spinergy Flex driving	For Spinergy hjul. Integret driving. 24", 25"
Natural Fit	Integret driving for bedre grep. Finnes i fire utgaver. 24", 25", 26".
Mikrogrep	Tynnere driving med silikontape. For bedre grep under fuktige forhold. 24" 25", 26"



### Quick Release

Modell	Beskrivelse
Standard	Avbildet modell
Tetra	For nedsatt håndfunksjon



### Eikebeskytter

Modell	Beskrivelse
Standard	Leveres i sort eller hvit



### Dekk

Modell	Beskrivelse
Schwalbe Right Run	Std. post 1 og 2. 1". Avbildet modell.
Sentinel Solid	Kompakt. 1".
Schwalbe Speedrun	Lettvektssdekk. 1"
Schwalbe Marathon Plus Evo	Lettvektssdekk. M/gelinnlegg mot punktering. 1".
Euro Trek Knobby	Høytrykksdekk med grovere mønster for bedre grep. 1 <sup>3/8</sup> "
Kenda Mountain Nevegal	Kraftig grovmønstret offroad dekk for ulendt terreng. 2".



### Verktøysett

Modell	Beskrivelse
Standard	Leveres standard til alle nye stoler



### Oppbevaring

Modell	Beskrivelse
Ryggsekk	For montering på rullestol.
Veske	Avtagbar. Festes under setet. 15x20 cm.
Bag	Avtagbar. Festes under setet. B31, H10, D20 cm.



### Ki Mobility

Rogue fra Ki Mobility er et nytt bekjentskap i det norske markedet. Ki Mobility ble startet i 2006, og har i løpet av disse årene etablert seg blant de største produsentene av manuelle rullestoler i USA og flere andre land. Ki kommer av det greske ordet som betyr "Sette i bevegelse".

Ki Mobility leverer et bredt spekter av rullestoler til både barn og voksne. Noe av grunnen til deres suksess er deres innovative tekniske løsninger og moderne design.

Rogue ble utviklet i 2012 og ble umiddelbart en stor suksess i USA. Dette er en high-end fastrammestol som har klart å kombinere svært lav vekt og enkel design med store muligheter for tilpasning og ulikt tilbehør.

Hver enkelt rullestol bestilles på mål etter brukerens behov. Dette gir skreddersydde løsninger i forhold til sittestilling, kjøreegenskaper og andre viktige funksjoner viktig i en rullestolbrukers hverdag.

*Ta kontakt med din lokale selger for  
demonstrasjon eller utprøving*

*"Etac ønsker at alle mennesker skal ha lik mulighet og frihet  
til å skape sin egen hverdag, uavhengig av fysiske forutsetninger."*