



Trykkfordeling basert på statisk luft

Invacare **Carebed** gir effektiv trykkfordeling både ved forebygging og behandling av trykksår. **Carebed** kan brukes til pasienter med middels risiko for å utvikle trykksår.



Madrasen har individuell tilpasning, og er svært enkel i bruk, noe som sikrer en korrekt og enkel håndtering for pleiepersonalet. **Carebed** følger sengens innstillinger og er meget stabil og komfortabel.

Trykkfordeling med statisk luft

Det er mange faktorer som må tas i betraktning når det gjelder utvikling av trykksår. En av de avgjørende faktorene er mottrykket underlaget gir mot kroppen over tid. Vanlige madrasser gir ofte et for høyt mottrykk. Ved immobilitet kan dette føre til at blodtilførselen stopper opp på utsatte steder, slik at vevet dør og trykksår oppstår. For å forebygge trykksår, må mottrykket reduseres.

Optimal funksjon

Carebed består av mer enn 300 separate celler fylt med luft. Luften transporteres og fordeles mellom cellene, og tilpasser seg pasientens form og vekt. Madrassen er meget enkel i bruk. Luft pumpes inn mens pasienten ligger på madrassen. Etter ca. ett minutt vil det være korrekt luftmengde i madrassen og ventilen lukker seg. Det er derfor umulig å fylle for mye luft i madrassen. **Carebed** er en anerkjent og innarbeidet madrass med gode kliniske resultater.



Produktegenskaper



Caresit

Konseptet med luftceller finnes også i seteputen **Caresit**. Kan f. eks. brukes i rullestol og i bil.



Pumpe

Den elektriske pumpen sørger for at madrassen fylles med rett mengde luft.



Vedlikeholdspumpe

Pumpen etterfyller madrassen automatisk (tilgjengelig som tilbehør).




Andre anvendelsesområder

Konseptet brukes også til barne- og operasjonsmadrasser.

Invacare **Carebed** reduserer mottrykket ved at den lar pasienten synke godt ned i madrassen. Trykket fordeles over en større flate og blodtilførselen opprettholdes.

Tekniske data

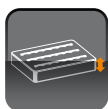

	900 mm	1900 mm	100 mm	3,8 kg	Maks. brukervekt: 150 kg
Størrelse Std	900 mm	1900 mm	100 mm	3,8 kg	150 kg
Operasjonsmadrass	480 mm	1030/1700/2000 mm	100 mm	1,3 - 2,3 kg	150 kg
Barnemadrass	700 mm	1600 mm	100 mm		150 kg
Pumpe				1,6 kg	150 kg
Caresit	4 størrelser, fra 400 - 450 mm	4 størrelser, fra 400 - 500 mm	60 mm	0,3 - 0,8 kg	150 kg

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykktidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Carebed - NO - 02/2016

Art. nr.	Overmadrass, statisk luft	Madrassmål cm	Produktbeskrivelse
650MFE	Carebed	90x190x10	Overmadrass, statisk luft
652MFE	Carebed	90x200x10	Overmadrass, statisk luft
700MFE	Pumpe Carebed		
1495934	Vedlikeholdspumpe Carebed		