

The logo for APEX, featuring the word "APEX" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a red dot above it. The background of the entire page is a photograph of a large, curved, ribbed structure, possibly a car's roof or a large piece of equipment, with a dark blue tarp in the foreground. The overall color scheme is teal and blue.

**APEX**

medeQGroup

**Pro-CARE Auto**

# Pro-CARE Auto

Pro-CARE Auto er et selvinnstillende system som automatisk tilpasser seg de optimale trykkinnstillinger for pasienten. Dette minimerer håndteringen, samtidig som pasientsikkerheten øker.

Konstruert med "Cell-on-Cell" teknologi, som betyr økt sikkerhet ved strømbrydd og transport, da den nedre delen av hver luft-celle alltid er fylt med luft og fungerer som en bunnmadrass

Produktet er egnet for bruk i alle typer omsorgsmiljøer, forebygging og behandling av sårkategori 4.



## Makstrykk/pleiestilling

Kan anvendes for statisk trykk, pleie- og forflytningsfunksjon. Går automatisk tilbake til trykkavlastende stilling etter 20 min.

## Trykkavlastende stilling

Systemet kan stilles inn på vekseltrykkbehandling med en syklus på 10 minutter.

## Programvalg (Systemet jobber selvinnstilt/automatisk med valgte program)



### Statisk stilling

Gir en stabil overflate med lavere trykk enn det vekslende leie. Egnet til hjelp ved innsovning, går automatisk til trykkavlastende stilling etter 20 minutter.



### Sittefunksjon + Vekslende leie

Gir mulighet for økt støtte og stabilitet ved sittende stilling.



### Sittefunksjon + Statisk leie

Gir mulighet for økt støtte og stabilitet ved sittende stilling. Går automatisk til trykkavlastende stilling etter 20 minutter



### Integrert helavlastning

De fem nederste cellene i madrassen kan individuelt kobles av, avhengig av pasientens lengde, for helt å eliminere trykket på hælene.


## Spesifikasjoner

	Modell	Pro-CARE Auto
Pumpe	Størrelse	29,1 x20x11,7 cm
	Vekt	2,2 kg
	Matriale	Brannhemmende ABS
	Spenning	AC 220-240V, 50Hz; AC 120V/ 60Hz
	Intervall/syklus	10 minutter
Trykkavlastnings- Madrass	Størrelse	200 x 80/85/90/105/120 x 20 cm
	Celler	20 x 20 cm høye celler
	Vekt	7-9 kg (avhengig av størrelse/modell)
	Overtrekk	PU / 2-veis stretch
	Cellemateriale	Nylon/TPU
	Brukervekt	0-200 kg



Art.nr	HMS nr	Modell
54-110		Pro-CARE Auto 80 cm
<b>54-151</b>	<b>230187</b>	<b>Pro-CARE Auto 85 cm</b>
<b>54-112</b>	<b>230188</b>	<b>Pro-CARE Auto 90 cm</b>
54-113		Pro-CARE Auto 105 cm
54-114		Pro-CARE Auto 120 cm

### Pro-CARE Auto Trykkavlastingsmadrass Pasient: 176 cm/82 kg

Trykkart 1

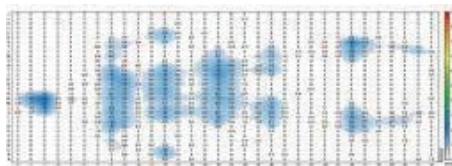

Trykkart 2

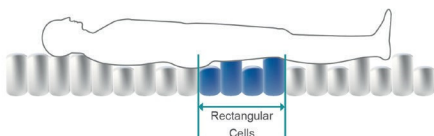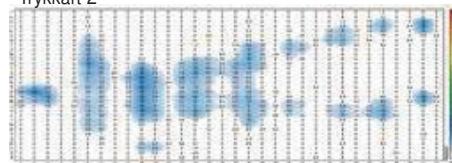

### Rektangulære luftceller

De rektangulære cellene følger kroppens konturer, bevegelser og reduserer forskyvningskreftene bedre. Gir bedre støtte sittende.

**Pyo-CARE** series Therapeutic Support Surface

**APEX MEDICAL CORP.**

***www.apexmedicalcorp.com***

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon:

medeQGroup

Karihaugveien 89, 1086 Oslo · +47 97 13 13 68 · post@medeqgroup.no · www.medeqgroup.no