

ZIPPIE VOYAGE



GÅ SAMMEN - VOKSE SAMMEN

ZIPPIE VOYAGE FINNES I 4 FARGER



SITTESYSTEMET FOR BARN I VEKST!

Når det kommer til sitteenhetern er Zippie Voyage's prioritet nr 1 at ditt barn får korrekt posisjonering hele veien i forhold til å få en sunn utvikling fra småbarn til større barn. Derfor vil du oppdage at den er meget brukervennlig, enkel å regulere og ta av og på sitteenheten. Alle setestørrelser fås i en og samme enhet.



// FOTBRETT
Høyde og vinkeljusterbart fotbrett med mulighet for fotbelter eller fotsandaler

// ENKEL TILT OG RYGGVINKLING
Tilt og ryggvinkling vil forbedre barnets posisjonering og er til nytte ved f.eks. å spise mat, fordøyelsesproblemer, pusteproblemer og for å kunne følge med på omverdenen i de ulike posisjoner. Tilt (inntil 35 °) og ryggvinkling (inntil 180 °). Betjenes vha hendler bak ryggen.

80°
Sitte/kjøre-
posisjon

90°
Nøytral
posisjon

Tilt

180°
Flat horisontal
liggeflate

Ryggvinkling



FUNKSJONELT TILBEHØR TIL ZIPPIE VOYAGE

Zippie Voyage er tilgjengelig med flere valgmuligheter og tilbehør som er designet for å gjøre hverdagens utfordringer lettere slik at du kan nyte dagene bedre.



// FESTEKRØK

En funksjonell krok til å henge vesker og bager i på turen. Lev art.nr: 125912 - HMS art nr: 232121



// SØSKENBRETT

Dette brettet gir søsken et stødig underlag å stå på når de skal med på turen. Solid brett med non-slip belegg og solide hjul. Festes enkelt i akselen bak. Lev art.nr: 125914 - HMS art nr: 232123



// HOLDEBØYLE

Føles trygt for barnet å ha noe fast og komfortabelt å holdel fast i. Lev art.nr: 160834 - HMS art nr: 232103



// BORD

Bordet er tilgjengelig i 2 versjoner – et i lysegrått eller klart. Begge versjoner er dybde og høydejusterbare. Lev art.nr: 160831 - HMS art nr: 232130 (grå) og Lev art.nr: 160831 - HMS art nr: 232129 (klart)



// PLATFORM FORAN

Frontmontert platform gir god tilgang til utstyr som medbringes. Lev art.nr: 125911 - HMS art nr: 232137



// FOTSANDAL

Fotsandalen vil hjelpe barnet til å holde sin posisjon ved at foten holdes på plass. Lev art.nr: 125897 - HMS art nr: xxxxx(6") og Lev art.nr: 125898 - HMS art nr: 232098 (8")



// KOPPHOLDER

For vannflasken eller annet medbrakt drikke. Lev art.nr: 125913 - HMS art nr: 232122





// PLATFORM UNDER

Oppbevaringsplattform i rammen under setet. Kan benyttes til f.eks. batterier eller ventilator. Maksimum belastning: 23 kg Lev art.nr: 125910 - HMS art nr: 232136(6")

Zippie Voyage		Lev.art.nr: 99000601	HMS art.nr: 232090
Maks brukervekt:		34 kg	
Setebredde:		24 – 30 cm, med innlegg inntil 15,5 cm (ekskl. trekk)	
Setedybde:		20 – 34 cm (ekskl. trekk)	
Legglengde:		15,5 – 31 cm	
Rygg høyde:		41 – 61 cm (ekskl. trekk)	
Ryggvinkling:		100° (80° til 180°)	
Setevinkling:		35° (-5° til 30°)	
Setehøyde:		59 – 66 cm (3 trinn mulig 59 / 62 / 66 cm)	
Totalbredde:		63 cm	
Totallengde:		110 cm	
Max. reversing width:		110 cm	
Maks. helling:		9° (for å benytte parkeringsbrems)	
Hjul bak:		12,5" punkteringsfrie hjul	
Hjul foran:		7"	
Vekt sitteenhet:		ca. 6 kg	
Understellets vekt:		ca. 12 kg	
Avtakbare deler:		Sete og hjul - kun for transport	
Mulige farger:		4 farger - grå(std), rød, beige eller blå detaljer	
Rammemateriale:		Aluminium	
Kollisjonstestet:		Ja; testet i henhold til ISO 7176-19 (2008) (Annex A)	
Totalhøyde:		98 – 105 cm	
Lengde sammenlagt:		80 cm	
Høyde sammenlagt:		37 cm	

For ytterligere informasjon om spesifikasjoner, valgmuligheter og tilbehør, henvises til bestillingsskjema. All informasjon kan endres uten varsel. Kontakt Sunrise Medical dersom du har spørsmål om produktet. Hvis du har vanskeligheter med å lese denne brosjyren, kan du finne den i pdf-format på våre nettsider, www.sunrisemedical.no eller du kan kontakte oss for å få en utskrift i større format.

Du vil raskt kunne endre retning barnet sitter. Sitteenheten løsnes enkelt fra basen. Dette gjør også vognen velegnet til å ta med i bil.

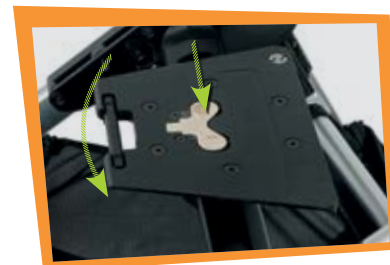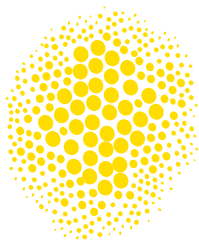

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
 Tlf.: +47 66 96 38 00
 Fax: +47 66 96 38 80
 E-post: post@sunrisemedical.no



www.SunriseMedical.no