

## Stabiliserings- og balansepakke



### Mageleie

Støtte under armene. Lang nakke. Uten trekantstøtte: balansetrening.



### Ryggleie

Stabilisering for bevegelse av armer og ben. Uten trekantstøtte: balansetrening.

### Lek med føtter

Barnet er i varierende grad aktiv med beina, og det er noe han må utfordres på mere. U- formen er med på å samle beina hans og også å samle hendene slik at han får mer aktivt bruk av både armer og ben rundt midtlinjen samt kroppssentrering.

U- formen kan stabiliseres i sidene med kileputer og en kan skråstille hele formen ved å legge inn kileputer enten i forkant eller bakkant eller begge deler for å få vuggefasjon. Barnet viser fin trivsel.

Turid Due  
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF,  
Nordre Åsen bo- og habiliteringssenter, Oslo



...Bamse produkter inneholder ikke skadelige stoffer som latex og ftalater. Det er derfor helt trygt å bruke.

## Babypakker



Posisjonering av premature. Lag et rede med to trekantstaver og nyfødt bøyestilling med diverse skråputer.



Barn som ligger i asymmetri belaster bare en side. Bruk trekantstav eller kilepute for å motvirke dette.



God posisjon med kilepter og skråputer spesielt for funksjonshemmede barn.



Oppbygging for egen ledelse på gulv for motorisk utvikling.

## Behandlingspakker



Gi så mye støtte du må og ta vekk.



Bygg i høyden etter som barnet vokser.



## Oppreisings- og koordineringspakker

*Nyhet*



Biceps og magemuskeltrening. Start tidlig.



Sitte og oppreisingstrening. Start tidlig.

## Benker



Krabbing i trapp fører barnet inn i homogent bevegelsesmønster.



Krabbing på avgrenset område modner et umodent krabbende. Barnet krabber mer og mer resiprokt.



Krabbing styrker armer og skuldre, hofter og ben.



«... De lange benkene har vi hatt stor suksess med- til å gå sideveis både gående og knestående. Min kollega ..... fullroser disse produktene og har benyttet de mye. Kan også benytte de lave benkene til barn som har lært å krabbe men med for stor sprik. På benken klarer de å konse og holde bena samlet under krabbing.»

Turid Due  
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF,  
Nordre Åsen bo- og habiliteringssenter, Oslo



...Bamse produkter har stor friksjon, er lette i vekt, enkle å rengjøre.  
De kan vaskes og desinfiseres.

## Hverdagsliv

-optimal posisjonering hele døgnet



### Sportsvognpakke

- Isolerer og varmer
- Fører barnet inn i normale bevegelsesmønstre.



*Nyhet*

### Sittemodul

- God posisjonering i sittende med skråpute. Oppreising starter med belastning på føtter. Gir koordinert muskularbeid, fri bevegelse i skuldre og armer og lang nakke.

### Korte



### Stolpakke

- Barnet må sitte i postural oppreising.
- Frigjør armer og bein.
- Viktig for å unngå kompenserte mønstre.

For mer informasjon se hjemmesiden vår  
[www.bamseprodukter.no](http://www.bamseprodukter.no)  
"varekatalog"



## Bamse Produkter A/S

- Babypakker og behandlingspakker med rektangler, kuber og skråputer/kileputer

*Nyhet*

- Utskåret halvmåne for stabilisering og balansetrening



Produktene kan bestilles gjennom hjelpemiddelsentralen

Det er ingen aldersgrense for å søke på aktivitetshjelpemidler

[www.bamseprodukter.no](http://www.bamseprodukter.no)  
[info@bamseprodukter.no](mailto:info@bamseprodukter.no)  
Tlf: 69 30 01 05