



Få rask hjelp ved anfall

Falck Epilepsialarm

Falck epilepsialarmer er utviklet for deg som har epilepsi og som trenger rask hjelp ved ulike typer anfall. Alarmen utløses ved anfall i form av kramper, muskelrykninger, rytmiske bevegelser og lyd eller der fukt og væske er et symptom. Sensorene er følsomme og registrerer dermed også svært svake anfall. Du kan bruke alarmen både i sengen og i en stol.

Alarmen har et justerbart lydsignal som avgis når du får et epileptisk anfall, slik at personal eller pårørende i nærheten blir varslet. Det er også mulig å viderekoble alarmen til personsøker eller mobiltelefon.

Det gir deg en tryggere og sikrere hverdag.



ABILIA

ALARM FØR ULIKE TYPER AV ANFALL

Falck epilepsialarm inngår i en serie pålitelige alarmprodukter som er godt utprøvd og brukes både i hjemmemiljø og omsorgsboliger verden over. Bruk den alarmen som passer til ditt behov.



Falck EpiTon - Registrerer anfall i form av lyd

EpiTon registrerer lyd ved et tonisk anfall eller ved starten av et GTK-anfall. Kjentetegnet for et tonisk anfall kan være et kortvarig skrik eller en mer langvarig smattelyd osv. EpiTon er svært følsom og dermed godt egnet også ved anfall med svak lyd.

Falck EpiFukt – Registrerer fukt

Falck EpiFukt er en epilepsialarm som registrerer fukt som vannlating, svette, oppkast og sikling. Innstillingsmuligheter for både små og store mengder fukt. Kan brukes i seng, rullestol og hvilestol. EpiFukt leveres med to vaskbare flanelaken, strømforsyning, kabler samt skruer til montering.

VIDERESENDING AV ALARM

I tilfeller der du ikke vil at lydsignalet skal høres i rommet, eller du vil at det viderekobles til flere personer, er det mulig å viderekoble alarmen til en personsøker (tilbehør: All in One Basic) eller en mobiltelefon (tilbehør: All in One).

All in One tar imot det trådløse alarmsignalet fra Falck epilepsialarm og sender det videre til f.eks. flere støttepersoner eller kommunal trygghetsalarm. Den tekniske løsningen tilpasses i henhold til boligens fysiske miljø samt ønsker og rutiner for hvordan alarmen skal tas imot.



TEKNISK INFORMASJON

Strømkabel: Bruk kun Falcks versjoner
Spenning: 12 V DC 4-polet modularkontakt
Strømförbruk: 110 mA
Størrelse: 16 x 10 x 4,5 cm
Utgang: 6-polet modularkontakt
og 12 V DC strømforsyning
Sensorinnang: 8-polet modularkontakt

ARTIKKELNUMMER

Falck EpiTon 323801 | HMS 020678
Falck EpiFukt 323803 | HMS 020680

TILBEHØR VIDERESENDING

All in One 330701
All in One Basic 330700
Batteri Back-Up 323808