



All in One Basic
Sørger for at alarmen kommer frem

Art.nr. All in One Basic: 330700

Det er viktig at du føler deg trygg på at alarmen din når en mottaker på en sikker og effektiv måte.

All in One Basic kan brukes til forskjellige løsninger i private boliger og bofellesskap. Eksempler på bruksområder er epilepsialarm, vandrings- og fraværsalarm eller trygghetsalarm. All in One Basic gir beskjed til helsepersonell eller pårørende ved å videresende alarmen til en personsøker.



ABILIA

ALL IN ONE BASIC

All in One Basic kan brukes sammen med bl.a. Abilias varslingshjelpemidler for å skape en komplett løsning. Den kan knyttes opp imot kabelbaserte sensorer, som f.eks. Emfit Epilepsialarm, som skal varsle en pårørende i løpet av natten. Løsningen er potensialfri og kan aktiveres av stort sett alle alarmer som er kabelbaserte og sørger for viderevarsling til en trådløs personsøker.

SIKKERHET OG FLEKSIBILITET

All in One Basic har god rekkevidde ved fri sikt, noe som skaper økt bevegelsesfrihet for eksempel i større bygninger. Ved behov kan rekkevidden økes ytterligere gjennom en Repeater.

Viderevarslingen har en såkalt heartbeatfunksjon som varsler dersom man havner utenfor rekkevidde, eller hvis det av andre årsaker ikke er kontakt mellom sender og mottaker.

All in One Basic er enkel i bruk, har en tydelig og enkel design og monitorering og kan motta varsler fra opp til fire trådløse sendere.

Løsningen består av to enheter: en sender og en mottaker i form av en personsøker.



TEKNISK INFORMASJON

All in One Basic sender

Mål mm (HxBxD): 140 x 105 x 30
Radiofrekvens: 869,2375 MHz
Rekkevidde fri sikt: 600 m

All in One Basic personsøker

Mål mm (HxBxD): 91 x 55 x 23
Vekt: 60 gram inkl. batterier
Radiofrekvens: 869,2375 MHz