



U-pute + Støttepute + Sylinderpute + Finnepute

# Arcona posisjoneringsputer

Flere funksjoner i en og samme pute



Robustpute



Støttepute

Arcona posisjoneringsputer er universale puter med flere funksjoner i en og samme pute, noe som gir dem store bruksmuligheter og fleksibilitet.

Arcona posisjoneringsputer er utviklet med utgangspunkt i kjente leiringsprinsipper og med fokus på at materialets kvalitet skal holde fasongen for å skape stabilitet.

Arcona posisjoneringsputer er fylt med viskoelastisk skum, polystyren kuler og vektgranulat. Noen av putene er fylt kun med skum eller kuler, mens de fleste har alle tre komponentene.

Fyllet lar brukeren "synke inn" i putene, noe som gir god støtte og trykkfordeling. Den ekstra vekten i putene gjør dem ekstra stabile, spesielt for urolige og store brukere.



Sjøhestpute + Robustpute



Sjøhestpute



Sjøhestpute + Finnepute



Sjøhestpute



Støttepute




Universalpute



Liten kilepute



Universalpute

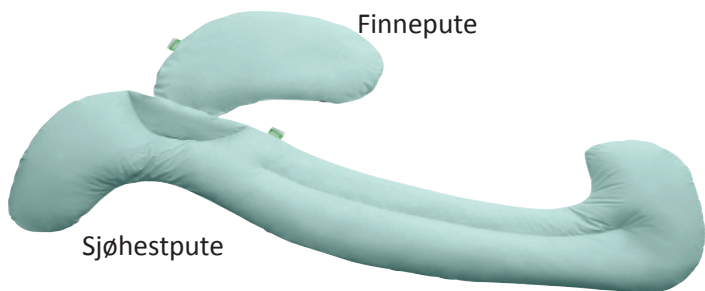

Sjøhestpute

Finnepute

### **Arcona Sjøhestpute/ Arcona Sjøhestpute junior**

Den komplette sideleiringsputen. Alle de nødvendige sideleiringskomponentene er samlet i en og samme pute.

Arcona sjøhestpute kan også brukes sammen med Arcona Finnepute, som gjør frontleiring eksepsjonell.


Fleksipute



### **Arcona Fleksipute**

Oppbygningen av denne puten er spesielt velegnet til å gi brukeren en god kroppstøtte. Den kan også brukes som U-pute og endene er sydd i spiss så den er mer kroppsnær ved Semi-Fowler liggstilling. Puten kan også plasseres bak, foran eller rundt brukeren.

Robustpute

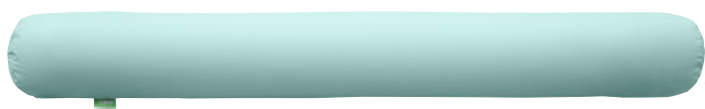

### **Arcona Robust pute**

Denne sylinderveputen er 200 cm lang, 28 cm bred og har ekstra tyngde, noe som gjør den spesielt velegnet til en tett leiring som Semi-Fowler liggstilling, eller ved sideliggende/delvis mageleie. Puten kan også med fordel brukes til urolige brukere som har behov for økt taktil stimulering og avgrensning.

Fleksjonspute



### **Arcona Fleksjonspute**

Puten posisjonerer hoftelæddet i nøytral stilling i sideleie og er særlig egnet for hofteropererte, spastikere m.fl. I ryggliggende posisjoneres hoftelæddet i fleksjon og benene leires støttet og stabilt. Puten kan dessuten brukes i trenings- og behandlingsseanser.

T-pute



### **Arcona T-pute**

T-formede puter i ulike størrelser kan erstatte faste abduksjonstøtter og arrangement for å posisjonere bena. I liggende posisjonering brukes ofte T-puter for å forhindre kryssing og andre feilstillinger for hofter og knær.

Sylinderpute, kort



### **Arcona sylindervepute, kort**

Kne- og hasepute som er uunnværlig når det skal leires i Semi-fowler liggstilling og ved fleksjon av kneet. Puten kan også brukes ved sideliggende som støtte i ryggen.

Liten hodepute



### **Arcona Liten hodepute**

Denne puten kan brukes til mange formål, når det i posisjoneringen skal fylles ut små hulrom. Puten gir optimal understøttelse. Puten kan også brukes til å forebygge trykksår mellom knærne og gi optimal hodeposisjonering. Inneholder kun polystyren kuler.

Stor hodepute



### **Arcona Stor hodepute**

Kan brukes som ryggstøtte når man leirer i Semi-fowler liggestilling. Ved posisjonering av hodet til nøytral nakkestilling gir puten en god støtte og komfort i tillegg til stabilitet. Ved bruk under leggene i ryggliggende stilling gir puten god trykavlastning for hælene og en stabil støtte. Inneholder kun polysteren kuler.

Liten Kilepute



### **Arcona Liten kilepute**

Brukes til å heve hælene fra madrassen ved behandling av trykksår. Puten kan også brukes til å leire en hemiplegisk arm eller til brukere med nedsatt tonus. Inneholder kun viskoelastisk skum.


Stor kilepute



### **Arcona Kilepute**

Kileputen er utformet som en trekantpute og kan brukes til ulike formål. Stabilisering både foran og bak ryggen i sideleie for å gi en stabil støtte. Ved bruk foran kroppen får øverste arm og skulder en god understøttelse i nøytral stilling. Inneholder kun viskoelastisk skum.

U-pute

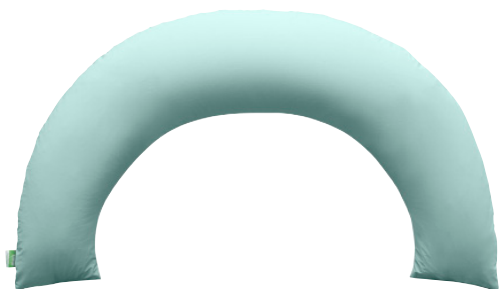

### **Arcona U-pute**

På grunn av sin U-form er denne puten spesielt egnet til å gi brukeren en god kroppsstøtte. Puten kan enten plasseres bak, foran eller rundt brukeren. Kroppsstøtteputen er en av grunnsteinene i Semi-Fowler liggestilling.

Støttepute



### **Arcona Støttepute**

Denne puten kan med god effekt brukes i sittende stilling hvor den urolige brukeren får effekten av å ha "katten i fanget". Den skaper ro og avgrensning. Puten kan også brukes til posisjonering av hodet samt stabilisering og styring av lårene i sittende stilling.

Universalpute



### **Arcona Universalpute**

Denne puten brukes for å sikre hoftabduksjon og til å minske risikoen ved hoftedislokasjon, når en bruker snues fra rygg til sideleie. Puten er også velegnet til understøttelse av arm/skulder og forebygging av ødemdannelse. Inneholder kun polysteren kuler.

## Artikkelnummer og mål på Arconaputene:

Hj.m.nr	Art.nr	Beskrivelse	Hj.m.nr Trekk	Art.nr Trekk	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt kg
235570	090-064-000	Arcona Sylinderpute	235571	090-064-010	62	29	20	1,7
234586	090-068-000	Arcona Fleksipute	234587	090-068-010	194	27	15	3,7
234283	090-070-000	Arcona Robustpute	234284	090-070-010	200	28	28	6
234572	090-060-000	Arcona Liten kilepute	234573	090-060-010	40	28	11	0,5
234574	090-066-000	Arcona Kilepute	234575	090-066-010	40	50	14	1,1
235566	090-054-000	Arcona Universalpute	235567	090-054-010	58	39	22	1,7
234281	090-056-000	Arcona Sjøhestpute	234282	090-056-010	186	51	12	5
236398	090-057-000	Arcona Sjøhestpute jr	235568	090-057-010	127	27	12	2,5
234221	090-058-000	Arcona Finnepute	234222	090-058-010	58	28	8	0,6
234223	090-072-000	Arcona U-pute	234224	090-072-010	88	94	17	2,7
234219	090-050-000	Arcona Støttepute	234220	090-050-010	55	54	12	1,2
234588	090-048-000	Arcona Liten hodepute	234589	090-048-010	39	25	8	0,3
235564	090-049-000	Arcona Stor hodepute	235565	090-049-010	58	40	13	0,9
235572	090-074-000	Arcona Fleksjonspute		090-074-010	51	30	30	1,8
248775	090-090-000	Arcona T-pute str. 1	248776	090-090-010	60	33	8	0,6
252624	090-091-000	Arcona T-pute str. 2	252625	090-091-010	74	51	12	1,2
255659	090-092-000	Arcona T-pute str. 3	268066	090-092-010	95	55	13	2,1

## Spesifikasjoner:

Fyllmateriale	Ekspanderende polystyrenkuler og viskoelastisk skum
Kulestørrelse	ca 3 mm
Puteoverflate	Polyester, polyuretan polycarbonat
Putetrekk	100% bomull
Rengjøring	Putetrekk 40 grader Putene desinfiseres eller tørkes av med såpevann



Armstøtteputer m/kuler



Armstøtteputer m/skum og kuler



Armstøtteputer m/meshtrekk



Omfavnerpute i 2 størrelser: Ytre omkrets 250/220 cm, indre omkrets 125/100 cm

# Arcona armstøtteputer

## Omfavner og støtter armene

Stabile støtteputer som omfavner armene og gir god støtte for hele armen.

Festes enkelt til rullestol med remmer i overkant av ryggen på stolen.

Hj.m.nr	Art.nr	Beskrivelse
243481	093-10100	Arcona armstøttepute, skum, høyre
242007	093-10100V	Arcona armstøttepute, skum, venstre
242008	093-10101	Meshtrekk til 10100, stk
	093-10101J	Bomullsjerseytrekk, høyre til 10100
	093-10101JV	Bomullsjerseytrekk, venstre til 10100V
196703	093-10200	Arcona armstøttepute, kuler, stk
	093-10201	Meshtrekk til 10200, stk
149246	056-T40	Omfavner, stor m/trekk (10A)
153670	056-T40B	Omfavner, liten m/trekk (10B)



056-T10 Nakkepute, stor



056-T90 Nakkepuff



056-T20 Hodestøtte asymmetrisk



056-T110 Hodestøtte symmetrisk

# Hode- og nakkeputer

Puter fylt med polystyrenkuler for stabil støtte av hode og nakke



056-T30 Nakkepute liten halvmåne


Hj.m.nr	Art.nr	Beskrivelse	Mål cm
149247	056-T10	Nakkepute, stor dental m/trekk	57 x 21
265960	056-T90	Nakkepuff, dental m/trekk	36 x 6,5
253509	056-T20	Hodestøtte asymmetrisk m/trekk	35 x 24
	056-T110	Hodestøtte symmetrisk m/trekk	35 x 24
	056-T30	Nakkepute liten halvmåne m/trekk	46,5 x 22

## Besøks- og postadresse:

Rosenkrantzgata 11  
3018 DRAMMEN

Telefon 32 24 42 50

[www.ovrebo.no](http://www.ovrebo.no)  
[firmapost@ovrebo.no](mailto:firmapost@ovrebo.no)

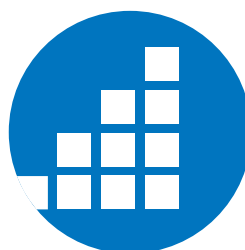

Øvreboø rehab