


StimuLITE® Classic sitteputen består av en formbar cellekonstruksjon i bikubestruktur (honeycomb) med lav vekt. Putens plane sitteflate former seg etter kroppen og gir dermed god trykkavlastning og god komfort. Puten er laget av tre lag, hvert lag av forskjellig hardhet, noe som gjør det mulig for de utragende sete bein å synke inn i dysen for lossing, mens omliggende lag støtte. Resultatet er en fantastisk pute med individuell tilpasning som distribuerer

trykkbelastning for din kroppsform og gir god stabilitet. Tyngre (honeycomb) brukes for å øke den sideveis stabilitet for legger og lår. StimuLITE® klassisk pute veier ca. 1,5 kg og er fremstilt av 100% termoplastisk polyuretan, et medisinsk godkjent produkt uten allergener eller miljømessig stressende tilsetningsstoffer, bakterie- og luktavvisende ved regelmessig renhold. Både sitteputer og trekk kan vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel. Perfekt for inkontinente personer siden inkontinensbeskyttelsen er plassert under seteputen inn i trekket. Dette innebærer at væsken strømmer gjennom puten, slik at huden holdes kjølig og tørr. StimuLITE® puter motvirker sittesår av sine unike egenskaper.

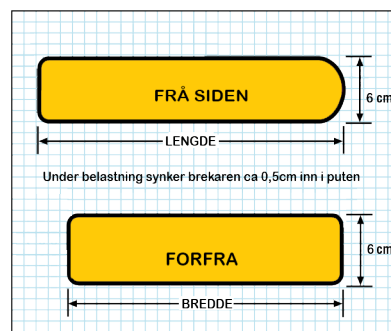

### Total Pressure Management™


#### Hindrer Hudskjørhet

Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår.

StimuLITE® puter består av sekskantede celler i bikubestruktur (honeycomb) som er perforert og tillater luftsirkulasjon og avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni trekket på undersiden av puten. På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr.





Puster og fordamp fuktighet

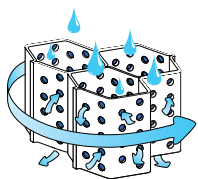

Komplett ventilasjonssystem

#### Trykkavlastning og sidestabilitet


StimuLITE® sitteputen Classic består av tre lag med ulik hardhet, og reduserer trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdel. StimuLITE sitteputer fordeler trykk fra sete- og lårknuter til mykdel under lårene, og kan brukes med trykksår opptil sårgrad 3. En mykere lag beskytter ischial og haleben og minimerer risikoen for å sitte gjennom. Putens cellstruktur former seg etter kroppen og med sidestabilisatorer sine gir brukeren en god sitte stillning samtidig som den omfordeler trykk.

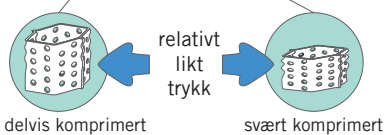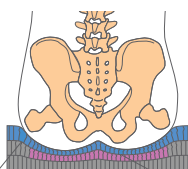

Fordeler trykk etter kroppsform

#### Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimuLITE® sitteputen avgjør sitteputens forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten. Det øverste laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. Cellene i StimuLITEs bikubestruktur er anisotrop, dvs at den har full bevegelighet i alle retninger og gir aldri absolutt "stopp". Når brukeren synker ned i puten, omslutes seteknuten av cellene som gjør at man "sitter stille", men likevel kan bevege seg uten å få "shear" i vevet. Shear oppstår når trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.

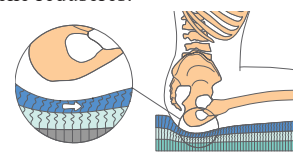

minimal skjærkraft mot venene  
Diffus lateral skyvekraft



Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. Rund bunn anbefals for rullestol med hengekøye dypere enn 2,5 cm.

Størrelse	StimulITE® Contoured BBXS (Ekstra Myk Brederer Sittegrupp)														
	Pute med flat bunn					Pute med avrundet bunn					Passer alla puter				
	Pute (*)		Ekstra Cordura Trekk		Tillbehør: Ull trekk		Pute (*)		Ekstra Cordura trekk		Tillbehør: Ull trekk		Ekstra Inkontinlegg		
Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.	Art. nr.	HMS nr.
b36 d36 h6	CL1414	COVCL1414	WCOVCL1414	207591	CL1414S	COVCL1414S	WCOVCL1414S	207592	IN1414	WCOVCL1414S	207592	IN1414	207498	IN1414	207498
b36 d41 h6	CL1416	COVCL1416	WCOVCL1416	207593	CL1416S	COVCL1416S	WCOVCL1416S	207594	IN1414	WCOVCL1416S	207594	IN1414	207498	IN1414	207498
b36 d46 h6	CL1418	COVCL1418	WCOVCL1418	207595	CL1418S	COVCL1418S	WCOVCL1418S	207596	IN1414	WCOVCL1418S	207596	IN1414	207498	IN1414	207498
b36 d51 h6	CL1420	COVCL1420	WCOVCL1420	207597	CL1420S	COVCL1420S	WCOVCL1420S	207598	IN1414	WCOVCL1420S	207598	IN1414	207498	IN1414	207498
b38 d41 h6	CL1516	COVCL1516	WCOVCL1516	207599	CL1516S	COVCL1516S	WCOVCL1516S	207600	IN1616	WCOVCL1516S	207600	IN1616	207499	IN1616	207499
b38 d43 h6	CL1517	COVCL1517	WCOVCL1517	207601	CL1517S	COVCL1517S	WCOVCL1517S	207602	IN1616	WCOVCL1517S	207602	IN1616	207499	IN1616	207499
b38 d46 h6	CL1518	COVCL1518	WCOVCL1518	207603	CL1518S	COVCL1518S	WCOVCL1518S	207604	IN1618	WCOVCL1518S	207604	IN1618	207500	IN1618	207500
b38 d51 h6	CL1520	COVCL1520	WCOVCL1520	207605	CL1520S	COVCL1520S	WCOVCL1520S	207606	IN1618	WCOVCL1520S	207606	IN1618	207500	IN1618	207500
b41 d41 h6	CL1616	COVCL1616	WCOVCL1616	207607	CL1616S	COVCL1616S	WCOVCL1616S	207608	IN1616	WCOVCL1616S	207608	IN1616	207499	IN1616	207499
b41 d43 h6	CL1617	COVCL1617	WCOVCL1617	207609	CL1617S	COVCL1617S	WCOVCL1617S	207610	IN1616	WCOVCL1617S	207610	IN1616	207499	IN1616	207499
b41 d46 h6	CL1618	COVCL1618	WCOVCL1618	207611	CL1618S	COVCL1618S	WCOVCL1618S	207612	IN1618	WCOVCL1618S	207612	IN1618	207500	IN1618	207500
b41 d51 h6	CL1620	COVCL1620	WCOVCL1620	207613	CL1620S	COVCL1620S	WCOVCL1620S	207614	IN1618	WCOVCL1620S	207614	IN1618	207500	IN1618	207500
b43 d41 h6	CL1716	COVCL1716	WCOVCL1716	207615	CL1716S	COVCL1716S	WCOVCL1716S	207616	IN1616	WCOVCL1716S	207616	IN1616	207499	IN1616	207499
b43 d43 h6	CL1717	COVCL1717	WCOVCL1717	207617	CL1717S	COVCL1717S	WCOVCL1717S	207618	IN1616	WCOVCL1717S	207618	IN1616	207499	IN1616	207499
b43 d46 h6	CL1718	COVCL1718	WCOVCL1718	207619	CL1718S	COVCL1718S	WCOVCL1718S	207620	IN1618	WCOVCL1718S	207620	IN1618	207500	IN1618	207500
b43 d51 h6	CL1720	COVCL1720	WCOVCL1720	207621	CL1720S	COVCL1720S	WCOVCL1720S	207622	IN1618	WCOVCL1720S	207622	IN1618	207500	IN1618	207500
b46 d41 h6	CL1816	COVCL1816	WCOVCL1816	207623	CL1816S	COVCL1816S	WCOVCL1816S	207624	IN1816	WCOVCL1816S	207624	IN1816	207501	IN1816	207501
b46 d43 h6	CL1817	COVCL1817	WCOVCL1817	207625	CL1817S	COVCL1817S	WCOVCL1817S	207626	IN1816	WCOVCL1817S	207626	IN1816	207501	IN1816	207501
b46 d46 h6	CL1818	COVCL1818	WCOVCL1818	207627	CL1818S	COVCL1818S	WCOVCL1818S	207628	IN1818	WCOVCL1818S	207628	IN1818	207502	IN1818	207502
b46 d51 h6	CL1820	COVCL1820	WCOVCL1820	207629	CL1820S	COVCL1820S	WCOVCL1820S	207630	IN1818	WCOVCL1820S	207630	IN1818	207502	IN1818	207502
b51 d41 h6	CL2016	COVCL2016	WCOVCL2016	207631	CL2016S	COVCL2016S	WCOVCL2016S	207632	IN1816	WCOVCL2016S	207632	IN1816	207501	IN1816	207501
b51 d46 h6	CL2018	COVCL2018	WCOVCL2018	207633	CL2018S	COVCL2018S	WCOVCL2018S	207634	IN1818	WCOVCL2018S	207634	IN1818	207502	IN1818	207502
b51 d51 h6	CL2020	COVCL2020	WCOVCL2020	207635	CL2020S	COVCL2020S	WCOVCL2020S	207636	IN2020	WCOVCL2020S	207636	IN2020	207503	IN2020	207503

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikelen er ikke prisforhandlet med NAV

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikelen er ikke prisforhandlet med NAV

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikelen er ikke prisforhandlet med NAV

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen, artikelen er ikke prisforhandlet med NAV

(\*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinnlegg og en vaskepåse

Tillbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),

Kilistatte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5S (HMS nr: 207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)

Vanntett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207544)



GÖRAN SJÖDEN REHABSHOP NORGE A/S  
Postboks 157 1378 Nesbru  
Tel: 48 50 32 97  
email: ordre@rehabshop.com  
www.rehabshop.as

Alle StimulITE® sitteputer er  
branntestet og godkjent i henhold til  
ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006,  
NS-EN 597:2015 og CE-merket.



Copyright, 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved.  
U.S. Patent #5,180,619; U.S. Patent #5,444,881 and other  
patents pending worldwide. Total Pressure Management  
is a trademark and Stimulite and Supracor are registered  
trademarks of Supracor Systems, Inc.