




## RotoBed – pleieseng med automatisk sving- og oppreisningsfunksjon

RotoBed®Free har en unik elektrisk oppreisning- og svingfunksjon. En enkel og brukervennlig håndkontroll sørger for en lettvinnt og selvstendig inn- og utstigning. En naturlig og vinkelrett posisjon av sitte-/liggeflaten forenkler forflytning til/fra seng f.eks. ved bruk av rullator. Ønsket sengehøyde og utsving

kan lagres til den enkelte bruker, slik at vedkommende får en god og riktig posisjon ut og inn av sengen. Sengen har elektrisk regulering av høyde, rygg og ben, som en alminnelig pleieseng. Liggeflaten er firedelt og gir optimal støtte.



RotoBed

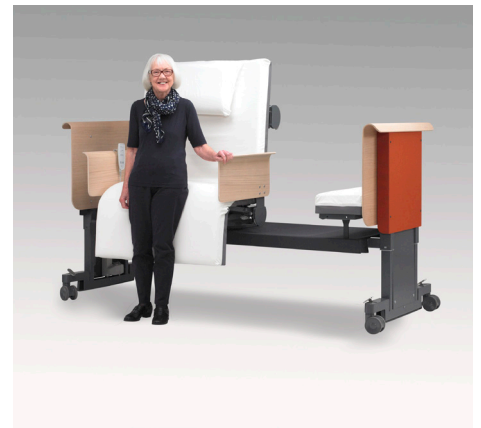

### Standardutstyr:

- Fullautomatisk dreiemekanisme som går både med og mot klokken. Oppgi ønsket retning ved bestillingen av sengen.
- Sengehest i to deler.
- Mulighet for lagring av ønsket høyde og utsving, slik at det blir riktig hver gang en skal inn og ut av sengen.
- Sengegavl i eikelaminat og grå tekstil.
- Laken og putetrekk.
- Grått beskyttelsestrekk i tekstil til sengerammen.



Enkel håndkontroll

### Verdt å vite:

RotoBed®-sengene er CE-godkjent og oppfyller de nyeste europeiske normer og krav for pleiesenger. International standard IEC 60601-2-52.

Motorer og kontrollboks fra Linak, standard IPX6W.

Beskrivelse.	Art. nr.	HMS.nr.
RotoBed®Free	RBF-0001-1-10-10	241420

Tekniske data	RotoBed®Free
Bredde	96 cm
Lengde	228 cm
Høydejustering	32 - 82 cm
Standard madrassmål	85x205 cm
Madrassmål etter henvendelse	100x205 cm
Max belastning	225 kg
Maks brukervekt	190 kg
Vekt seng	165 kg
Hjuldiameter	100 mm
Liggeflate	4 delt
Avtagbare sengehester	Ja
Brems	Semi-sentraltbrems
Farge	Eikefinér
Mål på forsendele umontert L x B x H	114 x 76 x 200 cm
Mål på forsendelse montert L x B x H	230 x 98 x 84 cm



## Madrassens oppbygging

### Hvilken madrass skal jeg velge til min RotoBed?

Vi tilbyr fire ulike madrasser til Rotobed®, kalt SafeSleep, AirSleep, Roho®Dry Flotation og BariaSleep. Grunnet sengens unike konstruksjon kan man ikke bruke andre madrasser i RotoBed®. Alle madrassene leveres med et strekkbart inkontinenstrekk som er vaskbart på 60°C (95 °C på AirSleep). Trekket består av to deler; hovedmadrass og fotdel. De to delene er i samme materiale og har fester til sengen (slik at madrassen ikke flytter seg under rotasjon).

### RotoBed® SafeSleep madrass

SafeSleep er en kvalitetsmadrass i fire lag, tilpasset RotoBed®. Den tilbyr svært god komfort og optimal trykkfordeling. Det øverste laget består av høyelastisk komfort-polyester som gir god luftstrøm og dermed lav varme- og fuktkonsentrasjon i kontaktflaten. De fire andre skumlagene har ulike egenskaper som øker fleksibiliteten og luftstrømmen, hvilket reduserer Shear-effekten.

- RotoBed® SafeSleep er laget uten CFC og er OEKOTEX®100-sertifisert.
- Dokumentert forebygging og behandling av trykksår trinn 1-3.
- For brukere 40 – 120 kg

### RotoBed AirSleep madrass

AirSleep er en hybridmadrass til bruk på institusjoner og for hjemmeboende, og er et viktig ledd i å forebygge trykksår. Den er egnet for brukere i middels, høy

og meget høy risiko for trykksår og til behandling av trykksår i alle stadier. Madrassen kan brukes både med og uten pumpe. Uten pumpe fungerer madrassen som en komfortabel trykkfordelende madrass. Brukervekt uten pumpe er 30- 150kg. Med pumpe gir hybridmadrassen en total avlastning av trykket mot huden. Det velges hvor kraftig vekslende trykk som ønskes. Brukervekt for madrass med pumpe er 30-250kg. Muligheten for å veksle mellom statisk og dynamisk funksjon gjør hybridssystemet velegnet til bruk i pasientens hjem, palliative pleiemiljøer og institusjoner der pasientene er utsatt for trykksår. AirSleep leveres med et strekkbart inkontinenstrekk som er vaskbart på 95°C.

- AirSleep er laget uten CFC og er OEKO-TEX®100- sertifisert.
- Dokumentert forebygging og behandling av trykksår i alle fire trinn.
- For brukervekt: 30-250 kg

### Roho® Dry Flotation madrass

Dry Flotation er en madrass i to lag. Luftcellene i Roho® er produsert i mykt og fleksibelt neopen. Cellene er sammenkoblet og gir dermed stor kontaktflate og lavt trykk på hud og vev.

- Dokumentert forebygging og behandling av trykksår i alle fire trinn.
- For brukere opp til 190kg.

### RotoBed BariaSleep madrass

RotoBed®BariaSleep er en kvalitetsmadrass i fire lag, tilpasset RotoBed®. Den tilbyr svært god komfort og optimal trykkfordeling. Topplaget består av elastisk polyether Elast PF 40 / P FR med en tetthet på 40 kg/m<sup>3</sup>. Madrassen er skåret i kvadrater i forskjellige størrelser for å best mulig tilpasse kroppen og gi optimal støtte. Det andre laget er laget av viskoelastisk polyurethanskum av høy kvalitet med en densitet på 53 kg/m<sup>3</sup>. Dette laget hjelper med å fordele kroppsvekten jevnt, slik at man unngår trykksår. Det tredje laget er i Elast PF 65FR med en densitet på 60 kg/m<sup>3</sup> . Den øverste flaten har tverrsnitt for å lette luftgjennomstrømning og minimere forskyvning. Basislaget består av SR 75 med en densitet på 75 kg/m<sup>3</sup>. Undersiden har tverrgående riller for å øke fleksibiliteten, så tilpasningsevnen i Rotobed sengen optimeres. BariaSleep har et ankersystem, slik at den ikke forflytter seg under rotering.


- RotoBed® BariaSleep er laget uten CFC og er OEKOTEX®100-sertifisert.
- Dokumentert forebygging og behandling av trykksår trinn 1-3.
- For brukervekt: 120-190 kg




## Tilbehør




ROHO®DryFlotation madrass

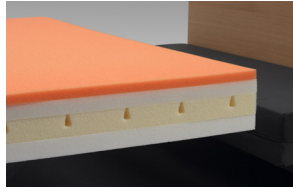

SafeSleep madrass

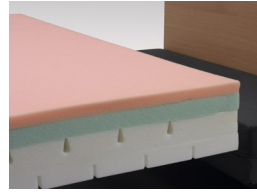

BariaSleep madrass

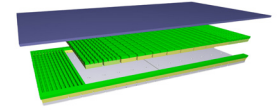

AirSleep madrass




Sengehest i metall ryggdel




Sengehest i metall midtdel



Sengehest i eikefinér

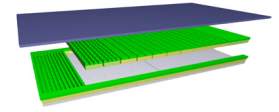

AirSleep madrass

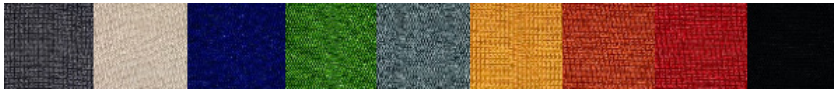


Tekstil hode- og fotgavl

Beskrivelse	Art.nr.	HMS.nr
RotoBed bredde 100 cm (std. 85 cm)	RBX-0001-100	
RotoBed forlenget med 10 cm i fotende (std. 205 cm)	RBX-0001-10	298214
RotoBed forlenget med 20 cm hode-/fotende (std. 205 cm)	RBX-0001-20	
SafeSleep madrass standard for brukere 40-120kg	RBA-1000-1A	244753
SafeSleep hovedmadrass for brukere 40-120kg, forlenget 10 cm	RBA-1000-1A-10	
ROHO®DryFlotation madrass standard opptil 190kg	RBA-1000-2A	249562
ROHO®DryFlotation hovedmadrass opptil 190kg, forlenget 10 cm	RBA-1000-2A-10	
BariaSleep hovedmadrass bredde 100 cm opptil 190kg	RBA-1000-3A-100	
BariaSleep hovedmadrass bredde 100 cm opptil 190kg, forlenget 10 cm	RBA-1000-3A-10	
AirSleep hovedmadrass for brukere 30-150kg*	RBA-1000-4A	290147
AirSleep hovedmadrass for brukere 30-150kg*, forlenget 10cm	RBA-1000-4A-10	
AirSleep hovedmadrass for brukere 30-150kg*, bredde 100cm	RBA-1000-4A-100	
AirSleep hovedmadrass for brukere 30-150kg*, bredde 100cm, forlenget 10cm	RBA-1000-4A-110	
*AirSleep pumpe til AirSleep madrass må bestilles i tillegg	RBA-1000-4P	
Fotmadrass standard	RBA-1000-1B	
Fotmadrass forlenget 10 cm	RBA-1000-1B-10	298215
Fotmadrass bredde 100 cm	RBA-1000-3B	
Fotmadrass bredde 100 cm, forlenget 10 cm	RBA-1000-3B-10	
Sengehest i metall (midtdel)	RBA-1001-1	
Sengehest i metall (ryggdel)	RBA-1001-2	
Sengehest i eikefinér (midtdel)	RBA-1001-3	
Sengehest i eikefinér (ryggdel)	RBA-1001-4	
Hode- og fotgavl polstret med tekstil (ni farger) pr. sett	RBA-2001-(10-26)	

## Tilbehør




Søsterhjelp inkl. håndtak

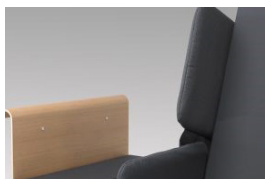

Sengehestpolstring



Laken i bomullsateng

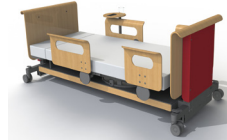

Svingbart bord



Rotolift



RotoSlide



RotoSlide 2-way



RotoSlide 4-way



RotoTurn



Lampe montert på seng



RotoSlide



RotoSlide 2-way



RotoSlide 4-way

Beskrivelse	Art.nr.	HMS.nr
Beskyttelsestrekk til sengeramme (tekstil 10)	RBA-3002S	
Beskyttelsestrekk til sengeramme forlenget 10 cm (tekstil 10)	RBA-3002-10	298217
Beskyttelsestrekk til sengeramme forlenget 20 cm (tekstil 10)	RBA-3002-20	
Sengehestpolstring	RBA4001	
RotoSlide	RBA-5001	247998
RotoSlide 2-way**	RBA-5002	
RotoSlide 4-way**	RBA-5003	
RotoTurn	RBA-5004	
Trekk til hodepute	RBA-6001	244754
Pute i termoelastisk skum, bredde 80 cm	RBA-6002	
Søsterhjelp inkl. håndtak	RBA-7001	243384
Lampe montert på seng	RBA-9001	
Rotolift®	RBA-9002	
RotoBed Trolley	RBA-9003	
Laken i bomullsateng til standard madrass	RBA-6004	289282
Laken i bomullsateng til forlenget madrass +10 cm	RBA-6004-A-10	289283
Laken i bomullsateng til fotmadrass	RBA-6004-B	
Laken i bomullsateng til forlenget fotmadrass +10 cm	RBA-6004-B-10	298216
Laken i bomullsateng til 100 cm bredde madrass	RBA-6004-AX	
Laken i bomullsateng til 100 cm bredde, forlenget +10 cm madrass	RBA-6004-AX-10	
Laken i bomullsateng til fotmadrass 100 cm bredde	RBA-6004-BX	
Laken i bomullsateng til fotmadrass 100 cm bredde, forlenget 10 cm	RBA-6004-BX-10	
RotoBed svingbart bord	RBA-7002	
** kombineres med RotoSlide RBA-5001		