



# Star Standard Air

Luftcellepute med unik omsluttende effekt

 **etac**<sup>®</sup>

# Star Standard Air

Enkammerpute med utmerket trykkfordeling.

Prisforhandlet, NAV-avtale Sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper, DK 5.


## Effektiv nedsynking og god omslutning

En enkammerpute har de beste forutsetningene for å omfordele trykket. Med høye celler er nedsynkingen og omslutningen på sitt beste. Dette resulterer i minst mulig skade på vevet. Standard Air er prisforhandlet i celledøyde 10 cm. Jo høyere cellene er, jo bedre trykkfordelingsegenskaper.




Standard Air leveres komplett med to standard trekk, håndpumpe, manual og reparasjonssett.

## Egenskaper

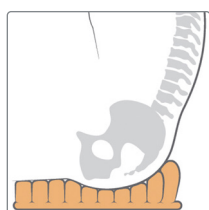


### Enkammerpute med dynamisk stabilitet

Cellene tilpasser seg kroppens form og den minste bevegelse, noe som stimulerer blodsirkulasjonen i vevet. Perfekt for brukere med lavt aktivitetsnivå.

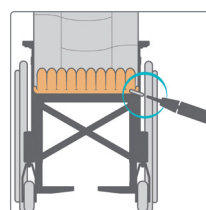


### Enkel håndtering

Enkammerpute betyr kun lufttrykkjustering med en ventil. Standard Air er en genial kombinasjon av enkel håndtering og dynamisk stabilitet, som kan øke sittetoleransen.

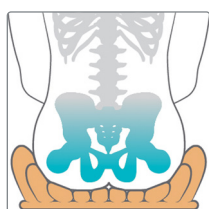

### Nedsynkning og omslutning

Luftcellene lar brukeren synke ned i puten og få perfekt omslutning. Jo høyere cellene er, jo bedre omslutning.

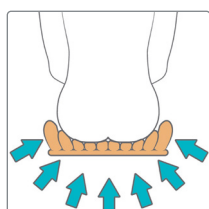

### Trykkfordelende

Standard Air har utmerkede trykkfordelingsegenskaper. Luftcellene tilpasser seg kroppens form og minimerer risikoen for vevsdeformasjon. Perfekt for forebygging og behandling av trykksår.

## Tilbehør



### Hygienetrekk

Trekk i pustende og flammesikker nylon med fireveis stretch og forseglet glidelås.

Standard Air - ett kammer	10 cm	HMS nr.	Standard Air - ett kammer	10 cm	HMS nr.
26 x 26 cm	ESSC0909-1	244909	39 x 49 cm	ESSC1519-1	244925
26 x 30 cm	ESSC0911-1	244910	39 x 53 cm	ESSC1521-1	244926
26 x 34 cm	ESSC0913-1	244911	44 x 34 cm	ESSC1713-1	244927
30 x 26 cm	ESSC1109-1	244912	44 x 39 cm	ESSC1715-1	244928
30 x 30 cm	ESSC1111-1	244913	44 x 44 cm	ESSC1717-1	244929
30 x 34 cm	ESSC1113-1	244914	44 x 49 cm	ESSC1719-1	244930
30 x 39 cm	ESSC1115-1	244915	44 x 53 cm	ESSC1721-1	244931
34 x 26 cm	ESSC1309-1	244916	49 x 39 cm	ESSC1915-1	244932
34 x 30 cm	ESSC1311-1	244917	49 x 44 cm	ESSC1917-1	244933
34 x 34 cm	ESSC1313-1	244918	49 x 49 cm	ESSC1919-1	244934
34 x 39 cm	ESSC1315-1	244919	49 x 53 cm	ESSC1921-1	244935
34 x 44 cm	ESSC1317-1	244920	53 x 39 cm	ESSC2115-1	244936
39 x 30 cm	ESSC1511-1	244921	53 x 44 cm	ESSC2117-1	244937
39 x 34 cm	ESSC1513-1	244922	53 x 49 cm	ESSC2119-1	244938
39 x 39 cm	ESSC1515-1	244923	53 x 53 cm	ESSC2121-1	244939
39 x 44 cm	ESSC1517-1	244924			

**Brukervekt**  
Ingen maksvekt, men putens størrelse må tilpasses brukerens størrelse.

**Materiale, pute**  
Lateksfri, høykvalitets gullfarget neopren. Samsvarserklært og brannsikker.

**Materiale, trekk**  
Topp: 92 % polyester, 8 % elastan. Sider: 3 mm svart stretch.  
Bunn: Sklisikker og flammebestandig PU.


**Materiale, hygienetrekk**  
Topp og sider: 78 % nylon, 22 % elastan, dekket med polyuretanfilm.  
Bunn: Sklisikker og flammebestandig PU.

**Rengjøring**  
Pute: Håndvask med såpe, natron eller eddik. For desinfeksjon, bruk 70 % desinfeksjonsløsning. Maskinvask maks 60°C i 10 min.

Rengjøring av standard trekk:  
Maskinvask 60 °C. Ikke bruk blekemiddel.

Rengjøring av hygienetrekk:  
Maskinvask 80 °C. Ikke bruk blekemiddel.

## Slik justeres lufttrykket

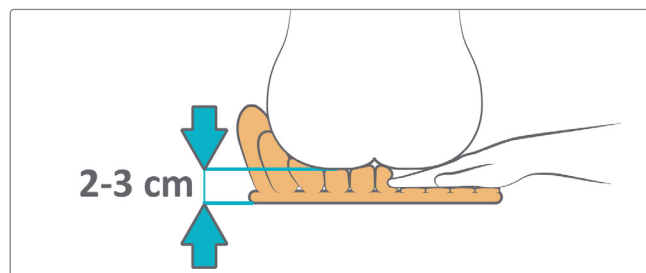

- Åpne ventil (vri mot venstre). Pump opp puten og lukk ventilen (vri mot høyre) når brukeren har riktig nedsenking.
- Plasser brukeren på puten.
- Slipp ut luften (vri ventil mot venstre)

- Sjekk med hånden at det er en avstand på 2–3 cm mellom bunnen av puten og brukersetet.
- Ved tiltet bekken, sjekk den nederste siden først.
- Om nødvendig kan puten enkelt fylles med mer luft mens brukeren sitter på puten.
- Høyere luftceller gir dypere nedstigning og omslutning, noe som gir enda bedre trykkfordelingsegenskaper.



“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk [www.etac.no](http://www.etac.no)