



U-pute + Sylinderpute + Finnepute

Arcona posisjoneringsputer

Flere funksjoner i en og samme pute



Fleksipute



Støttepute

Arcona posisjoneringsputer er utviklet og produsert i samarbeid med en spesialenhet innen neurologi og demens.

Resultatet er posisjoneringsputer som er formbare og som holder fasongen., slik at det skapes stabilitet, trykkfordeling og en stor understøttelsesflate.

I utformingen av Arcona posisjoneringsputer er det blant annet lagt vekt på at putenes fasong tillater en kroppsnær plassering inntil brukerne. Putenes tyngde er med på å sikre den kroppsnære plasseringen, fordi putenes stabilitet gjør at de blir værende der de plasseres. Det betyr at leiringen av brukeren forblir stabil.

Arcona posisjoneringsputer er fylt med små polyesterenkuler, viskoelastisk skum, kaldskum og bløtt granulat til å lage vekt. Det er tilgjengelig to varianter trekk; bomullsjersey (standard) og inkontinenstrekk. Begge trekkene puster, er føyelige, vaskbare og antibakterielt behandlet. ²

Posisjonering - Avlastning - Stillingsforandring



U-pute + finnepute



Sjøhestpute



Sjøhestpute + Finnepute



Støttepute + t-pute str 2 + finnepute



Støttepute + nakkepute + universalpute




Universalpute



H-pute



Universalpute

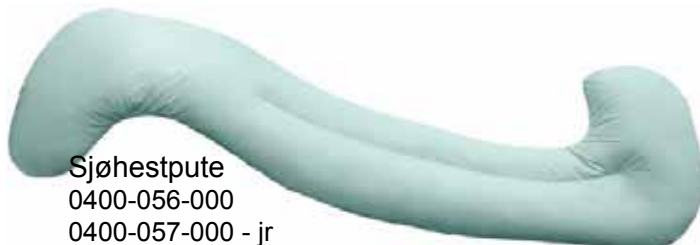

Sjøhestpute
0400-056-000
0400-057-000 - jr

Arcona Sjøhestpute/ Arcona Sjøhestpute junior

Den komplette sideleiringsputen. Alt du trenger for en god leiring i sideliggende samlet i én og samme pute.

Arcona sjøhestpute kan også brukes sammen med Arcona Finnepute, som gjør frontleiring eksepsjonell.



Finnepute
0400-058-000

Arcona Finnepute

Puten er tenkt som tilbehør til Sjøhestputen og brukes til ytterligere avlastning av ankel og hel. Finneputen kan også brukes alene som støtte til nakke, hode, legger osv.



Fleksipute
0400-068-000

Arcona Fleksipute

Oppbygningen gjør puten velegnet som kroppstøtte i Semi-Fowler leiring. Puten kan i flere leiringssituasjoner brukes som U-pute.



Puten kan plasseres bak, foran eller rundt brukeren. Når bruker plasseres halvt liggende på puten i rygg- eller mageleie gir putens utforming en tett kroppsavgrensning og stabil støtte.

Robustpute
0400-070-000

Arcona Robust pute

Robustputen er 200 cm lang, 28 cm bred. Utformingen og putens tyngde gjør den ytterst velegnet til en tett leiring si i f.els Semi-Fowler leiring eller ved delvis mageleie.



Puten kan også med fordel brukes til urolige brukere som har behov for økt taktil stimulering og det å kunne kjenne sin kropps ytre grenser.

H-pute
0400-074-000

Arcona H-pute

Puten posisjonerer hoftelddet sideliggende i nøytral stilling. Det gjør H-puten velegnet til hofteropererte og brukere med spastisitet.




Når H-puten brukes i ryggliggende posisjoneres hoftelddet i fleksjon, mens bena posisjoneres støtt og stabilt.

Sylinderpute
0400-064-000

Brukes også i trenings- og behandlingssituasjoner.

Arcona sylinderpute

Kne- og hasepute som er uunnværlig når det skal leires i Semi-fowler liggestilling og ved fleksjon av kneet.

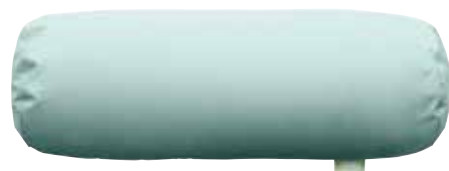

Puten kan også brukes ved sideliggende som støtte i ryggen.

T-pute
0400-090-000 - str1
0400-091-000 - str2
0400-092-000 - str3

Arcona T-pute

T-formede puter i ulike størrelser kan erstatte faste abduksjonstøtter og arrangement for å posisjonere bena. I liggende posisjonering brukes ofte T-puter for å forhindre kryssing og andre feilstillinger for hofter og knær.



Liten hodepute
0400-038-000



Stor hodepute
0400-039-000



Arcona Liten hodepute

Brukes når det skal fylles ut hulrom for optimal understøttelse. Puten brukes også til å forebygge trykksår mellom knærne og gi optimal hodeposisjonering.

Arcona stor hodepute

Kan brukes som ryggstøtte i Semi-Fowler leiring. Gir stabil støtte for posisjonering av hode i nøytralstilling. Plasseres under leggene for avlastning av hælene i rygliggende stilling og som støtte av kropp og/eller arm ved sideleie og mageleie.

Nakkepuff
0400-095-000



Arcona nakkepuff

Nakkepuff er en liten relativt fast pute som kan plasseres bak nakken for å få en stabil hodestilling i rygliggende, i en hvilestol, i en komfort rullestol o.l.

Liten Kilepute
0400-060-000



Arcona Liten kilepute

Brukes til å heve hælene fra madrassen ved behandling av trykksår. Brukes også i situasjoner hvor hele leggen skal heves for å minske risikoen for ødemdannelser.

Brukere med nedsatt tonus eller en hemiplegisk arm kan også ha nytte av leiring med en liten kilepute.

Stor kilepute
0400-066-000



Arcona Kilepute

Kileputen er utformet som en trekantpute og kan brukes f.eks til å stabilisere foran og bak kroppen i sideleie for å gi en stabil støtte. Ved bruk foran kroppen får øverste arm og skulder en god understøttelse i nøytral stilling.

i ryggleie brukes kileputen til understøttelse av knehaser, legger og lår.

U-pute
0400-072-000



Arcona U-pute

Putens U-form sørger for god kroppsstøtte.

Puten kan plasseres både bak, foran eller rundt brukeren.

Kroppsstøtteputen er en av grunnsteinene i Semi-Fowler liggestilling. Derfor er det opplagt å bruke U-puten til det.

Støttepute
0400-050-000



Arcona Støttepute

Brukes i sittende stilling, når den urolige brukeren har behov for å ha "katten i fanget".

Støtteputen lager ro og avgrensning, men kan også brukes til leiring av hode eller lår i sengen.

Små barn kan bruke den f.eks i mageleie.

Universalpute
0400-034-000



Arcona Universalpute

Universalputen sikrer hofteabduksjon og minsker risikoen for hofteleuksasjon når bruker snues fra ryggleie til sideleie.

Universalputen er også velegnet til understøttelse av arm og skulder, til forebyggelse av ødemdannelse og som støtte for føtter mot sengegavl.

Artikkelnummer og mål på Arconaputene:

Hj.m.nr	Art.nr	Beskrivelse	Hj.m.nr Trekk	Art.nr Trekk	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt kg
235570	0400-064-000	Arcona Sylinderpute	235571	0400-064-010	65	25	25	1,7
234586	0400-068-000	Arcona Fleksipute	234587	0400-068-010	194	34	15	3,7
234283	0400-070-000	Arcona Robustpute	234284	0400-070-010	200	25	25	6
234572	0400-060-000	Arcona Liten kilepute	234573	0400-060-010	37	24	8-11	0,9
234574	0400-066-000	Arcona Kilepute	234575	0400-066-010	38	50	0-11	1,1
235566	0400-034-000	Arcona Universalpute	235567	0400-034-010	60	35	25	2,3
234281	0400-056-000	Arcona Sjøhestpute	234282	0400-056-010	186	30	17	5
236398	0400-057-000	Arcona Sjøhestpute jr	235568	0400-057-010	127	30	14	2,5
234221	0400-058-000	Arcona Finnepute	234222	0400-058-010	100	30	12	0,6
234223	0400-072-000	Arcona U-pute	234224	0400-072-010	230	30	17	2,7
234219	0400-050-000	Arcona Støttepute	234220	0400-050-010	130	50	12	1,2
234588	0400-038-000	Arcona Liten hodepute	234589	0400-038-010	35	25	8	0,3
235564	0400-039-000	Arcona Stor hodepute	235565	0400-039-010	58	40	13	1
235572	0400-074-000	Arcona H-pute		0400-074-010	50	30	30	1,8
248775	0400-090-000	Arcona T-pute str. 1	248776	0400-090-010	60	31	13	0,9
252624	0400-091-000	Arcona T-pute str. 2	252625	0400-091-010	70	48	16	1,6
255659	0400-092-000	Arcona T-pute str. 3	268066	0400-092-010	95	52	17	2,2
	0400-095-000	Arcona nakkepuff		0400-095-010	36	6	10	0,9
243481	0400-052-000H	Arcona armstøttepute,h		0400-052-015H	65	23	10	0,9
242007	0400-052-000V	Arcona armstøttepute,v		0400-052-015V	65	23	10	0,9

Spesifikasjoner:

Fyllmateriale	3 mm kuler av ekspandert polystyren SEBS-granulat til å skape vektfylde Kaldskum og viskoelastisk som fyller ØKO-TEX®
Puteoverflate	Pustende og vanntett Polyamid impregnert med PU og antibakterielt behandlet
Bomullsjerseytrekk (std)	60% Bomull og 40% modakryl, Oeko-Tex, REACH, flammehemmende
Inkontinenstrekk	Pustende og vanntett Polyamid impregnert med PU og antibakterielt behandlet Flammehemmende (BS 58 52-1 og CAL117)
Rengjøring	Begge trekk er vaskbare og tåler tørketrommel Arcona posisjoneringsputer tåler ikke maskinvask, men kan rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel eller desinfiseres
ISO-klassifisering	ISO 09 07 06 - 02
Forventet holdbarhetstid	2 år
Overholder standard	EN 12812:2012 EN 12952-1 (pute og trekk) EN 1021-1:2014 (trekk) EN 1021-2:2014 (trekk) BS 5852-1 og CAL117 (inko.trekk)




Armstøtteputer m/kuler



Armstøtteputer m/skum og kuler



Armstøtteputer m/meshtrekk

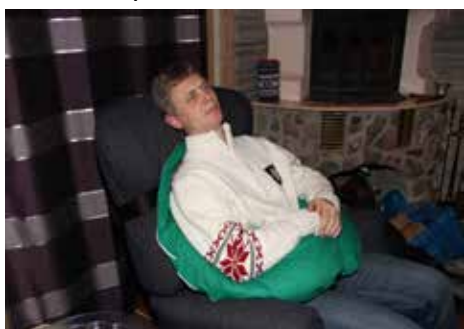

Omfavnerputen fins i 3 størrelser

Armstøtteputer

Omfavner kroppen og støtter armene

Arcona armstøtteputer er stabile støtteputer som omfavner armene og gir god støtte for hele armen.

Festes enkelt til rullestol med en festereim i overkant av ryggen på stolen.

Omfavnerputen omfavner bruker med god støtte for arm/overarm og bolen.

Puten festes rundt ryggstøtten på f.eks en hvilestol eller komfortrullestol. Hvor høyt puten festes avgjør hvor mye sideveis stabilitet brukeren får.

Puten festes sammen med borrelås foran magen på bruker og gir en trygg og støttende omfav-

Hj.m.nr	Art.nr	Beskrivelse	Hj.m.nr Trekk	Art.nr Trekk
243481	0400-052-000H	Arcona armstøttepute, høyre m/trekk		0400-052-015H
242007	0400-052-000V	Arcona armstøttepute, venstre m/trekk		0400-052-015V
242008	0400-052-030	Meshtrekk m/festestropp til armstøttepute		
287365	093-10200	Arcona armstøttepute, kuler, stk m/meshtrekk		093-10201
166825	0305-6401-120	Omfavner, stor 10 m/trekk, marine	166826	0305-6401-020
166823	0305-6421-120	Omfavner, liten 10A m/trekk, grønn	166824	0305-6421-020
153670	0305-6441-120	Omfavner, ekstra liten 10B m/trekk, blå		0305-6441-020



Besøks- og postadresse:

Rosenkrantzgata 11
3018 DRAMMEN

Telefon 32 24 42 50

www.ovrebo.no
firmapost@ovrebo.no



øvreboø rehab