

BRUGERVEJLEDNING (DK) **Auto SLIDE** BACK

Den **ORIGINALE Auto Slide** Glidepude til bilsæde, aflaster ryg og hofter ved ind og udstigning af bilsæde. Fås i 3 varianter **BACK** som fastgøres rundt sæderyg, **SEAT** som fastgøres rundt sæde og **TURNER** som ligger løst på sædet og kan nemt flyttes til alle siddeunderlag. Alle **Auto SLIDER** har egenskaber der bevirker at de låser under kørsel.



Den **ORIGINALE Auto Slide** leveres i model **AIR** er luftventilerende og føles ikke klam, samt giver en thermo effekt at sidde på ved kolde årstider, samt Velour som har en blød og behagelig overflade. Leveres med "Super Glide NYLON", varemærke som kendetegner et glidemateriale der har unikke glideegenskaber og lang holdbarhed.



| Art nr. | Hmi-nr. | Produkt | Størrelse: | Vægt: |
|-------------|---------|--------------------------|----------------|-------|
| MC 001-8100 | 17994 | Auto Slide Back Air | L 48 x B 48 cm | |
| MC 001-8200 | 104600 | Auto Slide BACK Velour | L 48 x B 48 cm | |
| MC 001-9100 | 35601 | Auto Slide TURNER Air | L 48 x B 48 cm | |
| MC 001-8210 | 104601 | Auto Slide TURNER Velour | L 48 x B 48 cm | |
| MC 001-8110 | 35526 | Auto Slide SEAT Air | L 48 x B 48 cm | |
| MC 001-8230 | 124984 | Auto Slide SEAT Velour | L 48 x B 48 cm | |




Placer Auto Slide med den del med afkortede hjørner på bilsædet.



Fastgør Auto Slide Back rund om sæderyg ved brug af låsespænde. Drej derefter Auto Sliden ud mod døråbning.



Sæt dig derefter ned på Auto Slide og hvor etiketten "FASTEN SEAT BELT" nu ses mellem dine ben.

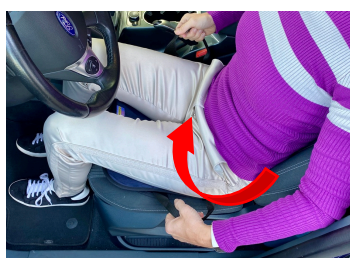

Drej og flyt sædepartiet med ind i bilsædet. Glid derefter baglens ind mod sæderyg for at komme endelig på plads.



Fastgør sikkerhedsselen og stræk benene ud, hvor vægten af disse vil gøre at Auto Sliden låser automatisk under kørsel.



Det unikke med Auto Slide, er at den glider i alle retninger. Derved kan bruger positionere sig nøjagtigt efter behov.



Håndtag kan anvendes for både bruger og en hjælper til at hjælpe til med forflytningen.



Auto Slide låser automatisk ved at vægten af de udstrakte ben, trykker forkant af den øverste glidedel, ned mod selv bilsædet.

Tekniske specifikationer



Brugervægt:
Max. brugervægt: 150 kg



Vask:
Auto Slide kan vaskes ved 60 Gr. C



Skyllemiddel:
Brug aldrig skyllemiddel. Dette forringer glidekvaliteten.



Tørretumbling:
Auto Slide tørretumbles skånsomt. Max. 40 Gr C.



Visual inspektion:
Foretag løbende visuel inspektion efter jævnlige brug og rengøring. Test at syninger, håndtag, stropper og materialer til en hver tid er indtakte og til enhver tid er i forsvarlig stand.



Bortskaffelse:
Sørg altid for at bortskaffelse af Auto Slide sker i henhold til gældende regler.



Sikkerhedssele:
Brug altid sikkerhedssele, når du kører med Auto Slide.

Udviklet og produceret af:

mastercare
HUMAN HANDLING SYSTEM

