


Safe & Sound

– sengen med bare myke overflater i vegger, gulv og tak

«Et rom i rommet»

- **Safe & Sound** har en unik rammekonstruksjon som gjør at gulv, vegger og tak står i spenn.
- Spennet reduserer muligheten for bruker til å slå seg, sette seg fast, lage bankelyder, bite, rive, slå i stykker eller klatre ut.
- Sengene er **solide** og tåler brukere med høyt aktivitetsnivå.
- Sengen **tilpasses brukers behov og ønsker** med tanke på farger, grad av luftgjennomstrømming, lystetthet, innsyn og åpenhet
- Også **grad av sikkerhet kan tilpasses** med skjult glidelåsføring i dør, tak, forsterkning av utsatte områder eller tilpasset høyde.

Safe and sound – generelle mål på sengene

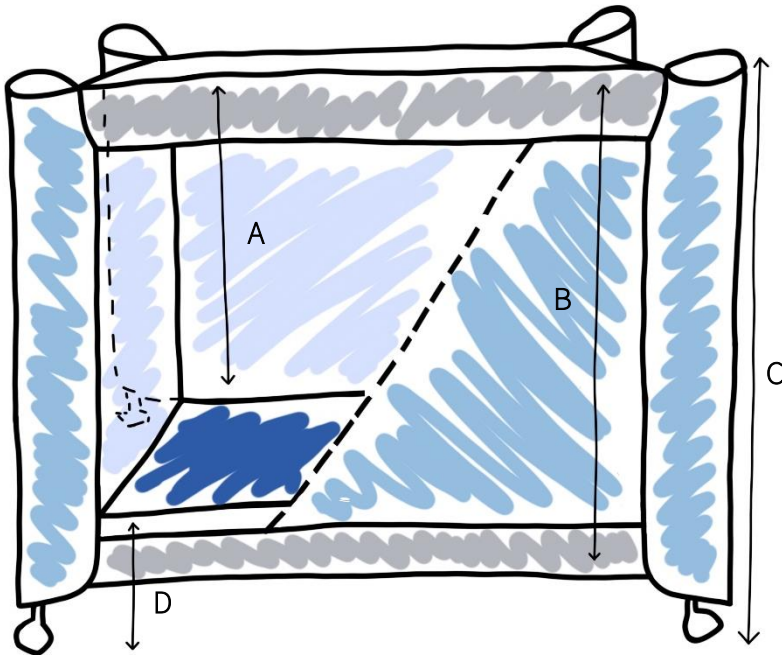

	Vegghøyde:	1,5m	1,7m	2,0m
A	Fra topp av madrass til topp av øvre ramme	125 cm	140 cm	170 cm
	Fra bunn av ramme til topp av ramme	150 cm	165 cm	195 cm
C	Fra gulv til topp av ramme, justerbar i 3 høyder	155 cm 165 cm 175 cm	170 cm 180 cm 190 cm	200 cm 210 cm 220 cm
	Vegghøyde:	Alle		
	D	Fra gulvet til toppen av madrass, justerbar i 3 høyder	29 cm 39 cm 49 cm	

Mini

Utvendig størrelse: 2.3 x 1.3 m.
Innvendig liggeflate: 1.9 x 0.9 m.
Innvendig vegghøyde: 1.25 m., 1.4 m., 1.7 m.

125 mm tykk madrass innebygd med glidelås.

Vekt: 135 kg

Safe & Sound Mini seng er liten nok til å få plass i de minste rommene. Den gir en intim og nær romfølelse.

Bildet viser: Mini 1.4 m innvendig høyde. Montert i nest nederste posisjon, standard opprullbar døråpning med magnetfeste, valgbar pvc-coated netting i veggene, std. polstrede hjørnestolper.



Midi

Utvendig størrelse: 2.4 x 1.8 m.

Innvendig liggeflate: 2.0 x 1.4 m.

Innvendig vegghøyde: 1.25 m., 1.4 m., 1,7 m.

75 mm tykk madrass innebygd med glidelås

Vekt: 150 kg

Safe & Sound Midi er bred nok til at mamma eller pappa kan ligge ved siden av. Størrelsen på sengen gir også god mulighet for lek og aktivitet, eller som timeout-rom og demping av aktivitet.

Bildet viser: Midi 2.0 m innvendig høyde montert i nest nederste posisjon, sidehengslet dør med magnetfeste, std materialer i vegger.



Maxi

Utvendig størrelse: 2.4 x 2.4 m.

Innvendig liggeflate: 2.0 x 2.0 m.

Innvendig vegghøyde: 1.25 m., 1.4 m., og 1.7 m.

75 mm madrass innebygd med glidelås

Vekt: 175 kg

Safe & Sound Maxi seng er stor nok til både å sove i og å være aktiv i på dagtid. Den brukes ofte som sanserom.

Bildet viser: seng i nederste posisjon, standard opprullbar døråpning med magnetfeste, ekstra sidehengslet dør med vindu, std vindu.



Spesialseng:

Maksimal innvendig lengde/bredde: 2 meter.

Behovet kan være:

- ekstra lav takhøyde
- ekstra høye sidevegger
- må fylle et helt rom
- små rom der det ikke plass til Safe & Sound modell Mini
- ekstra forsterkede vegger, vindu, tak, spesielle soner for mottak av slag, spark

Bildet viser: Safe & Sound Midi i rom med 220 cm takhøyde, montert i nest nederste posisjon, dekkpolstring under langside, heldekkende polstring på hjørnestolper.



Eksempler på tilbehør til Safe & Sound



Åpning i ramme for takheis



Opprullbare vegger på tre sider




Tak av netting



Elektrisk hev-senk funksjon i hjørnestolpene

- > Ulike **figurer og mønstre** kan sys på, eller trykkes direkte på duken med printer. Første bildet på siden her viser printet piratmønster, mens siste bilde viser printet fuglemønster.

Fargevalg; vegger, gulv, kanter

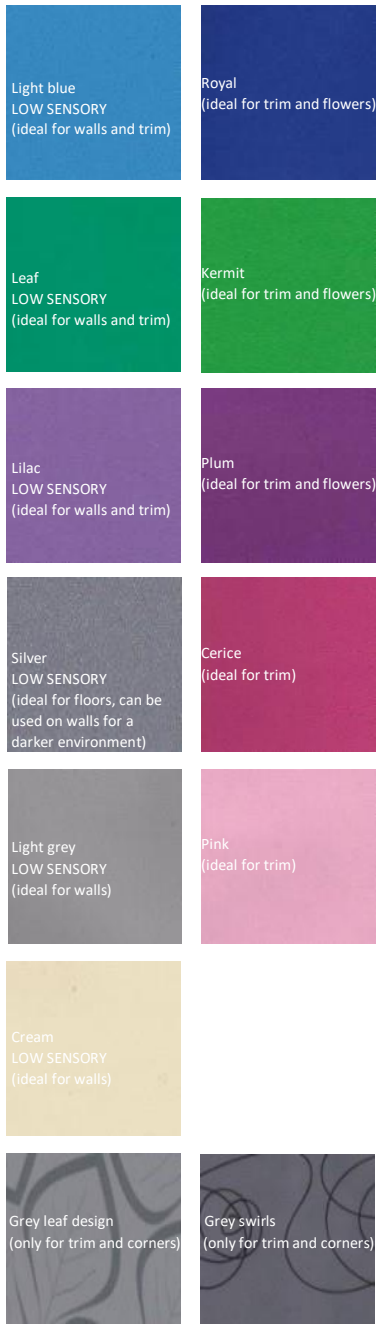

Standardutgave leveres med:

Selvbærende ramme, valgfri farge og type duk i gulv og vegger, en valgfri opprullbar døråpning med vindu og magnetfeste, et separat vindu klargjort for blending med magnetfeste, polstrete hjørnestolper, innelukket madrass, fast kryssfinèrbunn.

Vedlikehold:


Alle overflater er vaskbare med sprit, whitesprit, våtservietter eller mildt såpevann. Det skal ikke brukes klor eller sterke alkaliske basiske vaskemidler med lav pH. De angriper PVC-duken. Alle deler kan tas av separat for eventuell reparasjon av søm, hull, rifter.

Montering:

Alle Safe & Sound senger kan monteres av èn person. Tyngste del er kryssfinèrplaten i sengebunnen som sammen med madrassen veier 30 kg. Montering tar cirka 30 minutter.

Art nr	HMS nr	Beskrivelse
CC5000	244134	Safe & Sound Mini seng
CC6000		Safe & Sound Midi seng
CC7000		Safe & Sound Maxi seng
CC8000		Safe & Sound elektrisk hev-senk
CC8001		Safe & Sound tak glidelåsfeste
CC8002		Safe& Sound antibakteriell overflatebehandling
CC8003		Safe & Sound takheis åpning i ramme
CC8004		Safe & Sound blendingsvindu magnetfeste
CC8005		Safe & Sound opprullbar vegg magnetfeste
CC8006		Safe & Sound hjulsett låsbare
CC8007		Safe & Sound hull for sondeernæring
CC8008		Safe & Sound hjertebrett

Netting

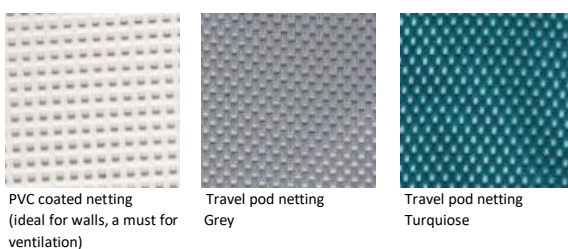

Kontakt oss gjerne ved spørsmål om produktet!



Aslaug Marie Ringstad
Partner/Ergoterapeut
92 81 21 90/am@inpo.no

Kontaktperson for
Innlandet
Troms og Finnmark



Mikal Bjåen
Partner/Fysioterapeut
45 63 79 13/mikal@inpo.no

Kontaktperson for
Agder
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland



Marianne Løvstad
Salgssjef/Fysioterapeut
90 27 84 75/marianne@inpo.no

Kontaktperson for
Oslo
Viken
Vestfold og Telemark



Line Strand
Fagkonsulent/Fysioterapeut
99 42 00 24/line@inpo.no

Kontaktperson for
Vestland
Rogaland