



## Bano vendbart toalett



Med Bano vendbart toalett kan man enkelt vende toalettsetet 290 grader, noe som forenkler tilgangen til toalettet. Det vendbare toalettet kan høydejusteres enkelt fra et integrert panel i begge toalettets støttehåndtak.

Dårlig tilpassede baderom skaper uoverkommelige hindre i forflytningssituasjoner. Det vendbare toalettet fjerner disse hindrene, og setter en ny standard for tilgjengelighet på baderommet. I stedet for at brukeren må tilpasse seg baderommet, tilpasser baderommet seg brukeren. Det gir brukeren økt trygghet, økt selvstendighet og økt verdighet.

## Funksjonalitet

### Vendbart toalett


Toalettsetet vendes enkelt ved hjelp av en utløsermekanisme integrert i toalettets støttehåndtak. Støttehåndtak kan heves og senkes. Ryggstøtte og toalettsete kan enkelt fjernes i forbindelse med rengjøring.



### Vendbar Modul

Brukere med nedsatt gangfunksjon er avhengig av å heve toalettet slik at beina går klar av gulvet for å kunne foreta en trygg og enkel vending. Det vendbare toalettet kan heves og senkes 200mm, og har en løftekapasitet på 300kg. Den elektriske hev og senk funksjonen betjenes enkelt fra et integrert panel i begge toalettets støttehåndtak.

I veggmodulen til det vendbare toalettet er det integrert et styringssystem for hev og senk funksjonen. Modulen er også fleksibel, og kan monteres på eksisterende bad med både gulvmonterte og veggmonterte toalett.

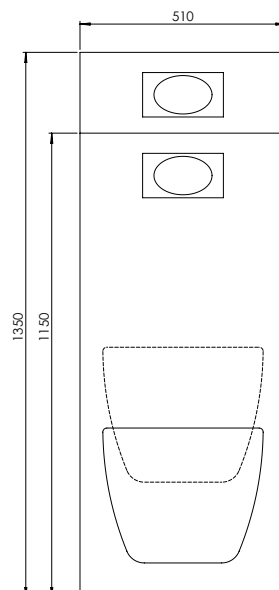

## Materialer



Bano vendbart toalett produseres i sterke materialer som tåler stor belastning og høy slitasje. Innovative løsninger gir optimal funksjonalitet og komfort. Porselensskålen er designet for enkel rengjøring.

Alle overflater er produsert i innovative komposittmaterialer. Dette øker komforten i form av at man unngår en kald og lite behagelig opplevelse. Toalettsetet er designet for behagelig sittekomfort og har en rengjøringsvennlig overflate.

Sisterner er produsert i korrosjonsbehandlet stål med deksel i vakuumformet kompositt.

## Teknisk

Produktnummer:	5920
Vekt, sisterner og toalett:	80kg
Maks belastning:	500kg
Maks løftekapasitet:	300kg
Maks belastning støttehåndtak:	250kg
Høydejustering:	200mm
Svingdiameter støttehåndtak nede:	850mm
Svingdiameter støttehåndtak oppe:	805mm

Innvendig dimensjon toalettsete 281 x 232mm  
Elektrisk hev/senk-betjening i begge støttehåndtak  
Rotasjonsbetjening i begge støttehåndtak  
Spylevolum: Todelt 3-6 l - Justerbart til 4,5-7 l  
Spylehastighet: 1,8 l/s - Justerbart til 2,2 l/s  
Strømforsyning: 230V IPX6

Endringer kan forekomme.

### Fargekoder:

Sisternedeksel: RAL 9016  
Støttehåndtak og deksel: RAL 7001

Hjelpemiddelet kan søkes hos Hjelpemiddelsentralen.



## Bano vendbart toalett med spyl- og tørkfunksjon

Det vendbare toalettet kan leveres med spyl- og tørkfunksjon. En enkel og brukervennlig løsning for et behagelig toalettbesøk som rengjør med en varm og behagelig vannstråle.

### Enkel i bruk

Helautomatisk rengjøringscyklus med kun et knappetrykk. Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdyse med ferskvann.

### Effektiv rengjøring

Spyler med en varm og behagelig vannstråle.

### Behagelig fønfunksjon

Etter rengjøringen starter varmluftsføneren som tørker med en behagelig temperert luft.

### Ingen behov for avkalkning

Spylesystemet tømmer for vann etter hver spyling, noe som fjerner risiko for kalkdannelser. Dette medfører at det ikke er behov for jevnlig service eller påfylling av avkalkningsmiddel.




## Teknisk

Produktnummer:	5930
Dusjvarighet:	180s
Fønevarighet:	180s
Kapslingsgrad:	IPX6
Merkespenning:	230V AC
Nettfrekvens:	50Hz
Inngangsstrøm:	1200W
Max strømningstrykk:	1,5-10 bar
Vanntemperatur fabrikkinnstilling:	37°C
Vannforbruk:	0,5 l/min

Endringer kan forekomme.




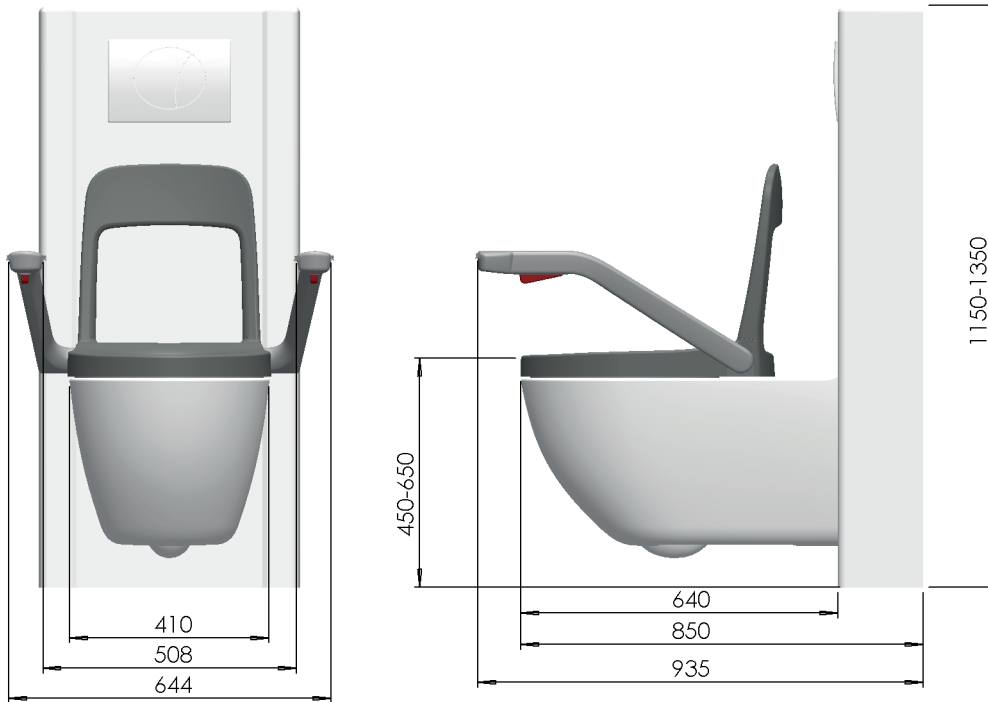

Ø850mm



Ø805mm

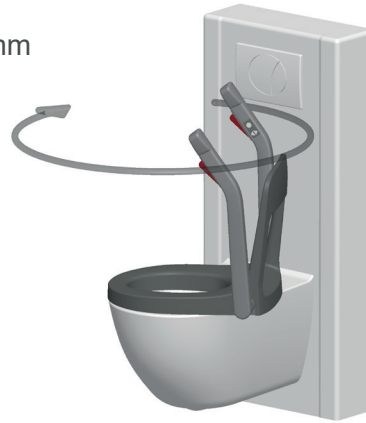

## Kontakt

### Bano Home Care

#### Ingelin Mari Rød

Ergoterapeut

Telefon: +47 97 11 51 00

ingelin@bano.no

#### Mie Damhagen Elvsaas

Fysioterapeut

Telefon: +47 93 20 77 87

mie@bano.no

### Bano Prosjekt

#### Daniel Nesse

Salgssjef

Fysioterapeut

Telefon: +47 95 97 87 60

daniel@bano.no

#### Veronica Silden Orth

Prosjektleder

Telefon: +47 94 81 98 57

vs@bano.no

### Hovedkontor

#### Bano AS

Industrivegen 22

NO-6823 Sandane

Telefon: 57 86 98 00

post@bano.no

[www.bano.no](http://www.bano.no)



Ved fabrikkfeil gir Bano kunden rett til å bytte produktet til tilsvarende produkt, eller produkt med tilsvarende egenskaper, i 3 år fra installasjon.